


Tilpasningsvejledning

ITE-HØREAPPARATER

Juna, Acriva,
Saphira og Carista

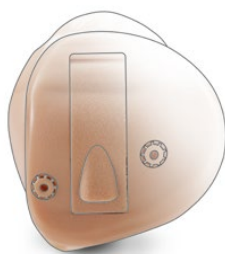


Indholdsfortegnelse

Høreapparatoversigt	4
Tilpasningsområder	5
Voksfiltre	6
Mikrofonfiltre	8
Tilpasning af et IIC-apparat	10
Tilpasning af et ITE-apparat med Oasis	12
Bestillingsinformation	13


Høreapparatoversigt

ITE-apparater findes i mange forskellige modeller. Valg af model afhænger af flere faktorer herunder størrelsen af hørenedsættelsen, anatomien af brugerens øre og de personlige ønsker. Denne vejledning hjælper dig med at tilpasse ITE-apparater.

ITEPD/ITED

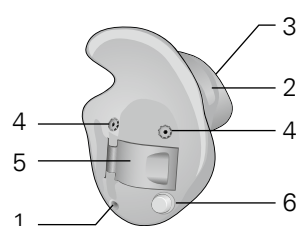

ITCPD/ITCD

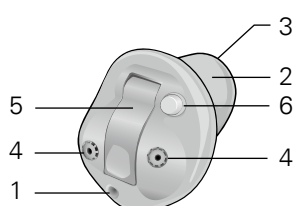


- 1 Vent
- 2 Kanal
- 3 Lydudgang med voksfilter
- 4 Mikrofonåbning med O-Cap-filter

- 5 Batteriskuffe
- 6 Trykknop (tilbehør)*

*Trykknappen kan programmeres til en volumenkontrol


ITC

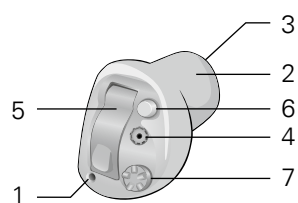


- 1 Vent
- 2 Kanal
- 3 Lydudgang med voksfilter
- 4 Mikrofonåbning med O-Cap-filter

- 5 Batteriskuffe
- 6 Trykknop (tilbehør)
- 7 Volumenkontrol (tilbehør)

CICP/CIC/CICx

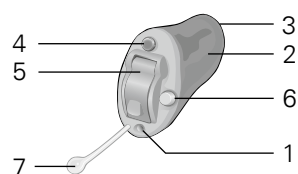

IIC

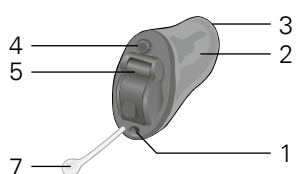

- 1 Vent
- 2 Kanal
- 3 Lydudgang med voksfilter
- 4 Mikrofonåbning med T-Cap-filter


- 5 Batteriskuffe
- 6 Trykknop (tilbehør)*
- 7 Udtagningssnor

*Trykknappen på Juna/Saphira CICP og CICx kan programmeres til en volumenkontrol


Tilpasningsområder

ITE-apparater findes i mange forskellige modeller og kan tilpasses til personer med milde til svære hørenedsættelser. De forventede tilpasningsområder for hvert enkelt ITE-apparat er vist nedenfor.


ITEPD/ITCPD

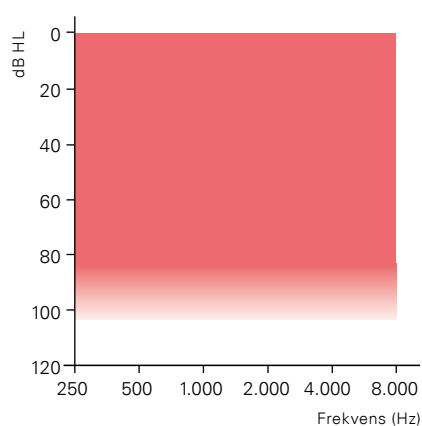


ITED

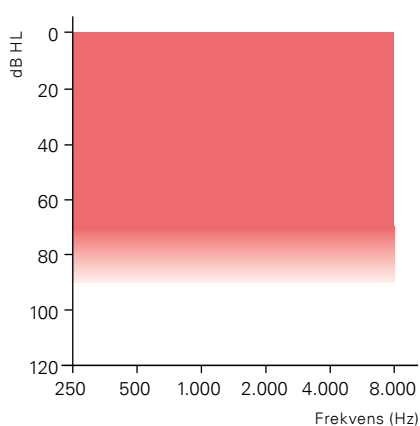


ITCD/ITC

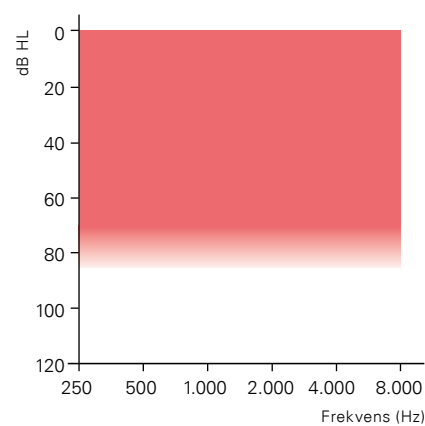


CICP

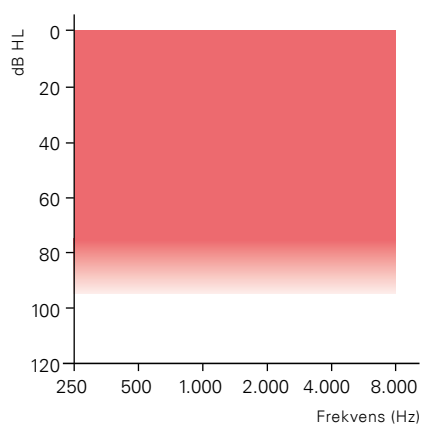

CICx/CIC

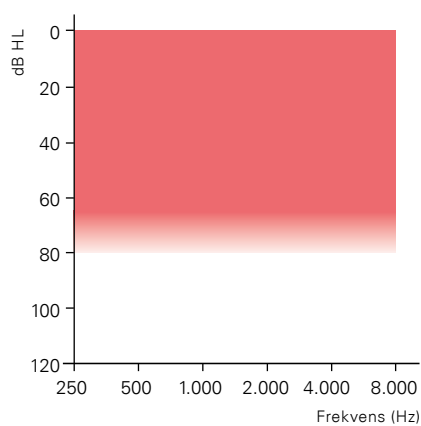

IIC

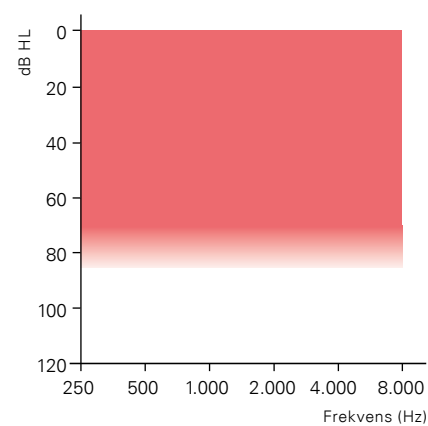


Voksfiltere

ITE-apparater fås med forskellige voksfilter enten ProWax, Micro Wax Buster eller Wax Buster.


ProWax

- 1 Tag et værktøj fra skjoldet.
- 2 Sæt den tomme del af værktøjet ind i det gamle filter, og træk det ud.
- 3 Skub det nye ProWax filter ind i høreapparatet.
- 4 Smid det brugte værktøj ud.

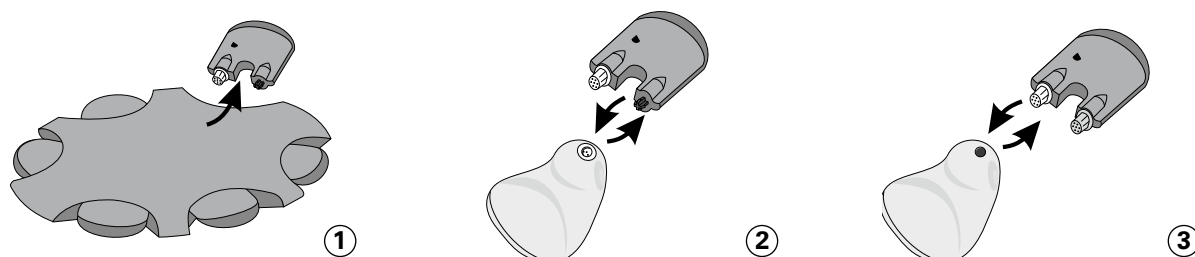


Micro Wax Buster (MWB)

- 1 Brug værktøjet til at trække det gamle filter ud.
- 2 Tag et nyt filter fra æsken.
- 3 Sæt filterets grå side fast på værktøjets mindste ende som vist.
- 4 Skub det nye filter ind i høreapparatet.
- 5 Rengøring: hold høreapparatet, så filteret presses mod en ren klud, og bevæg det frem og tilbage mod kluden.

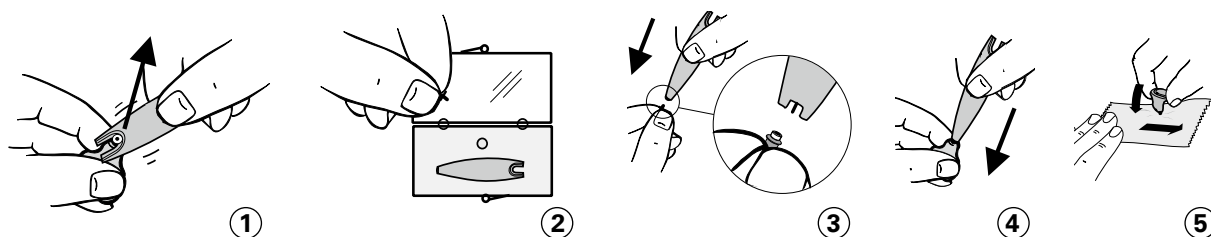


Wax Buster (WB)


- 1 Sæt værktøjet i det gamle filter og drej.
- 2 Træk det brugte filter ud af høreapparatet.
- 3 Tag et nyt filter fra æsken.
- 4 Skub filteret ind i høreapparatet med den grå side opad.
- 5 Brug værktøjet til at stramme filteret.
- 6 Rengøring: hold høreapparatet, så filteret presses mod en ren klud, og bevæg det frem og tilbage mod kluden.

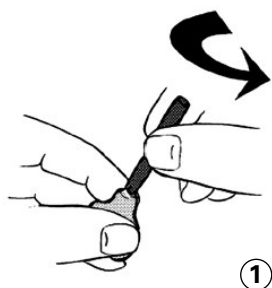

①

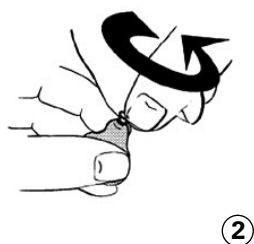


②

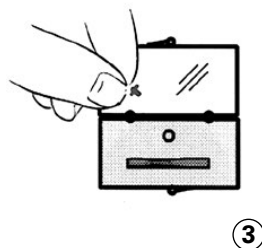


③



④

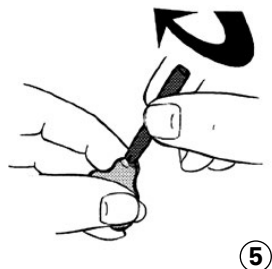

⑤

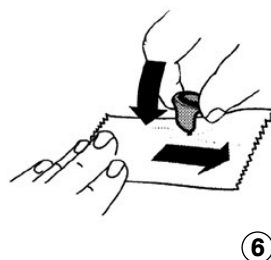

⑥



ITE-apparater skal anvendes med et af følgende voksfiltersystemer: ProWax, Micro Wax Buster eller Wax Buster. Anvendelse af andre voksfiltre kan beskadige høreapparatet.

Mikrofonfiltre


I-øret-apparater fås med enten T-Cap-filter eller O-Cap-filter til beskyttelse af mikrofonerne.

O-Cap-filter til ITEPD, ITED, ITCPD, ITCD og ITC

Værktøjet har to ender. Den ene ende (A) anvendes til at fjerne O-Cap-filtret med. På den anden ende (B) sidder det nye O-Cap-filter.



- 1 Sæt enden, der anvendes til at fjerne filteret med (A), ind i åbningen på det brugte O-Cap-filter, og træk det langsomt ud. Hold værktøjet helt lige.
- 2 Skub med den anden ende af værktøjet (B) det nye O-Cap-filter ind i åbningen, og fjern værktøjet forsigtigt.
- 3 Smid det brugte værktøj og O-Cap-filter ud.

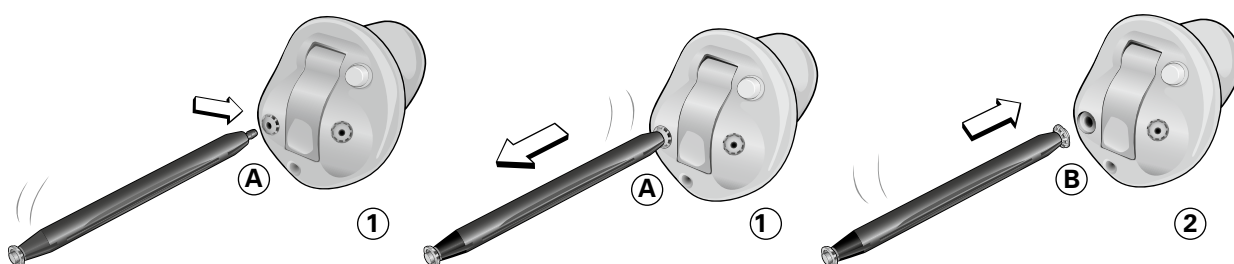


T-Cap-filter til CICP, CICx, CIC og IIC

Værktøjet har to ender. Den ene ende (A) anvendes til at fjerne T-Cap-filtret med. På den anden ende sidder det nye T-Cap-filter (B).



- 1 Skub enden, der bruges til at fjerne filteret med (A), ind under det brugte T-Cap-filters øverste kant.
- 2 Løft det brugte T-Cap-filter op og ud.
- 3 Sæt den anden ende af værktøjet (B) i åbningen på det nye T-Cap-filter, og drej værktøjet en anelse, så det nye T-Cap-filter løsnes.
- 4 Smid det brugte værktøj og T-Cap-filter ud.

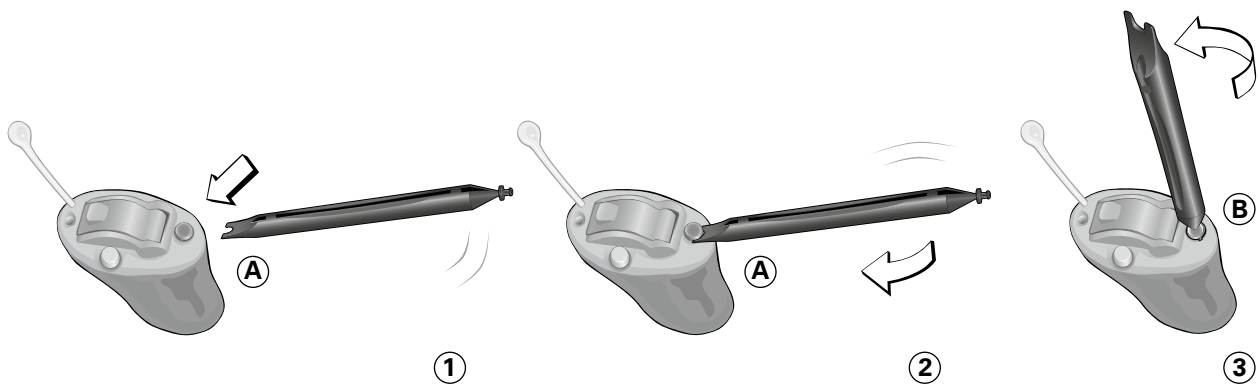


Tilpasning af et IIC-apparat

IIC-apparater er designede til at sidde dybt i øret efter første knæk. Det er øregangens anatomi, der er afgørende for, om brugeren kan tilpasses med et IIC-apparat. Følg tilpasningsvejledningen nedenfor for at vurdere, om din bruger er egnet til at få et IIC-apparat.

Aftrykstagning

For at vurdere, om en bruger er egnet til et IIC-apparat, skal der foretages et dybt aftryk af øret forbi øregangens andet knæk. Størrelsen og komforten af IIC-apparatet afhænger af kvaliteten af aftrykket. Brug måleværktøjet til aftryk til at bedømme om øregangens størrelse og form er egnet til et IIC-apparat.



Mikrofonen på IIC-apparatet kan placeres enten på siden (A) af faceplaten eller på toppen (B) af faceplaten. Måleværktøjet til aftryk kan anvendes til at bedømme, hvilken mikrofonplacering, der er mest optimal for det givne aftryk af øret.

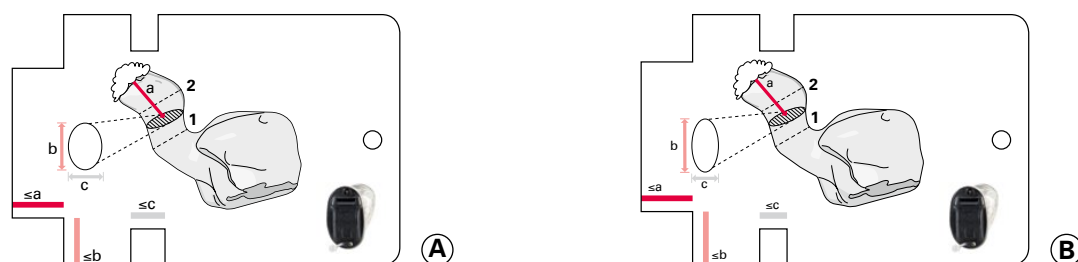

Anvendelse af måleværktøjet til aftryk



1 Øregangens længde

Øregangens længde afgør, om der er plads nok mellem høreapparatets spids og faceplaten. For at afgøre om øregangens længde er tilstrækkelig, anvendes den **røde streg** til at måle aftrykket fra spidsen af øret til det første knæk (a). IIC vil kun være usynlig, hvis værktøjets kant når til den første bøjning.

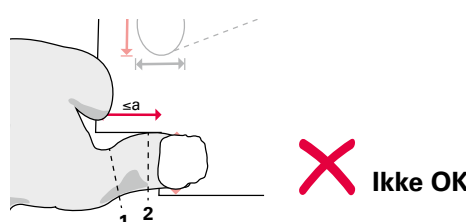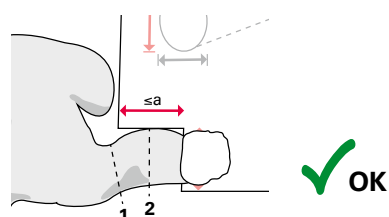


2 Øregangens højde

Øregangens højde afgør, om der er plads nok til, at IIC-apparatet kan passere gennem øregangen til dens endelige placering. Højden på aftrykket, som måles et sted mellem det første og andet knæk (b) skal være større end det **lyserøde mål** (se illustration).

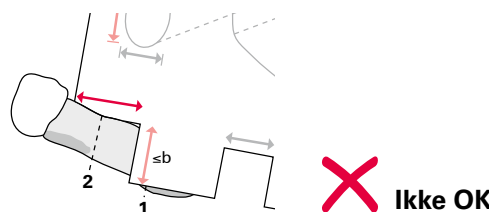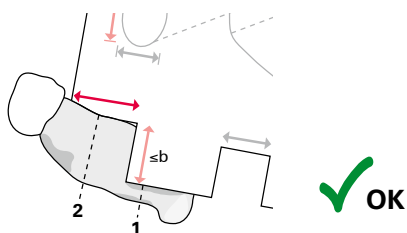


3 Øregangens bredde

Øregangens bredde afgør, om faceplaten kan passere det første knæk. Bredden på aftrykket, som er målt et sted mellem det første og andet knæk (c) skal være større end den **grå streg** på måleværktøjet til aftryk. Øregangen skal være bredere end hakket og må ikke kunne passe ind i hakket.

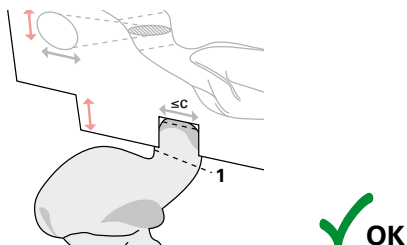

4 Øregangens form

Det er vigtigt visuelt at vurdere på formen af aftrykket. Hvis øregangen bliver bredere for enden, er den ikke egnet til et IIC-apparat **(A)**. Hvis øregangen bliver smalle for enden, er den ikke egnet til et IIC-apparat **(B)**.

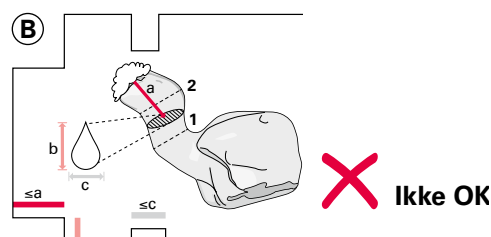

Tilpasning af et ITE-apparat med Oasis

Alle ITE-apparater programmeres med Oasis 18.0 eller nyere versioner ved hjælp af Bernafons programmeringskabler New Standard (nr. 2) og FlexConnect **Mini**.




Anvend FlexConnect Mini



Anvend ikke FlexConnect



- 1 Sæt et nyt batteri i og åben batteriskuffen lidt. Før FlexConnect Mini med den sorte prik opad ind i hullet mellem batteridøren og hængslet, indtil den sorte prik rører faceplaten. Luk batteriskuffen.
- 2 Sæt ledningen i FlexConnect Mini programmeringsstikket.
- 3 Sæt høreapparatet i brugerens øre, og før strippen over og bag øret.

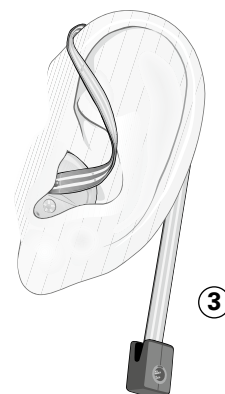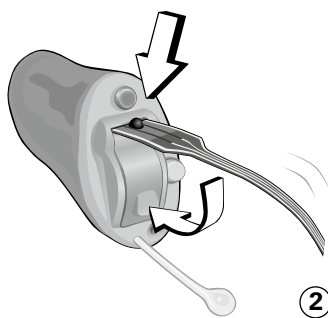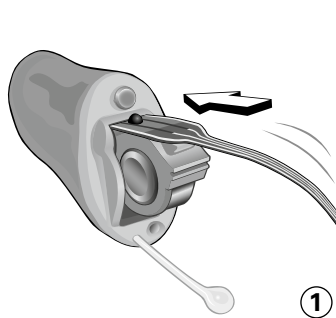

Bestillingsinformation


Voksfiltere og mikrofonfiltere

VARENUMMER	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
123459	ProWax voksfiltere	Skjold med 6 filtre. Hydrofobisk belægning.
123467	T-Cap mikrofonfiltere, BL	Holder med 8 filtre. Hydrofobisk belægning (til IIC).
123468	T-Cap mikrofonfiltere, DB	
123469	T-Cap mikrofonfiltere, MB	Holder med 8 filtre. Hydrofobisk belægning (til CIC, CICx, CICP)
123476	T-Cap mikrofonfiltere, LB	
123477	T-Cap mikrofonfiltere, BE	
128009	O-Cap mikrofonfiltere, BE	
128010	O-Cap mikrofonfiltere, LB	Holder med 8 filtre (til ITEPD, ITED, ITCPD, ITCD, ITC)
128011	O-Cap mikrofonfiltere, MB	
128012	O-Cap mikrofonfiltere, DB	




Wax Buster

VARENUMMER	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
589-09-140-06	Wax Buster-sæt, højre	Inkl. 1 Wax Buster, udtagningsværktøj, brugervejledning
589-09-141-07	Wax Buster-sæt, venstre	Inkl. 1 Wax Buster, udtagningsværktøj, brugervejledning
589-09-150-09	Wax Buster-sæt, højre	10 stk.
589-09-151-00	Wax Buster-sæt, venstre	10 stk.

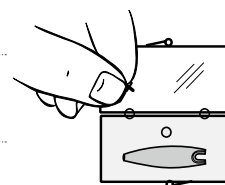


Micro Wax Buster


VARENUMMER	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
589-09-160-01	Micro Wax Buster-sæt, hvidt	Inkl. 1 Micro Wax Buster, udtagningsværktøj, brugervejledning
589-09-170-03	Micro Wax Buster-sæt, hvidt	10 stk.
825-01-089-08	Micro Wax Buster værktøj	
890-03-065-00	Micro Wax Buster rengøringsklud	

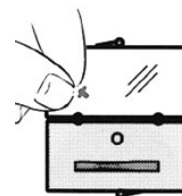

Værktøj

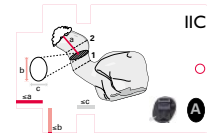VARENUMMER	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
130949	IIC-måleværktøj til aftryk	
122513	Afmonteringsværktøj til batteriskuffen	
121563	Lille vent renserværktøj	Til IIC 

Adapter

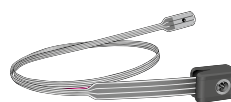VARENUMMER	BESKRIVELSE	BEMÆRKNINGER
117468	FlexConnect Mini	

Noter

[illegible]

Siden 1946 har det været vores lidenskab at udvikle førsteklasses høreapparater, som sætter mennesker med nedsat hørelse i stand til at nyde autentiske lytteoplevelser. Vi stræber efter at overgå vores kunders forventninger takket være schweizisk ingeniørkunst, præcision samt en dedikeret og personaliseret service. Vores mål er hver dag at give vores samarbejdspartnere merværdi. Bernafons repræsentanter og medarbejdere i mere end 70 lande realiserer vores vision om at hjælpe mennesker med nedsat hørelse til igen at kunne kommunikere uden begrænsninger.

Hovedkontor

Schweiz

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Phone +41 31 998 15 15
E-mail: info@bernafon.ch

Danmark

Bernafon
Kongebakken 9
2765 Smørum
Tlf.: +45 7022 7218
E-mail: info@bernafon.dk

SWISS 
Engineering

Bernafon Companies

Australia • Canada • China • Denmark • Finland • France • Germany • Italy • Japan • Korea • Netherlands • New Zealand • Poland • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • UK • USA

www.bernafon.com

bernafon 
Your hearing • Our passion