

Tilpasningsvejledning

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER

Super Power
BTE-høreapparater



Tilpasningsvejledning


Super Power BTE-høreapparater

Indholdsfortegnelse

Høreapparatoversigt	5
Tilpasningsområde	5
Montering af højre/venstre-markører	6
Montering og afmontering af hook	6
Udskiftning af dæmper i hooken	7
Udskiftning af batteriskuffen	7
Direkte audioindgang og FM	9
Montering af DAI-/FM-sko	9
Brug af FM-sko	9
Brug af DAI-sko	10
Tilpasning af Super Power BTE med Oasis	11
Tilslutning af programmeringskabler	11
Bestillingsinformation	12


Høreapparatoversigt

Super Power BTE-apparater er til mennesker med svære til meget kraftige høretab. Denne vejledning hjælper dig med at tilpasse Super Power BTE-apparaterne.

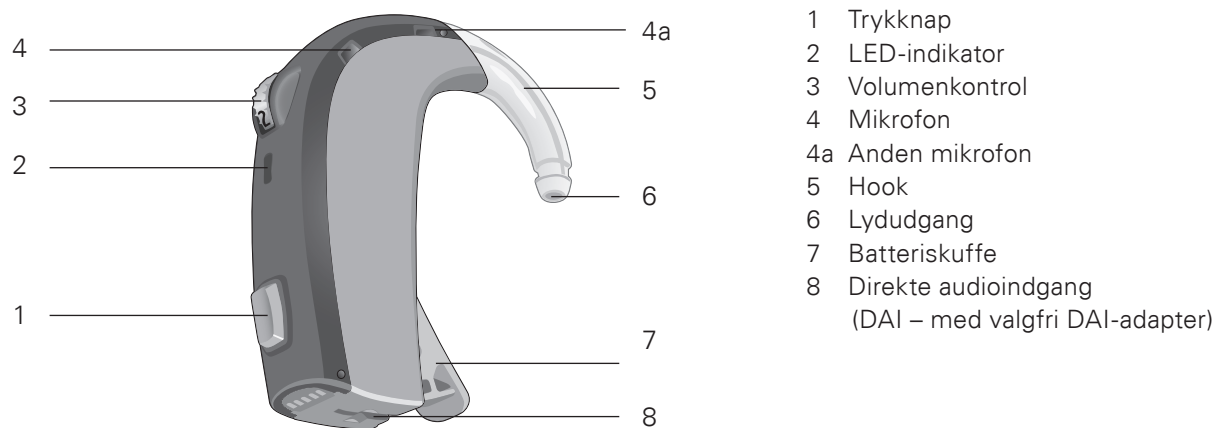


Tilpasningsområde

Nedenfor ses det forventede tilpasningsområde for Super Power høreapparatet.

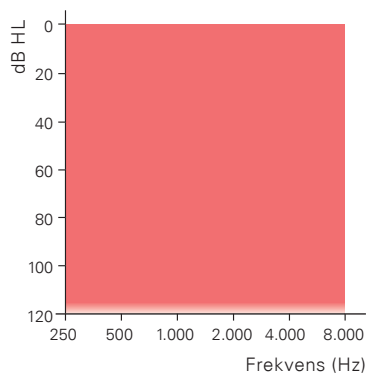

Montering af højre/venstre-markører


- 1 Åbn batteridøren.
- 2 Placer markøren i hullet som vist.
- 3 Drej og vrid pinden for at brække markøren af.
- 4 Luk batteriskuffen.

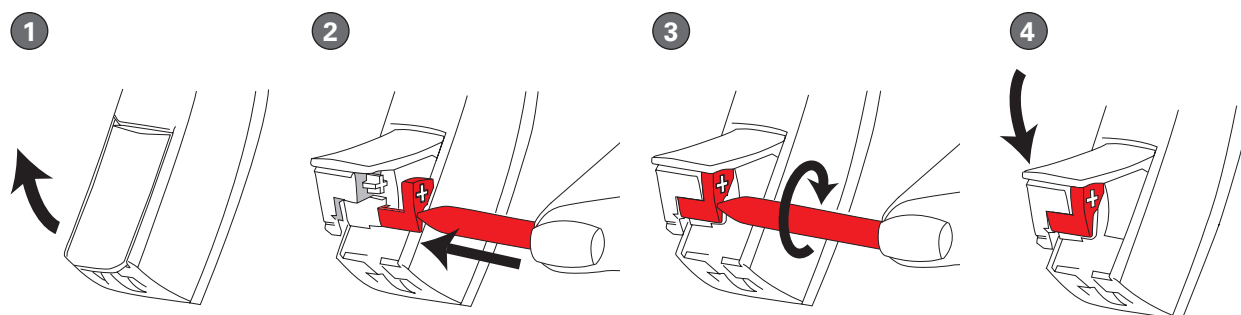

Montering og afmontering af hook


Super Power høreapparatet fås med både den konventionelle hook til voksne og en børnehook til pædiatri. Begge typer hooks monteres og afmonteres på samme måde.

- 1 Brug den spidse ende af afmonteringsværktøjet til at skubbe låsen fri.
- 2 Udskift hook.
- 3 Sæt låsen i igen (brug eventuelt en pincet).

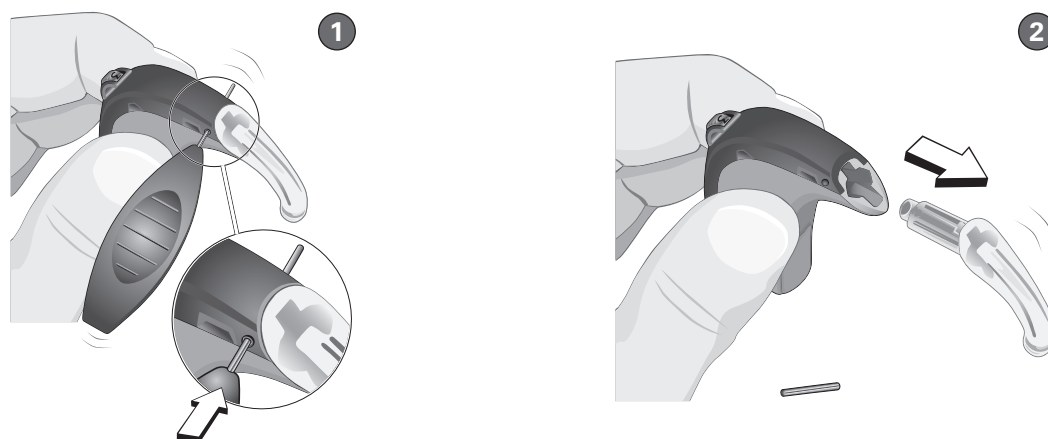


Udskiftning af dæmper i hooken

- 1 Tag en ny dæmper fra skjoldet.
- 2 Sæt den tomme ende af værktøjet ind i hookens nuværende dæmper og træk den ud.
- 3 Sæt den nye dæmper i hooken.
- 4 Smid det brugte værktøj ud.

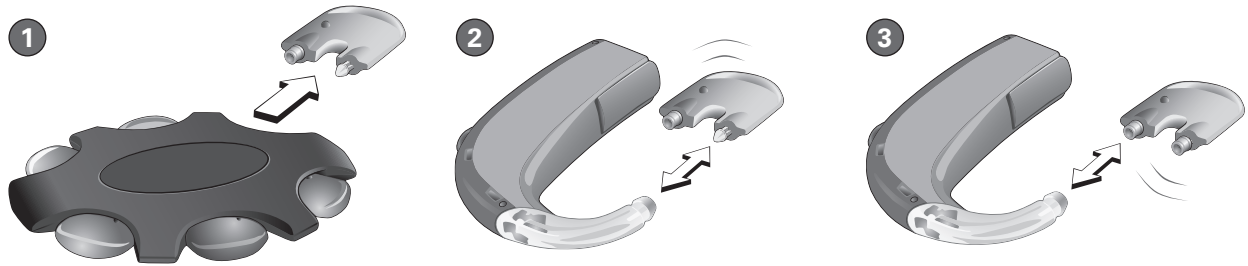

Udskiftning af batteriskuffen

- 1 Åbn batteriskuffen og placer batteriafmonteringsværktøjet som vist.
- 2 Træk forsigtigt batteriskuffen ud.
- 3 Klik den nye batteriskuffe på plads og luk den.

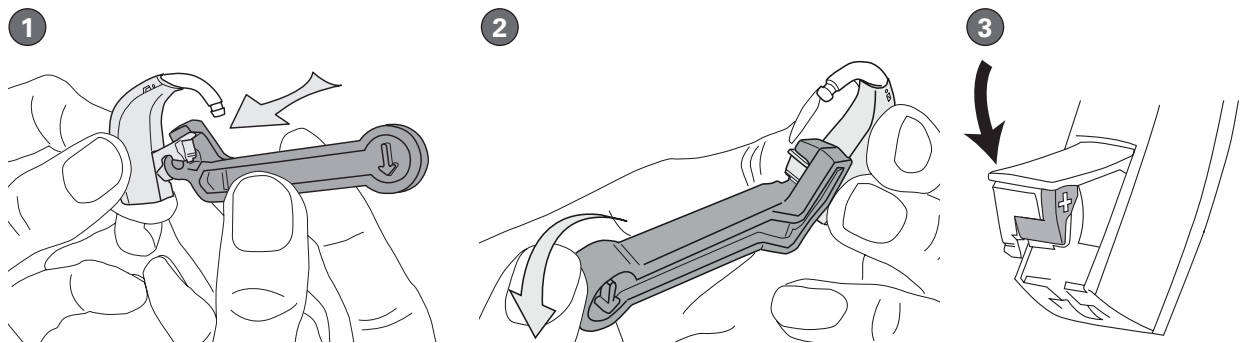


Børnesikret batteriskuffe

Super Power BTE-apparatet har en valgfri børnesikret batteriskuffe, som kan bestilles separat. En børnesikret batteriskuffe bør anvendes til børn og sårbare personer.


Luk batteriskuffen helt for at låse den. Brug en lille skruetrækker til at dreje låsen til låst position (vandret rille). Drej låsen til ulåst position (lodret rille) for at låse batteriskuffen op.

Sæt en lille skruetrækker ind i rillen i bunden af høreapparatet og tryk på batteriskuffen til den åbnes.


Låst

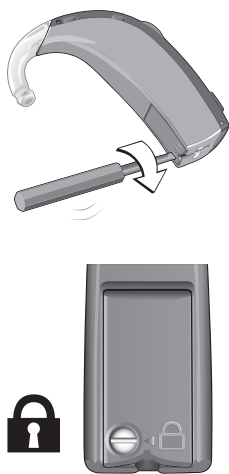

Ulåst

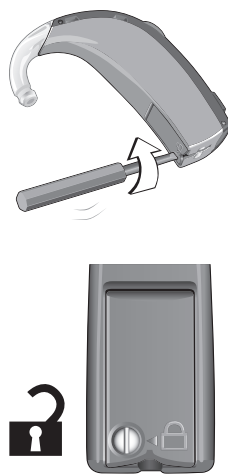


Åben børnesikret batteriskuffe

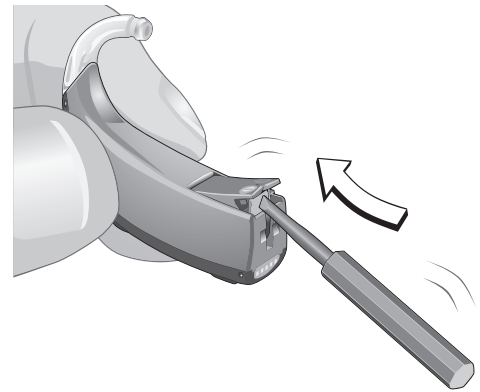

Direkte audioindgang og FM

Montering af DAI-/FM-sko

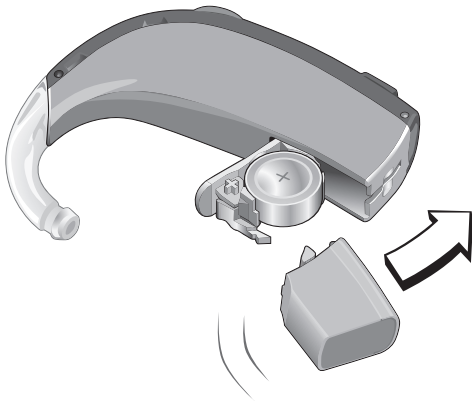

- 1 Åbn batteriskuffen helt.
- 2 Skub DAI-/FM-skoen ind i slidsen, indtil den flugter med høreapparatet.
- 3 Luk batteriskuffen igen og tilslut det ønskede tilbehør.

Brug af FM-sko


Super Power høreapparatet er kompatibelt med alle almindelige kendte FM-systemer (FM-modtagere). Forbindelsen etableres via Eurostik.

Vælg også FM-skoen, når du tilslutter en CROS mikrofon til høreapparatet.

Brug af DAI-sko


Direkte audioindgang (DAI) gør det muligt for høreapparat at modtage signaler direkte fra eksterne kilder såsom tv, pc, mp3-afspiller osv.

DAI-skoen har en Eurostik-forbindelse til at forbinde DAI-ledningen med en ekstern kilde.

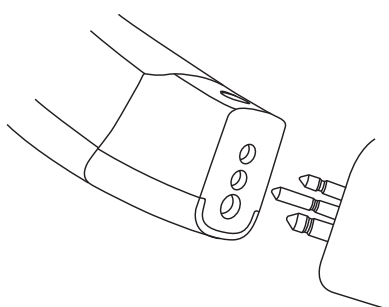


DAI-skoen har to justerbare trimmere.

Brug trimmeren på fronten til at justere volumen.

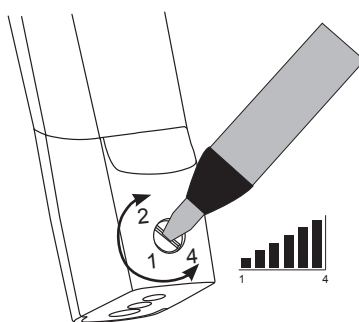

Brug trimmeren på toppen til at vælge indgangsimpedans (position HI eller position LO).

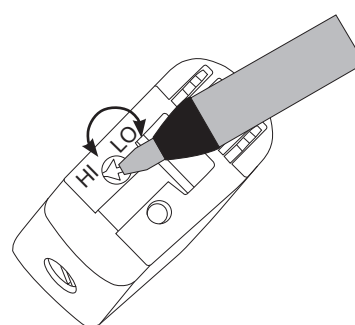

Position HI:
Tv, stereoanlæg, mp3-afspiller,
pc osv.
Position LO:
Kropsbårne FM-løsninger


Tilpasning af Super Power BTE med Oasis

Super Power høreapparater programmeres med Oasis ved hjælp af new standard (nr. 2) programmeringskabler.


Sæt venligst altid et nyt batteri i, før høreapparatet programmeres.

Trådløse Super Power høreapparater er kompatible med FittingLINK og det trådløse nEARcom tilpasningssystem.

Tilslutning af programmeringskabler

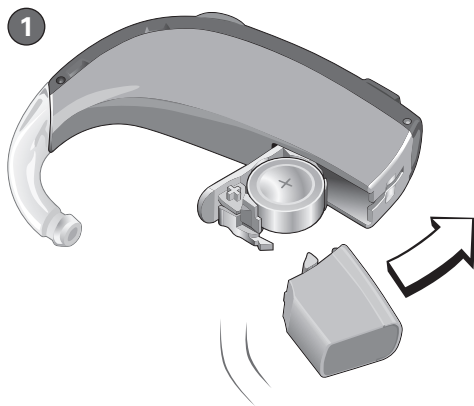

1 Åbn batteriskuffen helt, og lad programmeringsadapteren glide ind i sprækken, til den sidder fast på høreapparatet.

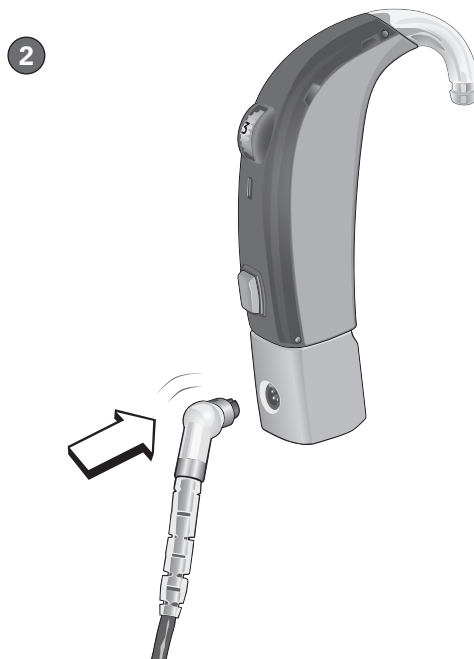

2 Luk batteriskuffen igen, og sæt kablet i som vist.


Bestillingsinformation

1. Audiologisk tilbehør

Varenummer	Beskrivelse	Bemærkninger
147602	DAI-adapter	
147435	FM-adapter	
153877	CROS mikrofon	


2. Programmeringsudstyr

2.1 Kabler

Varenummer	Beskrivelse	Bemærkninger
384-20-033-00	Programmeringskabel, Nr. 2 New standard (HiPro) Blå, venstre	
384-20-032-00	Programmeringskabel, Nr. 2 New standard (HiPro) Rød, højre	
384-20-035-00	Programmeringskabel, Nr. 2 New standard (NOAHlink) Blå, venstre	
384-20-034-00	Programmeringskabel, Nr. 2 New standard (NOAHlink) Rød, højre	

2.2 Adapter

Varenummer	Beskrivelse	Bemærkninger
399-50-640-00	Programmeringsadapter	Kompatibel med SP, Micro og Compact Power BTE-apparater CP/CPx

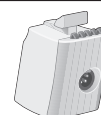

2.3 Programmeringsgrænseflade

Varenummer	Beskrivelse	Bemærkninger
144720	FittingLINK	Trådløs programmeringsgrænseflade




3. Tilbehør

3.1 Hooks

Varenummer	Beskrivelse	Bemærkninger
571-01-140-00	Hook til voksne	
106141	Dæmpet hook til voksne	
689-30-320-00	Dæmpningselementer	Skjold med 6 dæmpere


3.2 Højre/venstre-markører

Varenummer	Beskrivelse	Bemærkninger
101217	Sæt med farvemarkører højre/venstre	1 rød og 1 blå

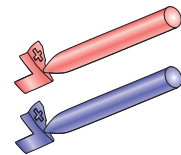

3.3 Værktøjer

Varenummer	Beskrivelse	Bemærkninger
101484	Batteriskuffe-afmonteringsværktøj	
890-22-270-00	Afmonteringsværktøj til lås	

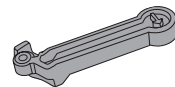

4. Pædiatriartikler

4.1 Værktøjer

Varenummer	Beskrivelse	Bemærkninger
145601	TAR batteriskuffe SR3	
144307	TAR batteriskuffe SR7	
571-01-110-00	Hook til børn	
106168	Dæmpet hook til børn	
152883	YoungStar sæt	YoungStar sættet indeholder: <ul style="list-style-type: none"> • Taske med valgfri skulderrem • Rengørings- og tørresæt • Rengøringsklud • Slange • Batteritester • Otoclip • Løve hånddukke • Pædiatri høreapparatguide

Siden 1946 har det været vores lidenskab at udvikle førsteklasses høreapparater, som sætter mennesker med nedsat hørelse i stand til at nyde autentiske lytteoplevelser. Vi stræber efter at overgå vores kunders forventninger takket være schweizisk ingeniørkunst, præcision samt en dedikeret og personaliseret service. Vores mål er hver dag at give vores samarbejdspartnere merværdi. Bernafons repræsentanter og medarbejdere i mere end 70 lande realiserer vores vision om at hjælpe mennesker med nedsat hørelse til igen at kunne kommunikere uden begrænsninger.

Hovedkontor

Schweiz

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Phone +41 31 998 15 15
E-mail: info@bernafon.ch

Danmark

Bernafon
Kongebakken 9
2765 Smørum
Tlf.: +45 7022 7218
E-mail: info@bernafon.dk

SWISS 
Engineering

Bernafon Companies

Australia · Canada · China · Denmark · Finland · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Netherlands · New Zealand · Poland · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · UK · USA

www.bernafon.com

bernafon 
Your hearing • Our passion