

Tilpasningsvejledning

# BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER

Compact Power Plus BTE  
Compact Power BTE  
Micro BTE  
Power BTE  
Nano BTE





# Tilpasningsvejledning

## Compact Power Plus, Compact Power, Power, Micro og Nano BTE-høreapparater

### Indholdsfortegnelse


<b>Tilpasning af BTE-høreapparater</b>	<b>4</b>
Oversigt over akustiske valgmuligheder	6
Tilpasningsområder	7
Montering og afmontering af hook eller tyndslangeadapter	8
Udskiftning af dome	9
Montering af højre/venstre-markører	9
Udskiftning af batteriskuffe	11
<b>DAI- og FM-adaptore</b>	<b>13</b>
Montering og afmontering af DAI- og FM-adaptore	13
Sådan anvendes FM-adapteren	14
Sådan anvendes DAI-adapteren	14
<b>Tilpasning af BTE-apparater med Oasis</b>	<b>15</b>
Tilslutning af programmeringskabler	15
FittingLINK	17
<b>Bestillingsinformation</b>	<b>19</b>

# Tilpasning af BTE-høreapparater

BTE-høreapparater fås i forskellige modeller med forskellige akustiske valgmuligheder alt afhængig af graden af hørenedsættelsen, formen på brugerens øre og af personlige ønsker. Denne vejledning hjælper dig med at tilpasse BTE-apparater.

## Compact Power Plus (CPx) og Compact Power (CP) BTE med hook

(fås også med tyndslange)

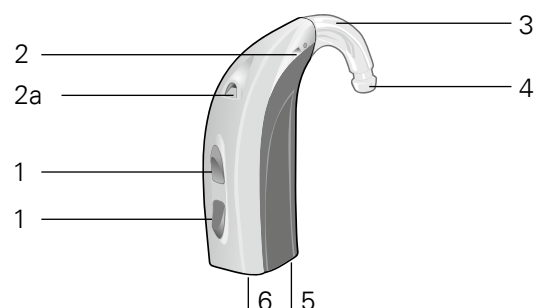


- 1 Multikontrol
- 2 Mikrofon
- 2a Anden mikrofon
- 3 Hook

- 4 Lydudgang
- 5 Batteriskuffe
- 6 Direkte audio-indgang (DAI) – med mulighed for tilvalg af DAI-adapter

## Micro BTE med tyndslange

(fås også med hook)

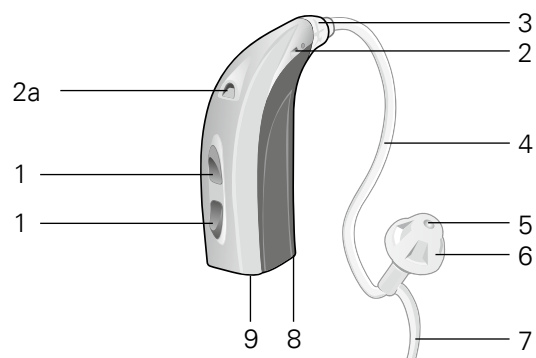


- 1 Multikontrol
- 2 Mikrofon
- 2a Anden mikrofon
- 3 Adapter
- 4 Tyndslange

- 5 Lydudgang
- 6 Dome
- 7 Støttebøjle
- 8 Batteriskuffe
- 9 Direkte audio-indgang (DAI) – med mulighed for tilvalg af DAI-adapter

**Power BTE med hook**


(fås også med tyndslange)

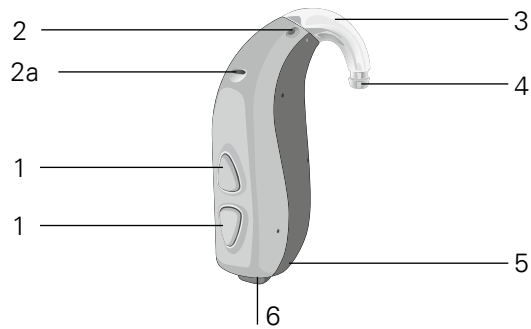

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1 Multikontrol    | 5 Batteriskuffe   |
| 2 Mikrofon        | 6 Direkte audio-indgang (DAI) – med mulighed for tilvalg af DAI-adapter |
| 2a Anden mikrofon |   |
| 3 Hook            |   |
| 4 Lydudgang       |   |

**Nano BTE med tyndslange**

(fås også med hook)

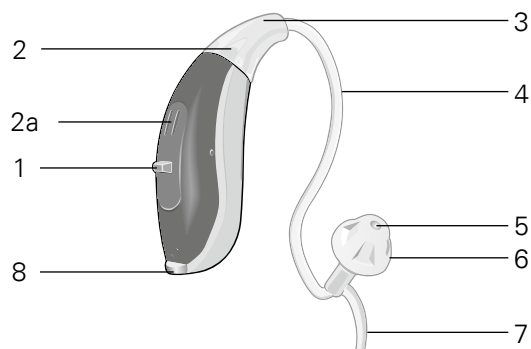














- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1 Trykknop        | 5 Lydudgang     |
| 2 Mikrofon        | 6 Dome          |
| 2a Anden mikrofon | 7 Støttebøjle   |
| 3 Adapter         | 8 Batteriskuffe |
| 4 Tyndslange      |                 |

## Oversigt over akustiske valgmuligheder

Alle BTE-modeller i denne tilpasningsvejledning kan tilpasses med enten en hook eller et tyndslangesystem. De traditionelle hooks tilpasses med brugertilpassede ørepropper.

Tyndslangesystemet kan kombineres med en række forskellige domes og brugertilpassede moulds. Alle Compact Power Plus, Compact Power, Power, Micro og Nano BTE-apparater kan tilpasses med Spira Flex og miniFit tyndslangesystemet.

Bemærk venligst, at der i tilpasningssoftwaren kun er angivet ét sæt af akustiske valgmuligheder (enten Spira Flex eller miniFit) for hver BTE-model. Til gengæld kan oversigten herunder hjælpe dig med at foretage det passende valg, hvis du ønsker at anvende et andet sæt akustiske valgmuligheder.


Spira Flex			miniFit	
Tyndslange 0,9 mm Tyndslange 1,3 mm			Tyndslange 0,9 mm Tyndslange 1,3 mm	
	Åben dome (6, 8, 10 mm)	↔		Åben dome (6, 8, 10 mm)
	Tulip dome	/	/	Fås ikke
	Dome, stor vent (8, 10, 12 mm)	↔		Bas dome, dobbelt vent (6, 8, 10, 12 mm)
	Dome, lille vent (8, 10, 12 mm)	↔		Bas dome, enkelt vent (6, 8, 10, 12 mm)
	Power dome (6, 8, 10 mm)	↔		Power dome (6, 8, 10, 12 mm)
	Canal mould	↔		Micro mould
	Custom tip	/	/	Fås ikke
	Fås ikke	/		Lite Tip

**Bemærk:** Sæt aldrig en Spira Flex dome eller mould på en miniFit tyndslange eller omvendt, da den kan falde af i brugerens øregang.


## Tilpasningsområder

BTE-høreapparater fås i en række forskellige modeller, der er velegnede til brugere med milde til svære høretab. Nedenfor ses de forventede tilpasningsområder for hver enkel BTE-høreapparatmodel.


**Compact Power Plus BTE**

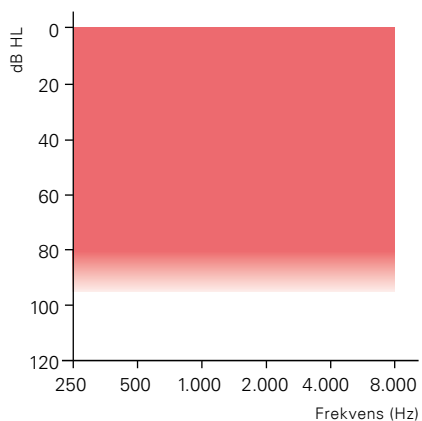


**Power BTE**

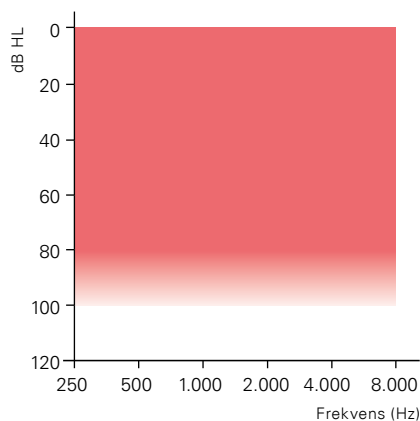


**Compact Power BTE**

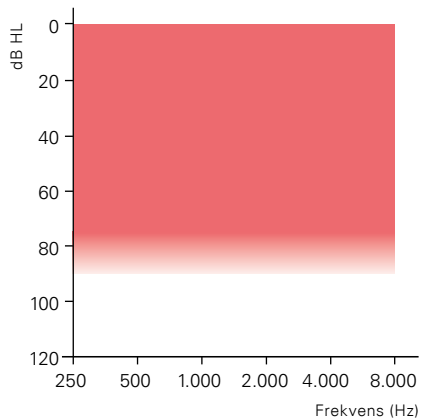

**Micro BTE**

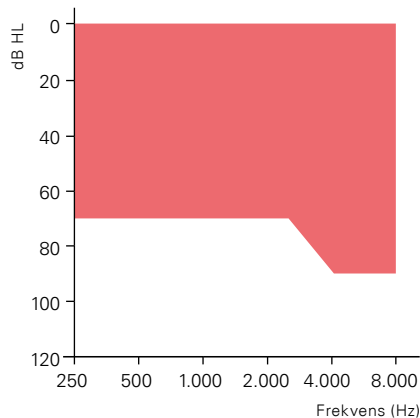

**Nano BTE**

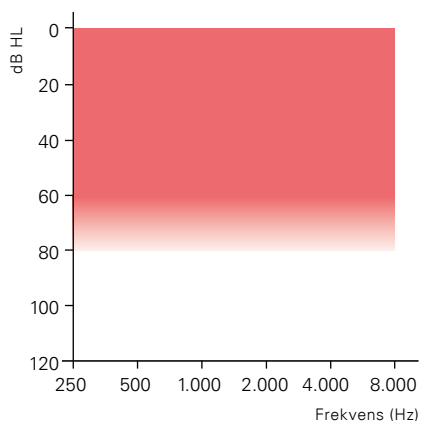


# Montering og afmontering af hook eller tyndslangeadapter

Alle BTE-høreapparater kan fås enten med tyndslange eller en almindelige hook.


## Compact Power Plus, Compact Power, Power og Micro BTE

- 1 Brug den spidse ende af afmonteringsværktøjet til at skubbe låsen fri.
- 2 Udskift hook eller adapter.
- 3 Sæt låsen i igen (brug evt. en pincet).

### Nano BTE


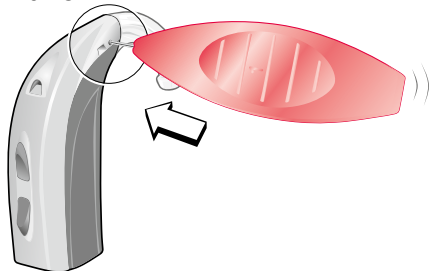


Brug den spidse ende af afmonteringsværktøjet til at skubbe låsen fri.

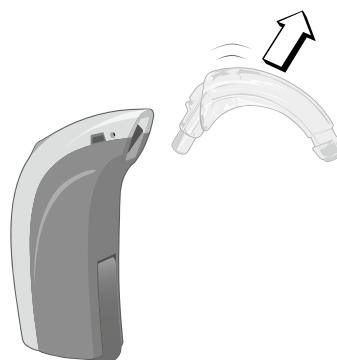


Aftag hook eller adapter.

- 1 Træk adapteren eller hook'en op og fri af høreapparatet.
- 2 Sæt en ny hook eller adapter på ved at skubbe den pågældende del fast på høreapparatet.

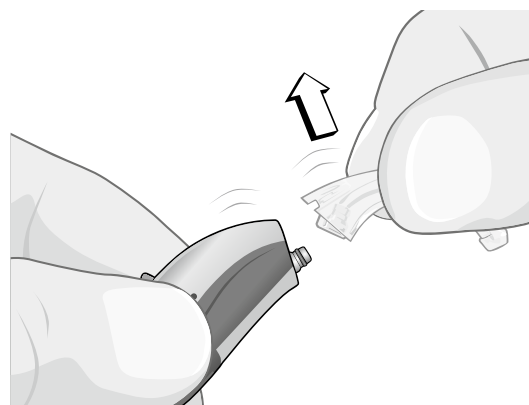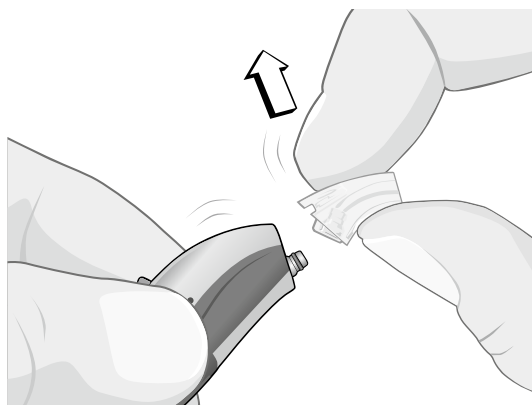



## Udskiftning af dome

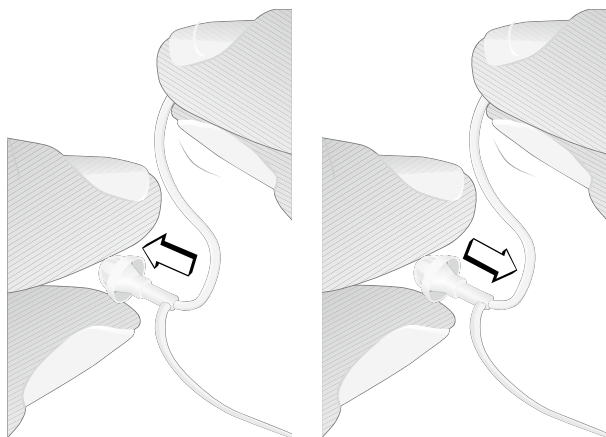

- 1 Træk den brugte dome af tyndslangen, og smid den ud.
- 2 Pres med rene hænder en ny dome så langt ind på tyndslangen, som den kan komme.

Hvis domnen ikke sidder helt fast på tyndslangen, kan den falde af i øregangen.


**i**

**Bløde tipper er beregnet til at blive kasseret efter brug. Brugeren skal forsynes med ekstra tipper og vises, hvordan man udskifter dem.**


## Montering af højre/venstre-markører

- 1 Åbn batteriskuffen, og placer markøren i hullet som vist.
- 2 Drej og vrid pinden for at brække markøren af.
- 3 Luk batteriskuffen.

### Micro BTE

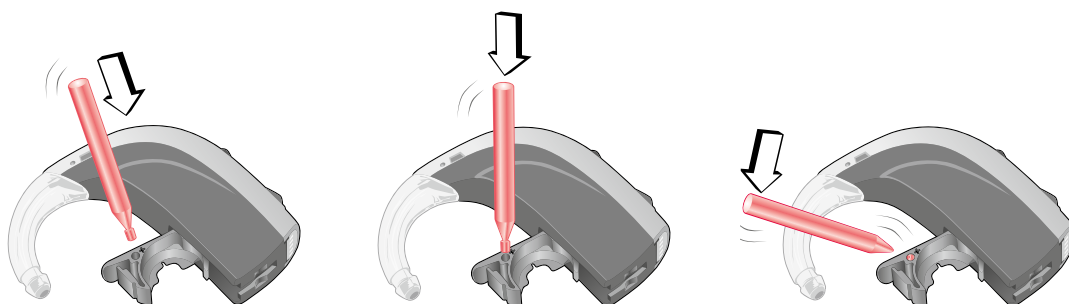


### Nano BTE

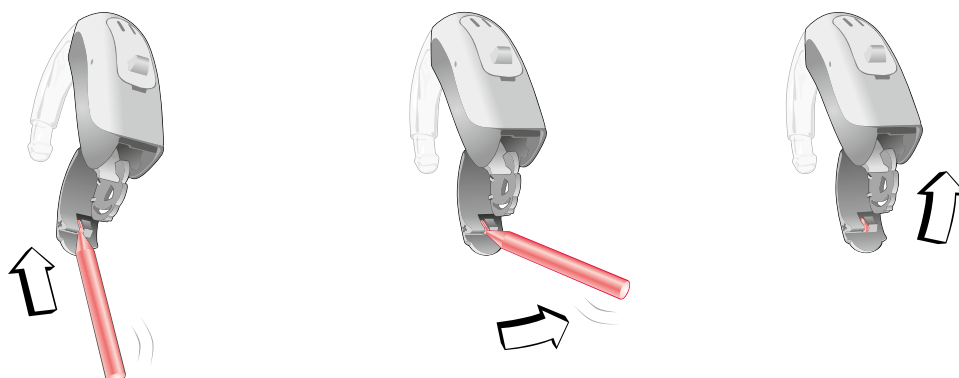


### Compact Power Plus og Compact Power BTE

- 1 Åbn batteriskuffen.
- 2 Placer markøren i hullet som vist.
- 3 Drej og vrid pinden for at brække markøren af.
- 4 Luk batteriskuffen.

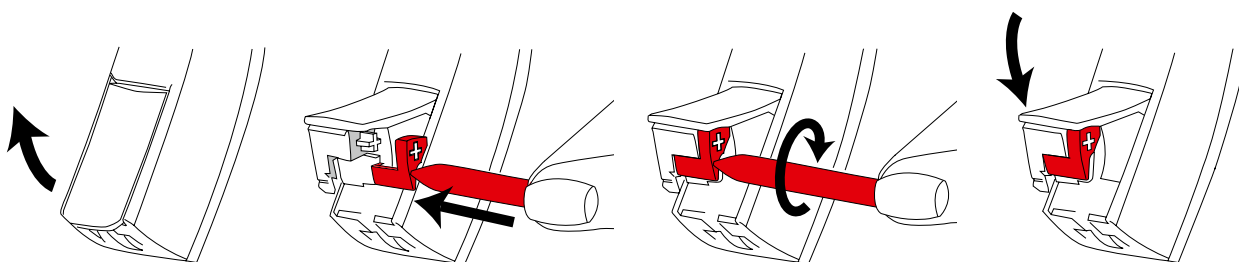

### Power BTE


- 1 Åbn batteriskuffen.
- 2 Placer markøren i hullet som vist.
- 3 Drej pinden for at brække markøren af.
- 4 Luk batteriskuffen.

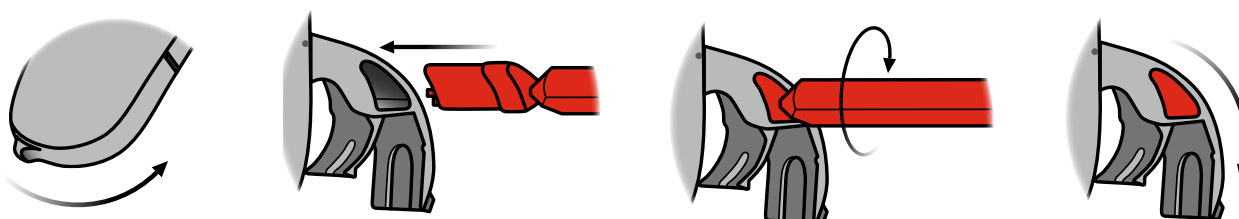

## Udskiftning af batteriskuffe


### Compact Power Plus, Compact Power og Micro BTE

- 1 Åbn batteriskuffen, og placer batteriafmonteringsværktøjet som vist.
- 2 Træk forsigtigt batteriskuffen ud.
- 3 Klik den nye batteriskuffe på plads og luk den.

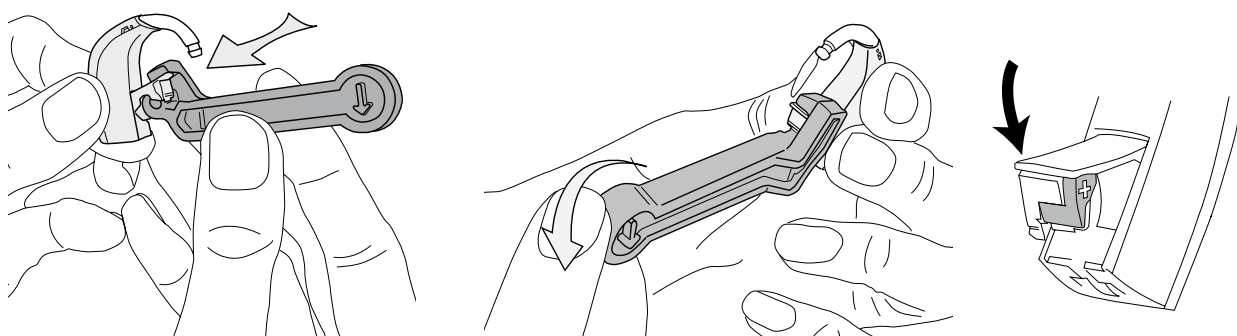

### Power og Nano BTE

- 1 Skub metallåsen ud med afmonteringsværktøjet.
- 2 Træk låsen ud med en pincet.
- 3 Når du udskifter skuffen, klik da den nye skuffe på plads (lukket position), og brug pincetten til at sætte låsen ind i hullet igen.
- 4 Brug pincettens flade ende til at skubbe låsen helt ind igen.

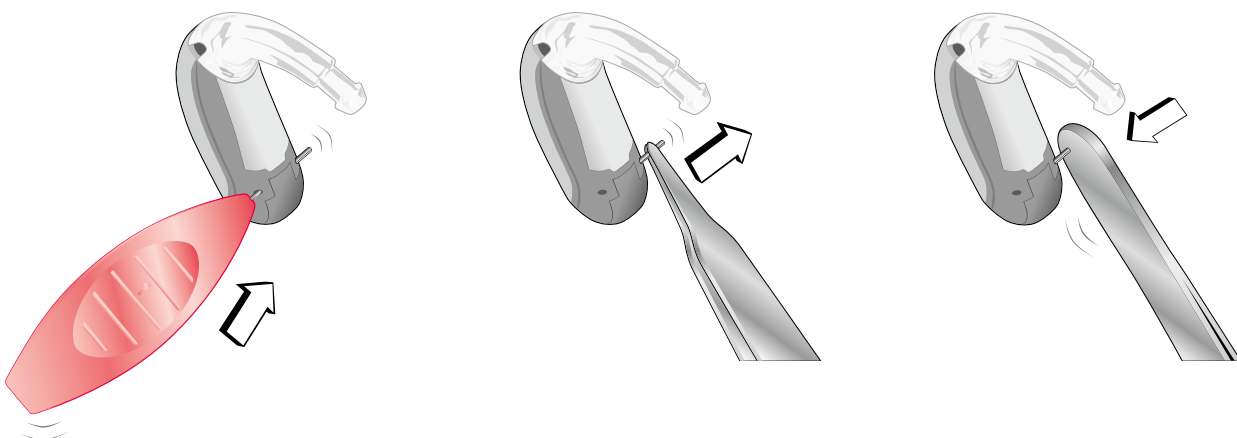

## Børnesikret batteriskuffe

Til de nedenstående modeller kan der separat bestilles en valgfri børnesikret batteriskuffe. En børnesikret batteriskuffe bør anvendes til børn og udsatte personer.

### Compact Power Plus, Compact Power og Micro BTE


#### Lås skuffen

- 1 Luk batteriskuffen helt for at låse den.
- 2 Brug en lille skruetrækker til at dreje låsen til låst position, dvs. at rillen skal være i vandret position (kun Micro BTE).


#### Lås skuffen op

- 1 Brug en lille skruetrækker til at dreje låsen til ulåst position, dvs. at rillen skal være i lodret position (kun Micro BTE).
- 2 Sæt en lille skruetrækker ind i rillen i bunden af høreapparatet og tryk på batteriskuffen til den åbnes.

#### Micro BTE

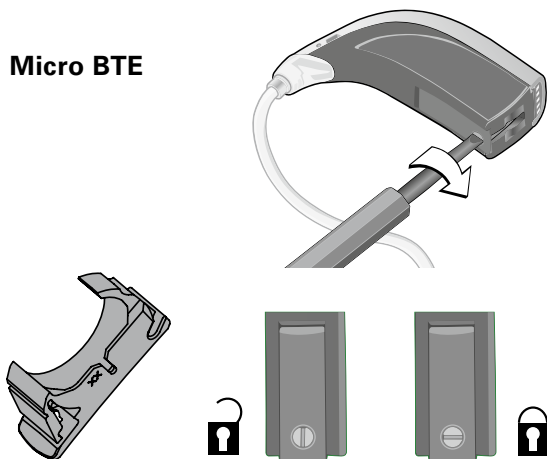


#### Compact Power/Compact Power Plus BTE

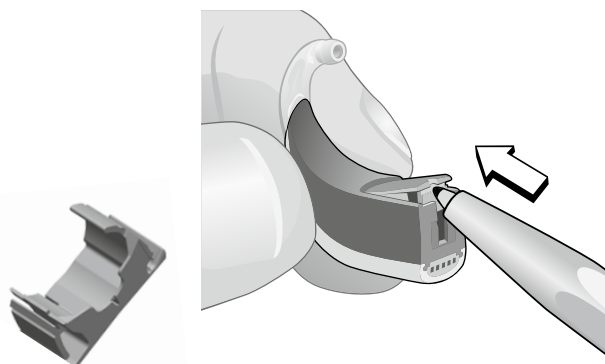

#### Power BTE

- 1 Åbn den børnesikrede batteriskuffe.
- 2 Stik højre/venstre-markøren ind i rillen.
- 3 Luk den børnesikrede batteriskuffe. Batteriskuffen er nu låst.
- 4 Lås batteriskuffen op ved at stikke spidsen af det blå værktøj ind i det lille hul på bagsiden af batteriskuffen.
- 5 Træk værktøjet mod højre. Mens værktøjet holdes i denne position, åbnes batteriskuffen.

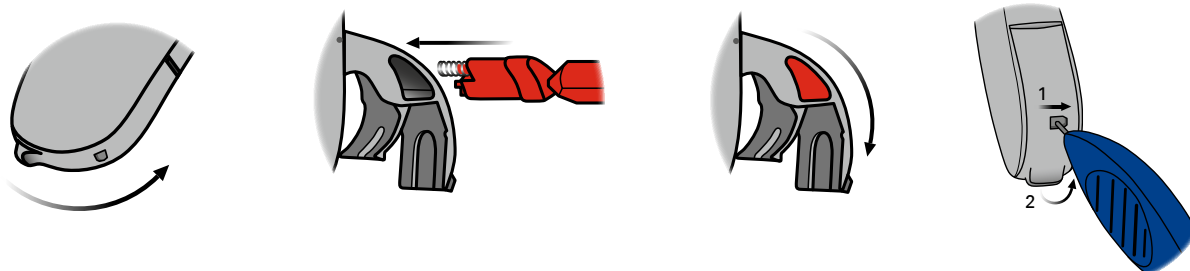


# DAI- og FM-adapttere

## Montering og afmontering af DAI- og FM-adapttere

### Compact Power Plus, Compact Power og Micro BTE

- 1 Åbn batteriskuffen helt.
- 2 Med batteriet isat, skubbes DAI- eller FM-adapteren ind i rillen, indtil den flugter med høreapparatet.

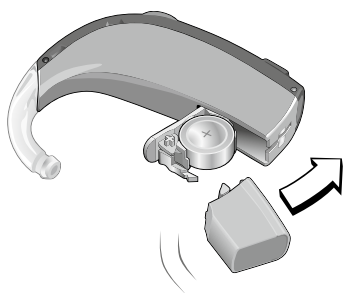


- 3 Luk batteriskuffen.
- 4 DAI- eller FM-adapteren tages af ved at åbne batteriskuffen og trække den ud.

### Power BTE

Inden FM- eller DAI-adapteren monteres på høreapparatet, skal standard batteriskuffen udskiftes med den batteriskuffe, der er beregnet til adapterne. Se side 11 for information om udskiftning af batteriskuffen.

- 1 Udskift batteriskuffen.
- 2 Med batteriet isat, monteres DAI- eller FM-adapteren som vist.
- 3 Luk batteriskuffen.
- 4 DAI- eller FM-adapteren tages af ved at åbne batteriskuffen og afmontere den.

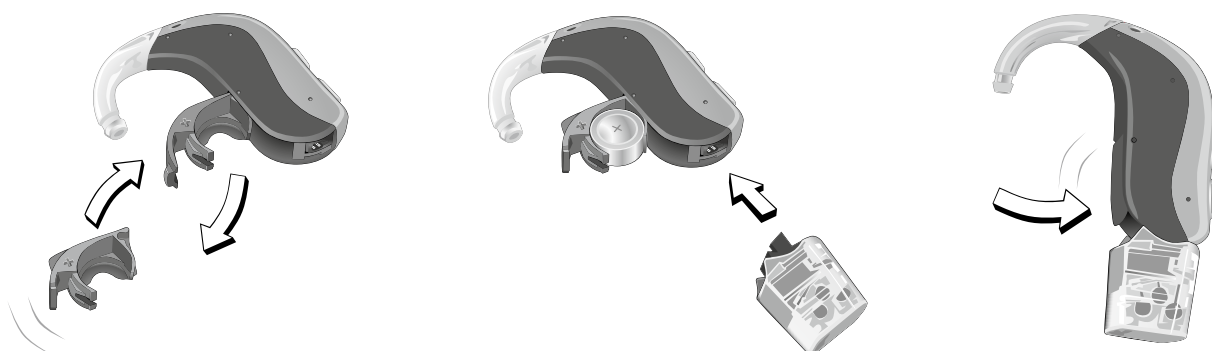

## Sådan anvendes FM-adapteren


Compact Power Plus, Compact Power og Power BTE-apparaterne er kompatible med alle almindelig kendte FM-systemer (FM-modtagere). Forbindelsen etableres via et Eurostik.

Vælg også FM-adapteren, når du tilslutter en CROS mikrofon til høreapparatet.

## Sådan anvendes DAI-adapteren


Direkte audio-indgang (DAI) gør det muligt for høreapparatet at modtage signaler direkte fra eksterne kilder såsom tv, stereoanlæg, pc, mp3-afspiller osv.

DAI-adapteren har en Eurostik-forbindelse til at forbinde DAI-ledningen med en ekstern kilde.

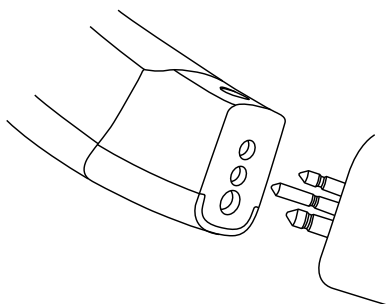


DAI-adapteren har to justerbare trimmere.

Brug trimmeren på fronten til at justere lydstyrken.

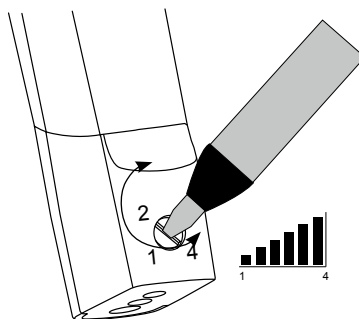

Brug trimmeren på toppen til at vælge indgangsimpedans.

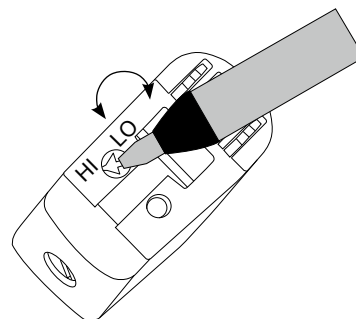


Position HI: Tv, stereoanlæg, mp3-afspiller, pc osv.  
Position LO: Kropsbårne FM-løsninger

# Tilpasning af BTE-apparater med Oasis

BTE-apparater programmeres med Oasis ved hjælp af New standard (Nr. 2) programmeringskabler. Nogle BTE-modeller skal have et nyt batteri for at kunne programmeres. Sæt derfor altid et nyt batteri i, inden programmeringen påbegyndes.


## Tilslutning af programmeringskabler

### Compact Power Plus, Compact Power og Micro BTE

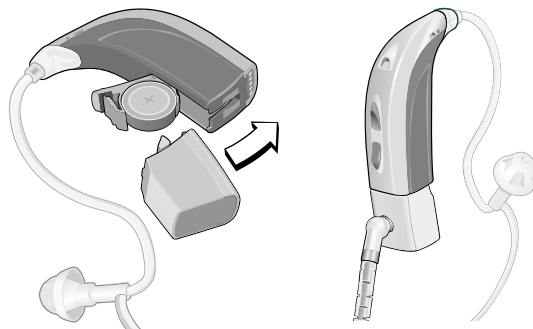

- 1 Åbn batteriskuffen helt, og skub programmingsadapteren ind i rillen, indtil den flugter med høreapparatet.
- 2 Luk batteriskuffen igen og sæt kablet i som vist.

### Power BTE

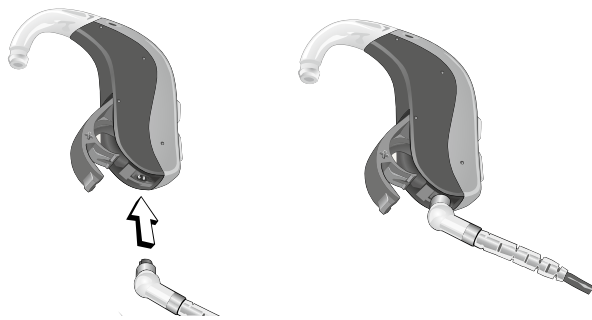

- 1 Åbn batteriskuffen helt. Det er ikke nødvendigt at isætte et batteri.
- 2 Sæt kablet til stikket.

## Nano BTE

- 1 Fjern dækslet med det lille værktøj som vist.
- 2 Tilslut kablet til stikket.
- 3 Sæt dækslet på igen ved først at sætte den øverste del ind under skallen og derefter klikke det på plads.





# FittingLINK

## Programmering med FittingLINK


FittingLINK er en trådløs programmeringsgrænseflade til tilpasning af alle trådløse høreapparater. FittingLINK kan tilsluttes pc'en via den medfølgende Bluetooth®-dongle eller et usb-kabel.

FittingLINK brugervejledningen, der medfølger i pakken, indeholder vigtige informationer om FittingLINK, dets funktioner og om tilslutning til pc. Læs venligst brugervejledningen grundigt, inden FittingLINK anvendes sammen med Oasis.

## Sådan kommer du i gang

Gør FittingLINK klar og etabler forbindelse til din pc, som beskrevet i FittingLINK brugervejledningen.

Når du åbner Oasis første gang, efter at FittingLINK er blevet installeret på pc'en, vil den automatisk blive detekteret som programmeringsgrænseflade. En dialogboks giver dig mulighed for at ændre din foretrukne programmeringsgrænseflade til FittingLINK. Dette kan gøres når som helst under "Præferencer" og "Kommunikation". Herefter kan FittingLINK bruges i Oasis.

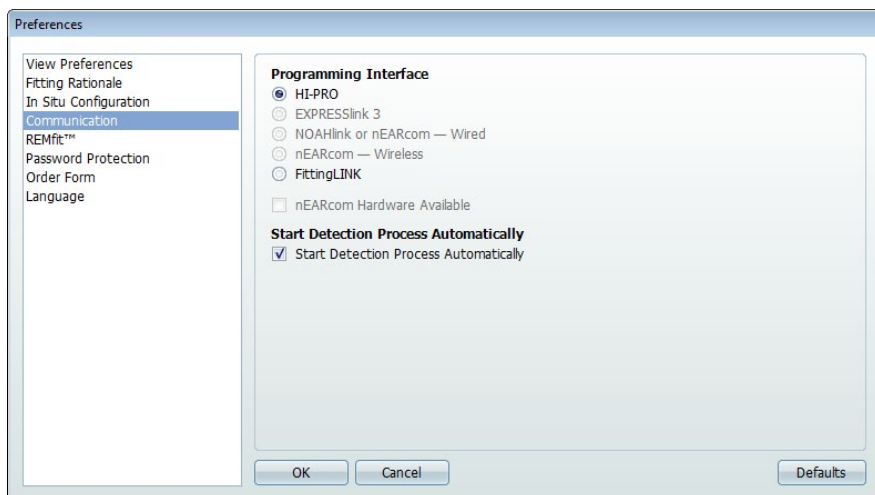

## Søgning efter, og programmering af, høreapparater

Tjek, at FittingLINK er tilsluttet til din pc, fuldt opladt og tændt (konstant grønt lys i øverste LED-lampe). Af sikkerhedsmæssige årsager bør høreapparaterne ikke sidde på brugerens ører under søgningen. For at sikre en god forbindelse bedes du kontrollere, at høreapparaterne er placeret korrekt i forhold til FittingLINK nakkestroppen. Se FittingLINK brugervejledningen for yderligere vejledning.


Start Oasis og klik på "Søg". Hvis FittingLINK ikke er standard programmeringsgrænseflade, vælges FittingLINK fra rullemenuen ved siden af knappen "Søg".

## Verificer højre og venstre høreapparat



I dialogboksen "Søg efter høreapparater" kan du afspille en lyd i hvert høreapparat for at bestemme, hvilken side der er aktiv. Hvis placeringen er korrekt, klikkes på "Næste". Hvis du vil ændre placeringen, klikkes på "Skift" og derefter på "Næste".

Herefter er tilpasningsproceduren den samme.

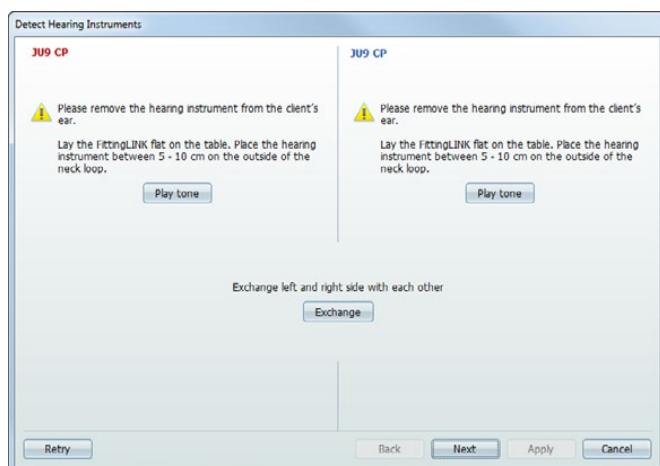

Se FittingLINK brugervejledningen for yderligere vejledning.

# Bestillingsinformation

## 1. Tilpasningsæt


Varenummer	Beskrivelse	Bemærkninger
163095	miniFit tyndslangesæt	Indeholder alle miniFit dele og værktøjer
890-80-060-00	Spira Flex tilpasningsæt	Indeholder alle Spira Flex dele og værktøjer



## 2. Tyndslanger


### miniFit tyndslanger 0,9 mm

Varenummer	Beskrivelse	Bemærkninger
156522	miniFit tyndslange, 0,9 mm, størrelse 0 venstre	Indeholder: - 5 miniFit tyndslanger 0,9 mm - 5 støttebøjler til miniFit slanger
156523	miniFit tyndslange, 0,9 mm, størrelse 1 venstre	
156524	miniFit tyndslange, 0,9 mm, størrelse 2 venstre	
156525	miniFit tyndslange, 0,9 mm, størrelse 3 venstre	
156526	miniFit tyndslange, 0,9 mm, størrelse 0 højre	
156527	miniFit tyndslange, 0,9 mm, størrelse 1 højre	
156528	miniFit tyndslange, 0,9 mm, størrelse 2 højre	
156529	miniFit tyndslange, 0,9 mm, størrelse 3 højre	

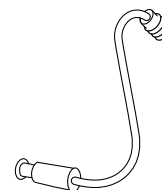

### miniFit tyndslanger 1,3 mm

Varenummer	Beskrivelse	Bemærkninger
156533	miniFit tyndslange, 1,3 mm, størrelse 0 venstre	Indeholder: - 5 miniFit tyndslanger 1,3 mm - 5 støttebøjler til miniFit slanger
156534	miniFit tyndslange, 1,3 mm, størrelse 1 venstre	
156535	miniFit tyndslange, 1,3 mm, størrelse 2 venstre	
156536	miniFit tyndslange, 1,3 mm, størrelse 3 venstre	
156537	miniFit tyndslange, 1,3 mm, størrelse 0 højre	
156538	miniFit tyndslange, 1,3 mm, størrelse 1 højre	
156539	miniFit tyndslange, 1,3 mm, størrelse 2 højre	
156540	miniFit tyndslange, 1,3 mm, størrelse 3 højre	

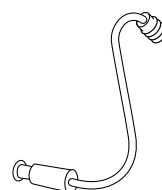

### Spira Flex tyndslanger 0,9 mm

Varenummer	Beskrivelse	Bemærkninger
589-25-070-00	Spira Flex tyndslange, 0,9 mm, størrelse 0 venstre	Indeholder: - 5 Spira Flex tyndslanger 0,9 mm
589-25-071-00	Spira Flex tyndslange, 0,9 mm, størrelse 1 venstre	
589-25-072-00	Spira Flex tyndslange, 0,9 mm, størrelse 2 venstre	
589-25-073-00	Spira Flex tyndslange, 0,9 mm, størrelse 3 venstre	
589-25-060-00	Spira Flex tyndslange, 0,9 mm, størrelse 0 højre	
589-25-061-00	Spira Flex tyndslange, 0,9 mm, størrelse 1 højre	
589-25-062-00	Spira Flex tyndslange, 0,9 mm, størrelse 2 højre	
589-25-063-00	Spira Flex tyndslange, 0,9 mm, størrelse 3 højre	



## Spira Flex tyndslanger 1,3 mm

Varenummer	Beskrivelse	Bemærkninger
589-25-090-00	Spira Flex tyndslange, 1,3 mm, størrelse 0 venstre	
589-25-091-00	Spira Flex tyndslange, 1,3 mm, størrelse 1 venstre	
589-25-092-00	Spira Flex tyndslange, 1,3 mm, størrelse 2 venstre	
589-25-093-00	Spira Flex tyndslange, 1,3 mm, størrelse 3 venstre	
589-25-080-00	Spira Flex tyndslange, 1,3 mm, størrelse 0 højre	Indeholder: - 5 Spira Flex tyndslanger 1,3 mm
589-25-081-00	Spira Flex tyndslange, 1,3 mm, størrelse 1 højre	
589-25-082-00	Spira Flex tyndslange, 1,3 mm, størrelse 2 højre	
589-25-083-00	Spira Flex tyndslange, 1,3 mm, størrelse 3 højre	



## 3. Domes

### miniFit domes

Varenummer	Beskrivelse	Bemærkninger
149303	Åben dome miniFit, 6 mm	
149304	Åben dome miniFit, 8 mm	Åben domes 10 domes pr. pakke
149305	Åben dome miniFit, 10 mm	
149306	Bas dome, dobbelt vent miniFit, 6 mm	
149307	Bas dome, dobbelt vent miniFit, 8 mm	Bas domes med dobbelt vent 10 domes pr. pakke
149308	Bas dome, dobbelt vent miniFit, 10 mm	
149309	Bas dome, dobbelt vent miniFit, 12 mm	
149310	Bas dome, enkelt vent miniFit, 6 mm	
149311	Bas dome, enkelt vent miniFit, 8 mm	Bas domes med enkelt vent 10 domes pr. pakke
149312	Bas dome, enkelt vent miniFit, 10 mm	
149313	Bas dome, enkelt vent miniFit, 12 mm	
149314	Power dome miniFit, 6 mm	
149315	Power dome miniFit, 8 mm	Power domes 10 domes pr. pakke
149316	Power dome miniFit, 10 mm	
149317	Power dome miniFit, 12 mm	




### Spira Flex domes

Varenummer	Beskrivelse	Bemærkninger
570-07-410-00	Åben dome, 6 mm	Åben domes
570-07-411-00	Åben dome, 8 mm	10 domes pr. pakke
570-07-412-00	Åben dome, 10 mm	
589-25-100-00	Tulip dome	Tulip domes 10 domes pr. pakke
123310	Dome, stor vent, 8 mm	
123311	Dome, stor vent, 10 mm	Domes med dobbelt vent 10 domes pr. pakke
123312	Dome, stor vent, 12 mm	
123307	Dome, lille vent, 8 mm	
123308	Dome, lille vent, 10 mm	Domes med enkelt vent 10 domes pr. pakke
123309	Dome, lille vent, 12 mm	
123293	Power dome, 6 mm	
123305	Power dome, 8 mm	Power domes 10 domes pr. pakke
123306	Power dome, 10 mm	



## 4. Programmeringsudstyr

### Kabler

Varenummer	Beskrivelse	Bemærkninger
384-20-033-00	Prog.kabel, Nr. 2 New standard (HiPro) blå, venstre	
384-20-032-00	Prog.kabel, Nr. 2 New standard (HiPro) rød, højre	
384-20-035-00	Prog.kabel, Nr. 2 New standard (NOAHLINK) blå, venstre	
384-20-034-00	Prog.kabel, Nr. 2 New standard (NOAHLINK) rød, højre	

### Adapter

Varenummer	Beskrivelse	Bemærkninger
399-50-640-00	Prog.kabel, Nr. 2 New standard (HiPro) blå, venstre	Kompatibel med Micro og Compact Power BTE





### Programmeringsgrænseflade

Varenummer	Beskrivelse	Bemærkninger
144720	FittingLINK	Trådløs programmeringsgrænseflade





## 5. DAI- og FM-adaptere

Varenummer	Beskrivelse	Bemærkninger
147602	Adapter, DAI 4	 Kompatibel med Micro og Compact Power BTE CP/CPx
147435	Adapter, FM 9	
142207	DAI-adapter, AP1000	 Kun kompatibel med Power BTE. Kræver dedikeret batteriskuffe.
142328	FM-adapter, FM10	







## 6. Værktøjer

Varenummer	Beskrivelse	Bemærkninger
166243	Tilbehørssæt CPx/CP/P/M BTE	Indeholder: · Rengøringsklud · Magnet til telefon · Multiværktøj
144367	Tilbehørssæt Nano BTE	Indeholder: · Rengøringsklud · Multiværktøj
101484	Afmonteringsværktøj til batteriskuffe	Til Micro, CP og CPx BTE
166313	TAR låsesæt til Power BTE	Indeholder: · Sæt med farvemærker, højre/venstre til at låse TAR batteriskuffe · Blåt værktøj til at åbne TAR batteriskuffe
890-22-270-00	Afmonteringsværktøj til lås	

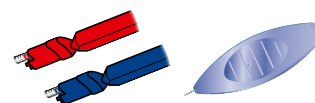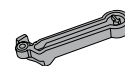

## 7. Reservedele

Varenummer	Beskrivelse	Bemærkninger
101217	Sæt med farvemærker, højre/venstre til CP/CPx BTE	1 rød og 1 blå
145367	Sæt med farvemærker, højre/venstre til Power BTE	1 rød og 1 blå
142708	Sæt med farvemærker, højre/venstre til at låse TAR batteriskuffe til Power BTE	1 rød og 1 blå
136395	Sæt med farvemærker, højre/venstre til Micro og Nano BTE	2 røde og 2 blå
156570	Støttebøjler (10 stk.)	Til miniFit tyndslanger
162758	Magnet til telefon	Til CPx/CP/P/M BTE

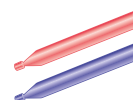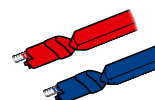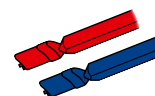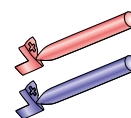



Siden 1946 har det været vores lidenskab at udvikle førsteklasses høreapparater, som sætter mennesker med nedsat hørelse i stand til at nyde autentiske lytteoplevelser. Vi stræber efter at overgå vores kunders forventninger takket være schweizisk ingeniørkunst og præcision samt en dedikeret og personaliseret service. Vores mål er hver dag at give vores samarbejdspartnere merværdi. Bernafons repræsentanter og medarbejdere i mere end 70 lande realiserer vores vision om at hjælpe mennesker med nedsat hørelse til igen at kunne kommunikere uden begrænsninger.

#### Hovedkvarter

##### Schweiz

Bernafon AG  
Morgenstrasse 131  
3018 Bern  
Tlf.: +41 31 998 15 15  
E-mail: [info@bernafon.ch](mailto:info@bernafon.ch)

##### Danmark

Bernafon  
Kongebakken 9  
2765 Smørum  
Tlf.: +45 7022 7218  
E-mail: [info@bernafon.dk](mailto:info@bernafon.dk)

**SWISS**   
Engineering

#### Bernafon Companies

Australia · Canada · China · Denmark · Finland · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Netherlands · New Zealand · Poland · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · UK · USA

[www.bernafon.com](http://www.bernafon.com)

**bernafon**   
Your hearing • Our passion