

Aanpasgids

# ACHTER-HET-OOR- HOORTOESTELLEN

Nano RITE  
Hoortoestellen





# Aanpasgids

## Nano RITE hoortoestellen


### Inhoudsopgave

<b>Nano RITE hoortoestellen - overzicht</b>	<b>5</b>
Keuzetabel voor akoestische opties	6
Aanpasbereik	7
De luidsprekerlengte bepalen	8
De luidspreker aan het Nano RITE hoortoestel bevestigen	9
De luidspreker van het Nano RITE hoortoestel loskoppelen	10
<b>M-luidspreker</b>	<b>11</b>
Oorstukjes op maat voor de M-luidspreker	12
De Lite Tip en de Micro mold aan de M-luidspreker bevestigen	13
De Micro mold losmaken van de M-luidspreker	14
De Lite Tip losmaken van de M-luidspreker	14
<b>P-luidspreker voor power aanpassingen</b>	<b>15</b>
De gehoorgangindicator gebruiken	15
Op maat aanpassing met de Power mold	16
De Power mold bevestigen aan en losmaken van de P-luidspreker	16
Veranderen van een power dome naar een Power mold	17
Het ProWax filter en de WaxStop vervangen	18
WaxStop systeem	18
ProWax systeem	18
<b>De Nano RITE aanpassen met Oasis</b>	<b>19</b>
De programmeerkabels aansluiten	19
<b>Bestelinformatie</b>	<b>20</b>



## Nano RITE hoortoestellen – overzicht



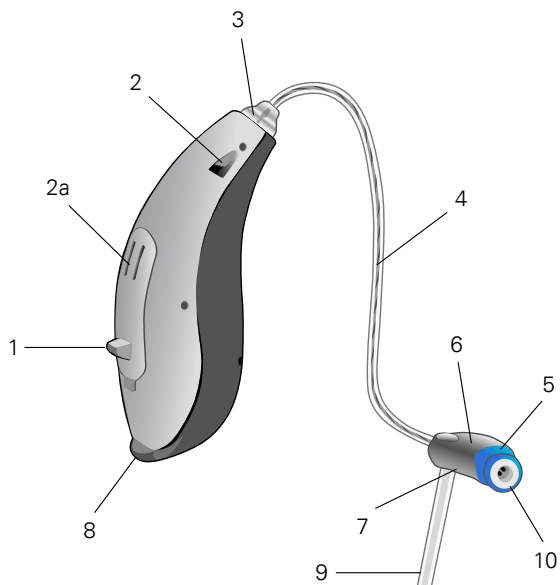










Het Nano RITE (luidspreker-in-het-oor) hoortoestel is eenvoudig te bedienen en draagt zeer comfortabel. Het unieke design in combinatie met geavanceerde technologie zorgt voor aantoonbare voordelen voor de eindgebruiker. Deze gids is bedoeld om u te helpen bij het aanpassen en hanteren van Nano RITE hoortoestellen.

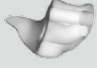


---

1	Druktoets	6	Luidspreker
2	Microfoon	7	Maataanduiding
2a	Tweede microfoon		luidspreker
3	Aansluitplug	8	Batterijlade
4	Snoertje	9	Conchasteun
5	Links/rechts- markering	10	ProWax filter


# Keuzetabel voor akoestische opties

Luidspreker	Aanpastype	Cerumen- bescherming luidspreker	Oorstukjes				Cerumen- bescherming maatoorstukjes
	<b>Direct</b>	<b>ProWax</b>	Open domes (6, 8, 10)	Tulip dome	Power domes (6, 8, 10, 12)		
	<b>Op maat</b>		Micro mold	Canal mold	Canal lock	Skeleton	WaxStop
							
			Lite Tip				
							
	<b>Direct</b>	<b>WaxStop</b>		Tulip dome	Power domes (6, 8, 10, 12)		
	<b>Op maat</b>		Power mold				WaxStop
							 ProWax 


## Aanpasbereik

Nano RITE hoortoestellen zijn leverbaar met twee luidsprekers: de M-luidspreker, geschikt voor lichte tot matig ernstige gehoorverliezen, en de P-luidspreker die extra power biedt voor ernstige gehoorverliezen. Hieronder ziet u de verwachte aanpasbereiken met verschillende oorstukjes.


### M-luidspreker

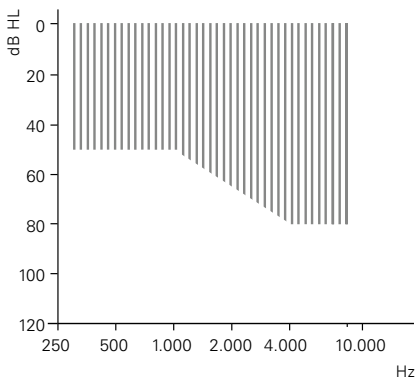

Open dome

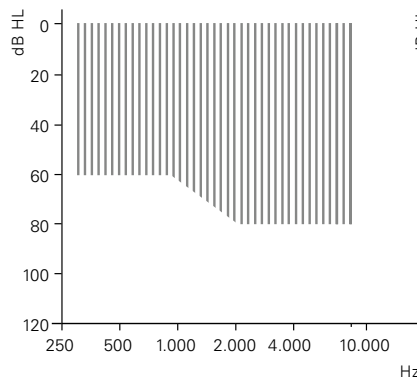


Tulip dome

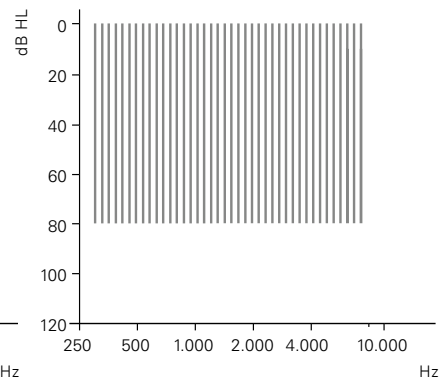


Micro mold / Lite Tip / Power dome

### P-luidspreker

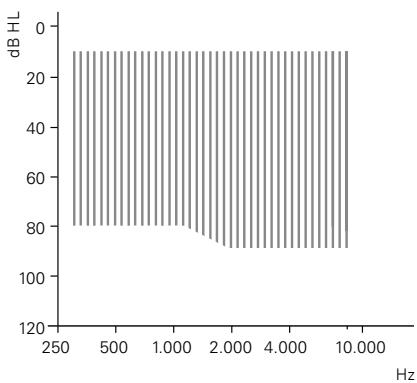

Tulip dome

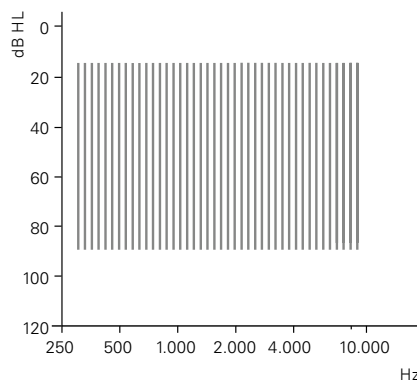


Power mold/Power dome

## De luidsprekerlengte bepalen

Er zijn vier luidsprekermaten verkrijgbaar voor zowel de M- als de P-luidspreker. Nr. 1 is de kortste, nr. 4 de langste. Voordat Nano RITE hoortoestellen worden aangepast, moet de juiste luidsprekerlengte bepaald worden. De meetprocedure is hetzelfde voor zowel de M- als de P-luidspreker.

1

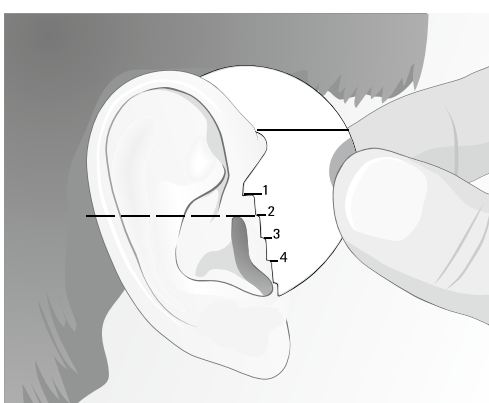

- 1 Plaats de meetset tegen het oor, waarbij u de bovenste lijn horizontaal houdt. Met uw oog op dezelfde hoogte als het oor leest u af welk maatstreepje het dichtste bij de denkbeeldige lijn zit die vlak boven de gehoorgang loopt. In dit voorbeeld is maat 2 de juiste keuze.

Power molds hebben een betere aanpassing als u een iets langer snoertje kiest dan u zou gebruiken bij een power dome. Als de bovenkant van de gehoorgang tussen twee maatstreepjes op het meetplaatje zit, dan kiest u het hoogste cijfer.


2



Snoertje te lang

- 2 Als het luidsprekersnoertje te lang is, valt het hoortoestel naar achteren waardoor de microfoons in een verticale in plaats van een horizontale positie komen te liggen. Tevens zal het luidsprekersnoer de contouren van het oor niet goed meer volgen.
- 3 Als het luidsprekersnoertje te kort is, zal het de neiging hebben om los te raken uit de gehoorgang, waardoor het hoortoestel minder vast in het oor zit.

3

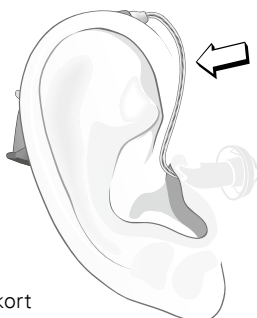


Snoertje te kort




## De luidspreker aan het Nano RITE hoortoestel bevestigen


1 – 2

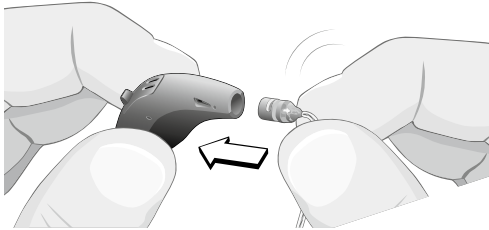


3

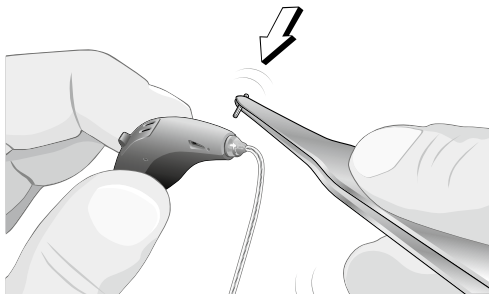

4

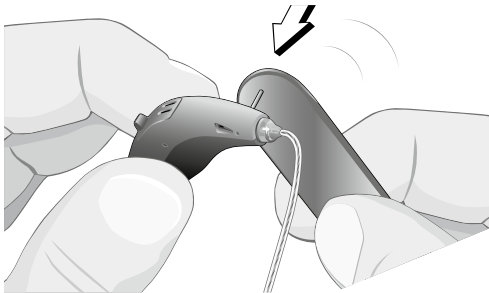

5

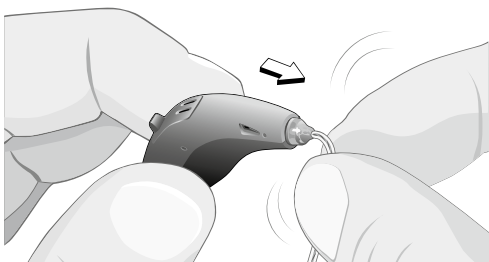

Correcte bevestiging van de luidspreker is absoluut noodzakelijk.


- 1 Schuif de aansluitplug in de aansluiting van het hoortoestel. Let daarbij op dat de pinnetjes van de aansluitplug precies in de aansluiting passen.
- 2 Als de plug op zijn plaats zit drukt u hem voorzichtig aan.
- 3 Neem de borgpen uit de verpakking waarin de luidspreker is geleverd (dit gaat gemakkelijk met een pincet). Steek de borgpen met het pincet in de behuizing.
- 4 Zorg ervoor dat de borgpen helemaal in de behuizing van het hoortoestel zit. Gebruik daarvoor eventueel de zijkant van het pincet.
- 5 Om de bevestiging van de luidspreker aan het toestel te controleren, trekt u zachtjes aan het luidsprekersnoetje vlakbij het aansluitpunt op het hoortoestel (zie afbeelding). Als de luidspreker loslaat, zat hij niet goed bevestigd.




**Luidsprekers kunnen van binnen makkelijk beschadigd raken als ze vallen. Zet ter bescherming een dome op de luidspreker voordat u hem gaat bevestigen.**

## De luidspreker van het Nano RITE hoortoestel afhalen


1

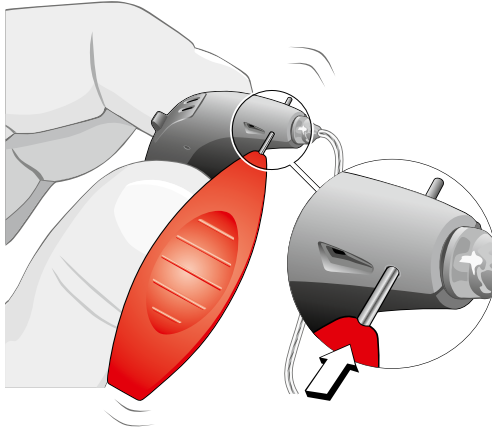

2

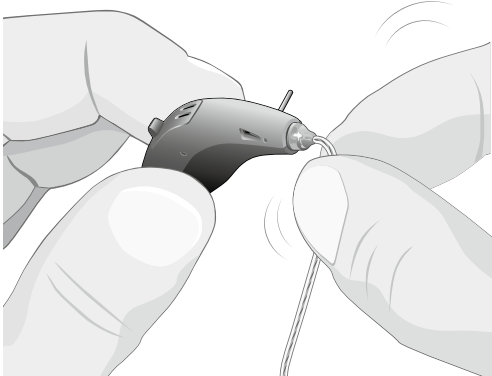

3

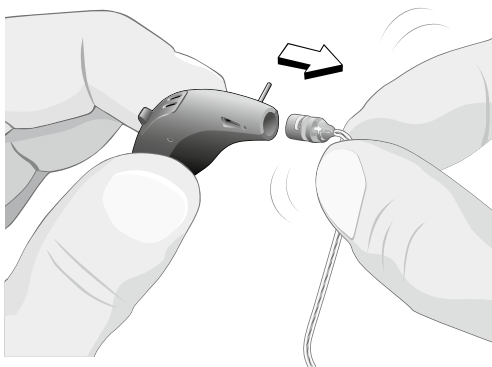

- 1 Gebruik het spitse uiteinde van het servicetool om de borgpen los te maken.
- 2 Houdt met de ene hand het toestel stevig vast terwijl u met de andere hand de rand van de aansluitplug tussen duim en wijsvinger vastpakt.
- 3 Trek nu de aansluitplug voorzichtig uit de aansluiting. Als dat niet gemakkelijk gaat, controleer dan of de borgpen volledig los zit.
- 4 Raak de borgpen niet kwijt; u hebt hem weer nodig als u de luidspreker herbevestigt.




**Probeer niet om de luidspreker los te krijgen door aan het snoetje te trekken zonder dat de borgpen vrij is. Hiermee kunt u zowel de luidspreker als het hoortoestel beschadigen.**

# M-luidspreker

De M-luidspreker is geschikt voor lichte tot matig ernstige gehoorverliezen en is leverbaar in vier lengtes. Hij kan voor zowel directe als op maat aanpassingen gebruikt worden.

1

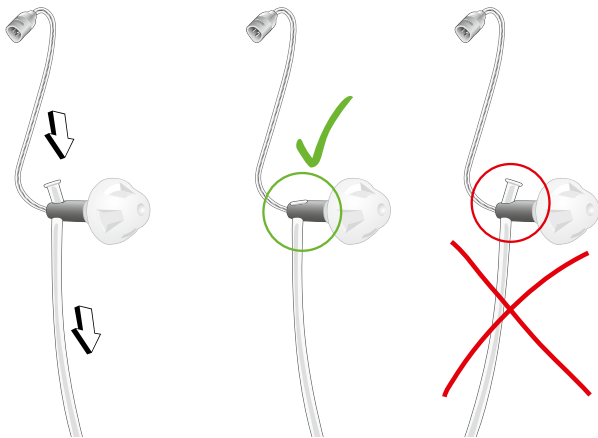

- 1 Om de luidspreker steviger in de gehoorgang vast te zetten kan een conchasteun gebruikt worden. Voor linker- en rechteroor kan dezelfde versie gebruikt worden. Steek de conchasteun in de opening van de luidspreker zoals afgebeeld, let daarbij op de oriëntatie.

Als de conchasteun te lang lijkt kan hij tot de gewenste lengte worden ingekort. Wees bij het knippen voorzichtig dat er geen scherpe randjes achterblijven die irritatie in het oor kunnen opleveren.

- 2 Om de conchasteun te verwijderen duwt u hem in de tegenovergestelde richting.

2




**i**

Als u de conchasteun in de luidspreker steekt, moet de bovenkant richting het luidsprekersnoer wijzen, zie afbeelding. Trek de conchasteun naar beneden totdat de top in de opening verdwijnt. Als u hem er in de verkeerde richting insteekt, zal de conchasteun niet op de juiste wijze in de oorschelp passen.

## Oorstukjes op maat voor de M-luidspreker

Voor op maat aanpassingen kunnen twee verschillende typen oorstukjes aan de M-luidspreker bevestigd worden. Bij de Micro mold en de Lite Tip is reeds een adapter geplaatst, rood (rechts) of blauw (links) om het oor aan te geven. De gekleurde stip bovenop het maatoorstukje geeft de voor/boven-positie in de gehoorgang aan.

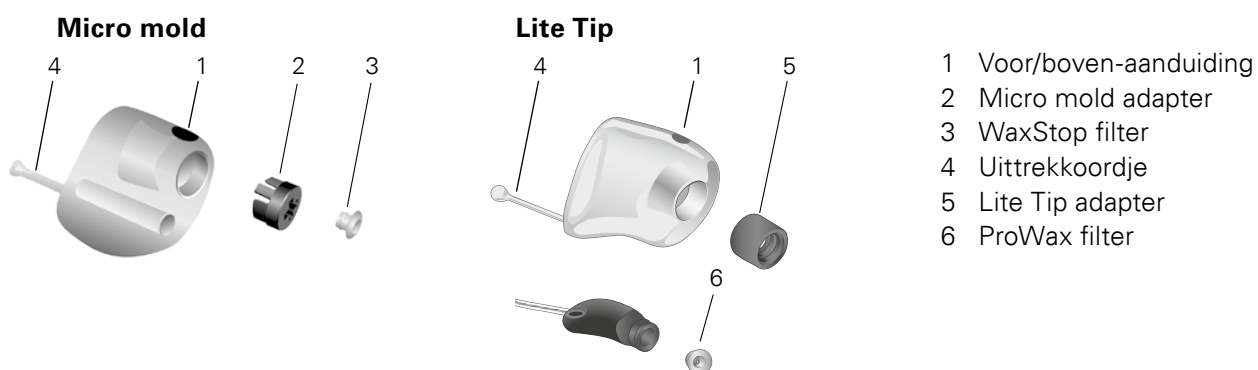

### Tools voor maatoorstukjes

Om de M-luidspreker aan het maatoorstukje te bevestigen dan wel om hem los te maken, kunt u twee verschillende tools gebruiken.

#### Lite Tip tool voor Lite Tip en Micro mold

- de Lite Tip of Micro mold aan de M-luidspreker bevestigen
- de M-luidspreker losmaken van de Lite Tip


Voor het plaatsen van een gewelfde luidspreker (alle oorstukjes)

Voor het losmaken van een luidspreker van de Lite Tip




#### Servicetool voor de Micro mold

De Micro mold servicetool is bedoeld om de Micro mold los te maken van de M-luidspreker.

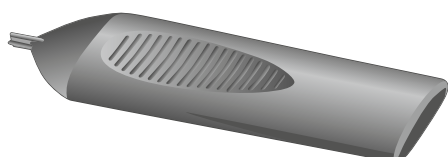


## De Lite Tip en de Micro mold aan de M-luidspreker bevestigen


1

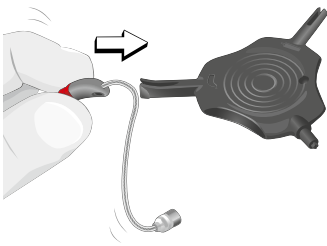


2

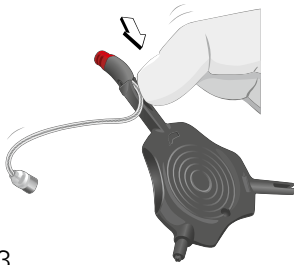


3

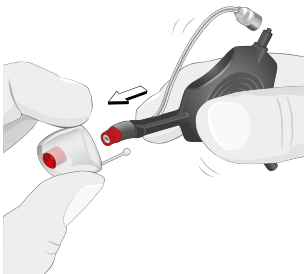

4 a)

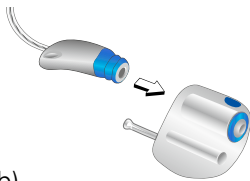


4 b)

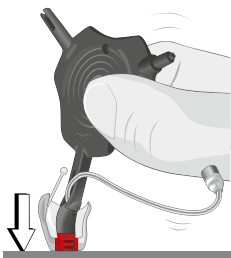

- 1 Gebruik de gewelfde pin van de Lite Tip tool voor gewelfde luidsprekers.
- 2 Plaats de luidspreker in de tool en duw het snoer in de groef voor een stevige bevestiging. Zorg dat de ProWax in de luidspreker zit (zie pagina 18).
- 3 Voordat u de luidspreker in het oorstukje steekt, draait u de luidspreker zodanig dat het snoertje en de bovenaanduiding op het oorstukje in elkaars verlengde liggen. Houd de luidspreker nauwkeurig in het midden van de adapter voordat u hem erin duwt.
- 4 Steek de luidspreker in het maatoorstukje.
  - 4 a) **Micro mold:** Houd de M-luidspreker in het verlengde van de Micro mold en steek hem erin totdat hij vastklikt. U dient dit voorzichtig te doen.
  - 4 b) **Lite Tip:** Plaats de Lite Tip tegen de tafel en duw de luidspreker stevig op zijn plaats. Zorg ervoor dat het voorste deel van de luidspreker helemaal in de Lite Tip zit en een vlak vormt met de voorkant van de Lite Tip. U dient dit voorzichtig te doen.
- 5 Zorg ervoor dat het oorstukje goed in het oor van uw cliënt zit en controleer de positie van het snoertje. Indien nodig kunt u het snoertje verbuigen door het te verwarmen.


### De Micro mold van de M-luidspreker losmaken

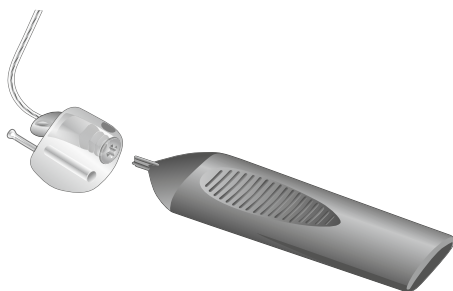


- 1 Verwijder de WaxStop van de Micro mold (zie pagina 18).
- 2 Steek de servicetool in de Micro mold adapter en zorg dat hij in het verlengde van het kruis ligt (zie afbeelding).
- 3 Duw de servicetool in de Micro mold. De Micro mold zal nu met een klikje loslaten.

### De Lite Tip van de M-luidspreker losmaken


1

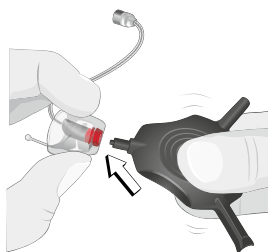

2

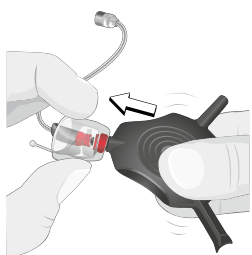

3

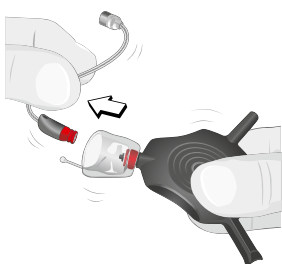

- 1 Houd de servicetool voorzichtig in het verlengde van het midden van de Lite Tip.
- 2 Druk de servicetool in de Lite Tip om de M-luidspreker los te maken terwijl u de Lite Tip stevig vasthoudt.
- 3 De Lite Tip kan nu van de M-luidspreker worden losgemaakt.

**i** Het is niet mogelijk om de Micro mold of Lite Tip los te maken zonder de juiste servicetool.

## P-luidspreker voor power aanpassingen


De P-luidspreker is van hoogwaardige kwaliteit en heeft voldoende ruimte in de gehoorgang nodig. Om vast te stellen of de gehoorgang van uw cliënt geschikt is voor deze luidspreker, kunt u de bijgeleverde gehoorgangindicator gebruiken. Deze stap is noodzakelijk voor zowel directe aanpassingen met de power dome als met maatoorstukjes

### Het gebruik van de gehoorgangindicator

1 – 2



3

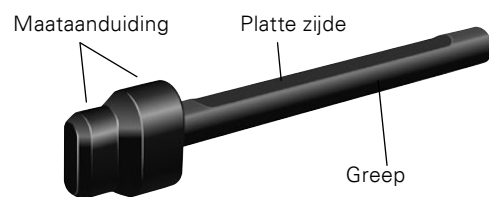

- 1 Houd de greep van de gehoorgangindicator zodanig dat de platte zijde van de greep naar boven wijst.
- 2 Steek de gehoorgangindicator in de gehoorgang (met de platte zijde naar boven) tot de maataanduiding helemaal in de gehoorgang zit. Als de maataanduiding gemakkelijk in de gehoorgang past is de cliënt een goede kandidaat voor de P-luidspreker.
- 3 Als de maataanduiding niet in de gehoorgang past maar wel achter de tragus verborgen zit als u er in een hoek van 45° naar kijkt, dan kan de P-luidspreker toch gebruikt worden met een Canal mold.
- 4 Als de maataanduiding zichtbaar is vanuit een kijkhoek van 45°, dan is de cliënt geen goede kandidaat voor een P-luidspreker.




**De indicator moet voor elk volgend gebruik schoongemaakt en gesteriliseerd worden. Verwijder eerst zichtbaar cerumen door het met een schone, droge of vochtige tissue van de gehoorgangindicator af te vegen. Laat de indicator vervolgens minstens 6 uur in een koude steriele oplossing weken.**


## Op maat aanpassing met Power mold

Power molds worden van een diepe oorafdruk gemaakt, net als de CIC. Er kan een venting van maximaal 2,4 mm geboord worden indien dit bij de bestelling wordt doorgegeven.


1

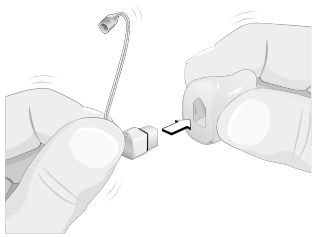


2

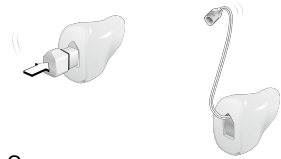

3

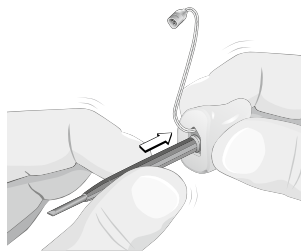

4

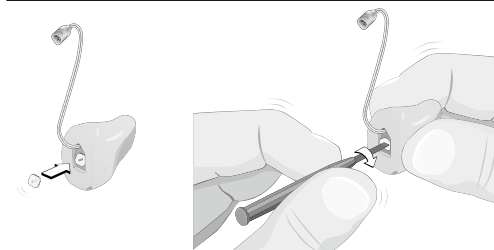

5



### De Power mold bevestigen aan en losmaken van de P-luidspreker


- 1 Houd de P-luidspreker in de ene hand en de Power mold in de andere, in de positie zoals afgebeeld.
- 2 Steek de P-luidspreker in het oorstukje tot hij er helemaal in zit en ca. 1 mm verzonken ligt.
- 3 Gebruik eventueel de achterkant van de speciale schroevendraaier (zie pagina 22).
- 4 Plaats het sluitplaatje op de behuizing van de luidspreker en gebruik de speciale schroevendraaier om het sluitplaatje ca. 45° met de klok mee te draaien totdat hij vast zit in de groeven van de behuizing.
- 5 Klik vervolgens het afdekplaatje vast zodat de luidsprekerbehuizing is afgedekt. Ook wordt zo het begin van het snoetje minder zichtbaar gemaakt.

Om de P-luidspreker los te maken dient u eerst het afdekplaatje te verwijderen. Dat doet u door de schroevendraaier heel voorzichtig tussen het afdekplaatje en het slangetje te schuiven en dan zachtjes naar boven te drukken. Draai het sluitplaatje met de schroevendraaier 45° tegen de klok in los. U voelt hem zachtjes losgaan, verwijder het sluitplaatje daarna.




## Veranderen van power dome naar Power mold


1

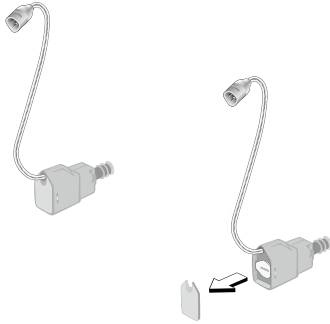


2

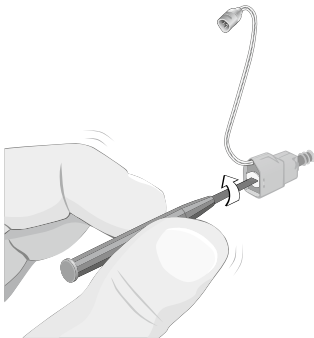

3

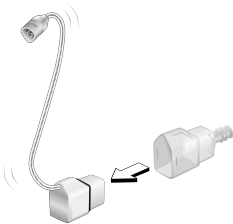

4

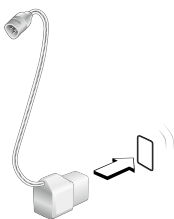

- 1 Verwijder het transparante afdekplaatje op de luidsprekerbehuizing door het er zachtjes af te halen met een schroevendraaier.
- 2 Gebruik de schroevendraaier om de sluitplaat ongeveer 45° tegen de klok in los te draaien.
- 3 Verwijder de luidsprekerbehuizing van de P-luidspreker.
- 4 Verwijder de pakking van de P-luidspreker

Volg de aanwijzingen op pagina 16 om de Power mold aan de P-luidspreker te bevestigen.



**Telkens als de luidspreker aan de behuizing wordt bevestigd moet een nieuwe pakking gebruikt worden. Rol de pakking niet op.**

# Het ProWax filter en de WaxStop vervangen


## WaxStop Systeem

Het WaxStop systeem kan worden toegepast bij de volgende akoestische configuraties:

- M-Speaker met een Micro mold
- P-Speaker met zowel een directe aanpassingen als een aanpassing op maat.

De WaxStop moet op tijd vervangen worden om te zorgen voor voldoende cerumenbescherming en om de levensduur van de luidspreker te verlengen.

1

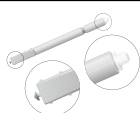

2



3




- 1 Pak het staafje met daarop de nieuwe WaxStop. Aan de andere kant zit een verwijderhaakje voor de oude WaxStop.
- 2 Steek het staafje in de opening van de oude WaxStop en trek die er langzaam uit. Houd het staafje goed recht.
- 3 Om de nieuwe WaxStop te plaatsen draait u het staafje om en plaats u hem in de geluiduitgang, waarna u het staafje voorzichtig wegtrekt.
- 4 Gooi het staafje met de oude WaxStop weg. Het kan niet opnieuw gebruikt worden.

## ProWax Systeem

**Het ProWax systeem kan worden toegepast bij de volgende akoestische configuraties:**

- M-luidspreker met een dome of Lite Tip
- P-luidspreker met een Power mold

Inspecteer het ProWax filter aan het uiteinde van de luidspreker visueel. Als het verstopt zit of er komt geen geluid uit het toestel dient u het ProWax filter te vervangen.

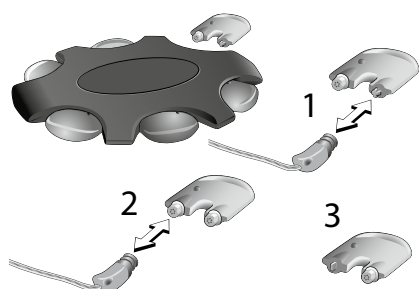

- 1 Neem een set uit het NoWax-schijfje, steek het lege deel van de set in het oude filter en trek dit eruit.
- 2 Plaats een nieuw filter in de geluidsuitgang van de luidspreker.
- 3 Gooi het gebruikte setje weg, het kan niet opnieuw gebruikt worden.

## Een Nano RITE aanpassen met Oasis

Nano RITE hoortoestellen worden geprogrammeerd met Oasis. Gebruik daarvoor nieuwe standaard (nr. 2) programmeerkabels.

Plaats voor het programmeren altijd nieuwe batterijen.

Voor uw gemak zijn draadloze Nano RITE hoortoestellen compatibel met het nEARcom draadloze programmeersysteem (afhankelijk van de hoortoestel productfamilie).

### De programmeerkabels aansluiten

1



1 Verwijder het afdekplaatje met de schroevendraaier, zie afbeelding.

2 Plug de kabel in de connector.

3 Om het afdekplaatje terug te plaatsen haakt u het bovenste deel eerst onder de behuizing, waarna u het zachtjes op zijn plaats klikt.

2



3



# Bestelinformatie

## I LUIDSPREKERS

### I.1 M-LUIDSPREKERS

Artikelnummer	Doel	Opmerkingen
113645	Luidspreker M, 1L	Geschikt voor op maat en directe aanpassingen
113646	Luidspreker M, 2L	
113647	Luidspreker M, 3L	
113648	Luidspreker M, 4L	
113611	Luidspreker M, 1R	
113630	Luidspreker M, 2R	
113631	Luidspreker M, 3R	
113632	Luidspreker M, 4R	



### I.2 P-LUIDSPREKERS

Artikelnummer	Doel	Opmerkingen
118226	Luidspreker P, 1L, inclusief luidsprekerbehuizing	Op maat aanpassing
118227	Luidspreker P, 2L, inclusief luidsprekerbehuizing	
118228	Luidspreker P, 3L, inclusief luidsprekerbehuizing	
118229	Luidspreker P, 4L, inclusief luidsprekerbehuizing	
117975	Luidspreker P, 1R, inclusief luidsprekerbehuizing	
118222	Luidspreker P, 2R, inclusief luidsprekerbehuizing	
118223	Luidspreker P, 3R, inclusief luidsprekerbehuizing	
118224	Luidspreker P, 4R, inclusief luidsprekerbehuizing	



## I.3 P-LUIDSPREKERS (MONTAGE)

Artikelnummer	Doel	Opmerkingen
118667	Luidsprekerunit P, 1L	Op maat aanpassing
118668	Luidsprekerunit P, 2L	
118669	Luidsprekerunit P, 3L	
118670	Luidsprekerunit P, 4L	
118662	Luidsprekerunit P, 1R	
118663	Luidsprekerunit P, 2R	
118664	Luidsprekerunit P, 3R	
118665	Luidsprekerunit P, 4R	



## 2 DOMES


### 2.1 OPEN DOMES

Artikelnummer	Doel	Opmerkingen
120045	Open dome RITE 6 mm	Verpakking van 10 stuks
120046	Open dome RITE 8 mm	Verpakking van 10 stuks
120047	Open dome RITE 10 mm	Verpakking van 10 stuks
120044	Tulip dome	Verpakking van 10 stuks



### 2.2 POWER DOMES

Artikelnummer	Doel	Opmerkingen
118063	Power dome RITE 6 mm	Verpakking van 10 stuks
120041	Power dome RITE 8 mm	Verpakking van 10 stuks
120042	Power dome RITE 10 mm	Verpakking van 10 stuks
120043	Power dome RITE 12 mm	Verpakking van 10 stuks

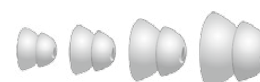


## 3 LUIDSPREKERKITS

Artikelnummer	Doel	Opmerkingen
119979	M-luidsprekerkit	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Inhoud:</li> <li>· 8 M-luidsprekers</li> <li>· Open domes</li> <li>· Tulip domes</li> <li>· Servicetools</li> </ul>
119978	P-luidsprekerkit	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Inhoud:</li> <li>· 8 P-luidsprekers</li> <li>· Power domes</li> <li>· Tulip domes</li> </ul>



## 4 WAX FILTERS

Artikelnummer	Doel	Opmerkingen
123459	NoWax systeem Draaischijfje met 6 filters	Voor M-luidspreker Voor Power Mold
689-30-282-00	WaxStop filter (8 stuks)	Voor P-luidspreker (alleen directe aanpassing) Voor Micro Mold en Power Mold
544-10-240-00	Huls WaxStop	Voor P-luidspreker met Power mold

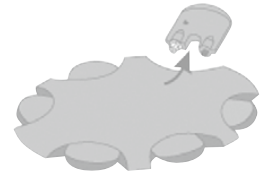

## 5 SERVICETOOLS

Artikelnummer	Doel	Opmerkingen
890-22-270-00	Servicetool voor borgpen	
119089	Meetplaatje voor luidsprekers	
825-01-211-00	Verwijderaar voor Micro mold/luidsprekerunit	Voor gebruik met M-luid- spreker met Micro mold
825-01-230-00	Schroevendraaier	
890-22-320-00	Gehoorgangindicator voor de P-luidspreker	
118890	Lite Tip tool	Voor gebruik met de M-luidspreker met Lite Tip

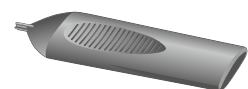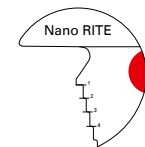

## 6 LUIDSPREKERONDERDELEN

Artikelnummer	Doel	Opmerkingen
654-01-570-00	Dome adapter, transparant	Voor directe aanpassing met P-luidspreker
506-24-030-00	Sluitplaatje	Met P-luidspreker
543-11-770-00	Afdekplaatje, beige	Met P-luidspreker
543-11-771-00	Afdekplaatje, medium bruin	
543-11-772-00	Afdekplaatje, roze	
543-11-773-00	Afdekplaatje, donkerbruin	
543-11-774-00	Afdekplaatje, transparant	
573-87-210-00	Micro mold adapter, rood	
573-87-211-00	Micro mold adapter, blauw	
119591	Lite Tip adapter, rood	Met M-luidspreker (100 stuks)
119592	Lite Tip adapter, blauw	
540-54-240-00	Pakking (tussen luidspreker en Power mold)	Met P-luidspreker



Sinds 1946 werken wij met passie aan de ontwikkeling en levering van topkwaliteit hoortoestellen waarmee mensen met hoorproblemen kunnen genieten van authentieke hoorsensaties. Wij werken met Zwitserse technologie en precisie en zetten ons volledig in voor een persoonlijke dienstverlening. Daarmee proberen we de verwachtingen van onze cliënten te overtreffen. Ons doel is: toegevoegde waarde bieden, elke dag weer. Vertegenwoordigers en medewerkers in meer dan 70 landen dragen onze missie uit: het helpen van mensen met een hooraandoening om probleemloos te kunnen communiceren.

#### **Hoofdkantoor**

##### **Switzerland**

Bernafon AG  
Morgenstrasse 131  
3018 Bern  
Phone +41 31 998 15 15  
Fax +41 31 998 15 90

##### **Nederland**

Bernafon  
Kuiperij 5  
1185 XS Amstelveen  
Telefoon +31 (0)20 545 10 90  
Fax +31 (0)20 5 45 57 98

**SWISS**   
Engineering

#### **Bernafon Companies**

Australia · Canada · China · Denmark · Finland · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Netherlands · New Zealand · Poland · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · UK · USA

[www.bernafon.com](http://www.bernafon.com)

**bernafon**   
Your hearing • Our passion