



5 conseils pour profiter au mieux de vos aides auditives ZERENA rechargeables

bernafon[®]
Your hearing • Our passion

Communication janvier 2018

NOS RECOMMANDATIONS

1- Charge

Toujours charger complètement les accus, jusqu'à ce que les voyants de la station de charge soient au vert fixe : cela prend environ 7 heures.

Ne procédez pas à des charges ponctuelles en cours de journée : cela peut compromettre la durée de vie des accus.

2 - Fin de charge

Si les accus sont déchargés et que les aides auditives sont éteintes, n'essayez pas d'obtenir plus d'autonomie de vos accus en ouvrant et en fermant le tiroir pile. Au choix :

- Placez les aides auditives sur la station de charge en vous assurant qu'elle est bien sous tension.
- Insérez des piles jetables et rangez les accus en sécurité. Avant la prochaine utilisation avec vos accus, prenez soin de bien les recharger complètement.

3 - Hors utilisation

Si vous n'utilisez pas vos aides auditives pendant une longue période, nous vous conseillons d'enlever les accus après les avoir chargés complètement.

Remarque : ne laissez jamais les accus dans les aides auditives avec les tiroirs pile ouverts. Cela peut compromettre la durée de vie des accus.

4 - Manipulation

Ne pas conserver les accus avec des objets métalliques tels que clés et pièces de monnaie.

5 - Entretien

Essuyez toute trace d'humidité des aides auditives ou de la station de charge avant de charger les accus.

N'utilisez pas d'alcool ou un autre produit chimique pour nettoyer vos aides auditives ou votre station de charge.

