

INFORMATION PRODUIT

ADAPTATEUR TV



DESCRIPTION

L'adaptateur TV de Bernafon prend le son de la TV et le transmet via un système Bluetooth® au SoundGate. L'adaptateur TV est facile à installer et crée un son d'écoute TV très naturel. Il travaille en combinaison avec les autres accessoires appairés avec le SoundGate comme les téléphones filaires, portables et autres baladeurs.

ÉCOUTE FACILE DE LA TV

Le son de la TV est transmis directement au SoundGate. L'utilisateur peut vouloir entendre la TV seulement ou se joindre à la conversation en gardant les micros actifs sur les aides auditives. La qualité du son est claire, tandis que le volume peut être facilement ajusté sur le SoundGate pour convenir aux préférences de chacun.

INSTALLATION

L'adaptateur TV est facile à installer. Il est automatiquement détecté par le SoundGate qui est sur le mode d'appairage. Aucun besoin d'appuyer sur différents boutons, il suffit juste de placer le SoundGate à côté de l'adaptateur TV.

FACILE À UTILISER

L'utilisation quotidienne de l'adaptateur TV est conviviale et sûre. La fonction d'auto-connexion assure que l'adaptateur TV est toujours prêt à l'emploi dans un rayon de 10 mètres autour du SoundGate. L'écoute TV démarre en appuyant simplement sur le bouton audio (clef de sol) du SoundGate. Les indications sur l'adaptateur TV donnent un statut clair sur la transmission, active ou mode veille.

FICHE TECHNIQUE

Dimensions	80 x 80 x 17 mm [3 1/8" x 3 1/8" x 5/8"]
Poids	70 g [2.5 oz.]
Alimentation	Externe 5V DC
Consommation	60 mA max.
Audio connexion	Entrée ligne jack 3,5mm, Entrée micro, jack 2,5 mm
Sensibilité entrée ligne	0.5 – 2.0 V RMS (analogique)
Bluetooth® profile	Propriété du SoundGate
Zone de connexion	10 m [30 ft.]
Zone de transmission	10 m [30 ft.] (Classe 2)
Temps de latence en transmission	< 15 ms
Qualité audio	Mono / 16 kHz échantillon de fréquences
Bande audio	80 Hz–7.4 kHz
Indicateur de statut	Led vert en fonctionnement, Led orange en transmission
Couleur	Blanc, haute brillance
Emissions	Max. -15dB/μA / 10 m, en accord avec tous les standards correspondants
Température d'utilisation	0–50° C [32–122° F]
Température de stockage	-20–70° C [-4–158° F]

LE LOGICIEL D'ADAPTATION ET L'ADAPTATEUR TV

Tous les appareils Bernafon compatibles avec le SoundGate possèdent un programme dédié aux différents divertissements. Ce programme peut être librement réglé avec Oasis.

Le niveau du son des micros peut être atténué avec Oasis par rapport à l'adaptateur TV. Cela se fait dans

Oasis au niveau de l'écran permettant le réglage des divertissements via le SoundGate. Le programme de divertissement est automatiquement activé dès que la transmission TV commence via le SoundGate.

Distributeur:**Bernafon AG**

Morgenstrasse 131
3018 Bern
Suisse
Téléphone +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90
www.bernafon.com

Prodition S.A.S.

37-39, rue Jean-Baptiste Charcot
92402 Courbevoie cedex
France
Téléphone +33 1 41 88 00 80
Fax +33 1 41 88 00 86
www.bernafon.fr