

INFORMATION PRODUIT

ADAPTATEUR TÉLÉPHONIQUE



DESCRIPTION

L'adaptateur téléphonique est une interface sans fil Bluetooth® entre une ligne téléphonique conventionnelle et le Bernafon SoundGate. Il permet au client d'accéder à sa ligne téléphonique en utilisant le SoundGate et ainsi de profiter de l'excellente qualité de son en conservant les mains libres. L'adaptateur téléphonique travaille en combinaison avec d'autres offres de service quand elles sont appairées avec le SoundGate comme un téléphone portable ou un baladeur.

COMMUNICATION

L'adaptateur téléphonique utilise le SoundGate du client pour communiquer avec la ligne téléphonique. En utilisant une réduction de bruit avancée et un système de suppression d'écho, l'adaptateur téléphonique permet aux clients de suivre une conversation téléphonique claire et sans distorsion.

INSTALLATION

L'installation de l'adaptateur téléphonique est remarquablement simple. Il doit juste être connecté entre le téléphone et la prise murale du téléphone.

FACILE À UTILISER

Une fois que l'adaptateur téléphonique et le SoundGate sont appairés, le dispositif est automatiquement prêt à l'emploi dès l'instant qu'ils sont distants au maximum de 10 m. Les appels entrants sont acceptés en appuyant sur le bouton téléphone du SoundGate. Les appels sortants sont normalement composés sur le téléphone.

FICHE TECHNIQUE

Dimensions	83 x 86 x 23 mm [3 1/4" x 3 3/8" x 7/8"]
Poids	80 g [2.8 oz.]
Alimentation	Externe 5V DC
Consommation	100 mA max.
Connexion téléphone	Entrée ligne tél / Sortie ligne tél: 2 x RJ11
Versions PSTN	FW 100-1 (US) / FW 100-2 (Europe) / FW 100-3 (Pacifique) / FW 100-4 (Japon)
Version Bluetooth®	Ver. 2.0
Profil support Bluetooth®	Profil casque (HSP) 1.0
Fréquence	Licence libre 2.4 GHz (Bande ISM)
Zone de connexion	10 m [30 ft.]
Qualité audio	Mono / 20 kHz échantillon de fréquences
Bande audio	80 Hz – 3.5 kHz
Indicateurs de statuts	Led fixe quand le SoundGate est connecté Led clignotant lentement quand le SoundGate est recherché Led clignotant rapidement quand la ligne téléphonique est active
Couleur	Blanc, brillance
Emissions	Max. -15dB/µA /10 m, en accord avec tous les standards correspondants
Températures d'utilisation	0 – 50° C [32–122° F]
Températures de stockage	-20 – 70° C [-4–158° F]

LE LOGICIEL D'ADAPTATION OASIS ET L'ADAPTATEUR TÉLÉPHONIQUE

Tous les appareils auditifs Bernafon compatibles avec SoundGate ont un programme dédié pour les applications téléphone. Ce programme peut être ajusté finement dans Oasis.

Le niveau de son des micros peut être atténué tout comme le signal téléphone. Ce réglage est disponible

dans l'écran des caractéristiques du programme téléphone sous SoundGate.

Le programme téléphone de SoundGate dédié est automatiquement activé aussitôt qu'une transmission audio est commencée à travers le SoundGate.

Distributeur

Suisse

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Berne
Téléphone +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90
www.bernafon.com

France

Prodition S.A.S.
37-39, rue Jean-Baptiste Charcot
92402 Courbevoie cedex
Téléphone +33 1 41 88 00 80
Fax +33 1 41 88 00 86
www.bernafon.fr