

STARK
IN JEDER
HINSICHT



SUPREMIA



bernafon[®]
Your hearing • Our passion

Neue Perspektiven entwickeln

Klänge sind für jeden von uns wichtig. Für Kinder sind sie jedoch unverzichtbar. Denn Klänge tragen maßgeblich zur Entwicklung des Hörvermögens und der kognitiven Fähigkeiten bei. Als Eltern möchten Sie, dass Ihr Kind von den vielfältigen Bild- und Klangeindrücken in seiner Umgebung profitieren kann. Kindern mit einer Hörschwäche bieten sich durch modernste Technik zahlreiche vielversprechende Lösungen.



Das Hörvermögen spielt eine kritisch-wichtige Rolle für die Sprech- und Sprachentwicklung sowie für die Kommunikation und fürs Lernen. Hörgeräte können einem Kind beim Erlernen des Sprechens helfen, indem sie die Stimmen anderer Menschen besser hörbar machen. Dadurch wird das Nachahmen von Stimmen einfacher, was für die Entwicklung des Sprechvermögens notwendig ist. Hörgeräte können einem Kind auch helfen, die eigene Stimme besser zu hören und somit ein weiteres Hindernis für eine natürliche Sprech- und Sprachentwicklung zu überwinden.



LEISTUNGSSTARKE PERSPEKTIVEN

Es gibt unterschiedliche Arten von Hörgeräten, die individuell auf den Grad der Hörschwäche abgestimmt sind.

Wurde bei Ihrem Kind ein starker bis hochgradiger Verlust des Hörvermögens diagnostiziert, kann das Supremia Super Power HdO (Hinter-dem-Ohr) von Bernafon die ideale Lösung sein.

Supremia wurde entwickelt, um Kinder in allen Lebenslagen und -phasen zu unterstützen.





Speziell für Kinder entwickelte Funktionen

Das Supremia Super Power HdO ist das leistungsstärkste Gerät von Bernafon für die Anwendung bei Kindern.

Der Alltag von Kindern ist voller grosser und kleiner Ereignisse. Supremia ist äusserst robust und beständig, um mit den Aktivitäten von Kindern Schritt halten zu können. Zudem ist das Gerät mit einer Reihe von Komponenten ausgestattet, die aus Supremia ein ideales Hörgerät für Kinder machen.





Lautstärkeregelung und Programmtaste

Das einfach zu bedienende Lautstärke-Regelrädchen und die Programmtaste wurden so entwickelt, dass sie für kleine Finger leicht zugänglich und einzustellen sind.

LED-Statusleuchte

Unterhalb des Lautstärke-Regelrädchens befindet sich eine kleine Statusleuchte. Diese zeigt nach entsprechender Programmierung die verschiedenen Einstellungen des Hörgeräts an. So können Sie die Bedienung des Hörgeräts leichter und unauffälliger überwachen (z.B. Hörgerät AN/AUS, niedriger Batteriestatus, Programmwechsel, usw.).

Batteriefachsicherung

Kleine Kinder sind von Natur aus neugierig. Damit sie die kleine Batterie nicht aus Versehen verlieren oder sogar verschlucken, ist Supremia mit einer optionalen Batteriefachsicherung erhältlich.



Die Vorteile der modernen Technik

Die einzigartige Audio Efficiency™ Technologie von Bernafon setzt gleichzeitig bei Sprachverständlichkeit und Hörkomfort an.

Supremia verstärkt die Klänge aber nicht nur, um sie hörbar zu machen. Mittels fortschrittlichster Technologie zielt Supremia darauf ab, sämtliche Sprachsignale verständlich zu machen. Dies zur Unterstützung der Sprech- und Sprachentwicklung bei Ihrem Kind.



Supremia Hörgeräte sind darüber hinaus in der Lage, sich an zahlreiche unterschiedliche Hörumgebungen anzupassen. In der Schule, bei einer Geburtstagsparty, zu Hause und überall sonst wird Ihr Kind von den leistungsstarken Eigenschaften des Geräts profitieren. Hören wird durch Supremia einfacher und angenehmer.



Optionen der kabellosen Anbindung

Manchmal benötigen selbst die besten Hörgeräte noch Unterstützung. Im Klassenzimmer kann ein FM-Adapter an Supremia angebracht werden, der das Gerät mit dem FM-System der Schule verbindet. Damit wird die Stimme des Lehrers direkt ins Hörgerät Ihres Kindes übertragen. Das kann Ihrem Kind helfen, besser zu hören und den Lehrer besser zu verstehen.

Darüber hinaus bietet Bernafon mit dem SoundGate 3 ein Gerät zur Direktübertragung (Streaming) an. Mit dem SoundGate 3 kann Ihr Kind Töne von seinem Mobiltelefon, Computer und anderen Audioquellen direkt auf das Hörgerät leiten. Mit Hilfe der SoundGate App kann das Hörgerät über das SoundGate 3 vom iPhone® aus gesteuert werden.¹⁾

SoundGate 3



SoundGate App



Apple, das Apple Logo und iPhone sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.



Mit dem Supremia bieten sich bisher noch nie dagewesene Möglichkeiten. Um mehr zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Ihren Hörgeräteakustiker oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.bernafon.com.

¹⁾ Die SoundGate App ist zur Anwendung mit einem iPhone vorgesehen (die SoundGate App unterstützt das iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s und iPhone 4). Als Anforderungen benötigt die SoundGate App das SoundGate 3 von Bernafon (oder neuere Versionen) sowie eine Funk-Hörhilfe.

Hören und Verstehen sind menschliche Grundbedürfnisse. Hörprobleme und die daraus resultierenden sozialen Konsequenzen stellen eine Herausforderung an unsere Gesellschaft dar. Wir glauben an eine Welt, in der Menschen mit verminderter Hörfähigkeit dank fortschrittlicher Technologie wieder uneingeschränkt kommunizieren können.

Für mehr Informationen über das Hören und Hörverluste www.bernafon.com

SWISS 
Engineering

bernafon 
Your hearing • Our passion

Bernaфон Companies: Australia • Canada • China • Denmark • Finland • France • Germany • Italy • Japan • Korea • Netherlands • New Zealand • Poland • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • UK • USA