

## SOUNDGATE

# SKRÓCONY PRZEWODNIK


Zmiana programów oraz głośności

Telefon

Połączenie muzyczne, np. MP3

Bluetooth® muzyka/audio

Wskaźnik baterii

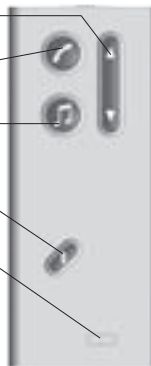

Przewodnik ten jest jedynie skróconą wersją pełnej instrukcji.

### **Ważne:**

- Baterie SoundGate'a muszą być naładowane przed jego użyciem.
- Zawsze używaj urządzenia SoundGate z paskiem-naszyjnikiem załączonym w zestawie – gdy rozmawiasz przez telefon lub słuchasz muzyki.

Pełne informacje znajdują się w instrukcji użytkownika SoundGate, a także na stronie [www.bernafon.com](http://www.bernafon.com)

## Parowanie z urządzeniami z Bluetooth®

Przed użyciem SoundGate z telefonem lub innym źródłem dźwięku wyposażonym w Bluetooth® należy "sparować" SoundGate z tym sprzętem. Raz sparowane urządzenie będzie zawsze rozpoznawane przez SoundGate, o ile funkcja Bluetooth® będzie włączona.

### **Przygotuj urządzenie z łączem Bluetooth®**

Postępuj zgodnie z instrukcją użytkownika telefonu lub innego źródła dźwięku, by przygotować to urządzenie do łączności poprzez Bluetooth®.

### **Przełącz SoundGate w tryb "parowania"**

Chcąc aktywować proces parowania przytrzymaj w **SoundGate** przycisk Bluetooth® wciśnięty przez 7 sekund – niebieskie światło zacznie szybko migać. **Tryb parowania jest aktywny przez 120 sekund.**

### **Aktywuj parowanie w urządzeniu Bluetooth®**

Aktywuj proces parowania w drugim urządzeniu. Na ekranie drugiego urządzenia powinien wyświetlić się napis **"SoundGate 1.4"**.

### **Wprowadź kod pin**

Kod urządzenia SoundGate to 0000. Po jego wprowadzeniu urządzenie powinno zostać "sparowane" z SoundGate'm.

(Urządzenie może wymagać ręcznej aktywacji połączenia. Wybierz w menu na ekranie funkcję "połącz").

## Odbiór muzyki/audio

Źródło dźwięku może zostać podłączone do SoundGate:

- > poprzez połączenie kablowe
- > poprzez połączenie bezprzewodowe Bluetooth®

### Podłączanie poprzez łącze kablowe

Użyj kabla audio i wetknij większą wtyczkę do urządzenia stanowiącego źródło dźwięku, a mniejszą do SoundGate.

### Podłączanie poprzez Bluetooth®

"Sparuj" dane urządzenie z SoundGate.

#### **Słuchanie muzyki poprzez Bluetooth®**

Wciśnij przycisk Bluetooth® przez ok. 2 sek. Następnie włącz urządzenie audio.



## Przycisk muzyka/audio

Poniżej przedstawiono jak używać SoundGate podczas odbioru z zewnętrznego źródła dźwięku.

### **Słuchanie muzyki/audio**

Wciśnij przycisk music/audio w SoundGate, by uruchomić odbiór audio. Przychodzące połączenia telefoniczne mogą być odbierane poprzez krótkie wciśnięcie przycisku telefonicznego.



Wciskając przycisk music/ audio przez ok.2 sek przełączasz odbiór pomiędzy dwoma urządzeniami z funkcją Bluetooth®.

### **Zatrzymanie odbioru muzyki/audio**

Wciśnij ponownie przycisk muzyka/audio.



Jeśli nie używasz SoundGate przez kilka godzin, wyłącz funkcję Bluetooth® (przyciśnij przez ok. 2 sek.).



Zapobiegnie to wyczerpaniu baterii. Naładuj baterie jeśli już z niego nie korzystasz. (po prawej: niebieski przycisk Bluetooth®)

## Połączenie z telefonem

<b>Odbieranie przychodzących połączeń telefonicznych</b>	Funkcja Bluetooth® w SoundGate musi być włączona. Kiedy telefon dzwoni wciśnij przycisk telefoniczny by odebrać połączenie.	
<b>Podczas rozmowy</b>	Mów do mikrofonu SoundGate (optymalna odległość to 30 cm).	
<b>Zakończenie połączenia</b>	Wciśnij ponownie przycisk telefoniczny SoundGate, by zakończyć połączenie.	
<b>Nawiązywanie połączeń</b>	Używaj telefonu jak zwykle. Mów do mikrofonu SoundGate – nie wciskaj przycisku telefonicznego SoundGate.	
<b>Regulacja głośności</b>	Wciśnij przycisk głośność/program w górę lub w dół, by nastawić pożądaną głośność.	
<b>Włączanie i wyłączanie mikrofonów aparatu</b>	Wciśnij na 2 sekundy przycisk głośność/program w górę lub w dół.	

Jeśli nie używasz SoundGate przez kilka godzin, wyłącz funkcję Bluetooth® (przyciśnij przez ok. 2 sek.).



Zapobiegnie to wyczerpaniu baterii. Naładuj baterie jeśli już z niego nie korzystasz. (po prawej: niebieski przycisk Bluetooth®)

## **Wskazówki na temat połączenia**

Sparowane urządzenia Bluetooth® automatycznie odnajdują się wzajemnie, gdy są włączone. Jeśli połączenie nie nastąpi automatycznie należy je zainicjować manualnie. Zawsze włączaj swój telefon przed włączeniem funkcji Bluetooth® w SoundGate.

## **Gdy urządzenie Bluetooth® jest poza zasięgiem**

Jeśli SoundGate znajdzie się poza zasięgiem Bluetooth® telefonu komórkowego połączenie zostanie przerwane. Powrót do pola zasięgu powinien przywrócić połączenie.

## Używanie SoudGate'a jako pilota zdalnego sterowania.

### Regulacja głośności

Dopasuj poziom głośności krótko wciskając górną lub dolną część przycisku.



### Zmiana programu

Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy górną lub dolną część przycisku, by zmienić program.

**Uwaga:** Zmiana programów jest możliwa jeśli skonfigurowano więcej niż jeden program słuchowy.

Podczas transmisji audio nie można zmienić programu.



04.11/BAG/113363/PL/subject to change