


INFORMACJA O PRODUKCIE ADAPTER TELEFONICZNY

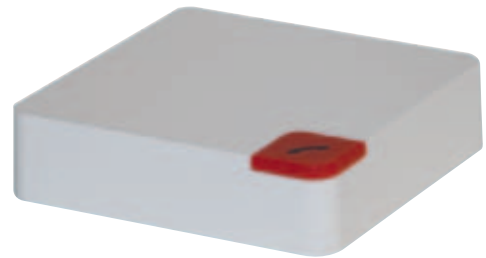

OPIS URZĄDZENIA

Adapter telefoniczny jest urządzeniem umożliwiającym transmisję sygnału Bluetooth® z telefonu stacjonarnego do SoundGate, a następnie do aparatów słuchowych. System zapewnia najwyższej jakości dźwięk podczas rozmowy telefonicznej oraz niedoścignioną ergonomię użytkowania ("hands free"). Adapter telefoniczny nie zakłóca funkcjonowania innych urządzeń "sparowanych" z SoundGate np. telefonów komórkowych, adaptera telewizyjnego, odtwarzaczy muzyki itp.

ŁATWOŚĆ I SWOBODA

Adapter telefoniczny jest urządzeniem, które sprawi, że Użytkownik aparatów słuchowych będzie bezproblemowo prowadził rozmowy przez telefon stacjonarny. System posiada układy redukcji szumów oraz echa, dzięki którym udało się całkowicie zredukować zniekształcenia dźwięku typowe dla rozmów przez telefon.

INSTALACJA

Proces instalacji jest bardzo prosty. Wystarczy "wpiąć" urządzenie pomiędzy telefon stacjonarny oraz gniazdko sieci telefonicznej.

ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

Po dokonaniu parowania SoundGate oraz adaptera urządzenia są gotowe do współpracy (jeśli dystans pomiędzy nimi nie przekracza 10 m). Połączenia przychodzące są akceptowane przez Użytkownika poprzez naciśnięcie przycisku "Telefon" SoundGate. Połączenia wychodzące są realizowane za pomocą klawiatury telefonu.

DANE TECHNICZNE

Wymiary	83 x 86 x 23 mm [3 1/4" x 3 3/8" x 7/8"]
Waga	80 g [2.8 oz.]
Zasilani	Zasilacz, 5V DC
Pobór prądu	100 mA max.
Połączenie z telefonem	Wejście/wyjście telefoniczne: 2 x RJ11
PSTN	FW 100-1 (US) / FW 100-2 (Europe) / FW 100-3 (Pacific) / FW 100-4 (Japan)
Protokół Bluetooth®	Ver. 2.0
Profil Bluetooth®	HSP (1.0)
Częstotliwość	2.4 GHz (pasmo ISM)
Zasięg AutoConnect	10 m [30 ft.]
Jakość dźwięku	Mono / częstotliwość próbkowania 20 kHz
Pasma przenoszenia	80 Hz – 3.5 kHz
Diody kontrolne	Sygnal ciągły – połączenie z SoundGate Wolne pulsowanie – poszukiwanie SoundGate Szybkie miganie – rozmowa
Kolor	Biały, błyszczący
Emisja fal elektromagnetycznych	Max. -15dB/μA /10 m, wartość zgodna z normami
Temperatura działania	0–50° C [32–122° F]
Temperatura przechowywania	-20–70° C [-4–158° F]

ADAPTER TELEFONICZNY I DOPASOWANIE ZA POMOCĄ OASIS

Adapter telefoniczny przeznaczony jest do wszystkich aparatów słuchowych Bernafon współpracujących z SoundGate. Aparaty te posiadają specjalistyczny program słuchowy do konwersacji telefonicznych z wykorzystaniem SoundGate.

Poziom sygnał z mikrofonów aparatów (tzn. "słyszalność" innych dźwięków podczas rozmowy telefonicz-

nej) może być dopasowany. Oasis umożliwia również programowanie innych właściwości programu słuchowego "SoundGate Telefon".

Program "SoundGate Telefon" jest aktywowany automatycznie po rozpoczęciu rozmowy telefonicznej.

Dystrybutor**Szwajcaria**

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Phone +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90
www.bernafon.com

Polska

Acustica Sp. z o.o.
ul. Hynka 73A
80-465 Gdańsk
Phone +48 58 511 0803
Fax +48 58 511 0803 wew. 113
www.bernafon.pl