


INSTRUKCJA INSTALACJI Adaptera telefonicznego

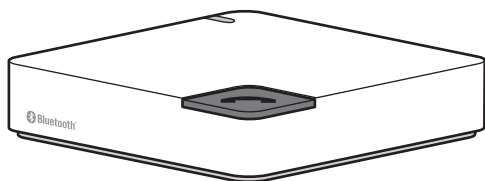

Spis treści


Wprowadzenie	4
Adapter telefoniczny – przegląd	5
Podłączenie do sieci	6
Podłączenie do linii telefonicznej	7
Przygotowanie SoundGate dla rozmów przez telefon stacjonarny	9
Użytkowanie adaptera telefonicznego	10
Uwagi dotyczące użytkowania urządzenia	11
Gwarancja międzynarodowa	14
Ostrzeżenia	15

Wprowadzenie


Niniejsza instrukcja dotyczy instalacji adaptera telefonicznego współpracującego z SoundGate. Informacje dotyczące użytkowania adaptera telefonicznego zawarte są w oddzielnej instrukcji obsługi tego urządzenia.

Przed zastosowaniem SoundGate do rozmów za pomocą telefonu stacjonarnego należy podłączyć adapter telefoniczny do linii telefonicznej.

Elementy niezbędne do instalacji znajdują się w dwóch ponumerowanych pudełkach.

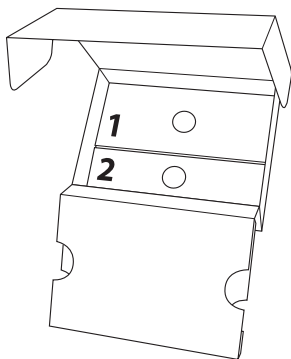

Adapter telefontyczny – przegląd

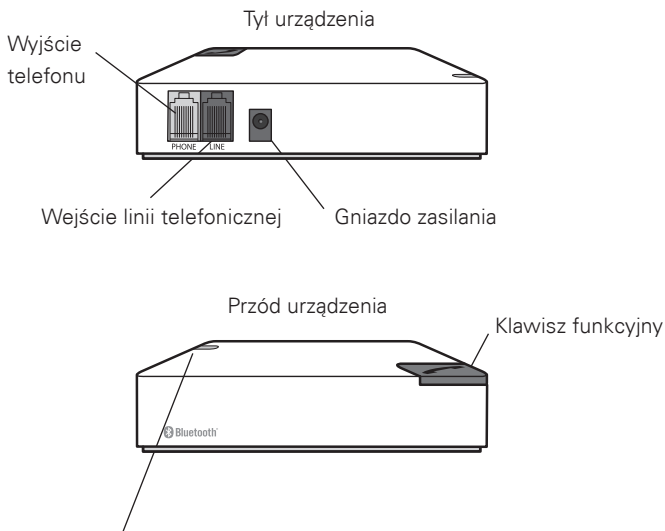

Wskaźnik statusu

Światło	Funkcja
Ciągły	Podłączony do SoundGate
Wolne pulsowanie	Poszukiwanie SoundGate
Miganie	Parowanie lub Rozmowa przychodząca
Brak światła	Urządzenie wyłączone




Podłączenie do sieci

Przed zasadniczą instalacją urządzenia należy je podłączyć do sieci elektrycznej. Wyciągnij zasilacz z pudełka nr 1.

- Upewnij się, że napięcie w gniazdku sieci elektrycznej jest odpowiednie dla zasilacza
- Podłącz zasilacz do sieci elektrycznej
- Podłącz wyjście zasilacza do gniazda zasilania znajdującego się na tylnej ścianie urządzenia
- Jeśli podłączono zasilanie, wskaźnik statusu przez kilka sekund będzie emitował błyski świetlne

Po kilku sekundach wskaźnik statusu rozpocznie emitowanie pulsującego światła, co oznacza, że urządzenie próbuje nawiązać łączność z SoundGate. Po ustaleniu połączenia wskaźnik rozpocznie emisję ciągłego światła. **UWAGA:** proces parowania urządzeń opisano na stronie 9.

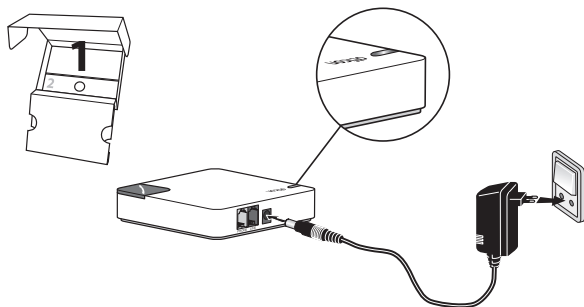



Podłączenie do linii telefonicznej

Podłącz adapter telefoniczny do linii telefonicznej oraz telefonu stacjonarnego. Wykorzystaj kabel z pudełka nr 2.

UWAGA: oba końce okablowania posiadają identyczne końcówki.


Połączenie adaptera telefonicznego polega na szeregowym "wpięciu" urządzenia w połączenie pomiędzy telefonem (centrałką, stacją bazową telefonu bezprzewodowego itp.) a gniazdkiem linii telefonicznej:

1. Odłącz od telefonu kabel łączący go z gniazdkiem linii telefonicznej.*
2. Odłączoną od telefonu wtyczkę wprowadź w gniazdo "LINE" urządzenia (kolor czarny).
3. Podłącz do gniazdka "PHONE" pozostały kabel (żółty).
4. Drugą końcówkę kabla podłącz do telefonu.*

Instalacja adaptera została zakończona. Kolejnym etapem jest sparowanie urządzenia z SoundGate (strona 9).

UWAGA:

* Jeśli Twój telefon stacjonarny nie posiada rozłączanego gniazda linii telefonicznej, należy zastosować inny model telefonu lub skontaktować się z technikiem w celu ustalenia innych możliwości podłączenia urządzenia.

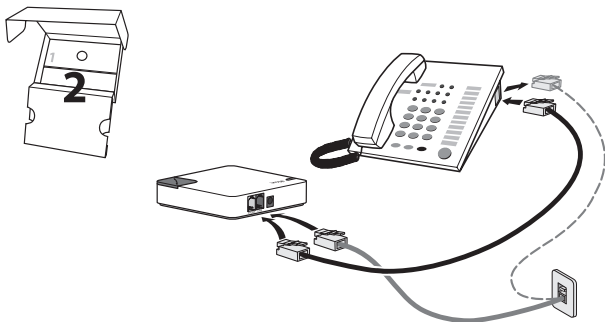

Przygotowanie SoundGate do rozmów przez telefon stacjonarny

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokonać procesu sparowania adaptera oraz SoundGate.

Parowanie

1. Aby dokonać parowania oba urządzenia muszą znajdować się w odległości nie większej niż 30 cm.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Bluetooth® na SoundGate (niebieska dioda zacznie emitować błyski).
3. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk funkcyjny na adapterze (czerwona dioda zacznie emitować błyski). Poczekać jedną minutę.
4. Po upływie minuty adapter telefoniczny połączy się z SoundGate i parowanie zostanie zakończone. Wskaźnik statusu adaptera telefonicznego będzie emitować ciągle światło.



Status

Parowania dokonujemy tylko jeden raz. Jeśli proces został zakończony pomyślnie, nie ma konieczności powtórzenia parowania.

Użytkowanie adaptera telefonicznego

Informacje dotyczące użytkowania urządzenia oraz współpracy z SoundGate zawarto w osobnej instrukcji obsługi adaptera telefonicznego.

Urządzenie powinno zostać zamontowane w pobliżu gniazdka telefonicznego oraz telefonu (centralki, stacji bazowej telefonu bezprzewodowego itp.).

Jeśli okresowo nie chcesz odbierać rozmów telefonicznych przez SoundGate, wyłącz adapter telefoniczny poprzez odłączenie urządzenia od sieci elektrycznej.

Adapter zużywa bardzo mało energii elektrycznej, tak więc nie ma konieczności wyłączania urządzenia. Wyjątkiem są dłuższe okresy czasu, kiedy nie planuje się stosowania adaptera telefonicznego.

Zasięg bezprzewodowej transmisji sygnału nie przekracza 10 m, przy czym zależy on od charakterystyki pomieszczenia, w której jest użytkowane (przeszkody itp.). Zasięg określa przestrzeń, w której można bezproblemowo prowadzić rozmowy telefoniczne z zastosowaniem SoundGate.

Więcej informacji znajdziesz na stronie; **www.bernafon.pl**

Uwagi dotyczące użytkowania urządzenia

Niniejszy produkt spełnia wytyczne opisane w FCC Part 15.

Niniejsze urządzenie spełnia wytyczne opisane w FCC Part 68 oraz wymagania ACTA.

UWAGA: modyfikacje, które nie zostały przewidziane i zaakceptowane przez producenta mogą utrudnić działanie urządzenia oraz zaburzyć współdziałanie aparatów słuchowych oraz akcesoriów dodatkowych. Za wady urządzenia wynikające z modyfikacji odpowiada użytkownik.

Testy wykazały, że: (1) niniejsze urządzenie nie może powodować szkodliwych interakcji z innymi urządzeniami oraz (2) urządzenie jest niewrażliwe na niepożądane zdalne sterowanie pochodzące od innych urządzeń.

Za skutki zmian i modyfikacji, które nie zostały przewidziane i zaakceptowane przez producenta odpowiada użytkownik

Zgodnie z zaleceniami normy FCC RF urządzenie to powinno znajdować się w odległości nie mniejszej niż 20 cm od użytkownika lub innych osób przebywających w otoczeniu produktu.

UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało wszechstronnie przetestowane oraz wykazano, że spełnia ono wytyczne urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z normą FCC Part 15. Nie stwierdzono interakcji sygnałów generowanych przez urządzenia oraz pola generowanego przez sieć elektryczną. Urządzenie generuje fale elektromagnetyczne w paśmie radiowym. Zamontowane w sposób nieodpowiedni może powodować zakłócenia funkcjonowania innych urządzeń radiotechnicznych.

Jeśli urządzenie generuje promieniowanie, które zakłóca działanie innych urządzeń np. radio, telewizji (co może być zweryfikowane przez włączenie i wyłączenie urządzenia), zaleca się:

- umieścić urządzenie w innym miejscu.
- zwiększyć odległość pomiędzy niniejszym urządzeniem oraz urządzeniem zakłócanym.
- podłączenie urządzenia do innego gniazdka sieciowego niż urządzenie zakłócanie.
- skonsultować się ze sprzedawcą sprzętu lub technikiem.

Deklaracja IC:

Sprzęt musi spełniać następujące dwa warunki:


- 1) sprzęt nie może powodować zakłóceń,
- 2) sprzęt nie może być podatny na zakłócenia, włączając zakłócenia, które mogą powodować jego nieprawidłowe działanie.

Produkt jest zgodny z wymaganiami IC dotyczącymi promieniowania elektromagnetycznego. Użytkownik powinien stosować się do wszelkich uwag nt. bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie nie powinno się znajdować w bezpośrednim otoczeniu innych urządzeń nadawczych. Produkt jest zgodny z wytycznymi Dyrektywy 1999/5/EC.

Deklaracja zgodności jest dostępna pod następującym adresem:

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Switzerland
www.bernafon.com

 Produkt jest kompatybilny z ogólnodostępną analogową siecią telefoniczną oraz może być zastosowany w krajach EU oraz EFTA.

Adapter telefoniczny należy zasilać za pomocą oryginalnego zasilacza dostarczonego razem w urządzeniem.

 **Bluetooth®**



Gwarancja międzynarodowa

Adapter telefoniczny objęty jest gwarancją dotyczącą wad materiałowych oraz wykonania. Gwarancja dotyczy tylko adaptera i nie obejmuje akcesoriów np. ładowarki, kabli itp. Gwarancja traci ważność, jeśli urządzenie było używane niezgodnie z przeznaczeniem, w nieodpowiedni sposób lub naprawiane/przerabiane w nieautoryzowanym serwisie.

W przypadku problemów z urządzeniem skontaktuj się z Protetykiem Słuchu. Razem z Protetykiem Słuchu przejrzyj kartę gwarancyjną oraz upewnij się, że jest ona prawidłowo wypełniona.

Powyższa gwarancja nie narusza jakichkolwiek praw przysługujących Państwu na mocy właściwego prawodawstwa krajowego w zakresie sprzedaży produktów konsumenckich. Państwa protetyk słuchu mógł udzielić gwarancji, której zakres wykracza poza postanowienia niniejszej ograniczonej gwarancji.

Skontaktuj się z Protetykiem Słuchu, aby otrzymać dodatkowe informacje.

Ostrzeżenia

Adapter telefoniczny nie jest zabawką tak więc urządzenie, jak i wszelkie dodatkowe (przejsściówki itp.) elementy powinny być niedostępne dla dzieci oraz osób niepoczytalnych (ryzyko połknięcia elementów dodatkowych itp.). W przypadku połknięcia elementu dodatkowego niezwłocznie należy się skontaktować z lekarzem.

Bezpieczeństwo użytkowania adaptera telefonicznego zależy od urządzenia, do którego jest on podłączony. Adapter należy podłączać do urządzeń spełniających normy IEC-60065, IEC-60601 lub normy równoważne.

Produkt spełnia międzynarodowe normy w aspekcie kompatybilności elektromagnetycznej. Jednakże adapter telefoniczny może powodować zaburzenia działania niektórych urządzeń medycznych. Przed zastosowaniem urządzenia np. w szpitalu należy skonsultować się z personelem odpowiedzialnym za funkcjonowanie sprzętu medycznego.

Urządzenie nie powinno być wystawiane na działanie wody ani innych substancji płynnych.

Dystrybutor:

Bernafon AG

Morgenstrasse 131
3018 Bern
Szwajcaria
Phone +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90
www.bernafon.com



Acustica Sp. z o.o.

ul.Hynka 73A
80-465 Gdańsk
Polska
Phone +48 58 511 0803
Fax +48 58 511 0803 wew.113
www.bernafon.pl

**Aby uzyskać więcej informacji na
temat słuchu i jego utraty zobacz
www.hear-it.org**