

SOUNDGATE

Odbiór dźwięku TV przez SoundGate

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wprowadzenie

Instrukcja ta opisuje w jaki sposób SoundGate może być wykorzystane do odbioru dźwięku z TV.


Dźwięk z telewizora jest transmitowany do adaptera TV, a następnie bezprzewodowo do SoundGate. Urządzenia wykorzystują technologię Bluetooth®.

Upewnij się, że adapter TV jest prawidłowo podłączony do telewizora. Więcej informacji znajdziesz w osobnej instrukcji instalacji.

Po włączeniu adaptera TV wszelkie sterowanie urządzeniami dokonywane jest za pomocą przycisków SoundGate.

Maksymalna odległość pomiędzy urządzeniami wynosi 10 m.

SoundGate – przegląd

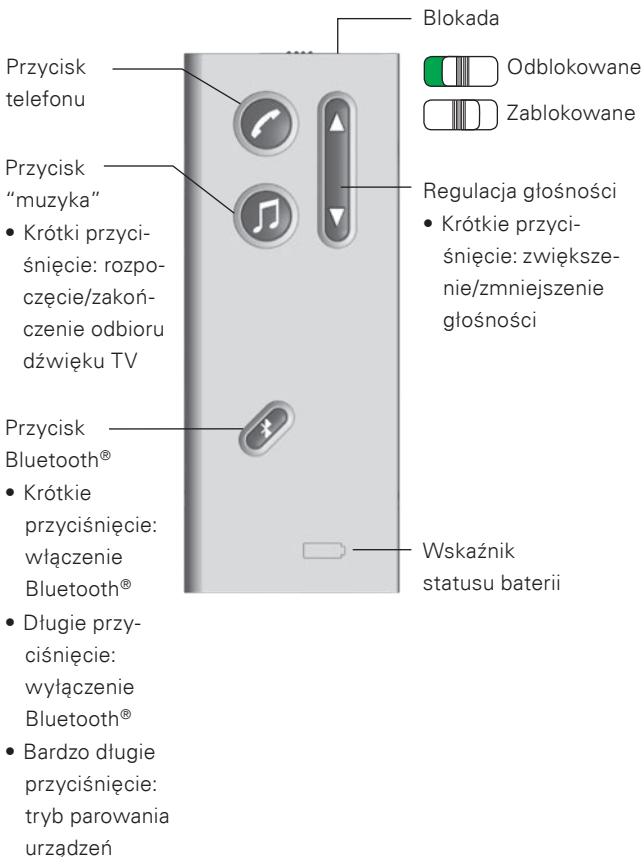

Przygotowanie SoundGate do odbioru dźwięku z TV

Przed rozpoczęciem współpracy urządzeń, TV adapter oraz SoundGate muszą być sparowane.

Parowanie

1. Aby dokonać parowania oba urządzenia muszą znajdować się w odległości nie większej niż 30 cm.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Bluetooth® na SoundGate (niebieska dioda zacznie emitować błyski).
3. Oba urządzenia dokonują teraz połączenia. Poczekaaj minutę.
4. Po upływie minuty adapter TV połączy się z SoundGate i parowanie zostanie zakończone.



Wskaźnik STATUSU adaptera TV będzie emitować ciągłe światło. Parowania dokonujemy tylko jeden raz.



Status

Jeśli proces został zakończony pomyślnie, nie ma konieczności powtórzenia parowania.

Rozpoczęcie/zakończenie odbioru dźwięku z TV

Przed rozpoczęciem odbioru dźwięku

Połącz SoundGate z naszyjnikiem oraz powieś urządzenie na szyi. Odległość pomiędzy Tobą a adapterem TV nie może być większa niż 10 m.

Użyj przycisku "muzyka" aby rozpocząć/zakończyć odbiór dźwięku z TV



Rozpoczęcie odbioru

Naciśnij przycisk "muzyka". SoundGate połączy się z adapterem TV. Po kilku sekundach odpowiednie diody na adapterze TV oraz SoundGate będą emitować sygnał świetlny. Aparaty przekazują dźwięk z TV.



Status

Zakończenie odbioru

Naciśnij przycisk "muzyka". SoundGate rozłączy się z adapterem TV. W/w diody przestaną emitować sygnał świetlny. Aparaty "powrócą" do ostatniego programu słuchowego.

WAŻNE

Aby odbierać dźwięk z adaptera TV funkcja Bluetooth® SoundGate musi być włączona. Jeśli funkcja ta jest nieaktywna, włączenie odbioru sygnału z TV automatycznie aktywuje transmisję danych przez Bluetooth®. Wyłączenia funkcji Bluetooth® dokonuje się za pomocą przycisku Bluetooth®.

