

ADAPTER TELEFONICZNY

Jak rozmawiać przez telefon
stacjonarny

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wprowadzenie

Ten przewodnik opisuje w jaki sposób używać SoundGate do rozmów przez telefon stacjonarny.


Adapter telefoniczny zapewnia bezprzewodowe połączenie pomiędzy SoundGate oraz domowym telefonem stacjonarnym podłączonym do linii telefonicznej. Dzięki tym urządzeniom użytkownik aparatów może obsługiwać połączenia przychodzące oraz wychodzące.

W pierwszej kolejności należy się upewnić, czy poprawnie zainstalowano adapter telefoniczny. Proces instalacji tego urządzenia opisano w osobnym przewodniku instalacji.

Należy pamiętać, że maksymalny zasięg połączenia bezprzewodowego pomiędzy SoundGate oraz adapterem telefonicznym wynosi 10 m.



SoundGate - przegląd

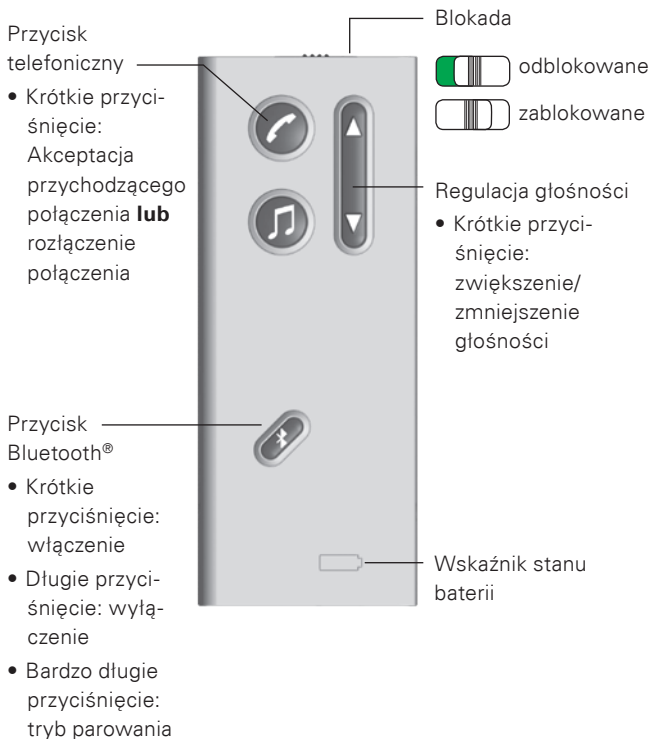

Rozmowy telefoniczne mogą być odbierane w przypadku włączenia blokady!

Połączenia przychodzące

Przed rozmową

Zawieś SoundGate na szyi używając w tym celu dostarczonego z urządzeniem naszyjnika. Upewnij się, że funkcja Bluetooth® w SoundGate jest włączona. Upewnij się, że jesteś w odległości nie większej niż 10 m od adaptera.

Połączenie przychodzące

Twoje aparaty zaczną generować dźwięk dzwonka oraz zielona obwódka przycisku telefonicznego zacznie migotać.



Akceptacja połączenia przychodzącego

Połączenia przychodzące odbierane są poprzez krótkie naciśnięcie przycisku telefonicznego SoundGate. Podczas połączenia obwódka wokół klawisza rozpocznie emisję ciągłego światła. Oznacza to, że sygnał telefoniczny jest transmitowany do aparatów słuchowych. Podczas rozmowy telefonicznej wskaźnik statusu adaptera telefonicznego będzie migotał.



Status

Zakończenie połączenia

Naciśnij klawisz telefoniczny SoundGate. Połączenie zostanie zakończone. Wskaźnik statusu na adapterze telefonicznym będzie emitował ciągłe światło.



Status

Połączenia wychodzące

Inicjowanie połączenia

Poprzez krótkie naciśnięcie przycisku telefonicznego SoundGate lub klawisza funkcyjnego adaptera rozpocznij połączenie.

W aparatach słuchowych usłyszysz sygnał telefonu. Obwódka wokół klawisza będzie emitowała ciągłe światło.

Podnieś słuchawkę telefonu lub naciśnij na telefonie klawisz rozpoczęcia połączenia oraz wprowadź numer telefonu osoby, do której dzwonisz. Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę lub naciśnij na telefonie klawisz zakończenia połączenia.

Podczas rozmowy wskaźnik statusu adaptera będzie migotał.

Zakończenie połączenia

Naciśnij klawisz telefoniczny SoundGate. Połączenie zostanie zakończone, a obwódka wokół klawisza przestanie emitować światło. Wskaźnik statusu na adapterze telefonicznym będzie emitował ciągłe światło.

Upewnij się, czy słuchawka telefonu jest poprawnie odłożona!



Status



Status

UWAGA: SoundGate zaprojektowano w ten sposób, że Twój głos zostanie odpowiednio wzmocniony, aby Twój rozmówca dokładnie słyszał co mówisz. Pamiętaj, aby mówić wyraźnie na naturalnym poziomie głośności. Jeśli Twój rozmówca Cię nie rozumie, mów bezpośrednio do mikrofonu zainstalowanego w SoundGate.