

5 porad używania aparatów z akumulatorkami

1 Ładowanie

Zawsze ładuj całkowicie akumulatorki – tak długo, aż dioda ładowarki świeci się w sposób ciągły na zielono. Pełne ładowanie trwa około 7 godzin.

2 Brak prądu

Jeśli akumulatorki są wyczerpane oraz aparaty słuchowe były wyłączone, nigdy nie próbuj wymuszać działania aparatów poprzez otwieranie i zamykanie komory baterii. W takim przypadku wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Umieść aparaty w ładowarce (upewnij się, że jest ona włączona).
- Użyj standardowych baterii jednorazowego użytku, zachowując akumulatorki do późniejszego ładowania.

3 Przerwa w używaniu aparatów

Jeśli nie zamierzasz używać aparatów przez dłuższy okres czasu, wyjmij z nich akumulatorki.

Uwaga: Nigdy nie pozostawiaj akumulatorków w aparatach słuchowych z otwartą komorą baterii. W przeciwnym wypadku znacznie skróci to czas ich działania.

4 Przechowywanie

Nie przechowuj akumulatorków z innymi metalowymi przedmiotami (klucze, monety itp.).

5 Utrzymanie

Zetrzyj wszelką wilgoć z baterii lub/i z ładowarki przed rozpoczęciem procesu ładowania.