



РУКОВОДСТВО ПО ОПЦИЯМ АКУСТИКИ

РУКОВОДСТВО ПО ОПЦИЯМ АКУСТИКИ

Содержание

Описание опций акустики	6
Опции для стандартных заушных слуховых аппаратов	6
Опции для заушных Слуховых аппаратов ТВУ(Телефон-в-ухе)	8
Диапазон настроек	10
Диапазон настроек для стандартных заушин	10
Диапазон настроек для Слуховых аппаратов ТВУ (Телефон-в-ухе)	11
Обзор акустических опций	12
Информация для заказа	14

РУКОВОДСТВО ПО ОПЦИЯМ АКУСТИКИ

Данное Руководство по Опциям Акустики Показывает разнообразие вкладышей, которые можно применять для заушных слуховых аппаратов.

Выбор подходящих вкладышей зависит от многих условий, включая степень снижения слуха, необходимое усиление, индивидуальные потребности стиля, и анатомические особенности уха пациента.

Данное руководство поможет Вам выбрать подходящую опцию акустики, чтобы соответствовать потребностям пациента и улучшить работу аппарата, слуховой комфорт и выбрать правильный стиль.

Описание опций Акустики

Предлагается большое разнообразие вкладышей, чтобы удовлетворить все потребности пациентов.

Тонкие трубки Спирафлекс для всех стандартных типов слуховых аппаратов доступны в двух размерах. Слабые и средние потери слуха могут быть протезированы с системой тонких трубок СпираФлекс в комбинации со стандартными и индивидуальными вкладышами. В данном руководстве Вы найдете рекомендации по данному вопросу.

Есть в наличии два различных телефона для слуховых аппаратов Телефон-в-ухе: М-телефон для малых и средних потерь слуха и П.телефон для средних и тяжелых потерь слуха.

Вы можете выбрать между стандартным вкладышем, используя Открытый, Тюльпановидный, Вкладыш в Вентом и Мощный вкладыш, а также различные индивидуальные вкладыши.

Опции для стандартных заушных аппаратов

СТАНДАРТНЫЙ ЗВУКОВОЙ КРЮЧОК



Традиционные акустические системы используют индивидуальный вкладыш для средних и тяжелых потерь слуха.

ТОНКАЯ ТРУБКА СПИРАФЛЕКС 0,9 ММ*



Подходит для протезирования слабых и средних потерь слуха. Есть в наличии в 4х различных размерах.

Рекомендуемые вкладыши:
Открытый вкладыш, Тюльпановидный, Индивидуальный

ТОНКАЯ ТРУБКА СПИРАФЛЕКС 1,3 ММ*



Подходит для протезирования средних и тяжелых потерь слуха. Есть в наличии в 4х различных размерах.

Рекомендуемые вкладыши:
Открытый большой вкладыш с вентом, Открытый малый вкладыш с вентом, мощный вкладыш, канальный вкладыш.

* Тонкая трубка Спирафлекс должна быть использована с адаптером для заушного аппарата, который заменяет стандартный звуковой крючок.

БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ – ОТКРЫТЫЙ ВКЛАДЫШ



Открытый вкладыш предлагает открытое протезирование с минимальной окклюзией. Есть в наличии 3 различных размера: 6 мм, 8 мм, и 10 мм.

Рекомендуемая тонкая трубка: 0,9 мм.

БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ – ТЮЛЬПАНОВИДНЫЙ ВКЛАДЫШ



Тюльпановидный вкладыш возможен только размером 12 мм.

Рекомендуемая тонкая трубка: 0,9 мм

БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ – ВКЛАДЫШ С ВЕНТОМ (SINGLE DOME)



Есть в наличии два различных вида вкладыша с вентом: один с большим вентом, другой с малым вентом.

Есть в наличии 3 различных размера: 6 мм, 10 мм, и 12 мм.

Рекомендуемая тонкая трубка: 1,3 мм

БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ – МОЩНЫЙ ВКЛАДЫШ (DOUBLE DOME)



Мощный вкладыш не имеет вента и предназначен для быстрого слухопротезирования (стандартные размеры вкладыша). Есть в наличии 3 различных размера: 6 мм, 8 мм, и 10 мм.

Рекомендуемая тонкая трубка: 1,3 мм

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ



Индивидуальный вкладыш предлагает в опции большой или малый вент. В сочетании с короткой длиной, он дает хороший эффект открытого протезирования.

Рекомендуемая тонкая трубка: 0,9 мм

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ – КАНАЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ ВКЛАДЫШ



Канальный вкладыш предлагает в опции большой или малый вент.

Рекомендуемая тонкая трубка: 1,3 мм

Опции для заушных слуховых аппаратов ТВУ (телефон-в-ухе)

М-ТЕЛЕФОН (ЗАГНУТЫЙ И ПРЯМОЙ)



Подходит для протезирования слабой и средней потерь слуха. . Есть в наличии 4 различных длины.

Рекомендуемые вкладыши:
Открытый вкладыш, Тюльпановидный, Индивидуальный и Lite Tip (только для изогнутых телефонов).

П-ТЕЛЕФОН



Подходит для протезирования средних и тяжелых потерь слуха. Есть в наличии в 4х различных размерах.

Рекомендуемые вкладыши:
Тюльпановидный, мощный вкладыш, мощный индивидуальный вкладыш.

БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ – ОТКРЫТЫЙ ВКЛАДЫШ



Открытый вкладыш предлагает очень открытое протезирование с минимальной окклюзией. Есть в наличии 3 различных размера: 6 мм, 8 мм, и 10 мм.

Рекомендуемый телефон: М-телефон.

БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ – ТЮЛЬПАНОВИДНЫЙ ВКЛАДЫШ



Тюльпановидный вкладыш есть в наличии только размером 12 мм.

Рекомендуются оба: и М-телефон и П-телефоны.

БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ – МОЩНЫЙ ВКЛАДЫШ



Мощный вкладыш служит для быстрого протезирования без вента. . Есть в наличии 4 различных размера: 6 мм, 8 мм, 10 мм и 12 мм.

Рекомендуемый телефон: П-телефон.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ



Micro Mold подходит для протезирования средних и тяжелых потерь слуха. Возможно применение вента различных размеров, можно использовать с **прямым и изогнутым М-телефоном**.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ – LITE TIP



Lite Tip является привлекательным за счет его полого строения. Он маленький и подходит для слабой и средней потерь слуха. Возможно применение вента различных размеров, можно использовать с **изогнутым М-телефоном**.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ – МОЩНЫЙ ВКЛАДЫШ




Мощный вкладыш подходит для протезирования тяжелых потерь слуха. Он похож на корпус внутриушного слухового аппарата. Возможно применение вента различных размеров, можно использовать с **П-телефоном**.


Диапазон настроек

Разнообразие вкладышей для стандартных заушных аппаратов и аппаратов ТВУ (телефон-в-ухе) предоставляет большую гибкость для Ваших пациентов. Изучите диапазон настроек для того, чтобы найти подходящий вкладыш для Вашего пациента. Диапазон настроек был установлен и зависит от слухового аппарата и размера вента. Частотный ответ для всех вкладышей может быть продемонстрирован на программе Оазис.

ОБЫЧНЫЙ ДИАПАЗОН НАСТРОЕК ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ

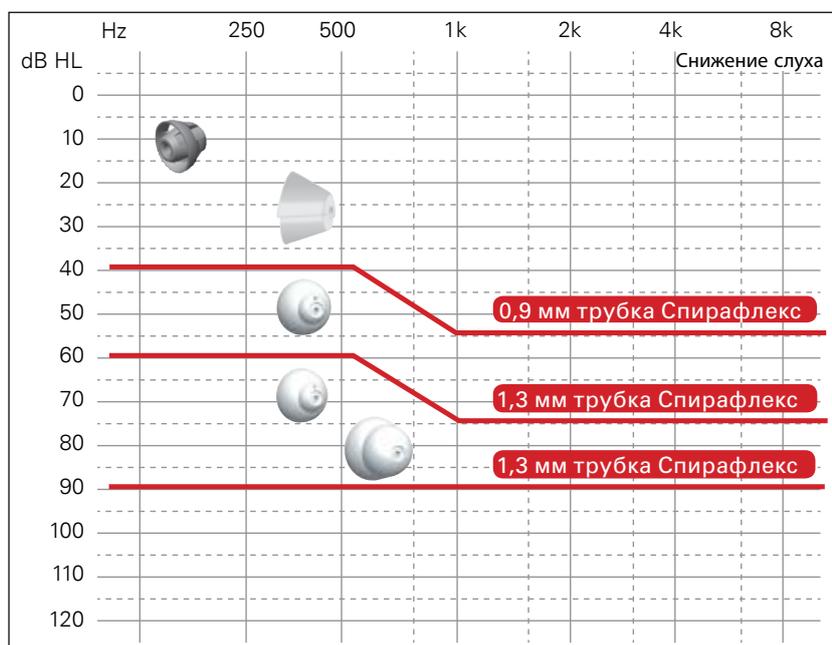


ОБЫЧНЫЙ ДИАПАЗОН НАСТРОЕК ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ

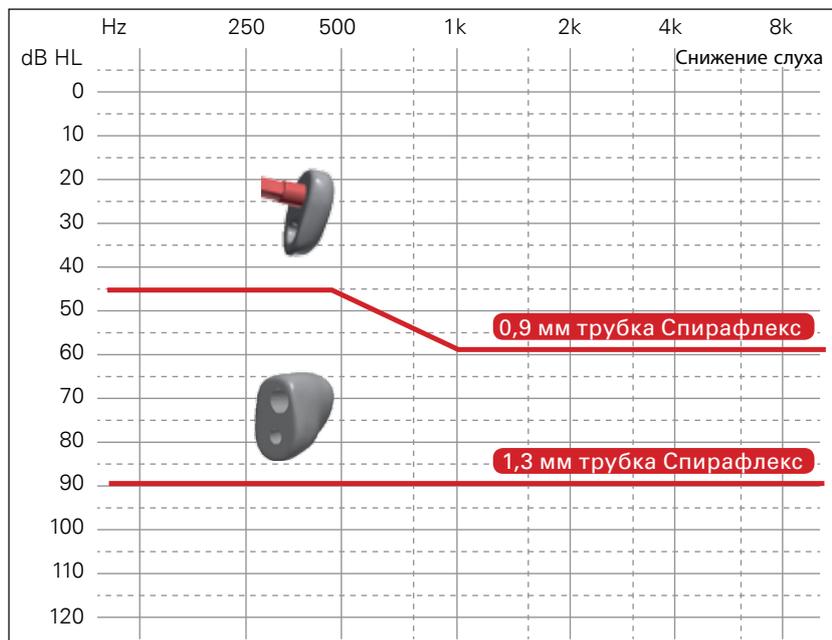


РУКОВОДСТВО ПО ОПЦИЯМ АКУСТИКИ

ТВУ ЗАУШНЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ ДИАПАЗОН ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ

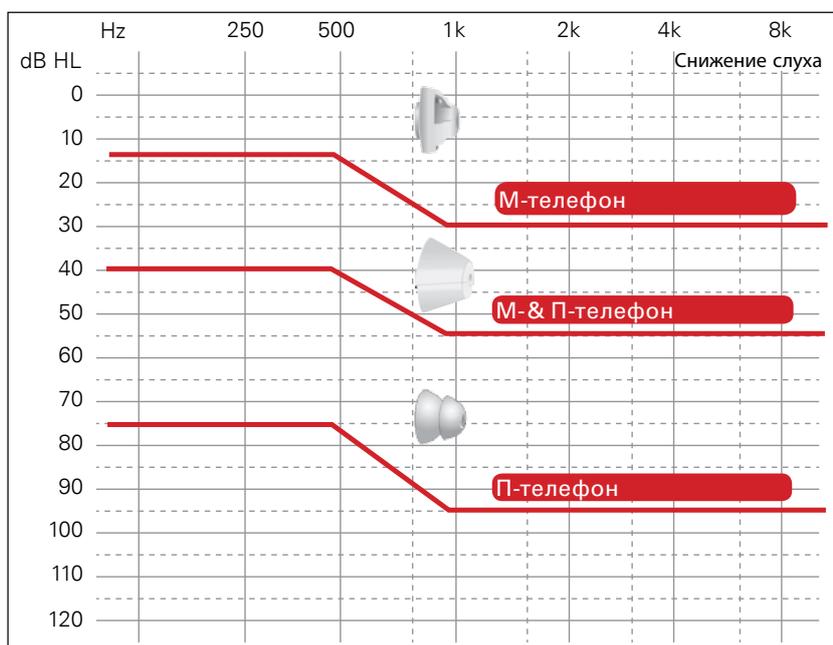

ТВУ ЗАУШНЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ ДИАПАЗОН ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ

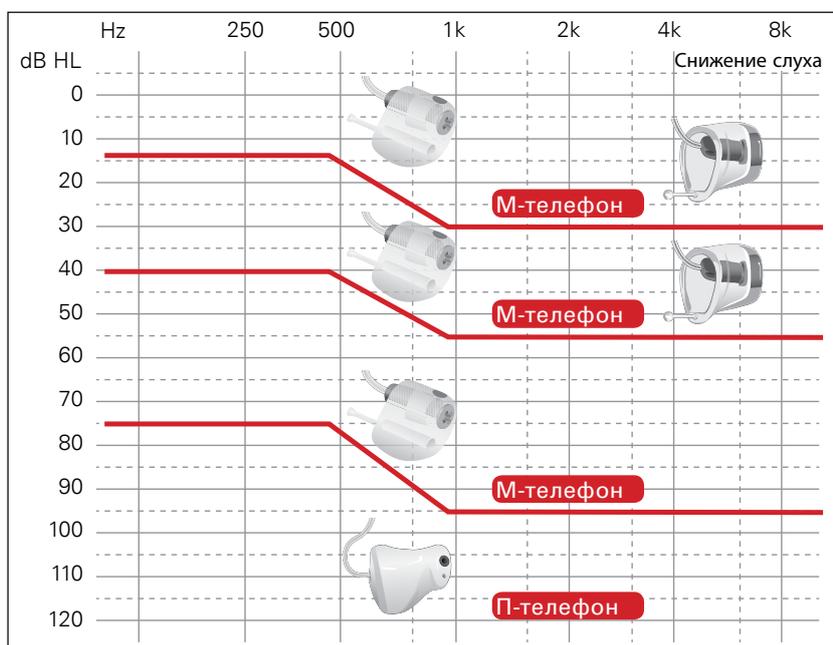

Обзор акустических опций

				СТАНДАРТНЫЕ ВКЛАДЫШИ		
				Ушные вкладыши	ОТКРЫТЫЙ ВКЛАДЫШ**	ТЮЛЬПАНО-ВИДНЫЕ ВКЛАДЫШИ**
ЗАУШНЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ	Стандартный звуковой крючок	 Микро/ Компактная	 Нано			
	Спирэфлекс 0,9 мм*	 Микро/ Компактная	 Нано	6 mm 8 mm 10 mm	12 mm	8 mm 10 mm 12 mm
	Спирэфлекс 1,3 мм*	 Микро/ Компактная	 Нано	6 mm 8 mm 10 mm	12 mm	8 mm 10 mm 12 mm
ТЕЛЕФОН-В-УХЕ	М-телефон	 Микро		6 mm 8 mm 10 mm	12 mm	
	М-телефон изогнутый	 Нано		6 mm 8 mm 10 mm	12 mm	
	П-телефон	 Микро	 Нано		12 mm	

Рекомендовано
 Возможно
 не подходит

РУКОВОДСТВО ПО ОПЦИЯМ АКУСТИКИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫШИ						
ВКЛАДЫШ, МАЛЫЙ ВЕНТ	МОЩНЫЙ ВКЛАДЫШ**	КАНАЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ (CUSTOM TIP)	МИКРО МОЛД	МАЛЫЙ ВКЛАДЫШ (LITE TIP)	МОЩНЫЙ ВКЛАДЫШ
						
Стандартные вкладыши, изготовленные другими лабораториями.						
8 mm 10 mm 12 mm	6 mm 8 mm 10 mm	Полный (без вента) 1,0 mm 1,4 mm 2,4 mm	Полный (без вента) 1,0 mm 1,4 mm 2,4 mm 4,0 mm			
8 mm 10 mm 12 mm	6 mm 8 mm 10 mm	Полный (без вента) 1,0 mm 1,4 mm 2,4 mm	Полный (без вента) 1,0 mm 1,4 mm 2,4 mm 4,0 mm			
	6 mm 8 mm 10 mm 12 mm			Полный (без вента) 1,0 mm 1,4 mm 2,4 mm 3,0 mm		
	6 mm 8 mm 10 mm 12 mm			Полный (без вента) 1,0 mm 1,4 mm 2,4 mm 3,0 mm	Полный (без вента) 0,7 mm (Длинный) 0,7 mm (Короткий) 1,2 mm 1,5 mm	
	6 mm 8 mm 10 mm 12 mm					Полный (без вента) 1,0 mm 1,4 mm 2,4 mm

* Тонкие трубки Спирафлекс должны быть использованы с адаптерами для заушин, адаптеры заменяют стандартные вкладыши.

** Внимание, для системы Спирафлекс и для ТВУ телефонов есть в наличии **разные наборы** Открытых, Тюльпановижных и Мощных вкладышей.

Информация для заказа

Стандартная заушина Акустические опции

ЗАУШИНЫ ЗВУКОВЫЕ КРЮЧКИ

Каталожный номер	Описание
571-01-130-00	Для Микро/ Компактных заушин
571-01-132-00	Для Нано заушин



АДАПТЕРЫ СПИРАФЛЕКС

Каталожный номер	Описание
589-25-160-00	Для Микро/ Компактных заушин
589-25-170-00	Для Нано заушин



СПИРАФЛЕКС ТОНКИЕ ТРУБКИ

Каталожный номер	Описание
589-25-060-00	0,9 mm, Правый, Длина 0
589-25-061-00	0,9 mm, Правый, Длина 1
589-25-062-00	0,9 mm, Правый, Длина 2
589-25-063-00	0,9 mm, Правый, Длина 3
589-25-070-00	0,9 mm, Левый, Длина 0
589-25-071-00	0,9 mm, Левый, Длина 1
589-25-072-00	0,9 mm, Левый, Длина 2
589-25-073-00	0,9 mm, Левый, Длина 3
589-25-080-00	1,3 mm, Правый, Длина 0
589-25-081-00	1,3 mm, Правый, Длина 1
589-25-082-00	1,3 mm, Правый, Длина 2
589-25-083-00	1,3 mm, Правый, Длина 3
589-25-090-00	1,3 mm, Левый, Длина 0
589-25-091-00	1,3 mm, Левый, Длина 1
589-25-092-00	1,3 mm, Левый, Длина 2
589-25-093-00	1,3 mm, Левый, Длина 3



ВКЛАДЫШИ СПИРАФЛЕКС

Каталожный номер	Описание
570-07-410-00	Открытый вкладыш 6 mm
570-07-411-00	Открытый вкладыш 8 mm
570-07-412-00	Открытый вкладыш 10 mm
589-25-100-00	Тюльпановидный вкладыш
123310	Вкладыш, большой вент 8 mm
123311	Вкладыш, большой вент 10 mm
123312	Вкладыш, большой вент 12 mm
123307	Вкладыш, маленький вент 8 mm
123308	Вкладыш, маленький вент 10 mm
123309	Вкладыш, маленький вент 12 mm
123293	Мощный вкладыш 6 mm
123305	Мощный вкладыш 8 mm
123306	Мощный вкладыш 10 mm



Информация для заказа

Тву заушины акустические опции

М-ТЕЛЕФОН (ПРЯМОЙ) И П- ТЕЛЕФОН ДЛЯ МИКРО ТВУ

Каталожный номер	Описание
632-02-520-00	М-телефон, Правый, Длина 1
632-02-521-00	М-телефон, Правый, Длина 2
632-02-522-00	М-телефон, Правый, Длина 3
632-02-523-00	М-телефон, Правый, Длина 4
632-02-530-00	М-телефон, Левый, Длина 1
632-02-531-00	М-телефон, Левый, Длина 2
632-02-532-00	М-телефон, Левый, Длина 3
632-02-533-00	М-телефон, Левый, Длина 4



Каталожный номер	Описание
632-02-420-00	П-телефон, Правый, Длина 1
632-02-421-00	П-телефон, Правый, Длина 2
632-02-422-00	П-телефон, Правый, Длина 3
632-02-423-00	П-телефон, Правый, Длина 4
632-02-430-00	П-телефон, Левый, Длина 1
632-02-431-00	П-телефон, Левый, Длина 2
632-02-432-00	П-телефон, Левый, Длина 3
632-02-433-00	П-телефон, Левый, Длина 4



М-ТЕЛЕФОН (BENT) AND П-ТЕЛЕФОН UNITS FOR NANO RITE

Каталожный номер	Описание
113611	М-телефон, Правый, Длина 1
113630	М-телефон, Правый, Длина 2
113631	М-телефон, Правый, Длина 3
113632	М-телефон, Правый, Длина 4
113645	М-телефон, Левый, Длина 1
113646	М-телефон, Левый, Длина 2
113647	М-телефон, Левый, Длина 3
113648	М-телефон, Левый, Длина 4



Каталожный номер	Описание
117975	П-телефон, Правый, Длина 1
118222	П-телефон, Правый, Длина 2
118223	П-телефон, Правый, Длина 3
118224	П-телефон, Правый, Длина 4
118226	П-телефон, Левый, Длина 1
118227	П-телефон, Левый, Длина 2
118228	П-телефон, Левый, Длина 3
118229	П-телефон, Левый, Длина 4



ВКЛАДЫШИ

Каталожный номер	Описание
120045	Открытый вкладыш 6 mm
120046	Открытый вкладыш 8 mm
120047	Открытый вкладыш 10 mm
120044	Тюльпановидный вкладыш
118063	Мощный вкладыш 6 mm
120041	Мощный вкладыш 8 mm
120042	Мощный вкладыш 10 mm
120043	Мощный вкладыш 12 mm



С 1946 года Бернафон разрабатывает высокотехнологичные слуховые системы которые позволяют нашим пациентам получать настоящее удовольствие от прослушивания звуков. Благодаря Швейцарской инженерной мысли и нашему качественному сервису, мы стремимся удовлетворить потребности наших клиентов. В настоящее время, представители и сотрудники Бернафона более чем в 70 странах мира претворяют в жизнь нашу задачу помогать слабослышащим людям общаться без ограничений.

Штаб-квартира

Швейцария

Бернафон АГ
Моргенштрассе 131
3018 Берн
Тел: +41 31 998 15 15
Факс: +41 31 998 15 90

Россия

Хорошевское шоссе, д. 21 А
123007 Москва
Реп. офис
+7 495 517092
+7 499 7628469

SWISS 
Engineering

Bernafon Companies

Australia · Canada · China · Denmark · Finland · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Netherlands · New Zealand · Poland · Spain · Sweden · Switzerland · UK · USA

www.bernafon.com

bernafon 
Your hearing · Our passion