

SOUNDGATE

GUÍA RÁPIDA


Control de volumen y cambio de programas

Teléfono

Conexión de música, p.ej. MP3

Bluetooth® música/audio

Indicador del estado de la batería

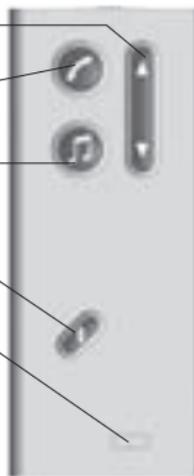

Esta guía es sólo una breve referencia.

Importante:

- SoundGate cuenta con una batería recargable que debe ser cargada antes de ser usada.
- SoundGate se debe usar siempre con el cordón para el cuello al usar un teléfono móvil o durante la transmisión de audio.

Para informaciones más detalladas, por favor consulte el manual de instrucciones de SoundGate o visite www.bernafon.com

Emparejamiento a dispositivos Bluetooth®

Antes de utilizar SoundGate con un teléfono móvil o una fuente de audio provistos de Bluetooth®, es necesario realizar un emparejamiento entre SoundGate y el dispositivo en cuestión. Una vez que un dispositivo esté emparejado, SoundGate lo reconocerá siempre que dicho dispositivo se encuentre dentro del rango de alcance y la función Bluetooth® de SoundGate esté encendida.

Preparar el dispositivo Bluetooth®

Por favor, consulte el manual del teléfono o del dispositivo de audio y prepárelo para Bluetooth® según las instrucciones.

Activar el modo de emparejamiento de SoundGate

Para activar el emparejamiento, pulse el botón de Bluetooth® de **SoundGate** durante 7 segundos hasta que la luz azul parpadee rápidamente. **El modo de emparejamiento estará activo durante 120 segundos.**

Activar el emparejamiento en el dispositivo Bluetooth®

Active el proceso de emparejamiento en el dispositivo. Cuando esté listo, la palabra **"SoundGate 1.4"** aparecerá en la pantalla del dispositivo.

Introducir el código PIN

El código de SoundGate es 0000. Luego de ingresarlo, el dispositivo se debe emparejar al SoundGate.

(Es posible que el dispositivo requiera que Usted active manualmente la conexión al seleccionar “Conectar” en el menú de la pantalla.)

Escuchar música/audio

Las fuentes de audio pueden conectarse a SoundGate:

- > por cable
- > por una conexión inalámbrica Bluetooth®

Conexión a una entrada de audio por cable

Usando el cable de audio, conecte el enchufe más grande a la fuente de audio (reproductor de música, etc.) y el enchufe más pequeño al conector de audio en la parte inferior de SoundGate.

Conexión a una fuente de audio por Bluetooth®

Empareje el dispositivo deseado con SoundGate.

Escuchar música a través de Bluetooth®

Pulse la tecla Bluetooth® durante 2 segundos. Luego encienda la fuente de audio.



Botón de música/audio

La tabla muestra cómo utilizar SoundGate para todos los tipos de transmisión de audio.

Escuchar música/audio

Pulse el botón de música/audio de SoundGate para iniciar la reproducción. Llamadas telefónicas entrantes pueden contestarse con una pulsación corta del botón de teléfono.



Una pulsación durante 2 segundos de la tecla de música/audio le permite cambiar entre dos fuentes de sonido Bluetooth®.

Parar la música/audio

Pulse nuevamente el botón de música/audio.



Se recomienda apagar la función Bluetooth® (pulsar durante 2 segundos) cuando no se vaya a usar SoundGate por varias horas.



Esto evita que se descargue la batería de SoundGate. Cargue la batería de SoundGate cuando no lo esté usando. (A la derecha: Imagen de la tecla Bluetooth®, azul)

Utilización con un teléfono móvil

Contestar llamadas	La función Bluetooth® de SoundGate debe estar activa. Cuando suena el teléfono, pulse el botón de teléfono en SoundGate para contestar.	
Hablar	Hable al micrófono de SoundGate (la distancia óptima es de 30 cm/ 12 pulgadas).	
Colgar el teléfono	Pulse nuevamente el botón de teléfono de SoundGate para terminar la llamada.	
Realizar una llamada	Inicie la llamada desde su teléfono móvil como lo haría normalmente. Hable al micrófono de SoundGate – no pulse el botón de teléfono de SoundGate.	
Ajustar el volumen	Pulse el botón de volumen/programa hacia arriba o abajo hasta que el sonido sea confortable.	
Encender/apagar los micrófonos del audífono	Pulse el botón de volumen/programa hacia arriba o abajo durante 2 segundos.	

Se recomienda apagar la función Bluetooth® (pulsar durante 2 segundos) cuando no se vaya a usar SoundGate por varias horas.



Esto evita que se descargue la batería de SoundGate. Cargue la batería de SoundGate cuando no lo esté usando. (a la derecha: Imagen de la tecla Bluetooth®, azul)

Consejo para la reconexión

Los dispositivos Bluetooth® emparejados se encuentran entre sí al ser encendidos. Si los dispositivos no se conectan automáticamente, deberán ser conectados manualmente. Siempre encienda su teléfono móvil antes de encender la función Bluetooth® en SoundGate.

Qué hacer si SoundGate sale del rango de alcance de Bluetooth®

Si SoundGate abandona el rango de alcance de Bluetooth® del teléfono móvil, se perderá la conexión. Normalmente es suficiente colocar los dispositivos nuevamente dentro del rango de alcance para que se reconecten.

Utilizar SoundGate como control remoto

Ajustar el volumen

Suba o baje el volumen de los audífonos con una pulsación corta hacia arriba o abajo.



Cambiar de programa

Pulse el botón hacia arriba o abajo durante 2 segundos para pasar hacia adelante o atrás en el ciclo de programas.

Nota: Eso sólo es posible si los audífonos están configurados con múltiples programas.

Durante una transmisión de audio, no se puede cambiar a otro programa.



04.11/BAG/113358/ES/subject to change