

RC-S

Control Remoto

MANUAL DE INSTRUCCIONES

bernafon[®]
Your hearing • Our passion

El siguiente control remoto está descrito en este manual:



RC-S

Le felicitamos por la compra del nuevo control remoto de Bernafon. Está entre los controles remotos más avanzados disponibles en el mercado. Ha sido adaptado cuidadosamente para controlar sus audífonos de modo exacto y preciso.

Por favor, siga las siguientes instrucciones para usar y cuidar su nuevo control remoto. Le ayudarán a obtener los mejores beneficios posibles del mismo y de sus audífonos. Ahora puede disfrutar nuevamente de los sonidos de la vida ... de su familia, de sus amigos y de su entorno.

Control remoto de Bernafon

RC - S



Indicaciones de seguridad

Indicaciones
de seguridad

*Ilustración de los programas
de escucha*

Programas
de escucha

Descripción de funciones

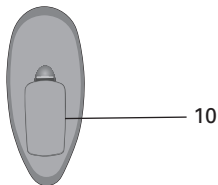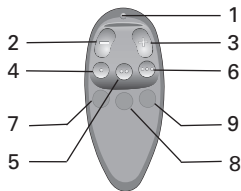

- 1 Indicador de pila
- 2 Bajar el volumen
- 3 Subir el volumen
- 4 Programa de escucha 1
- 5 Programa de escucha 2

- 6 Programa de escucha 3
- 7 Símbolo para el programa 1
- 8 Símbolo para el programa 2
- 9 Símbolo para el programa 3
- 10 Compartimiento de pila

Sus programas de escucha:

Programa de escucha 1:

Programa de escucha 2:

Programa de escucha 3:

Cómo manejar su audífono con el control remoto

Usted puede controlar sus audífonos en todo momento, usando los controles locales situados en ellos o pulsando la función deseada en el control remoto. El último reglaje realizado por usted es el que rige el ajuste actual de su audífono.

Por ejemplo, si el programa 2 es seleccionado mediante el pulsador y a continuación usted oprime el botón del programa 1 en el control remoto, el ajuste del audífono será el programa 1.

Distancia de manejo

Con el control remoto usted puede controlar su audífono desde una distancia de hasta 1 metro (aproximadamente la longitud de su brazo). Usted puede manejar el control remoto desde su bolsillo o desde la cartera. No es necesario que haya contacto visual directo entre el control remoto y el audífono.

Estado de reposo

Su nuevo control remoto no está dotado de un botón para encender y apagarlo. Cuando usted no lo esté utilizando, volverá automáticamente al estado de reposo.

Control de volumen




Pulse «+» para subir el volumen

Pulse «-» para bajar el volumen

3 programas de escucha

Su audífono se puede programar con 3 programas de escucha diferentes (ver página 3). Usted podrá cambiar entre los tres programas fácilmente con la ayuda del control remoto.

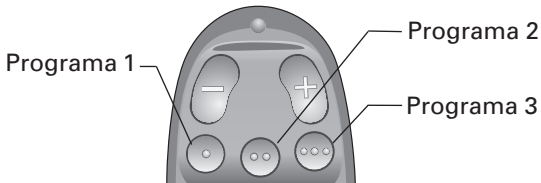

Para el programa 1 pulse el botón con «●»

Para el programa 2 pulse el botón con «●●»

Para el programa 3 pulse el botón con «●●●»

Secuencia de programas

Los 3 botones de programa en su control remoto corresponden a los tres programas instalados en su audífono. Cuando usted utiliza los botones situados en el control remoto para cambiar de programa, el audífono emitirá pitidos que le indicarán el programa que usted está escuchando. Por favor, consulte el manual de instrucciones de su audífono para mayor información.

Si el programa 2 y/o el programa 3 de sus audífonos no están disponibles, no se realizará ningún cambio cuando se pulsen los botones «●●» o «●●●».



Cómo cambiar la pila

Para insertar una pila nueva (CR 2)

- Con la ayuda de su uña, quite la tapa del compartimiento de pila cuidadosamente.



- Retire la pila usada.



- Antes de insertar la pila nueva, asegúrese de que el signo «+» en la pila coincida con el signo «+» en el compartimiento de pila.
- Coloque la pila en el compartimiento, asegurándose de que la pila esté conectada correctamente a ambos extremos.


- Coloque la tapa sobre el compartimiento. Nunca fuerce la tapa al cerrarla.

- El indicador de pila emitirá una luz intermitente verde mientras la pila esté buena y una luz intermitente roja cuando la pila necesite cambio.

- La duración de la pila varía con las condiciones de uso. Para mayor información, por favor consulte a su profesional en audición.
- No use pilas recargables en su control remoto.



Indicador de pila

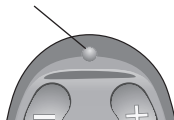

Cuidado de su control remoto

- Cuando cambie la pila o limpie su control remoto, manténgalo sobre una superficie blanda para evitar que se dañe al caerse accidentalmente.
- Mantenga limpio su control remoto. Límpielo regularmente con una tela o un paño seco.
- Evite que se moje su control remoto (por ejemplo en la ducha o bajo lluvia intensa).
- Nunca intente secar su control remoto con una secadora de cabello, un horno microondas o cualquier otro aparato.

- Su control remoto nunca debe ser expuesto al calor extremo. No lo deje en la guantera de su coche.

Protección del medio ambiente



Para ayudar a proteger el medio ambiente, no tire el control remoto o las pilas a la basura domiciliaria. Por favor, entréguelos en un punto de reciclaje o devuélvalos a su profesional en audición para su posterior gestión. Para mayor información, contacte a su profesional.

Advertencias e indicaciones de seguridad adicionales

Es muy importante que usted se familiarice detalladamente con este manual antes de usar su control remoto.

Una pila gastada debe ser retirada lo más pronto posible.

Por favor, devuelva las pilas usadas a su proveedor o al profesional en audición.

No elimine nunca las pilas quemándolas. Existe el riesgo de explosión y lesiones.

No tire las pilas con la basura domiciliaria. Pueden causar contaminación del ambiente.

Nunca trate de recargar pilas no recargables.

Mantenga las pilas nuevas y usadas alejadas de niños o personas con incapacidad mental. Si alguien se ha tragado una pila, busque atención médica inmediatamente.

El control remoto no está autorizado para uso en ambientes explosivos. No lo utilice en minas u otros ambientes con riesgos de explosión.

El control remoto usa señales digitales inductivas para transmitir órdenes al audífono. Aunque es sumamente improbable, se han expresado preocupaciones de que estas señales puedan interferir con aparatos médicos, tales como los marcapasos.

Como precaución adicional, aconsejamos a los portadores de marcapasos no llevar ni usar el control remoto en un bolsillo cercano al pecho o colgado del cuello.

¡Cuidado! El control remoto no es un juguete y no deberá, bajo ninguna circunstancia, estar al alcance de bebés o niños pequeños (menores de 36 meses).

Por razones de seguridad, no se debe atar el cordón. Use el asimiento de cordón suministrado.

Garantía internacional

Los controles remotos de Bernafon están cubiertos por una garantía limitada, cubriendo defectos en materiales y confección, por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de entrega. Esta garantía cubre el propio control remoto, pero no los accesorios, tales como pilas, etc.

Esta garantía se anula en caso de defectos debidos a manejo inadecuado.

Asimismo, esta garantía no será válida en caso de que el control remoto sea reparado por personal no autorizado. Por favor, revise la tarjeta de garantía con su profesional en audición y asegúrese de que esté correctamente completada.

Ilustración de programas de escucha con símbolos

Las siguientes ilustraciones de las diferentes situaciones de escucha son previstas para individualizar su control remoto. Su profesional en audición puede ayudarle a escoger un símbolo adecuado para sus programas de escucha.

Fabricante:

Bernafon AG

Morgenstrasse 131

3018 Bern

Suiza

Teléfono +41 31 998 15 15

Telefax +41 31 998 15 90

www.bernafon.com



bernafon 
Your hearing • Our passion