

# RC-P

Control remoto

# MANUAL DE INSTRUCCIONES



# ÍNDICE

## Control remoto Bernafon RC-P

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Características .....                                  | 7  |
| Inserción y extracción de la pila .....                | 8  |
| Manejo de sus audífonos<br>con el control remoto ..... | 11 |
| Distancia de funcionamiento .....                      | 12 |
| Interruptor de bloqueo de seguridad .....              | 13 |
| Control de volumen .....                               | 15 |
| Pulsador de programas .....                            | 16 |
| Botón de enmudecer .....                               | 17 |



|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Luz de estado .....                               | 18 |
| Anillo de lanyard .....                           | 20 |
| Funda de protección .....                         | 21 |
| Cómo cuidar su control remoto.....                | 22 |
| Protección del medio ambiente .....               | 23 |
| Advertencias y recomendaciones de seguridad ..... | 24 |
| Garantía internacional .....                      | 28 |
| Declaraciones de conformidad .....                | 29 |


# Introducción



Control remoto (RC-P)

Este manual describe cómo usted puede obtener el mejor rendimiento de su control remoto Bernafon. Por favor siga estas instrucciones de cuidado y uso.

# Características

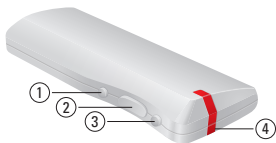

- 1 Pulsador de programas
- 2 Control de volumen
- 3 Botón de enmudecer
- 4 Luz de estado





- 5 Anillo de lanyard
- 6 Tapa de pila
- 7 Interruptor de bloqueo de seguridad

# Inserción y extracción de la pila

El control remoto usa una pila del tipo CR2.

Para insertar una pila nueva:

- Retire la tapa de la pila deslizándola suavemente. (A)
- Asegúrese de que el signo “+” en la pila coincide con el signo “+” en el compartimiento de pila.

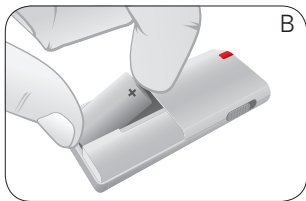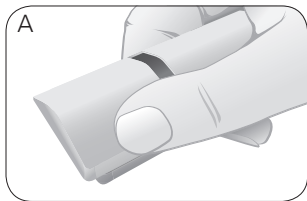

- Coloque la pila en el compartimiento, asegurándose de que la pila está posicionada correctamente en ambos extremos. (B)
- Recoloque la tapa de la pila y ciérrela deslizándola.

Por favor tomar nota:

- Nunca debe forzarse la tapa de la pila. En caso de que se requiera fuerza para cerrar la tapa, verifique la alineación de la tapa y pongala nuevamente para que se deslice fácilmente a su lugar.
- La vida útil de la pila varía según las condiciones de uso. Pregunte a su profesional en audición para mayor información.

## Manejo de sus audífonos con el control remoto

Sus audífonos pueden manejarse mediante los botones en su control remoto. Si en ambos oídos están adaptados audífonos, el control remoto los ajustará ambos simultáneamente.

## Distancia de funcionamiento


Con el control remoto, usted puede manejar sus audífonos desde una distancia de hasta 1 metro. Una línea de vista directa entre el control remoto y sus audífonos no es necesaria.

# Interruptor de bloqueo de seguridad


Su control remoto está dotado de un interruptor de bloqueo de seguridad para prevenir cambios no deseados.

- Posicione el interruptor en “desbloqueado” con el punto verde visible. Su control remoto está listo para usar. (A)

- Posicione el interruptor en “bloqueado” con el punto verde escondido. Los botones de su control remoto están desactivados. (B)

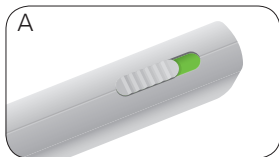

Desbloqueado =  
Punto verde visible

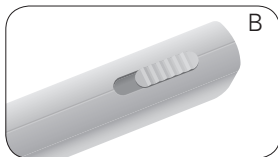

Bloqueado =  
Punto verde escondido

# Control de volumen

El volumen de sus audífonos puede ser ajustado mediante el control de volumen.



Aumentar el volumen

Disminuir el volumen

Pulse "+" para aumentar el volumen (más fuerte)

Pulse "-" para disminuir el volumen (más suave)

## Pulsador de programas

Para acceder a los programas del audífono con el control remoto, pulse el botón "●". Cada presión avanzará los audífonos al próximo programa en el ciclo.



Pulsador de programas

## Botón de enmudecer

El control remoto está dotado de un botón de enmudecer. Cuando se pulsa este botón, el control remoto cambia los audífonos al modo enmudecido.



Botón de enmudecer


Pulse el botón “\*” para acceder a la función de enmudecer. Para desenmudecer los audífonos mediante el control remoto, basta con pulsar cualquier botón.

## Luz de estado

La luz de estado indica el funcionamiento del control remoto. Parpadeará después de cada presión de un botón. Se verán dos posibilidades.

Un parpadeo  indica que el control remoto está bloqueado. Para desbloquearlo, coloque el interruptor de bloqueo de seguridad en la posición donde sea visible el punto verde.

**Verde** indica que el control remoto está desbloqueado y ha enviado una orden a los audífonos

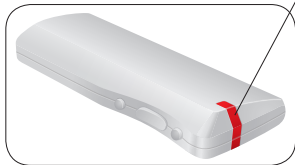


Luz de estado

Si la luz no parpadea después de que se haya presionado un botón, la pila necesita ser sustituida.

## Anillo de lanyard

Para su conveniencia, es posible unir el control remoto a un lanyard. Para montar el lanyard, tire hacia afuera el anillo que se encuentra cerca del compartimiento de pila. Pase la cuerda a través del anillo para unirla a su control remoto.

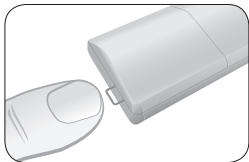

# Funda de protección

**Objetivo:** Usted puede proteger su control remoto de rayas accidentales usando la funda de protección proporcionada.

**Uso:** Inserción – Empuje suavemente el control remoto hacia dentro de la apertura de la funda de protección.

Retiro – Presione con su dedo sobre el material directamente opuesto a la apertura de la funda para destapar la punta de su control remoto, luego tírelo suavemente hacia afuera.

## Cómo cuidar su control remoto

- Cuando cambie la pila o limpie su control remoto, manténgalo sobre una superficie blanda para evitar que se dañe si se cae accidentalmente.
- Limpie el control remoto regularmente con un paño o papel tisú seco.
- Evite que se moje su control remoto.
- Nunca intente secar el control remoto con un secador de cabello, un horno microondas o cualquier otro aparato de calor.

- El control remoto nunca debe ser expuesto al calor extremo, tal como sobre el tablero de mandos o en la guantera de un coche.

## Protección del medio ambiente



Ayude a proteger el medio ambiente, no tirando el control remoto o las pilas a la basura domiciliaria no separada. Por favor, recicle su control remoto y las pilas o devuélvalos a su profesional en audición para su gestión posterior. Contacte a su profesional en audición para mayor información.

## Advertencias y recomendaciones de seguridad

- Es muy importante que usted se familiarice minuciosamente con este manual antes de usar su control remoto.
- El control remoto no debe ser usado en un avión.
- Una pila gastada debe ser retirada lo más pronto posible.
- Las pilas usadas deben ser devueltas al proveedor de pilas o al profesional en audición.
- Nunca elimine las pilas quemándolas.  
Existe el riesgo de explosión y lesiones.

- Nunca tire las pilas en la basura domiciliaria. Pueden provocar la contaminación del ambiente.
- Nunca trate de recargar pilas no recargables.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de niños pequeños o personas con incapacidad mental. Si se traga una pila, busque asistencia médica inmediata.
- El control remoto no está autorizado para uso en ambientes explosivos. No lo utilice en minas u otros ambientes con peligros de explosión.

- El control remoto usa señales digitales inductivas para transmitir órdenes a los audífonos. Aunque es sumamente improbable, se han expresado preocupaciones de que esta señal pueda posiblemente interferir con dispositivos médicos, tales como los marcapasos.
- Como precaución adicional, aconsejamos a los portadores de marcapasos no llevar ni usar el control remoto en un bolsillo cercano al pecho o colgado del cuello.

- ¡Atención! El control remoto no es un juguete y no deberá bajo ninguna circunstancia estar al alcance de bebés o niños pequeños (menores de 36 meses).
- Por razones de seguridad, nunca deben atarse los extremos del cordón lanyard. Use el cierre suministrado.

## Garantía internacional

El control remoto de Bernafon está cubierto por una garantía limitada, cubriendo defectos en materiales y confección, por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de entrega.

Esta garantía cubre el propio control remoto, pero no los accesorios, tales como pilas. Esta garantía se anula en caso de que un defecto se deba a un mal uso o tratamiento incorrecto.

# Declaraciones de conformidad

Por la presente, Bernafon AG declara que el control remoto RC-P cumple con los requisitos fundamentales y con otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE y la Directiva 93/42/CEE.

Una copia de la declaración de conformidad puede obtenerse dirigiéndose a:

Bernafon AG  
Morgenstrasse 131  
3018 Bern  
Suiza

Este producto y todos sus componentes han sido aprobados para su utilización en los siguientes países: Todos los estados miembros de la Unión Europea y la EFTA y AU, CA, JP, NZ y USA.



Este aparato cumple con la sección 15 de la normativa FCC y con la RSS-210 del Ministerio de Industria de Canadá. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes:

((1) Este aparato no debe provocar interferencias perjudiciales y (2) este aparato debe aceptar cual-quier interferencia recibida, incluso interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para manejar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites para dispositivos digitales de clase B de acuerdo con la sección 15 de la normativa FCC.

Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales que pueden producirse en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular.

Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual puede averiguarse apagando el equipo y volviéndolo a encender, se recomienda al usuario intentar corregir dichas interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.

- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al utilizado para conectar el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Este aparato digital de clase B cumple la norma canadiense ICES-003.

La emisión de este aparato es acorde a la norma siguiente: ETSI EN 300 330 – 1 V1.5.1



## Fabricante

Bernafon AG  
Morgenstrasse 131  
3018 Bern  
Suiza  
Teléfono +41 31 998 15 15  
Telefax +41 31 998 15 90  
[www.bernafon.com](http://www.bernafon.com)



**bernafon**<sup>®</sup>  
*Your hearing • Our passion*