

# SOUNDGATE

SoundGate para  
escuchar la televisión

# MANUAL DEL USUARIO

## Introducción

El presente manual explica cómo utilizar SoundGate para escuchar la televisión.


El sonido del televisor es transmitido a SoundGate por el adaptador de televisión utilizando la tecnología Bluetooth®.

Asegúrese de que el adaptador de televisión está correctamente conectado al televisor. Consulte la guía de instalación.

Cuando el adaptador de televisión está encendido, todas las operaciones para escuchar la televisión se realizan desde SoundGate.

Escuchar la televisión es posible dentro de un rango de unos 10 metros/30 pies, aproximadamente, del televisor.

## Descripción de SoundGate

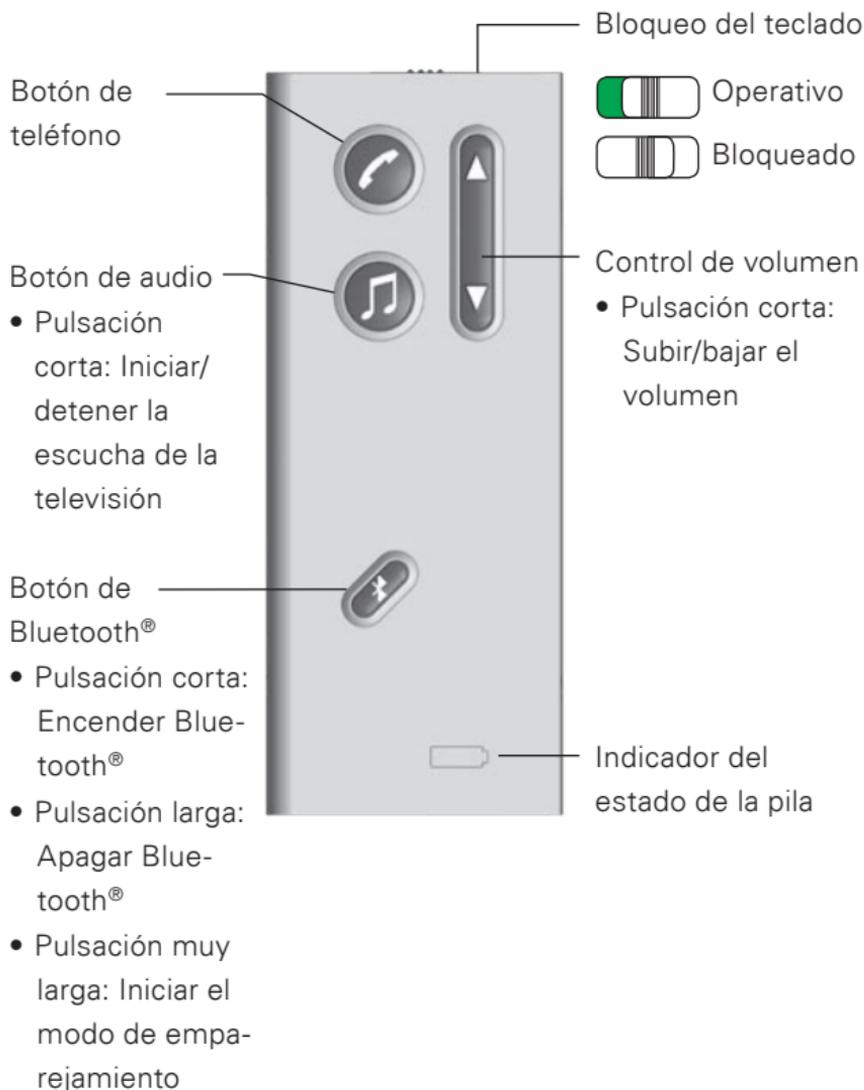

## Preparación de SoundGate para escuchar la televisión

La primera vez que SoundGate es utilizado con el adaptador de televisión, debe realizarse un emparejamiento entre los dos dispositivos.

### Emparejamiento

1. Para emparejar el adaptador de televisión con SoundGate, los dispositivos deben estar colocados cerca el uno del otro. Coloque SoundGate junto al adaptador de televisión (la distancia entre los dispositivos debe ser menos de 30 cm/1 pie).
2. Pulse el botón de Bluetooth® de SoundGate durante 5 segundos hasta que la luz azul comience a parpadear rápidamente. 
3. Ahora, los dos dispositivos están estableciendo una conexión entre ellos. Espere un minuto.
4. Después de un minuto, el adaptador de televisión se conecta a SoundGate y el emparejamiento está completado.  Estado

El indicador de ESTADO naranja en el adaptador de televisión mostrará una luz sólida.

El emparejamiento debería llevarse a cabo sólo una vez y normalmente no será necesario repetirlo.

# Escuchar la televisión/inicio y detención

## Antes de escuchar

Lleve SoundGate alrededor del cuello utilizando el cordón para el cuello. Procure que la distancia entre usted y su televisor no sea más de 10 metros/30 pies.

Use el botón de audio de SoundGate para escuchar la televisión.



## INICIAR el sonido

Pulse el botón de audio.

SoundGate se conectará al adaptador de televisión. Después de pocos segundos, se verá una luz naranja sólida en SoundGate y en el adaptador de televisión. Entonces, los audífonos recibirán el sonido de la televisión.



Estado

## DETENER el sonido

Pulse el botón de audio.

SoundGate se desconectará del adaptador de televisión. Todas las luces naranjas se apagarán. Los audífonos retornarán al programa de escucha anterior.

## Nota

La función Bluetooth® en SoundGate debe estar activa para permitir la transmisión desde el televisor. La desactivación de la función Bluetooth® debe llevarse a cabo manualmente, mediante el botón de Bluetooth®.

