

# ADAPTADOR DE TELÉFONO

Llamadas telefónicas – Uso diario

## MANUAL DEL USUARIO

## Introducción

El presente manual explica cómo utilizar SoundGate para conversaciones telefónicas.


El adaptador de teléfono provee una conexión inalámbrica entre SoundGate y su teléfono de casa. Admite llamadas entrantes y salientes. La utilización manos libres es posibilitada por SoundGate.

Primero, asegúrese de que el adaptador de teléfono está correctamente conectado a la línea telefónica terrestre y a la red eléctrica. Por favor, consulte la guía de instalación.

La aplicación telefónica inalámbrica es posible dentro de un rango de aproximadamente 10 metros (30 pies) desde el adaptador de teléfono.



## Descripción de SoundGate

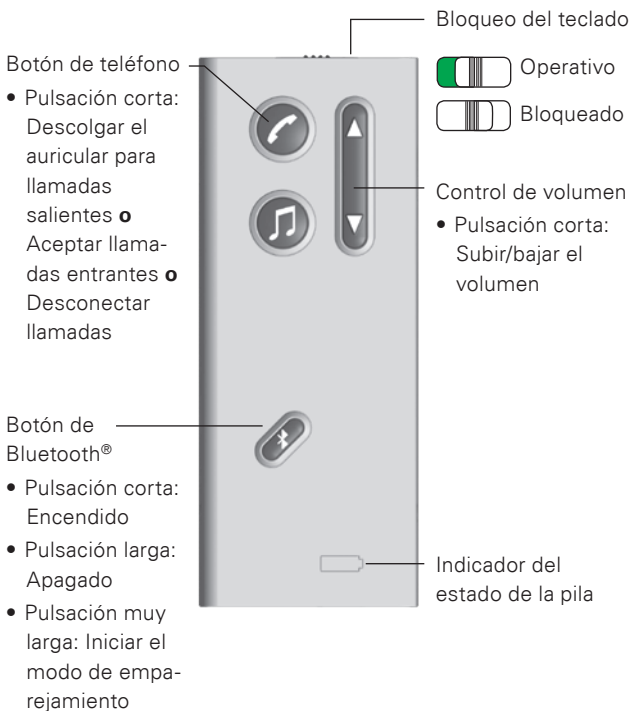

¡La recepción de llamadas es posible incluso cuando el teclado está bloqueado!

## Llamadas entrantes

### Antes de hablar

Lleve SoundGate alrededor del cuello utilizando el cordón para el cuello. Asegúrese de que la función Bluetooth® en SoundGate está encendida. La distancia entre usted y el adaptador de teléfono no debe ser más de 10 metros (30 pies) y el indicador rojo de estado del adaptador de teléfono debe mostrar una luz continua.

### Llamadas entrantes

Se escuchará un tono de llamada en los audífonos y la luz verde alrededor del botón de teléfono parpadeará.



### Contestar

Realice una pulsación corta sobre el botón de teléfono de SoundGate. SoundGate contestará la llamada y la luz verde alrededor del botón dejará de parpadear y permanecerá fija. Ahora, la llamada será dirigida a los audífonos. Hable normalmente, igual que haría si su interlocutor estuviese sentado frente a usted. El indicador rojo de estado en el adaptador de teléfono parpadeará durante la llamada.



Estado

### Colgar

Realice una pulsación corta sobre el botón de teléfono de SoundGate. SoundGate colgará la llamada y la luz verde alrededor del botón se apagará. El indicador rojo de estado en el adaptador de teléfono mostrará ahora una iluminación continua.



Estado

# Llamadas salientes

## Hacer una llamada saliente

Realice una pulsación corta sobre el botón de teléfono de SoundGate o pulse brevemente el botón rojo de teléfono en el adaptador de teléfono. Usted escuchará un tono de marcado en los audífonos. La luz verde alrededor del botón mostrará una iluminación continua.



Descuelgue el auricular o presione la tecla de llamada en el teléfono y marque el número rápidamente. Una vez que la llamada esté terminada, vuelva a colgar el auricular o presione la tecla de finalización de llamada en el teléfono.



El indicador rojo de estado en el adaptador de teléfono parpadeará durante la llamada.



Estado

## Colgar

Realice una pulsación corta sobre el botón de teléfono de SoundGate. SoundGate desconectará la llamada y la luz verde alrededor del botón se apagará.



El indicador rojo de estado en el adaptador de teléfono mostrará ahora una iluminación continua.



Estado

¡Asegúrese de que el teléfono está apagado o el auricular está colgado!

**Nota:** El nivel de su voz para su interlocutor es ajustado automáticamente por SoundGate, pero usted debe hablar siempre claramente y en voz alta. Si es necesario, hable directamente al micrófono de SoundGate.