

5 tips para obtener el mejor rendimiento de sus audífonos recargables

1 Carga

Siempre cargue sus pilas por completo, hasta que la luz del cargador esté verde – toma alrededor de 7 horas.

2 Descargado

Si las pilas se han agotado y los audífonos se han apagado, nunca trate de obtener más energía abriendo y cerrando el porta pilas. En este caso puede:

- Colocar sus audífonos en el cargador y asegurarse de que esté encendido
- Insertar pilas desechables y guardar las pilas recargables para cargarlas después.

3 Fuera de uso

Si no está usando sus audífonos por un periodo de tiempo extendido, saque las pilas.

Nota: Nunca deje las pilas recargables en el audífono con el porta pilas abierto.

Esto comprometerá la vida de su pila

4 Uso

No mantenga las pilas recargables junto con materiales metálicos como llaves y monedas.

5 Mantenimiento

Retire la humedad de sus audífonos o cargador antes de cargar.