

GRÄNSLÖS
UTAN HINDER.
NÄR SOM
HELST,
VAR SOM HELST.

ZERENA



bernafon 
Your hearing • Our passion





Zerena hjälper dig att höra och kommunicera i livets alla situationer, i lugna såväl som i bullriga och föränderliga miljöer. Oavsett var du är och vad du gör, behöver ditt liv inte begränsas av din hörselnedsättning. Lyssna på Charles Frey* och hans berättelse om hur han gör Zerena, Bernafons helt nya banbrytande hörsellösning, till en integrerad del av sitt liv.

*Charles Frey, en speciell och inspirerande person och hotellägare i de Schweiziska alperna.

“

RECEPTET FÖR EN AVKOPPLANDE KVÄLL:

EN GOD DRINK OCH TVÅ
SMÅ ZERENA-HÖRAPPARATER.

”

För personer med hörselnedsättning kan en utekväll ibland vara stressande. Ständigt omgiven av olika ljud, kan det vara svårt att koncentrera sig på det man verkligen vill höra. Men Charles Frey framhåller att hans Zerena-hörapparater hjälper honom att uppfatta tal i bullriga miljöer, koppla av och njuta.





Zerena har precis de rätta komponenterna för en förstklassig ljudupplevelse: en extremt snabb processor, en uppsättning dynamiska egenskaper, en snygg design och flera olika anslutningsmöjligheter.

GRÄNSLÖSA MÖJLIGHETER.

Med Zerena kan du förvänta dig förbättrad taluppfattning i de mest utmanande och bullriga ljudmiljöer. Njut av den stora variationsrikedomen av ljuden i omgivningen och hur hörapparaterna anpassar sig till dynamiken i vardagens olika lyssningssituationer.

OMÄRKBAR ANPASSNING.

Oroa dig inte för programbyte när omgivningsljuden ändras. Zerena gör detta utan att det märks.

HÖRSEL UTAN ANSTRÄNGNING.

Zerena arbetar ständigt för att minska din lyssningsansträngning och ge dig mer energi att fokusera på det som är viktigt för dig.

TRÅDLÖSA MÖJLIGHETER.

Zerena kommunicerar med en lång rad Bluetooth®-enheter så att du enkelt får tillgång till dagens många trådlösa möjligheter.



Många ljudmiljöer kan vara mycket dynamiska med ljud som varierar i styrka och karaktär. Ljud kan komma från olika håll och ändras från en sekund till nästa.

ZERENA är en hörapparat som låter dig fokusera på det som händer runt dig och det som är viktigt för dig. Du kan känna dig trygg med att Zerena ger dig det stöd som behövs i varje ögonblick, oavsett vilken situation du befinner dig i och hur utmanande den är.

Allt är möjligt tack vare Zerena's revolutionerande DECS™-teknik.





“

NYCKELN TILL
FRAMGÅNG:
GÄSTVÄNLIGHET,
VÄNLIGA ÖGON OCH
ZERENA-HÖRAPPARATER
I ÖRONEN.

”


Att föra ett samtal i en bullrig miljö kan vara utmanande för personer med hörselnedsättning. Precis så var det för Charles Frey. Han kände ofta oro för att inte höra och förstå vad som sades. Men tack vare sina Zerena-hörapparater känner han sig åter trygg och lugn när han vistas i bullriga miljöer.

Tidigare användes teknik i hörapparater som klassificerade olika lyssningsmiljöer och förstärkte ljudet baserat på ljudinformation som redan passerat. DECS™ suddar ut gränserna och arbetar ständigt och omärkbart även i de mest utmanande ljudmiljöer. Därför kan Zerena hela tiden anpassa sig till snabba förändringar i omgivningen.



Traditionell ljudmiljöklassificering



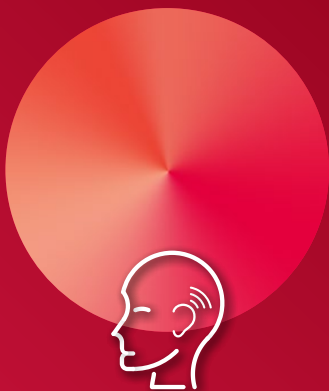

Dagens teknik

Med den extremt snabba processorn i Zerena, DECS™, analyseras ständigt det som händer runt dig. Ett smart kontrollsystem upptäcker tal- och bullerelement i ljudmiljön med samma hastighet som de kortaste talljuden. Denna information används för att ge talsignalen korrekt förstärkning och för att minska störande ljud som försämrar talförståelsen. Med DECS™ kan användaren uppleva bästa möjliga talförståelse och komfort med minimal ansträngning.



“

NYCKELN TILL DEN
BÄSTA
TV-UPPLEVELSEN:

EN 72" OLED-TV,
87 HD-KANALER, OCH
64 KB/S STEREO LJUD DIREKT
TILL MINA ZERENA-HÖRAPPARATER.

”

Genom att parkoppla dina Zerena-hörapparater till TV-A, kan du skapa den bästa tv-upplevelsen. Med TV-adaptern kan du trådlöst överföra ljud från tv:n direkt till dina hörapparater. Du kan se på tv med den volym du själv föredrar utan att störa andra och njuta av Dolby Digital Stereo-ljud när det är som bäst.

Känner du någon annan som använder Zerena-hörapparater? Då kan ni se er favoritfilm tillsammans genom att parkoppla era hörapparater med samma TV-A-adapter.



Att parkoppla Zerena med din TV-A går snabbt och enkelt.



Efter det att Charles Frey parkopplade sina Zerena-hörapparater med TV-adapter behöver han inte längre tänka på tv-volymen.

Zerena är Made for iPhone®. Ljudet från din iPhone®, iPad®, iPod® kan överföras trådlöst direkt till dina hörapparater. Se till exempel din favoritserie på iPaden eller lyssna på musik på din iPhone med trådlös och direkt överföring av ljudet till dina hörapparater.



Made for



iPod




iPhone



iPad

EasyControl-A-app för iPhone och Android™-telefoner kan användas för att byta program eller ändra volym i dina hörapparater. Använd även "Hitta min hörapparat"-funktion och håll koll på batterinivån. Att använda appen är bekvämt, diskret och roligt.

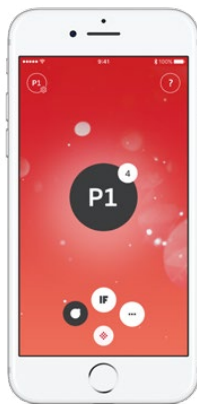

Bernafon EasyControl-A-app för kontroll av dina Zerena-hörapparater.

Zerena och Bernafons EasyControl-A-app är kompatibla med iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 9.7-tums iPad Pro, 12.9-tums iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4:e generationen), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, och iPod touch (5:e och 6:e generationen). Enheten måste ha iOS 9.3 eller senare installerat. Appen har även stöd för Apple Watch. Vid nedladdning av EasyControl-A-app till iPad, leta efter iPhone -appar i App Store. EasyControl-A-app är kompatibel med enheter som har Android™ 6.0, Marshmallow eller senare. För information om kompatibilitet, besök: www.bernafon.se/products/accessories.

Apple, Apple-loggan, iPhone, iPad, iPod touch, och Apple Watch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc. Android. Google Play, och Google Play-loggan är varumärken som tillhör Google Inc.

Använd RC-A-fjärrkontrollen för att enkelt och diskret justera volymen och byta program i dina hörapparater. Liten och nätt är RC-A-fjärrkontrollen smidig att ta med sig och den ligger bekvämt i handen.



RC-A är enkel att använda och ligger bekvämt i handen.

“

NYCKELN TILL
RÄTT STIL:
KOSTYM FRÅN PARIS,
SKOR FRÅN MILANO OCH
ZERENA-HÖRAPPARATER
FRÅN SCHWEIZ.

”



jet
black



cocoa
brown



metallic
antracit



metallic
silver




sand
beige

Basfärg på skal är metallic silver

Elegant, robust och med IP68-kalssificering för vatten- och damm resistens är Zerena en pålitlig hörapparat som passar alla stilar.

Zerena finns i tre utföranden och nio färgkombinationer som passar din personliga stil och alla typer av hörselnedsättningar.

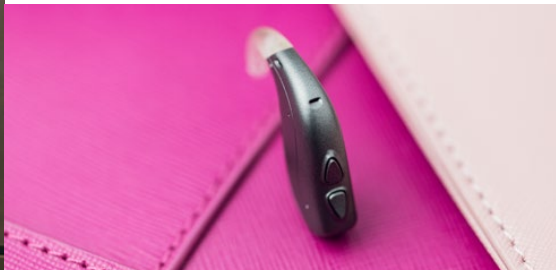

Kraftfulla Zerena BTE 105



Eleganta Zerena miniRITE T



Diskreta Zerena miniRITE



antique
bronze



metallic
antracit



metallic
silver



sand
beige

Basfärg på skal är metallic anthracite

Att höra och förstå sin omgivning är ett grundläggande behov. En hörselnedsättning leder ofta till sociala och kommunikativa problem. Vi strävar efter att underlätta för människor med nedsatt hörsel med hjälp av avancerad teknik.

För mer information om hörsel och hörselnedsättning **www.bernafon.com**

SWISS 
Engineering

bernafon 
Your hearing • Our passion

Bernaфон Companies: Australia • Canada • China • Denmark • Finland • France • Germany • Italy • Japan • Korea • Netherlands • New Zealand • Poland • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • UK • USA