

Şarj Edilebilir işitme cihazlarınızdan en iyi şekilde yararlanmanız için 5 ipucu

- 1 Şarj** Pillerinizi her zaman şarj yuvasındaki ışık sürekli yeşil yanana kadar tam şarj edin – bu işlem yaklaşık 7 saat sürer.
- 2 Pili bitmiş** Piller boşaldığı ve işitme cihazları kapandığında asla pil yuvasını acıp kapatarak daha fazla kullanmaya çalışmayın. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Setzen Sie die Hörgeräte mit den ZPower Akkus erneut in die Ladestation und vergewissern Sie sich, dass diese geladen werden.
 - Tek kullanımlık piller takın ve şarjlı pilleri daha sonra şarj etmek üzere saklayın.
- 3 Kullanım dışı** Eğer işitme cihazını uzun bir süre boyunca kullanmayacaksanız, pillerini çıkartın.
Not: Şarj edilebilir pilleri pil yuvası açık olarak işitme cihazlarında bırakmaktan kaçının. Aksi takdirde pil omru kısalmır.
- 4 Kullanım** Şarj edilebilir pilleri anahtar ve bozuk para gibi metal nesnelerle birlikte tutmayın.
- 5 Bakım** İşitme cihazlarını şarj etmeden önce, cihazın ya da şarj yuvasının üzerindeki nemi yumuşak bir bezle silin. Temizlik için alkol veya başka bir kimyasal madde kullanmayın.