

easyTymp Plus-version

easyTymp Plus-versionen möjliggör kontralaterala akustiska reflexmätningar, reflexavbrott och testning av örontrumpetens funktion när tillvalet Kontraprob köps och en extra licens aktiveras.


Användning av Contra-sonden



För att mäta kontralaterala reflexer är det nödvändigt att ansluta Kontraprob till easyTymp Plus versionen. På Kontra-proben finns markeringen "Kontra". Sätt in den kontralaterala givaren i detta uttag och använd klippet som finns på baksidan av Kontraprobe för att fästa på patientens kläder.

Tryck på knappen på sidan av Kontraproben för att starta eller stoppa/pausa den aktuella mätningen eller för att växla mellan höger och vänster när sonden inte är införd i örat.

Avancerad provning

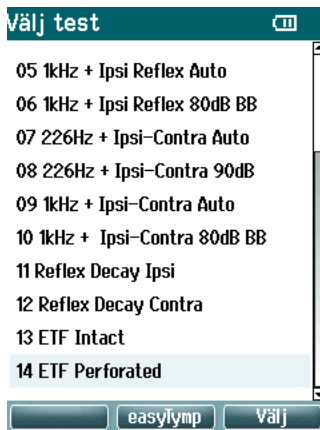

Avancerad testning:

- Kontralaterala akustiska reflexer

Ytterligare licenser för easyTymp Plus-versionen:

- Licens för högfrekvent sondton på 1 kHz

OBS: Protokollförteckningen är baserad på version och licensiering. Inte aktiva protokoll är gråmarkerade.

Testning av akustiska reflexer

Innan kontralateral reflextestning utförs bör en tympanometri utföras.

