

PHILIPS

HearLink

Aides auditives
sur-mesure



Guide
d'utilisation

Aperçu des modèles

Ce manuel est valable pour les modèles d'aides auditives, les types de piles, les styles, les types de filtres et les options de la gamme Philips HearLink :

À remplir par votre audioprothésiste.

- Modèles**
- HearLink 9000 – HL 9000
(HEI9000, HEI9001, HEI9002)
 - HearLink 7000 – HL 7000
(HEI7000, HEI7001, HEI7002)
 - HearLink 5000 – HL 5000
(HEI5000, HEI5001, HEI5002)
 - HearLink 3000 – HL 3000
(HEI3000, HEI3001, HEI3002)
 - HearLink 2000 – HL 2000
(HEI2000, HEI2001, HEI2002)

Type de pile 10 312

- Modèles**
- IIC Invisible dans le conduit auditif
 - CIC Intra-profond
 - ITC Intra-conduit

-
- Filtres**
- Pare-cérumen ProWax miniFit
 - Filtre T-cap
 - Filtre O-cap

-
- Options**
- Contrôle des programmes
 - Contrôle du volume
 - Bobine téléphonique
 - Auto Téléphone
 - NFMI

Réglages spécifiques de votre aide auditive

Aperçu des réglages de votre aide auditive

Gauche

Droite

Contrôle du volume

Oui

Non

Oui

Non

Contrôle des programmes

Oui

Non

Oui

Non

Mode silencieux

Oui

Non

Oui

Non

Indicateurs de contrôle du volume

Émet un bip au volume min/max

Activé Désactivé

Activé Désactivé

Bip quand le volume est changé

Activé Désactivé

Activé Désactivé

Émet un bip au volume préféré

Activé Désactivé

Activé Désactivé

Indicateurs de pile

Avertissement pile faible

Activé Désactivé

Activé Désactivé

Certificat de garantie

Nom du propriétaire:

Audioprothésiste:

Adresse de l'audioprothésiste:

Numéro de téléphone de l'audioprothésiste:

Date d'achat:

Période de garantie:

Mois:

Modèle droit:

N° de série:

Modèle gauche:

N° de série:

Type de pile:

Garantie internationale

Votre aide auditive bénéficie d'une garantie limitée internationale assurée par le fabricant. Cette garantie est de 24 mois à partir de la date de livraison. Cette garantie limitée couvre les défauts de fabrication et de matériaux dans l'aide auditive elle-même, mais pas les accessoires tels que les piles, les tubes, les écouteurs, les embouts, les filtres, etc. Les problèmes provoqués par une manipulation ou un entretien incorrect, une utilisation excessive, des accidents, réparations effectuées par un tiers non agréé, une exposition à des conditions corrosives, des modifications physiques de l'oreille, des dégâts provoqués par la pénétration d'un corps étranger dans l'appareil ou des réglages incorrects ne sont PAS couverts par la garantie limitée et peuvent l'annuler. La garantie expliquée ci-dessus n'affecte pas les droits juridiques dont vous bénéficiez peut-être, de par les législations nationales régissant la vente des biens de consommation. Votre audioprothésiste peut avoir émis une garantie qui dépasse les clauses de cette garantie limitée. Pour obtenir davantage d'informations, n'hésitez pas à le consulter.

Si vous avez besoin de services d'entretien, apportez votre aide auditive à votre audioprothésiste qui pourra entretenir, régler, et réparer votre appareil tout au long de sa durée de vie.

Introduction

Ce mode d'emploi vous indique comment utiliser et entretenir votre nouvelle aide auditive Philips. Veuillez le lire attentivement, y compris les avertissements. Vous pourrez ainsi bénéficier pleinement de tous les avantages de votre nouvelle aide auditive.

Votre audioprothésiste a ajusté votre aide auditive de manière à répondre à vos besoins. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à le consulter.

Vous trouverez plus d'informations sur www.hearingsolutions.philips.com

Utilisation prévue

L'aide auditive a pour but d'amplifier les sons et de les transmettre à l'oreille afin de compenser les déficiences auditives relevant d'une perte auditive modérée à sévère-profonde. Cette aide auditive est destinée aux adultes et aux enfants de plus de 36 mois.

Remarque importante

L'amplification de votre aide auditive est ajustée et optimisée selon vos capacités auditives personnelles pendant l'adaptation effectuée par votre audioprothésiste.

Identifiez votre aide auditive

Philips propose une grande variété d'aides auditives intra-auriculaires. Veuillez prendre connaissance de la présentation générale de votre modèle et du type de pile correspondant. Cela facilitera votre lecture de ce mode d'emploi.


Sommaire

Pile de type 10 (présentation du style CIC)	12
Pile de type 312 (présentation du style ITC)	13
Identifier l'aide auditive gauche et droite	14
Entretenir vos aides auditives avec l'outil multi-usages	15
Allumer et éteindre l'aide auditive	16
Quand remplacer la pile	17
Remplacer la pile	18
Insérer l'aide auditive	20
Retirer l'aide auditive	21
Entretenir votre aide auditive	22
Remplacer les filtres	24
Remplacer le pare-cérumen ProWax miniFit	25
Remplacer le filtre T-cap	26
Remplacer le filtre O-cap	27
Fonctions et accessoires optionnels	28
Changer de programme	29
Changer le volume avec le bouton-poussoir	31

Changer le volume avec la molette de volume	32
Mettre l'aide auditive en mode silencieux	33
Autres options	34
Avertissements généraux pour toutes les aides auditives	35
Guide de dépannage	40
Résistance à l'eau et à la poussière	42
Conditions d'utilisation	43
Informations techniques	44

Pile de type 10 (présentation du style CIC)



Description et fonction de chaque composant

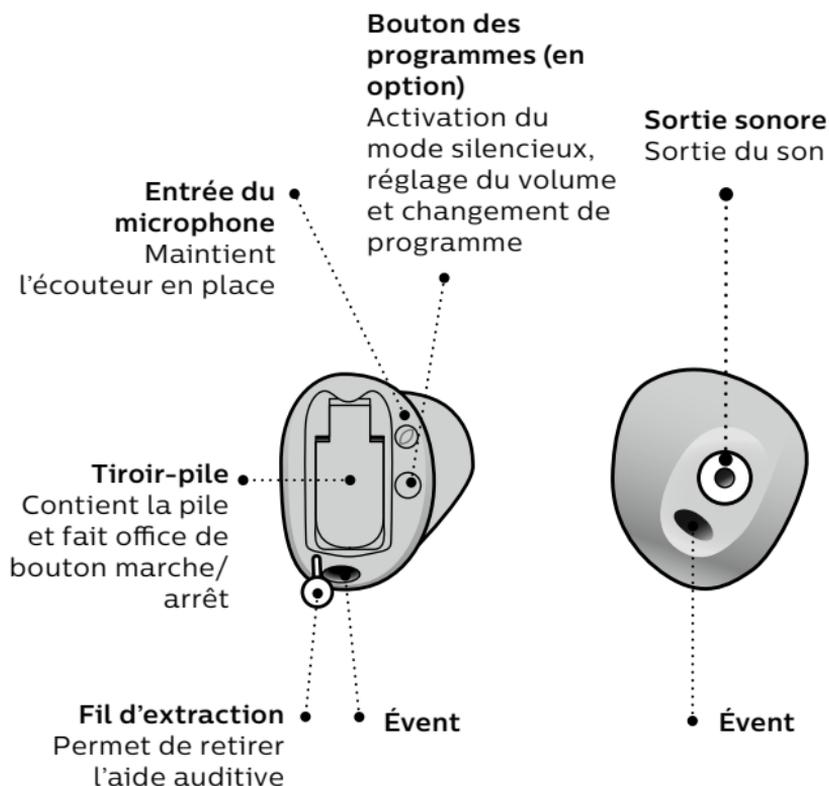

Les composants peuvent être placés de manière différente sur votre aide auditive.


Pile de type 312 (présentation du style ITC)

Description et fonction de chaque composant

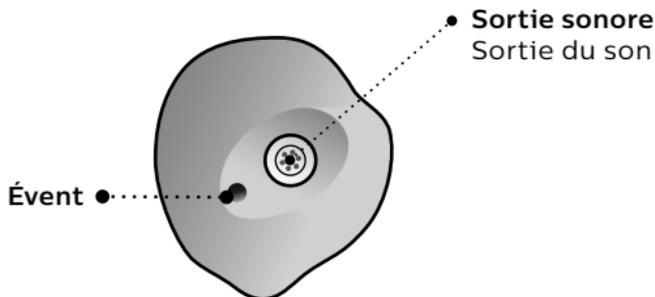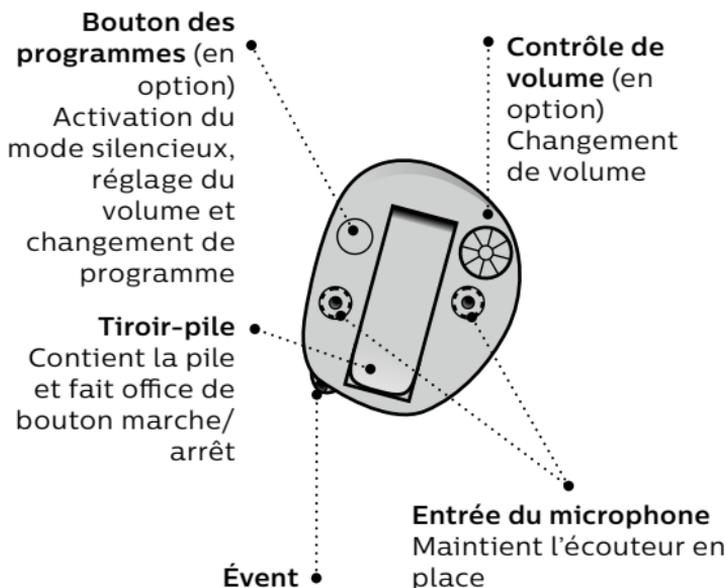

Identifier l'aide auditive gauche et droite


Il est important de faire la différence entre l'aide auditive gauche et droite car elles sont formées et programmées différemment.

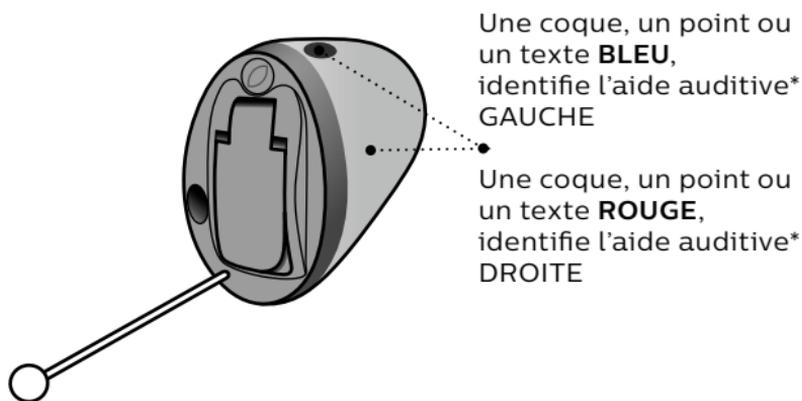

* La coque et la pastille sont uniquement utilisées sur le modèle IIC afin de différencier les aides auditives droites et gauches.

Entretien vos aides auditives avec l'outil multi-usages

L'outil multi-usages contient un aimant qui facilite le remplacement de la pile dans l'aide auditive. Il contient également une brosse et une boucle en fil métallique pour nettoyer et enlever le cérumen de votre écouteur ou de votre embout. Si vous avez besoin d'un outil multi-usages, adressez-vous à votre audioprothésiste.

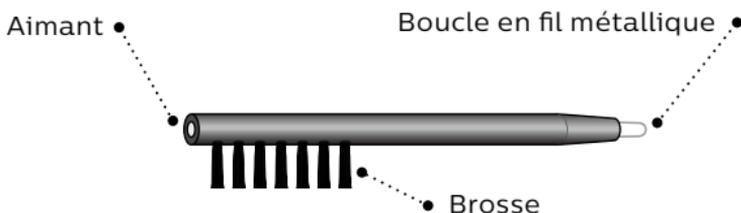


Remarque importante

Votre outil multi-usages est doté d'un aimant intégré. Maintenez-le à une distance de 30 cm au minimum de vos cartes de crédit et autres objets sensibles aux champs magnétiques.


Allumer et éteindre l'aide auditive

Le tiroir-pile sert également à allumer et éteindre l'aide auditive. Pour préserver la pile, n'oubliez pas d'éteindre votre aide auditive quand vous ne la portez pas. Si vous souhaitez revenir aux paramètres standards de l'aide auditive, programmés par votre audioprothésiste, ouvrez puis fermez le tiroir-pile.

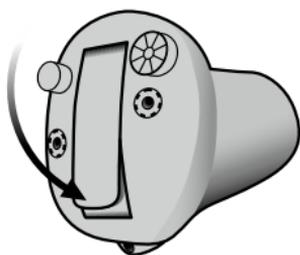

Allumer

Fermer complètement le tiroir-pile avec la pile en place

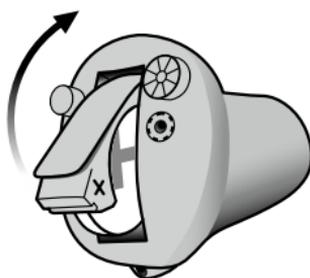

Éteindre

Ouvrir le tiroir-pile

Lorsque l'aide auditive n'est pas utilisée pendant plusieurs heures (par exemple, la nuit), ouvrez complètement le tiroir-pile pour que l'air circule; cela permettra d'optimiser l'autonomie de la pile.

Quand remplacer la pile

Lorsque la pile est faible, vous entendez trois bips répétés à intervalles modérés jusqu'à ce que la pile soit vide.



Trois bips

La pile est faible



Quatre bips

La pile est vide


Conseil pour les piles

Pour être sûr(e) de toujours avoir une aide auditive qui fonctionne, ayez toujours sur vous une pile de rechange ou remplacez-la avant de partir de chez vous.

Remplacer la pile


1. Retirer la pile usagée

Ouvrez entièrement le tiroir-pile. Retirez la pile.

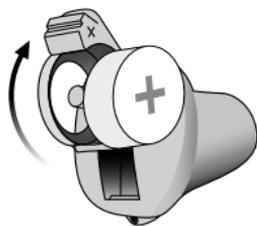

2. Déballer une nouvelle pile

Retirez l'étiquette autocollante du côté + de la pile.

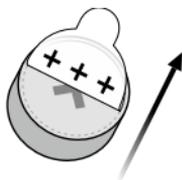


Conseil:

Attendez 2 minutes pour que la pile puisse aspirer de l'air. Cela lui permettra de fonctionner de manière optimale.

3. Insérer la pile neuve

Insérez la pile neuve dans le tiroir-pile.


Assurez-vous que le côté + soit en face du signe + présent sur le tiroir-pile.

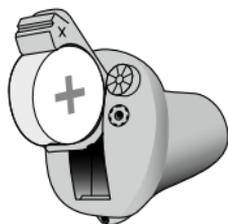

4. Refermer le tiroir-pile

Fermez le tiroir-pile.


L'aide auditive joue alors une courte musique. Tenez l'aide auditive près de votre oreille pour entendre la musique.

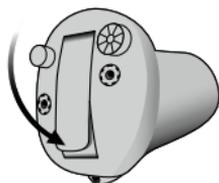

Conseil

Vous pouvez utiliser l'outil multi-usages pour changer les piles. Utilisez l'extrémité magnétique pour retirer et insérer les piles.

L'outil multi-usages vous sera fourni par votre audioprothésiste.

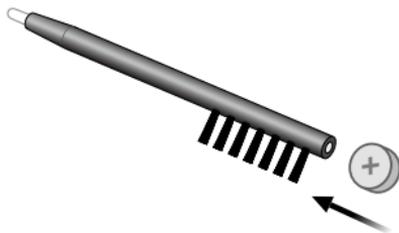

Insérer l'aide auditive

Étape 1

Placez l'extrémité de l'aide auditive dans votre conduit auditif.



Étape 2

Tirez doucement votre oreille vers l'extérieur et enfoncez l'aide auditive dans le conduit auditif, en la faisant légèrement pivoter si nécessaire. Suivez le contour naturel du conduit auditif. Appuyez sur l'aide auditive pour vous assurer qu'elle est placée de manière confortable dans l'oreille.



Retirer l'aide auditive

Saisissez l'aide auditive à l'aide du fil d'extraction (si disponible). Retirez doucement l'aide auditive du conduit auditif.

Si votre aide auditive ne dispose pas de fil d'extraction, vous pouvez la retirer en la tirant sur le côté.

Remarque importante


N'utilisez PAS le tiroir-pile comme poignée pour insérer ou retirer votre aide auditive. Il n'est pas conçu pour cela.


Entretien votre aide auditive

Lorsque vous manipulez l'aide auditive, maintenez-la au-dessus d'une surface lisse pour éviter de l'abîmer en cas de chute.


Nettoyer l'aide auditive

Brossez délicatement toutes les impuretés qui se trouvent dans les ouvertures à l'aide d'une brosse propre. Brossez doucement la surface. Assurez-vous que les filtres ne tombent pas. Nettoyez l'évent en insérant la brosse dans l'orifice tout en la faisant légèrement pivoter.

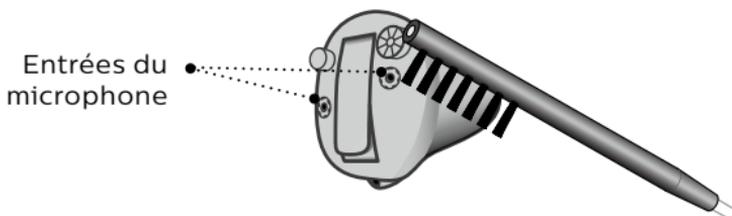

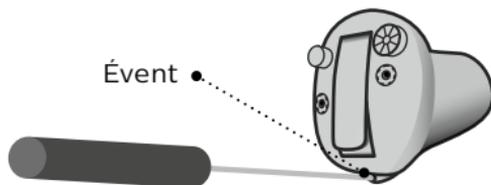

- Si l'évent est très petit, un outil spécifique peut être nécessaire. Veuillez consulter votre audioprothésiste.

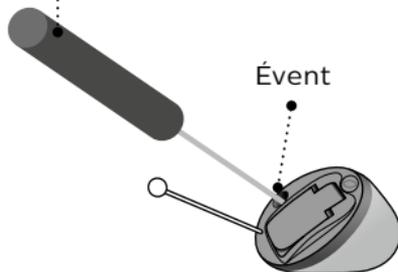

Remarque importante

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'aide auditive. Elle ne doit jamais être lavée ou immergée dans l'eau ni tout autre liquide.

Remplacer les filtres

Les filtres empêchent le cérumen et les impuretés d'endommager l'aide auditive. Remplacez les filtres s'ils sont obstrués, ou contactez votre audioprothésiste :

- Le pare-cérumen ProWax miniFit protège la sortie sonore.
- Les filtres O-Cap et T-Cap protègent l'entrée du microphone.

Veillez vous référer aux pages suivantes pour les instructions concernant le remplacement des filtres appropriés.

Veillez vous référer à la page 3 pour les filtres applicables.

Remarque importante


Utilisez toujours le même type de filtre pare-cérumen que celui qui a été initialement fourni avec l'aide auditive. Si vous avez le moindre doute à propos de l'utilisation ou du remplacement des filtres pare-cérumen, contactez votre audioprothésiste.

Remplacer le pare-cérumen ProWax miniFit

1. Outil

Retirez l'outil de la coque. Cet outil possède deux bras : l'un pour le retrait et l'autre pour l'insertion du pare-cérumen neuf.


Pare-cérumen
neuf

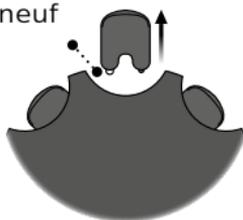

2. Retirer


Insérez le bras de retrait vide dans le pare-cérumen et retirez-le.

Pare-cérumen
neuf

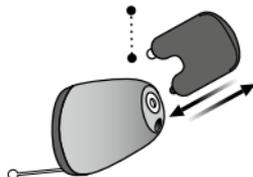

3. Insérer


Insérez le pare-cérumen neuf à l'aide de l'autre bras, retirez l'outil et jetez-le.

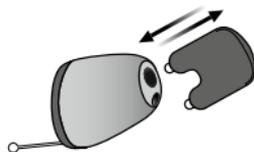

Remplacer le filtre T-cap (aides auditives avec piles de type 10)


1. Outil

Retirez l'outil de l'emballage. L'outil comporte deux extrémités, l'une pour effectuer le retrait et l'autre pourvue du filtre T-Cap neuf.

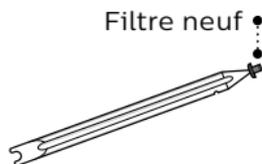


2. Retirer

Enfoncez la fourche de l'outil sous le bord supérieur du filtre T-Cap usagé et retirez-le en le soulevant.

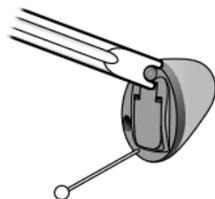

3. Insérer


Insérez le nouveau filtre T-Cap et retirez l'outil en le faisant pivoter légèrement. Jetez l'outil après l'avoir utilisé.

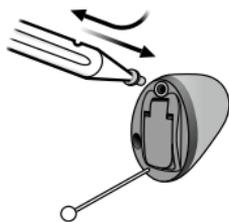

Remplacer le filtre O-cap (aides auditives avec piles de type 312)


1. Outil

Retirez l'outil de l'emballage. L'outil comporte deux extrémités, l'une pour effectuer le retrait et l'autre pourvue du filtre O-Cap neuf.

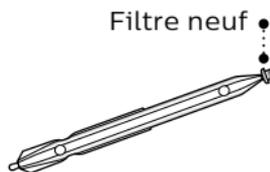


2. Retirer

Enfoncez l'extrémité pointue de l'outil dans le filtre O-Cap existant et tirez-le pour le faire sortir.

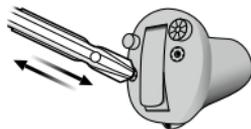

3. Insérer

Insérez le filtre O-Cap neuf en utilisant l'autre extrémité de l'outil. Jetez l'outil après l'avoir utilisé.

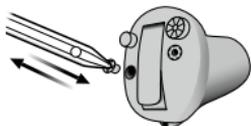


Fonctions et accessoires optionnels

Les fonctions et accessoires décrits aux pages suivantes sont optionnels. Nous vous invitons à consulter votre audioprothésiste pour savoir comment votre aide auditive est programmée. Si vous vous trouvez dans des situations d'écoute difficiles, un programme spécifique pourrait vous être utile. Ces programmes spécifiques sont configurés par votre audioprothésiste.

Notez ci-dessous les situations d'écoute durant lesquelles vous pourriez avoir besoin d'aide.

Changer de programme

Votre aide auditive peut avoir jusqu'à 4 programmes différents. Ces programmes spécifiques sont configurés par votre audioprothésiste.

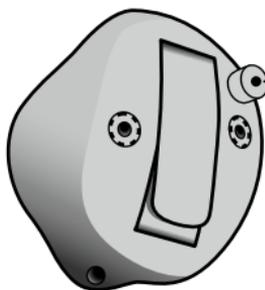

- Appuyez sur le bouton pour changer de programme. Exercez une pression courte si le bouton-poussoir est uniquement utilisé pour le changement de programme, et une pression longue s'il est aussi utilisé pour le contrôle du volume.

Veillez noter que si vous avez deux aides auditives synchronisées (les deux aides auditives réagissent lorsque l'un des boutons-poussoirs est utilisé), l'aide auditive DROITE avance, par exemple du programme 1 au programme 2, alors que l'aide auditive GAUCHE recule par exemple du programme 4 au programme 3.

Si vos aides auditives fonctionnent de manière indépendante, vous devez appuyer sur bouton-poussoir de chacune des aides auditives pour changer de programme.

À remplir par votre audioprothésiste

Programme	Son que vous entendrez lors de l'activation	Quand l'utiliser
1		«1 bip»
2		«2 bips»
3		«3 bips»
4		«4 bips»


Changement de programme:

- Indépendant Synchronisé*
- GAUCHE DROITE
- Pression courte Pression longue

* Disponible uniquement sur les modèles avec NFMI

Changer le volume avec le bouton-poussoir

Le bouton-poussoir vous permet de régler le volume. Vous entendez un bip quand vous montez ou baissez le volume.

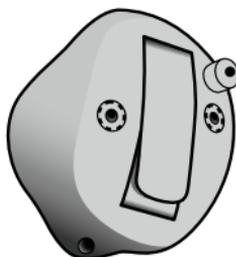

Une pression courte sur l'aide auditive DROITE augmente le volume

Une pression courte sur l'aide auditive GAUCHE diminue le volume



Vous entendez 2 bips au niveau de départ.
Vous entendez 3 bips au Maximum et au Minimum.

À remplir par votre audioprothésiste


Changement de volume

GAUCHE

DROITE

Changer le volume avec la molette de volume

La molette de volume vous permet de régler le volume. Vous entendez un bip quand vous montez ou baissez le volume.

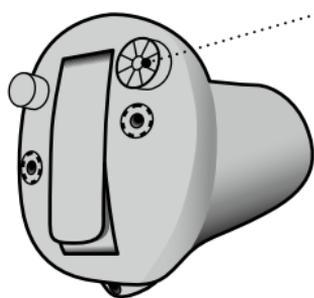


• Tournez vers l'avant pour monter le volume

Tournez vers l'arrière pour baisser le volume


Augmentation
du volume

Baisse du volume

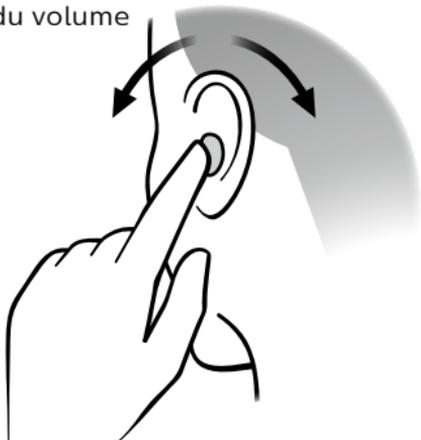

Mettre l'aide auditive en mode silencieux

Utilisez le mode silencieux si vous devez couper le son de l'aide auditive pendant que vous la portez. Cette fonction est disponible uniquement sur les aides auditives munies d'un bouton-poussoir.

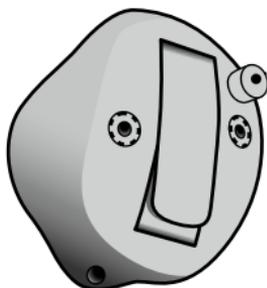

- Exercez une pression très longue (4 secondes) sur le bouton-poussoir pour mettre l'aide auditive en mode silencieux.

Pour réactiver l'aide auditive, appuyez brièvement sur le bouton-poussoir.

Remarque importante

N'utilisez pas le mode silencieux pour éteindre votre aide auditive. En effet, dans ce cas-là la pile continue à consommer de l'énergie.

Autres options

Bobine téléphonique – disponible uniquement sur certains modèles

La bobine téléphonique vous aide à mieux entendre quand vous utilisez un téléphone avec boucle magnétique intégrée ou lorsque vous vous trouvez dans des lieux équipés de systèmes de boucle magnétique comme les théâtres, les églises ou les salles de conférence. Ce symbole, ou un signe similaire, est affiché dans tous les lieux où une boucle a été installée.



Auto-Téléphone – disponible uniquement sur certains modèles

Auto-Téléphone peut activer automatiquement un programme téléphone dans l'aide auditive si votre téléphone est doté d'un aimant dédié. L'aimant doit être positionné sur votre téléphone, à côté de la sortie sonore.



Veillez vous référer à la page 3 pour les options applicables.

Pour obtenir plus d'informations, contactez votre audioprothésiste.

Avertissements généraux pour toutes les aides auditives

Vous devez prendre connaissance des avertissements généraux suivants avant d'utiliser votre aide auditive, pour votre sécurité personnelle et pour vous assurer de son utilisation correcte.

Veillez noter qu'une aide auditive ne restaure pas l'audition normale et ne peut ni empêcher ni améliorer une perte d'audition liée à une déficience auditive. Notez également que dans la plupart des cas l'utilisation occasionnelle d'une aide auditive ne permet pas à un utilisateur d'en retirer tous les avantages.

Consultez votre audioprothésiste si votre aide auditive fonctionne de manière inattendue.

Utilisation des aides auditives

- Les aides auditives doivent uniquement être utilisées conformément au mode d'emploi et doivent être réglées par votre audioprothésiste. Une mauvaise utilisation peut entraîner une perte auditive soudaine et permanente.
- Ne laissez pas d'autres personnes porter votre aide auditive car une utilisation incorrecte peut abîmer définitivement les facultés auditives de ces personnes.

Risque d'étouffement et risque d'ingestion des piles ou d'autres petites pièces

- Les aides auditives, leurs composants et les piles doivent être tenus hors de portée des enfants et de toute personne susceptible de les avaler ou de se blesser.
- Les piles peuvent parfois être confondues avec des comprimés. Vous devez donc examiner soigneusement vos médicaments avant d'avaler vos comprimés.

En cas d'ingestion d'une pile ou d'une aide auditive, appelez immédiatement le SAMU ou un médecin.

Utilisation des piles

- Utilisez toujours les piles recommandées par votre audioprothésiste. Des piles de mauvaise qualité peuvent fuir et être à l'origine de blessures.
- Ne tentez jamais de recharger les piles ni de les brûler. Elles pourraient exploser.

Dysfonctionnement

- Votre aide auditive peut s'arrêter de fonctionner de façon inattendue. Tenez-en compte lorsque vous dépendez de sons d'alerte (par exemple, lorsque vous êtes dans la circulation). Les aides auditives peuvent cesser de fonctionner, par exemple si les piles sont vides ou si les tubes sont obstrués par de l'humidité ou du cérumen.

Implants actifs

- Les implants actifs exigent une prudence particulière.
- En règle générale, respectez les directives des fabricants de défibrillateurs et de stimulateurs cardiaques implantables concernant leur utilisation avec les téléphones mobiles et les aimants.
- L'aimant Auto Téléphone ou l'outil multi-usages (qui contient un aimant) doivent être tenus à plus de 30 cm de l'implant. Ne les transportez pas dans une poche de poitrine, par exemple.
- Si vous avez un implant cérébral actif, contactez le fabricant de votre appareil pour obtenir des informations quant aux risques de perturbation.

Examens radiologiques (rayons X), tomодensitométriques («scanners»), IRM, Scanner et électrothérapie

- Retirez votre aide auditive avant une radiographie, un examen d'imagerie par TDM, IRM ou PET, une électrothérapie ou une intervention chirurgicale car votre aide auditive pourrait être endommagée par une exposition à des champs magnétiques puissants.

Chaleur et produits chimiques

- L'aide auditive ne doit jamais être exposée à des températures extrêmes, par exemple

dans une voiture garée au soleil.

- L'aide auditive ne doit pas être séchée dans un four à micro-ondes ou tout autre type de four.
- Les produits chimiques se trouvant dans les produits cosmétiques, la laque de coiffure, le parfum, la lotion après-rasage, les produits solaires et les insecticides peuvent endommager l'aide auditive. Retirez toujours votre aide auditive avant d'appliquer ces produits et laissez-les sécher avant de l'utiliser.

Aide auditive puissante

- Des précautions spéciales doivent être prises pour choisir, adapter et utiliser une aide auditive lorsque le niveau de pression acoustique maximum dépasse 132 dB SPL (IEC 711), car il y a un risque d'altération de la capacité auditive restante de l'utilisateur.

Pour savoir si votre aide auditive est une aide auditive puissante, demandez à votre audioprothésiste.

Effets secondaires possibles

- Les aides auditives et les embouts peuvent provoquer une accumulation accélérée de cérumen.
- Les matériaux normalement non allergéniques utilisés dans les aides auditives peuvent, dans de rares cas,

provoquer une irritation cutanée ou d'autres effets secondaires.

Veillez consulter un médecin si ces situations se produisent.

Interférences

- L'aide auditive a subi de nombreux tests concernant les interférences, selon les normes internationales les plus strictes. Cependant, les interférences entre l'aide auditive et les autres appareils (certains téléphones mobiles, systèmes de bande publique, les systèmes d'alarme des magasins et d'autres appareils sans fil) peuvent se produire. Si cela se produit, augmentez la distance entre l'aide auditive et le dispositif interférant.

Connexion à un équipement externe

- La sécurité de l'aide auditive lorsqu'elle est connectée à un équipement externe via un câble d'entrée auxiliaire et/ou directement, est déterminée par la source du signal externe. Lorsque l'aide auditive est connectée à un équipement externe branché sur une prise murale, cet équipement doit être conforme à la norme IEC-62368 (ou IEC-60065, IEC-60950 jusqu'au 20 juin 2019) ou à des normes de sécurité équivalentes.

Guide de dépannage

Problème	Causes possibles
Pas de son	Pile épuisée
	Sortie sonore obstruée
	Entrée du microphone obstruée
	Microphone de l'aide auditive en silencieux
Son intermittent ou réduit	Sortie sonore obstruée
	Humidité
	Pile épuisée
Grincement	Aide auditive mal insérée
	Accumulation de cérumen dans votre écouteur

Solutions

Remplacez la pile

Nettoyez la sortie sonore* ou remplacez le filtre pare-cérumen

Nettoyez l'entrée du microphone* ou remplacez le filtre (T-Cap ou O-Cap)

Réactivez le microphone des aides auditives

Nettoyez la sortie sonore* ou remplacez le filtre pare-cérumen

Essuyez la pile et l'aide auditive avec un chiffon sec

Remplacez la pile

Réinsérez l'aide auditive

Faites examiner votre conduit auditif par un médecin

* Comme indiqué par les consignes de ce manuel

Si aucune des solutions ci-dessus ne donne de résultat, consultez votre audioprothésiste pour lui demander conseil.

Résistance à l'eau et à la poussière

Votre aide auditive est étanche à la poussière et protégée contre la pénétration d'eau (IP68). Cela signifie qu'elle est conçue pour être portée dans toutes les situations de la vie quotidienne. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter si vous transpirez ou si votre tête est mouillée quand il pleut. Si votre aide auditive entre en contact avec de l'eau et cesse de fonctionner, veuillez suivre les instructions suivantes:

1. Essuyez-la doucement à l'aide d'un chiffon pour la sécher.
2. Ouvrez le tiroir-pile et retirez la pile, puis essuyez doucement l'eau se trouvant dans le tiroir-pile.
3. Laissez sécher l'aide auditive avec le tiroir-pile ouvert pendant environ 30 minutes.
4. Mettez une pile neuve.

Remarque importante

Ne portez pas votre aide auditive sous la douche ou pendant des activités aquatiques. Évitez d'immerger l'aide auditive dans l'eau ni aucun autre liquide.

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation	Température: +1°C à +40°C Humidité relative: 5% à 93%, sans condensation
--------------------------	---

Conditions de stockage et de transport	La température et l'humidité ne doivent pas dépasser les limites suivantes pendant des périodes prolongées durant le transport et le stockage : Température: -25°C à +60°C Humidité relative: 5% à 93%, sans condensation
--	---

Informations techniques

L'aide auditive est dotée de deux technologies radio décrites ci-dessous.

L'aide auditive contient un émetteur-récepteur radio utilisant une technologie d'induction magnétique de courte distance à 3,84 MHz. La force du champ magnétique de l'émetteur est très basse et ne dépasse jamais 15nW (-40 dBuA/m à 10 mètres).

L'aide auditive est conforme aux normes internationales concernant la compatibilité électromagnétique et l'exposition humaine.

En raison de l'espace disponible limité sur l'aide auditive, tous les marquages de certification sont présents dans ce document.

Des informations supplémentaires sont disponibles dans le « Guide de spécifications ».

États-Unis et Canada

L'aide auditive comporte un module radio portant les identifiants de certification suivants:

Pour les modèles CIC NFMI :

FCC ID: 2ACAH-AUCIC

IC: 11936A-AUCIC

ITC :

En pile 312:

FCC ID: 2ACAH-AUITE13

IC: 11936A-AUITE13

L'appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC et au RSS d'Industrie Canada exempt de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le fabricant déclare que cette aide auditive est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité est disponible auprès du fabricant:



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemark
www.hearingsolutions.philips.com

CE 0543



IP68

Description des symboles utilisés dans ce livret ou sur l'étiquette du conditionnement

	<p>Avertissements Le texte repéré par un symbole de marquage doit être lu avant d'utiliser le produit.</p>
	<p>Fabricant Le produit est élaboré par le fabricant dont le nom et l'adresse figurent à côté du symbole. Indique le fabricant du dispositif médical, tel que défini dans les directives de l'UE 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE.</p>
	<p>Marque CE Le produit est conforme à la directive de l'UE sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE. Le numéro à quatre chiffres indique l'identification de l'organisme notifié.</p>
	<p>Déchets électroniques (DEEE) Recyclez vos aides auditives, accessoires ou batteries et piles conformément aux réglementations locales ou renvoyez-les à votre audioprothésiste en vue de leur mise au rebut. Équipements électroniques couverts par la Directive 2012/19/UE sur les déchets et les équipements électriques (DEEE).</p>
	<p>Marque de conformité réglementaire (RCM) Le produit est conforme aux exigences de sécurité électrique, de CEM et de spectre radio relatives aux produits fournis au marché australien ou néo-zélandais.</p>

<p style="text-align: center;">IP68</p>	<p>Code IP Ce symbole indique la classe de protection contre la pénétration nocive d'eau et de matières étrangères, conformément à la norme EN 60529:1991/A1:2002. IP6X indique une protection totale contre la poussière. IPX8 indique la protection contre les effets d'une immersion continue dans l'eau.</p>
<p style="text-align: center;"></p>	<p>Tenir à l'abri de l'humidité Indique un dispositif médical devant être protégé de l'humidité.</p>
<p style="text-align: center;"></p>	<p>Symbole de mise en garde Consulter le mode d'emploi (Guide d'utilisation) pour connaître les avertissements et les mises en garde.</p>
<p style="text-align: center;">REF</p>	<p>Numéro de catalogue Indique le numéro de catalogue du fabricant afin que le dispositif médical puisse être identifié.</p>
<p style="text-align: center;">SN</p>	<p>Numéro de série Indique le numéro de série du fabricant afin qu'un dispositif médical spécifique puisse être identifié.</p>

Déclaration REACH :

REACH exige que Philips Hearing Solutions fournisse des informations sur la teneur en substances chimiques pour les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) si elles sont présentes à plus de 0,1 % du poids de l'article. Le produit HearLink ne contient aucune substance figurant sur la liste REACH SVHC applicable au moment de la fabrication. Des informations plus récentes sont disponibles sur le site web.

www.hearingsolutions.philips.com/REACH.

< >
8,15 mm



< 19 mm >

^
v 9,0 mm

< 15 mm >

www.hearingsolutions.philips.com



Philips et le Philips Shield Emblem sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence. Ce produit a été fabriqué par ou pour et est vendu sous la responsabilité de SBO Hearing A/S, et SBO Hearing A/S est le garant de ce produit.



000020358600001