

Brugsanvisning

ConnectClip



2.4 GHz

oticon
PEOPLE FIRST

Introduktion til denne brugsanvisning

Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye ConnectClip. Læs brugsanvisningen grundigt, inkl. afsnittet om advarsler. Dette vil hjælpe dig med at få mest mulig gavn af din nye ConnectClip. Kontakt din hørespecialist, hvis du har yderligere spørgsmål om din ConnectClip.

For at gøre det lettere for dig indeholder denne brugsanvisning en navigationslinje til at hjælpe dig med at navigere nemt gennem de forskellige afsnit.

Tilsigtet brug

ConnectClip er en trådløs modtager/sender af lyd mellem høreapparater og omgivelserne, inkl. tale og trådløst elektronisk lydudstyr. ConnectClip er også en hjælp for brugere af trådløse høreapparater til betjening af deres høreløsning.

ConnectClip er beregnet til brug af børn (> 36 måneder) og voksne sammen med deres høreløsning.

VIGTIGT


Læs denne brugsanvisning grundigt, inden du bruger din ConnectClip. Den indeholder instruktioner og vigtig information om brug og vedligeholdelse af din ConnectClip.

Introduktion

ConnectClip kan både bruges som et trådløst headset til mobiltelefonen og som partnermikrofon.


1. Headset til mobiltelefon

Lyden fra din telefon streames til dine høreapparater via ConnectClip (A). Din stemme opfanges af ConnectClip og sendes til mobiltelefonen (B).

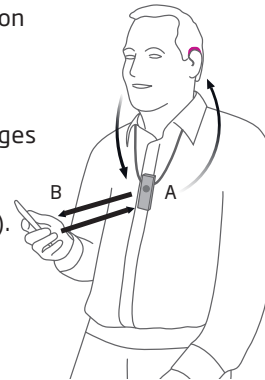

2. Partnermikrofon

Lyden af den valgte stemme bliver sendt trådløst FRA ConnectClip TIL dine høreapparater.

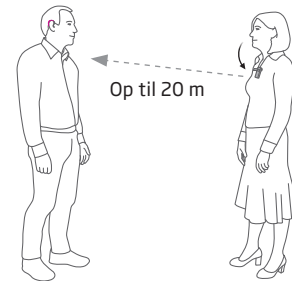

Indhold

Pakkens indhold	9
Oversigt - basisfunktioner	10
Oversigt - indikatorer	12
Kom godt i gang	14
Kom godt i gang	
A. Parring af høreapparaterne med ConnectClip	16
B. Parring af mobiltelefonen med din ConnectClip	18
Daglig brug	
Daglig brug: Tænd/Sluk	20
Daglig brug: Opladning	22
Brug af din ConnectClip med en mobiltelefon	
Brug af din ConnectClip med en mobiltelefon	24
Sådan sikrer du, at ConnectClip er forbundet til telefonen	25
Modtage opkald	26
Foretage opkald	28
Avancerede headset-funktioner	29

Lytte til musik	
Lytte til musik	30
Brug af din ConnectClip som parttermikrofon	
Brug af din ConnectClip som parttermikrofon	32
Valg af mikrofon-indstilling	33
Tænd/sluk for lyden fra parttermikrofonen	34
Justering af parttermikrofonens lydstyrke	35
Tænd/sluk for lyden fra parttermikrofonen på dine høreapparater	36
Rengøring af ConnectClip	37
Brug af din ConnectClip som fjernbetjening til høreapparaterne	
Brug af din ConnectClip som fjernbetjening til høreapparaterne	38
Andre egenskaber og funktioner	39
Advarsler	40
Teknisk information	46
International garanti	49

Pakkens indhold

ConnectClip-pakken indeholder følgende:



ConnectClip



Halssnor - lang



Halssnor - normal



Pung



Denne guide
(Brugsanvisning)



Oplader
(varierer fra land til land)




Usb-kabel
(til opladning)




Beskyttelses-
cover

Oversigt - basisfunktioner

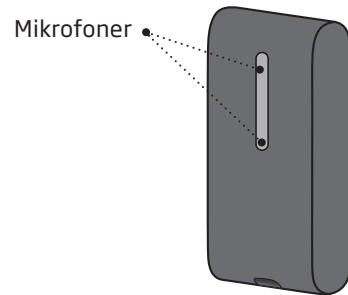

Forside

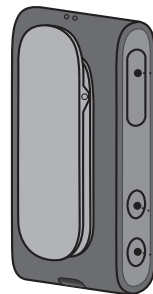


Bagside

Multiknap

- Tænd/sluk
- Besvar opkald
- Valg af indstilling


Lydstyrke

- Op
- Ned

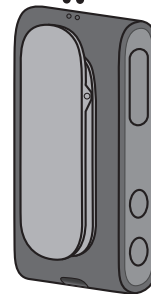

Opladerstik
(mikro-usb)

Clips (kan drejes), så ConnectClip kan sættes på tøjet.

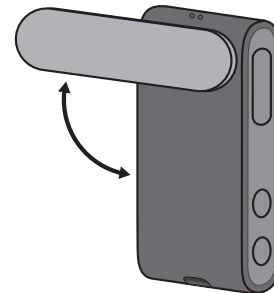

Oversigt - indikatorer


Status	Beskrivelse	
	Blinkende gult	Søger efter høreapparater
	Konstant gult	Dvaletilstand. Høreapparater er tilsluttet. Ej forbundet til telefon
	Blinkende blå	Søger efter mobiltelefon (parring)
	Konstant blå	Forbundet til en mobiltelefon
	Konstant grønt	Igangværende telefonsamtale; Headset (HFP), Mobil
	Blinkende grønt	Indgående opkald
	Konstant orange	Musik; Mobiltelefon (A2DP)
	Konstant magenta	Partnermikrofon-indstilling
	Blinkende magenta	Forbindelse genoprettes med partnermikrofon

Strøm	Beskrivelse	
	Konstant rødt	Lavt batteriniveau
	Konstant grønt	Tændt - lader ikke
	Blinkende grønt	Tændt - lader
	Aftagende grønt	Tændt - fuldt opladet
	Blinkende orange	Slukket - lader
	Konstant orange	Slukket - fuldt opladet

Kom godt i gang


Inden du kan bruge ConnectClip med dine høreapparater, skal høreapparater og ConnectClip parres/forbindes. Hvis du skal bruge din ConnectClip med en mobiltelefon kræver det også, at ConnectClip parres/forbindes med din mobiltelefon.

1. Parring af høreapparater og ConnectClip

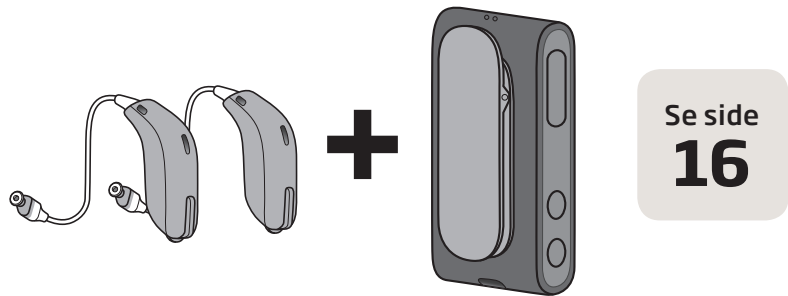

Se side
16

2. Parring af ConnectClip og mobiltelefon

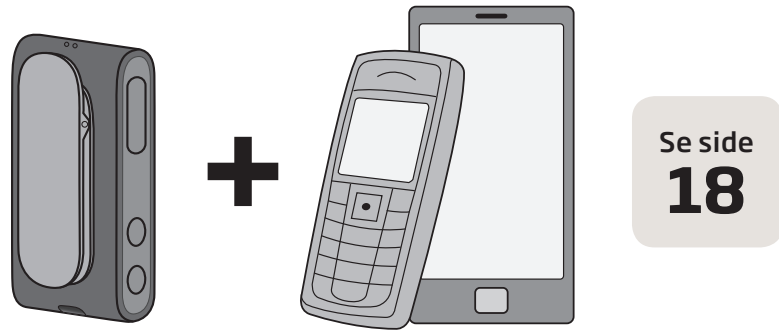


Se side
18

A. Parring af høreapparaterne med ConnectClip

1. Sørg for, at din ConnectClip er slukket (se side 20)

Hold multiknappen inde i ca. 6 sek.,
indtil **strømindikatoren SLUKKER**. ●

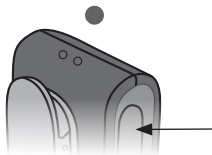


2. Sæt høreapparater i parringstilstand

Genstart høreapparaterne for at aktivere parringstilstand.
Du kan se, hvordan du slukker dine høreapparater
og tænder dem igen i brugsanvisningen til dine
høreapparater.

3. Høreapparaterne er nu klar

til at blive forbundet med din ConnectClip.
Du har nu ca. 3 min. til at afslutte parringen.

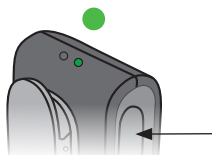


4. TÆND din ConnectClip



Hold multiknappen inde i ca. 3 sek. indtil
strømindikatoren lyser **KONSTANT GRØNT**. ●

5. Din ConnectClip vil nu søge efter dine høreapparater

Lampen **BLINKER GULT**. ●

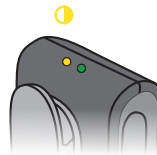

6. Placér din ConnectClip og begge høreapparater tæt ved hinanden (maks. afstand 20 cm).

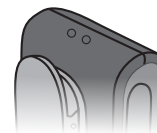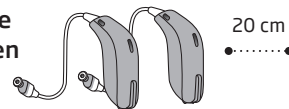


7. Forbindelse oprettes til høreapparaterne

Det vises ved at lampen lyser **KONSTANT GULT**. ●




B. Parring af mobiltelefonen med din ConnectClip

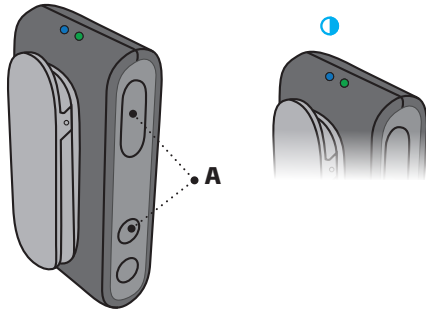

Sæt ConnectClip i parringstilstand

Hold multiknappen OG lydstyrke op-knappen inde i ca. 6 sek. (A), indtil lampen BLINKER BLÅT. ❶

Din ConnectClip er nu i parringstilstand i ca. 3 min.

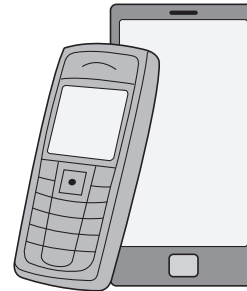

Gør mobiltelefonen klar til parring

Tænd for Bluetooth. Søg efter/ Dan par med ConnectClip.

Du finder normalt dette under Indstillinger/Bluetooth på din telefon.

Indtast pinkode

Hvis din telefon beder om en pinkode, skal du indtaste 0000 (4 x nul).



Parring gennemført


Når din ConnectClip er parret med din mobiltelefon lyser lampen KONSTANT BLÅT. ●

Daglig brug: Tænd/Sluk



• TÆND ●

Hold multiknappen inde i ca. 3 sek.,
indtil strømindikatoren lyser
KONSTANT GRØNT.

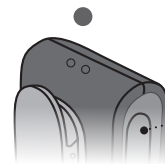

• SLUK ●

Hold multiknappen inde i ca. 6 sek.,
indtil strømindikatoren SLUKKER.

Brug	Kapacitet
Typisk daglig brug	16 timer: Op til 2 timers lydstreaming + 2 timer telefon + 12 timer standby
Standby (tændt, uden streaming)	Op til 36 timer
Musik eller partnermikrofon	Op til 5 timer
Telefon	Op til 6 timer

Daglig brug: Opladning




- **Lavt batteriniveau** ●

Når der er omkring 30 minutters streamingtid tilbage, lyser strømindikatoren RØDT.



- **Opladning** ●

Sæt den vedlagte oplader i stikket (mikro-usb) på din ConnectClip.
Strømindikatoren BLINKER GRØNT eller ORANGE.

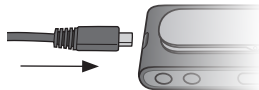

Opladningsindikatorer

Oplader (ConnectClip tændt)	Blinker	●
Fuldt opladet (ConnectClip tændt)	Aftager	●
Oplader (ConnectClip slukket)	Blinker	●
Fuldt opladet (ConnectClip slukket)	Konstant	●

Opladningstid:
2 timer for fuld opladning, når den medfølgende strømforsyning bruges.

Vigtigt


Ved opladning skal opladningsindikatorerne lyse som beskrevet i denne brugsanvisning. Hvis ingen af opladningsindikatorerne lyser, skal du frakoble enheden fra opladeren og kontakte din hørespecialist.



Vigtigt

Når du oplader ConnectClip, skal du bruge den medfølgende originale strømforsyning på 5,0V/1A, der er CE og sikkerhedsmærket.


Brug af din ConnectClip med en mobiltelefon

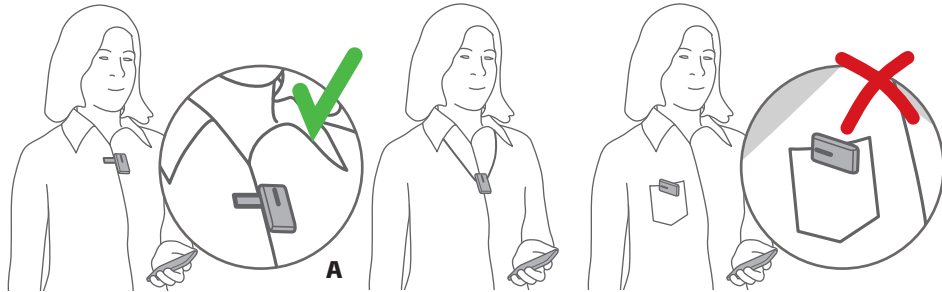

VIGTIGT

Din ConnectClip skal bæres som vist for bedst mulig ydelse. Det er vigtigt, at mikrofonen vender mod din mund (A), og at din ConnectClip ikke er dækket af tøj el. lign. Den maksimale afstand mellem ConnectClip og mobiltelefon er 10 m.

Sådan sikrer du, at ConnectClip er forbundet til telefonen

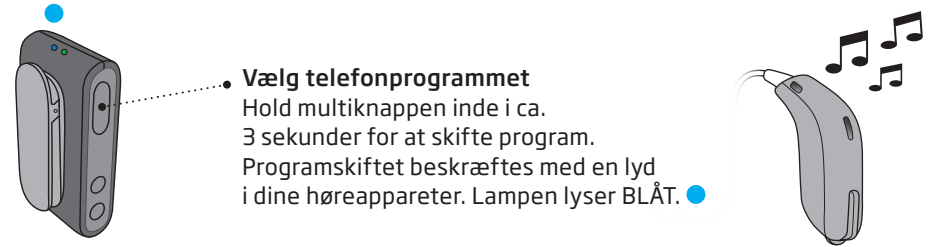

Status	Indstilling
●	Dvaletilstand. Tilsluttet til høreapparaterne. Ikke forbundet med en mobiltelefon
●	Forbundet til en mobiltelefon
●	Partnermikrofonindtilling

Modtage opkald



Telefonen er forbundet

Når din ConnectClip er tændt og inden for mobiltelefonens rækkevidde vil forbindelse oprettes automatisk.

Lampen lyser KONSTANT BLÅT. ●



Telefonen ringer

Når telefonen ringer, vil du høre et signal (og hvis tilgængeligt ringetonen fra din telefon) i dine høreapparater.

Lampen BLINKER GRØNT. ●



Besvar opkald

Enten kan du trykke kort på multiknappen (A) - eller besvare opkaldet fra din mobiltelefon.

Når der er forbindelse skifter lampen til KONSTANT GRØNT. ●




Afslut opkald

Enten kan du trykke kort på multiknappen (A) - eller afslutte samtalen fra din mobiltelefon.

Lampen lyser KONSTANT BLÅT. ●

Foretage opkald

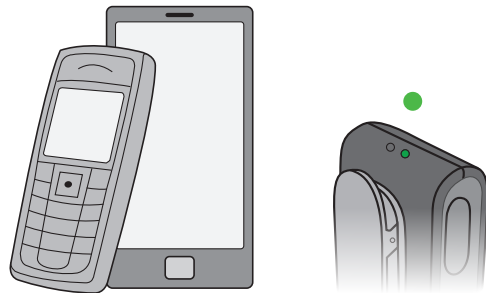

For at foretage et opkald skal du bruge mobiltelefonen. Opkaldet bliver automatisk forbundet til din ConnectClip.

Når du har forbindelse skifter lampen til KONSTANT GRØNT. ●

Avancerede headset-funktioner

Stemmeopkald / Stemmekommandoer

Når der er forbindelse til en mobiltelefon, vil et dobbelttryk på multiknappen aktivere funktionen stemmeopkald, hvis telefonen supporterer dette.

Afvis opkald


Et langt tryk på knappen lydstyrke ned, når telefonen ringer, afviser opkaldet.

Mute af høreapparatmikrofonerne (kun lyd fra partnermikrofonen)

Hold knappen lydstyrke ned inde i ca. 3 sek. for at mute høreapparaternes mikrofoner.

Tryk kort på lydstyrke op eller ned for at slå høreapparatmikrofonerne til igen.

Lytte til musik

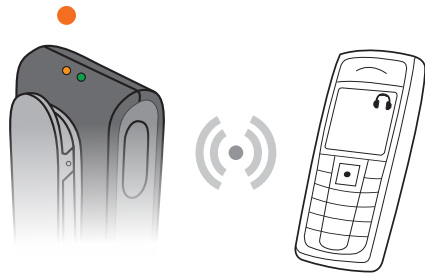

Trådløs lyd (A2DP)

Hvis ConnectClip er forbundet til en mobiltelefon, eller anden enhed, via Bluetooth, vil du automatisk få musikken fra telefonen/enheden i dine høreapparater.

Lampen lyser ORANGE. ●

Du behøver ikke trykke på noget på din ConnectClip.


Status	Beskrivelse
●	ConnectClip er tændt - og streamer musik fra telefonen

Justering af lydstyrke


Når du lytter til musik, kan lydstyrken for det streamede signal justeres ved hjælp af knapperne lydstyrke op/ned.

Afbryd lyden på telefonen

Et kort tryk på multiknappen vil afbryde lyden. Brug telefonen til at tænde for lyden.

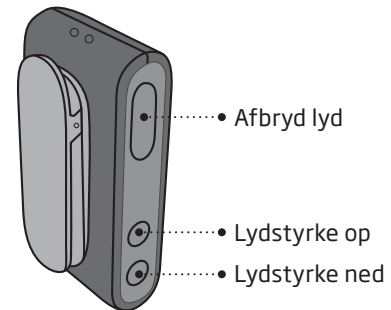

Brug af din ConnectClip som parttermikrofon

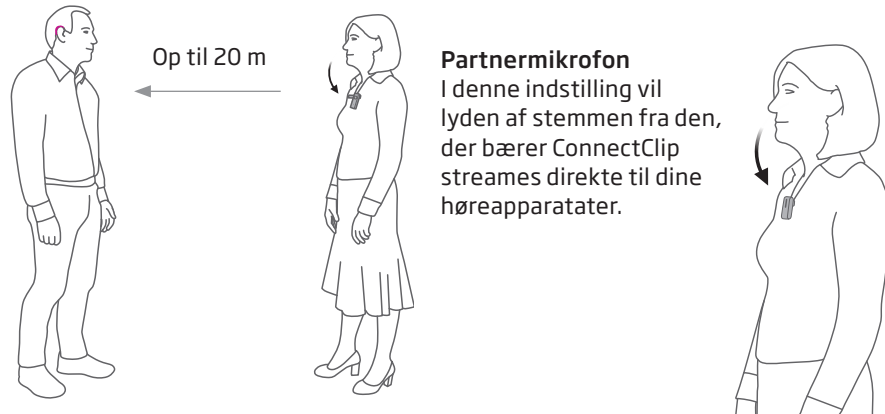

Op til 20 m


Parttermikrofon

I denne indstilling vil lyden af stemmen fra den, der bærer ConnectClip streames direkte til dine høreapparater.

VIGTIGT

Sørg for, at mikrofonen vender mod talerens mund og at den ikke er dækket af tøj el. lign.

Valg af mikrofon-indstilling

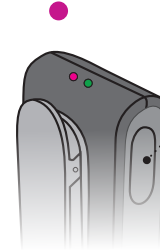

Vælg mikrofon-indstilling

Hold multiknappen inde i ca. 3 sek. for at skifte indstilling. Ændringen bekræftes med en lyd i dine høreapparater. Lampen lyser KONSTANT MAGENTA.



Status	Beskrivelse
●	ConnectClip er tændt. I dvaletilstand, dvs. ikke forbundet med en telefon
●	Forbundet til en mobiltelefon
●	ConnectClip er tændt - og i parttermikrofon-indstilling

Tænd/sluk for lyden fra partnermikrofonen



Sluk for lyden fra mikrofonen

Hold multiknappen (A) inde i ca. 3 sek. for at slukke for lyden fra mikrofonen til høreapparaterne og for at slå høreapparaterne tilbage på deres normale program.

Statuslampen skifter til GULT ● eller BLÅT. ●

Justering af partnermikrofonens lydstyrke


Lydstyrke op eller lydstyrke ned

Det streamede signal kan justeres ved hjælp af lydstyrkeknapperne (op/ned).

Mute af høreapparatmikrofonerne (kun lyd fra partnermikrofonen)

Hold knappen lydstyrke ned inde i ca. 3 sek. for at mute høreapparaternes mikrofoner.

Tryk kort på lydstyrke op eller ned for at slå høreapparatmikrofonerne til igen.

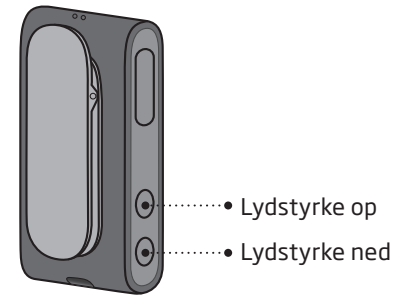

Tænd/sluk for lyden fra partnermikrofonen på dine høreapparater



P1 --> P2 --> TV --> mikrofon

Et langt tryk på høreapparatknappen vil skifte til det næste program i rækken i høreapparaterne.

Når du når til partnermikrofon-programmet, vil du høre indikatoren for partnermikrofon.

For at slukke for lyden fra mikrofonen skal du blot skifte tilbage til et høreapparatprogram.

VIGTIGT

Se høreapparaternes brugsanvisning for information om funktionaliteterne for din specifikke høreløsning.

Rengøring af ConnectClip

VIGTIGT

Brug en blød, tør klud til at tørre din ConnectClip af med. Den må aldrig vaskes eller nedsænkes i vand eller andre væsker.

Brug af din ConnectClip som fjernbetjening til høreapparaterne

Når din ConnectClip ikke streamer, fungerer den som fjernbetjening til dine høreapparater.



- **Lydstyrke op**
- kort tryk
- **Lydstyrke ned**
- kort tryk



- **Næste program**
- Hold knappen inde i 3 sek. for at skifte program.
- **Mute høreapparat-mikrofoner - langt tryk.**
Et kort tryk på lydstyrke op eller ned vil slå lyden til igen.

VIGTIGT

Maksimal afstand mellem ConnectClip og høreapparater er 2 m.

Andre egenskaber og funktioner

En forbindelse ad gangen

Når en ConnectClip er parret med flere enheder (op til otte), vil den kun oprette forbindelse til den først tilgængelige telefon inden for rækkevidde.

Ingen opkald, når den bruges som partermikrofon

Når du bruger din ConnectClip som partermikrofon, vil der ikke være forbindelse til mobiltelefonen.

Timeout (uden for rækkevidde) i mikrofonindstilling

Hvis din ConnectClip er uden for høreapparaternes rækkevidde, vil høreapparaterne slå over på det primære program efter 90 sek.

Slet Bluetooth- parringer

Hold multiknappen, lydstyrke op og ned inde i 10 sek. for at slette alle Bluetooth-parringer. Det vises ved at statuslampen BLINKER RØDT.

Advarsler

Før du tager din ConnectClip i brug, skal du omhyggeligt sætte dig ind i nedenstående generelle advarsler og i de øvrige oplysninger i denne brugsanvisning for at sikre den personlige sikkerhed og korrekt brug. Kontakt din hørespecialist, hvis du oplever uventede funktioner eller episoder med ConnectClip.

Kvælningsfare og risiko for at sluge små dele

ConnectClip og de medfølgende dele skal holdes uden for rækkevidde af børn og andre, som kunne komme til at sluge dele eller på anden måde skade sig selv. Søg omgående læge, hvis nogen kommer til at sluge en del.

Eksplodingsrisiko

Din ConnectClip indeholder ikke nok strøm til at forårsage brand under normale betingelser. ConnectClip er dog ikke afprøvet i henhold til internationale standarder for omgivelser med eksplosionsrisiko. Vi anbefaler, at ConnectClip ikke bruges de steder, hvor der er eksplosionsfare.

Advarsler

Røntgen, CT-, MR-, PET-scanning, elektroterapi og operation

Fjern ConnectClip inden røntgen, CT-, MR-, PET-scanning, elektroterapi eller operation osv., da ConnectClip ellers kan tage skade ved eksponering til kraftige elektromagnetiske felter.

Varme og kemikalier

Din ConnectClip må aldrig udsættes for høje temperaturer, fx efterlades i en varm bil parkeret i solen. ConnectClip må ikke tørres i mikrobølgeovn eller andre typer af ovne. Kemikalier i kosmetik, hårlak, parfume, aftershave lotion, solcreme og myggespray kan ødelægge din ConnectClip. Læg altid din ConnectClip fra dig, inden du bruger sådanne produkter. Lad produktet tørre helt, inden du tager den i brug.

Interferens

Din ConnectClip er blevet grundigt afprøvet for interferens i overensstemmelse med de strengeste internationale standarder. Dog kan der forekomme interferens mellem din ConnectClip og andre enheder (fx visse mobiltelefoner, walkie-talkier, butiksalarm-systemer og andre trådløse enheder). Hvis du oplever interferens, skal du øge afstanden mellem din ConnectClip og den forstyrrende kilde.

Advarsler

Brug i trafikken

Brug af ConnectClip kan distrahere dig. Vær opmærksom på dine omgivelser, når du bruger ConnectClip. Der henvises til de nationale færdselsregler vedrørende brugen af kommunikationsudstyr i trafikken.

Brug om bord på fly

Din ConnectClip har Bluetooth. ConnectClip bør ikke bruges om bord på fly, medmindre det specifikt er tilladt af flypersonalet.

Aktive implantater

ConnectClip er blevet grundigt testet og kategoriseret til menneskelig brug i overensstemmelse med internationale standarder for human eksponering (specifik absorberingsrate - SAR), induceret elektromagnetisk effekt og spænding ind i menneskekroppen. Eksponeringsværdierne ligger langt under internationalt accepterede sikkerhedsgrænseværdier for SAR, induceret elektromagnetisk effekt og spænding i menneskekroppen, som defineres i standarderne for menneskers sundhed og sameksistens med aktive medicinske implantater som pacemakere og hjertedefibrillatorer.

Advarsler

Genopladeligt batteri

Forsøg ikke at åbne ConnectClip, da det kan skade batteriet.

Forsøg aldrig at udskifte batteriet. Send enheden til leverandøren, hvis batteriet skal udskiftes. Servicegarantien bortfalder, hvis der er tegn på forsøg på at åbne enheden.

Sikkerheden ved genopladning af batterier via usb-stikket afgøres af den eksterne signalkilde. Når enheden er tilsluttet eksternt udstyr, der sidder i en stikkontakt, skal det opfylde IEC-62368 (eller IEC-60065, IEC-60950 indtil juni 20, 2019) eller tilsvarende sikkerhedsstandarder.

Tilslutning til eksternt udstyr

Sikkerheden ved brug af ConnectClip, når det er forbundet eksternt udstyr (via et aux-inputkabel, usb-kabel eller direkte forbundet), bestemmes af den eksterne signalkilde. Når apparatet er forbundet til eksternt udstyr, der sidder i en stikkontakt, skal det opfylde IEC-62368 (eller IEC-60065, IEC-60950 indtil juni 20, 2019) eller tilsvarende sikkerhedsstandarder.

Advarsler

Krydskontrol

Din ConnectClip skal holdes uden for rækkevidde af børn og andre, som kunne finde på at bruge den uhensigtsmæssigt, for at sikre din personlige sikkerhed og undgå forkert brug.

Brug af halssnor

Hvis halssnoren ved et uheld skulle hænge fast i noget, er den designet, så den automatisk knækker. Halssnoren må derfor aldrig forkortes eller ændres på en uautoriseret måde. Halssnoren bør ikke bruges af børn under 36 måneder.

Mulige bivirkninger

I yderst sjældne tilfælde kan materialer i din ConnectClip, som ellers ikke er allergene, irritere huden eller medføre andre bivirkninger. Søg læge, hvis du oplever disse bivirkninger.

Advarsler

Mobiltelefon-kompatibilitet

Se www.oticon.dk for en liste over de mobiltelefoner, som er blevet grundigt testet af oticon og som opfylder minimumskravene for kompatibilitet på testtidspunktet. Oticon fraskriver sig dog ansvaret for kompatibilitet generelt. I særdeleshed er Oticon ikke ansvarlig for inkompatibilitet som resultat af fremtidige opdateringer af mobiltelefonerne og heller ikke tilfælde af inkompatibilitet, som ikke er omfattet/registreret i disse tests. Oticon er ikke økonomisk ansvarlig med hensyn til refundering af udgifter til mobiltelefoner, som ikke virker, som forventet.

Vi anbefaler, at du tjekker ovennævnte liste, før du køber en mobiltelefon.

Teknisk information

Brugsbetingelser:

Transport- og opbevaringsforhold:

Temperatur og luftfugtighed må ikke overstige de nedenfor anførte grænseværdier i længere perioder i forbindelse med transport og opbevaring:

- Temperatur: -20°C til +60°C
- Fugtighed: 15 - 93 %, ikke-kondenserende

Driftsmiljøbetingelser:

- Temperatur: +5°C til 40°C
- Fugtighed: 15 - 93 %, ikke-kondenserende
- Atmosfærisk tryk: 700 hPa til 1060 hPa

ConnectClip indeholder også en radiotransceiver, der anvender Bluetooth Low Energy (BLE), og en proprietær kortrækkende radioteknologi, der begge fungerer ved ISM-båndet ved 2.4 GHz. GHz Radiosenderne er svage og altid under 50 mW, svarende til 17 dBm i total udstrålet effekt. ConnectClip opfylder internationale standarder for radiosendere, elektromagnetisk kompatibilitet og human eksponering. På grund af den begrænsede plads på ConnectClip findes de relevante mærkninger vedrørende godkendelser i denne brugsanvisning.

USA og Canada

Denne enhed indeholder et radiomodul, som er certificeret i henhold til:

FCC ID: 2ACAHAC01

IC: 11936A-AC01

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede radiostandardspecifikationer (RSS).

Brug af enheden er underlagt følgende to betingelser:

- (1) enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og
- (2) enheden skal acceptere al modtaget interferens, heriblandt interferens, der kan forårsage uønsket brug.

Bemærk:

Ændringer eller justeringer af enheden, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige producent, kan medføre, at garantien bortfalder.

Denne Klasse B digitale enhed opfylder kravene i den canadiske ICES-003.

Bemærk: Denne enhed er blevet testet og fundet at opfylde grænserne for en Klasse B digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Denne enhed genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan den forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis denne enhed forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke enheden, opfordres brugeren til at forsøge udbedre forholdene på en eller flere af følgende måder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem enheden og modtageren.
- Tilslut enheden til et andet udtag på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt producenten eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

International garanti

Din ConnectClip har fra producentens side en begrænset international produktgaranti i 12 måneder fra leveringsdato. Garantien dækker materiale- og produktionsfejl i selve enheden, men ikke i tilbehør som fx batterier, ledninger, strømkabler osv. Garantien dækker ikke skader grundet fejlagtig/ukorrekt håndtering, forkert pleje eller brug, ulykker, reparationer foretaget af en uautoriseret tredjepart, ætsning, fremmede objekter inde i enheden eller forkert indstilling. Ovenstående garanti berører ikke de juridiske rettigheder, som er gældende under national lov for salg af forbrugsvarer. Din hørespecialist kan have udstedt en garanti, der er udvidet i forhold til ovenstående. Kontakt din hørespecialist for yderligere oplysninger.

Service

Tag din ConnectClip med til din hørespecialist, som har mulighed for at løse mindre problemer.

Producenten erklærer hermed, at denne ConnectClip (AC1A) er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Overensstemmelseserklæring kan indhentes hos producenten.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark
www.oticon.dk



Komponenter fra
elektronisk udstyr
må kun bortskaffes i
henhold til gældende
lokale regler.



Beskrivelse af symboler anvendt i denne brugsanvisning	
	Advarsler Tekst mærket med dette symbol skal læses, før produktet tages i brug.
	Producent Produktet er fremstillet af producenten, hvis navn og adresse er angivet ved siden af symbolet. Angiver producenten af medicinsk udstyr, som defineret i EU-direktiv 90/385/EØF, 93/42/EØF og 98/79/EF.
	CE-mærke Dette produkt er i overensstemmelse med EU-direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr.
	Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) Bortskaf dine høreapparater, tilbehør eller batterier i henhold til de lokale bestemmelser eller returner dem til din hørespecialist for bortskaffelse. Elektronisk udstyr omfattet af direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
	Symbol, der indikerer overholdelse af lovgivning (RCM - Regulatory Compliance Mark) Produktet overholder kravene til elektrisk sikkerhed, EMC og radiospektrum for produkter, der leveres til Australien og New Zealand.
	Bluetooth-logo Registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc., hvor ethvert brug af dette kræver en licens.

195093DK / 2019.04.03

	Indendørs brug Angiver, at produktet er kvalificeret til indendørs brug.
	Dobbelt isolering Angiver, at produktets strømforsyning er dobbelt isoleret. Dette betyder, at der er en meget lav risiko for enkeltfejl, dvs. enkeltfejlfejl kan ikke forekomme.
Beskrivelse af symboler anvendt på lovmæssig emballagemærkning	
	Hold tør Angiver en medicinsk enhed, der skal beskyttes mod fugt.
	Advarsels-symbol Se brugsanvisningen for advarsler.
	Katalognummer Angiver producentens katalognummer, så medicinsk udstyr kan identificeres.
	Serienummer Angiver producentens serienummer, så en bestemt medicinsk enhed kan identificeres.
INPUT: 5.0V  0.4mA (ex. 5.0V, 200mA)	Strømforsyningseffekt Angiver den hastighed, hvormed strøm sendes fra stikkontakten til det elektriske apparat.

195093DK / 2019.04.03



0000195093000001

oticon
PEOPLE FIRST

195093DK / 2019.04.03 / Firmware 1.1 eller nyere