


TUOTETIEDOT OTICON RIA2 PRO OTICON RIA2

Oticon | Ria2

Oticon Ria2 perustuu Inium Sense -alustaan. Ria2:n audiologiset ominaisuudet takaavat käyttäjälleen keskeisen suorituskyvyn ja mahdollistavat kunkin käyttäjän yksilöllisten kuuntelutarpeiden ja -tottumusten huomioimisen. Ria2 sisältää ohjelmia, jotka tukevat kuulemista vaikeissakin tilanteissa.

Ria2-tuoteperhe sisältää laajan valikoiman kojemalleja uudistetuista korvakäytäväkojeista monipuoliseen valikoimaan korvantauskojeita. Uusi mallivalikoima sisältää uudet pienemmät ei-langattomat IIC & CIC 75 V2 mallit, jotka sopivat entistä useammalle käyttäjälle pienen kokonsa ansiosta.

SOVITUSALUE

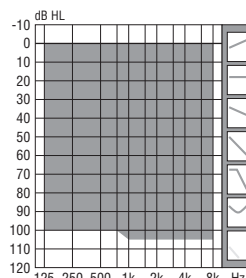

YouMatic Essential

YouMatic on asiakkaan yksilölliset tarpeet ja äänimielitymukset huomioiva automaattinen säätöjärjestelmä. YouMatic Essential helpottaa säätämään kojeen reaktio- ja vasteaikoja vastaamaan asiakkaan toiveita mukavuuden, puheen tuen ja äänen selkeyden osalta.

Free Focus Essential

Free Focus Essentialin avulla kahden suuntatoiminnon (Opti-Omni ja muut suuntatoiminnot) välillä siirtyminen on helppoa. Lisäksi on mahdollista siirtyä kokosuuntatoimintoon erittäin vaikeissa kuuntelutilanteissa.

Opti-Omni on uusi suuntatoiminto, joka on kehitetty erityisesti puheen ymmärtämisen helpottamiseksi. Se jäljittelee korvavalehden luonnollista tehtävää puhesignaalin kuulemisen parantamiseksi.

Inium Sense feedback shield

Inium Sense feedback shield on tehokas kierronestojärjestelmä, jonka mahdollistaa Oticonin Inium Sense -alusta. Inium Sense feedback shield on kahden teknologian yhdistelmä, jotka molemmat estävät ja ehkäisevät kiertoa heikentämättä signaalin laatua ja uhraamatta vahvistusta.

Järjestelmä valitsee ääniympäristön perusteella parhaan mahdollisen yhdistelmän reaaliaikaista vaihenkääntöä ja taajuussiirtoa tuottaen erinomaista äänenlaatua kaikissa tilanteissa.

Tuoteperheen ominaisuudet

- Binauraalinen synkronointi
- Binauraalinen koordinointi
- YouMatic Essential
- Sovituksen kanava-alue 8 kHz
- Inium Sense feedback shield
- Free Focus Essential
- Muisti
- Induktiokela
- AutoPuhelin-ohjelma
- Modulaatioperusteinen
- Yksikaistainen suuntatoiminto
- NAL-NL1, NAL-NL2 ja DSL v5.0a m[i/o]
- Joustavat miniFit-kuulokkeet
- ConnectLine ja kaukosäädin
- DAI ja FM mahdollisuus
- In-situ-audiometria (Genie)
- IP68 veden- & pölynkestäväksi sertifioitu (kaikki yksilölliset kojeet)
- IP58 vedenkestäväksi sertifioitu (kaikki korvantauskojeet)




oticon
PEOPLE FIRST

TUOTETIEDOT

BTE - MALLIT

RITE - MALLIT

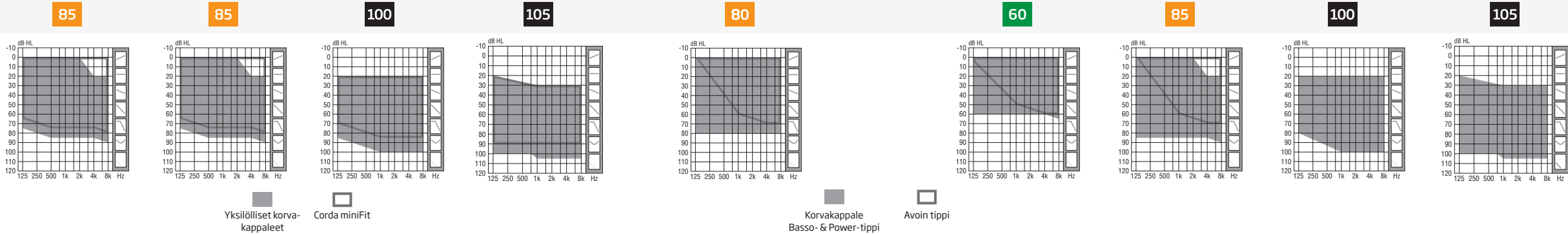

OSPL90 (huippu)	Keinokorva	131 dB SPL	126 dB SPL	135 dB SPL	138 dB SPL	127 dB SPL	115 dB SPL	127 dB SPL	132 dB SPL	135 dB SPL
	ZCC KYTKINONTELO	121 dB SPL	117 dB SPL	126 dB SPL	133 dB SPL	117 dB SPL	105 dB SPL	118 dB SPL	124 dB SPL	125 dB SPL
Suurin vahvistus (huippu)	Keinokorva	62 dB	61 dB	68 dB	73 dB	62 dB	46 dB	65 dB	66 dB	73 dB
	ZCC KYTKINONTELO	53 dB	51 dB	60 dB	67 dB	53 dB	35 dB	55 dB	57 dB	61 dB




Pariston koko	312	13	13	10	312	312
Sovitustasot	85	85 100	105	80	60 85 100 105	60 85 100 105
Pariston kesto (t)*	115-140	85-190	100-200	65-75	80-110	80-110
Langaton	■	■	■	■	■	■
Suuntatoiminto	■	■	■	■	■	■
Ohjelmapainike	■	■	■	■	■	■
Voimakkuussäädin	■	■	■	■	■	■
Induktiokela	■	■	■	■	■	■
AutoPuhelin	■	■	■	■	■	■
ConnectLine / kaukosäädin yhteensopiva	■	■	■	■	■	■
FM-yhteensopiva	■	■	■	■	■	■
Valinnainen ohjelmointi, johto #3	Johto #3 suoraan	Ohjelmointikenä	Johto #3 suoraan	Johto #3 suoraan	FlexConnect	Ohjelmointi-kenkä

vain Ria2 Pro:ssa

- Oletus
- Valinnainen

* Todellinen pariston kesto esitetään arviovalinā perustuen mittauksiin eri vahvistusasetuksilla ja ottotasoilla.

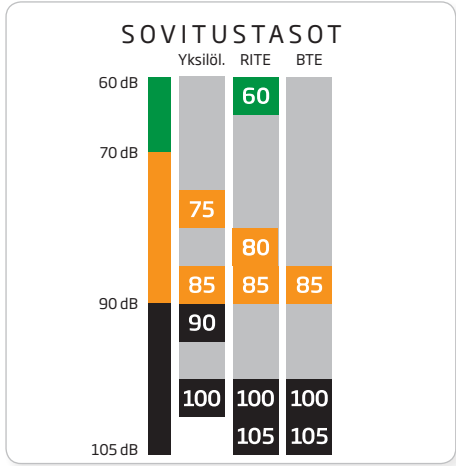


LISÄVARUSTEET


Lisävarusteet	Tyyppi/tiedot	Käytetään seuraavan kanssa
Lukittava paristokotelo	Saatavana 7 värissä Saatavana 8 värissä	RITE, miniBTE, BTE13 ja BTE13 105 miniRITE
DAI-liitin	AP900 AP1000	BTE13 ja RITE BTE13 105
Integroitava FM-vastaanotin	Amigo R12	BTE13 ja RITE
FM-liitin	FM 9 FM10 Yhteensopiva Amigo R2:n ja muiden yleisten vastaanottimien kanssa	BTE13 BTE13 105

TUOTETIEDOT

ITE - MALLIT

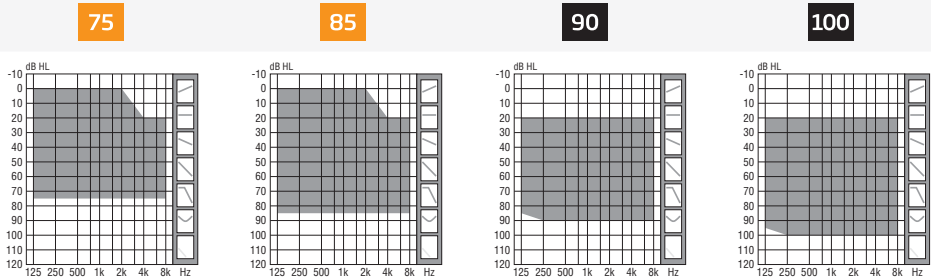

OSPL90 (huippu)	Keinokorva	119 dB SPL	126 dB SPL	130 dB SPL	135 dB SPL
	ZCC KYTKINONTELO	109 dB SPL	117 dB SPL	121 dB SPL	127 dB SPL
Suurin vahvistus (huippu)	Keinokorva	49 dB	59 dB	64 dB	71 dB
	ZCC KYTKINONTELO	38 dB	50 dB	54 dB	62 dB

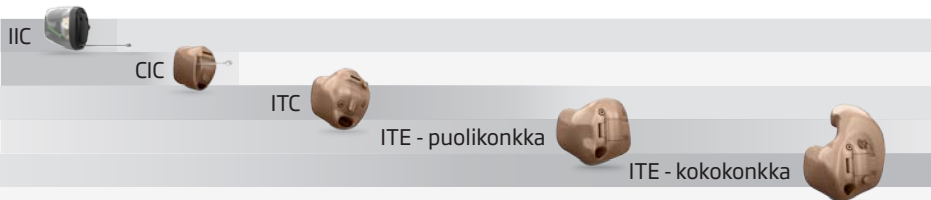

Pariston koko	10	312	13
Sovitustasot	75 85	75 85 90 100	75 85 90 100
Pariston kesto (t) ¹	95-100	75-135	140-250
Langaton	○	○	○
Suuntatoiminto		○	■
Ohjelmapainike	○ ²	○	○
Voimakkuussäädin	○ ²	○	○
Induktiokela		○	○
AutoPuhelin		○	○
ConnectLine / kaukosäädin yhteensopiva	○	○	○
FM-yhteensopiva			
Valinnainen ohjelmointi, johto #3	Programming Adaptor Mini ³ FlexConnect Mini ⁴	FlexConnect Mini	FlexConnect Mini

IIC saatavilla vain Ria2 Pro 75:ssä

☞ Oletus
Valinnainen

- 1) Todellinen pariston kesto esitetään arviovälinä perustuen mittauksiin eri vahvistusasetuksilla ja ottotasoilla.
- 2) Valinta saatavilla vain CIC:ssä
- 3) Ei-langaton IIC & CIC 75 kojeet mar-raskuusta 2016 lähtien
- 4) Langattomat ja ei-langattomat kojeet ennen marraskuuta 2016

ITE - MALLIT

Vahasuoja	ei-langaton IIC ja CIC ³	ProWax miniFit
	langattomat ja ei-langattomat kojeet ⁴	ProWax
	Mikrofonikuuloke, paristotyyppi 10	T-Cap
	Mikrofonikuuloke, paristotyyppi 312 ja 13	O-Cap
Kojeissa, joissa on 312-paristo, paristokotelo saattaa olla vaakasuorassa riippuen korvan muodosta.		
Oticon optimoi sovituksen ja ilmastoinnin oletuksena kuulonaleneman, halutun kojemallin ja korvan muodon mukaan.		

OLOSUHTEET

Käyttöolosuhteet	Lämpötila: +1°C - 40°C Suhteellinen kosteus: 5-93 %, ei-tiivistyvä
Säilytys- ja kuljetusolosuhteet	Lämpötila ja kosteus eivät saa ylittää annettuja arvoja pitkiä aikoja kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Lämpötila: -25°C - +60°C Suhteellinen kosteus: 5-93 %, ei-tiivistyvä

SOVITUS


Oticon Ria2 -kojeet ohjelmoidaan Genie 2015.2 sovitushjelmalla tai uudemmalla, joka on yhteensopiva NOAH 3:n tai uudemman kanssa.

Langaton sovitus - FittingLINK
FittingLINK muodostaa langattoman yhteyden (Bluetooth) tietokoneen ja yhden tai kahden langattomasti sovitettavan kuulokojeen välille. Lisäksi FittingLINKiä voidaan käyttää USB-johdolla tietokoneeseen yhdistettynä.


Langallinen sovitus
Käytä ohjelmointijohtoa #3.

VÄRIVAIHTOEHDOT


RITE- JA KORVANTAUSKOJEET

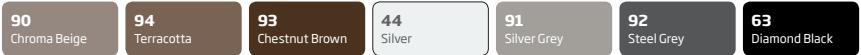

LISÄVÄRIT

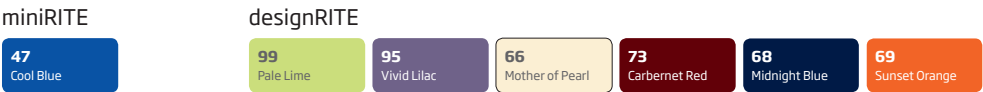

YKSILÖLLISET MALLIT

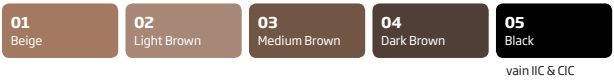

POWER FLEX - KORVAKAPPALEET



TUOTETIEDOT

miniRITE JA RITE

Kuulokeosa	Käytettävä miniFit-kuulokkeita.	
	Valittavana kolme kuuloketyyppiä, jotka on merkitty suorituskyvyn mukaan: 60, 85 ja 100.	
	60, 85 60, 100	pituudet 0-5 pituudet 1-5
Power Flex -korvakappale	Valittavana kaksi eri suorituskyvyllä varustettua Power Flex -korvakappaletta: 100 ja 105.	
Kuulokkeen johto	Erilliset johdot yhdistävät Power Flex -korvakappalet kojeisiin, saatavilla pituuksilla 1-5.	
Kuulokeliitin kojeeseen	Tyyppi C1 (merkitty pakkaukseen).	
ProWax miniFit	miniFit-kuulokkeet 60, 85 ja 100.	
ProWax	Power Flex -korvakappale Mikrokorvakappale Kevytteippi	

BTE - MALLIT

Koukku	Malliin BTE13 105 vaihdettavissa standardi tai lasten koukku, suodattimella ja ilman.
	Vaihdettavissa standardi tai lasten koukku. malleihin BTE13 85 ja BTE13 100.
	Vaihdettavissa standardi tai lasten koukku malliin miniBTE 85.
Suodatin	Suodatinosa saatavilla malleihin BTE13 85 ja miniBTE 85. Valinnainen mallille BTE13 100.
Ohutletkut	Corda miniFit (0,9 mm letku) malleihin miniBTE 85 ja BTE13 85.
	Corda miniFit Power (1,3 mm letku) malleihin BTE13 100 ja BTE13 105.
	Ohutletkuja on saatavilla -1-4 pituuksissa. Ohutletkuja liitettäessä on käytettävä mallikohtaisia liittimiä.
ProWax	Mikrokorvakappale Kevytteippi

designRITE

Kuulokeosa	Käytettävä miniFit 80 -kuuloketta, saatavana pituuksissa 1-5.
Kuulokeliitäntä kojeisiin	Tyyppi C3 (merkitty pakkaukseen).
ProWax miniFit	miniFit -kuuloke 80
ProWax	Mikrokorvakappale Kevytteippi

Saatavilla vain Ria2 Pro:ssa

RITE JA BTE MALLIT

Korvaosat	Kaikissa miniFit-kuulokkeissa ja miniFit-letkuissa täytyy käyttää miniFit-korvakappaleita.
	Kevytteippi ja mikrokorvakappale (edellyttää mallin ottamista).

miniFit tipit

Tyyppi	Koko
Avoin tippi	6, 8, 10 mm
Power-tippi	6, 8, 10, 12 mm
Bassotippi, yksi ventti	6, 8, 10, 12 mm
Bassotippi, tuplaventti	6, 8, 10, 12 mm
Grip Tip, ei venttiä	S & L
Grip Tip, iso ventti	S & L

Ominaisuudet	Oticon Ria2 Pro	Oticon Ria2
Sovitusmenetelmät	NAL, DSL	NAL, DSL
Binauraalinen synkronointi (automaattinen)	Kyllä	Ei
Binauraalinen koordinointi (painiketoiminnot)	Kyllä	Kyllä
YouMatic	Essential	Essential
Yksilölliset profiilit	3	3
Sovitusalue*	8 kHz	8 kHz
Inium Sense feedback shield	Kyllä	Kyllä
Free Focus	Essential	Essential
Automaattinen suuntatoiminto	Dual mode	Dual mode
Erityisohjelmat (musiikki, luennot, jne.)	Kyllä	Kyllä
Sovituskaistat	6	4
Taajuuskaistat	16	16

* Taajuusalue saatavilla sovituksen aikana tehtäviin säätöihin.

HUOMAA: designRITE ja IIC saatavilla vain Ria2 Pro:ssa

CUSTOM 75 (VAIN IIC)
OTICON RIA2 PRO



Mittakaava 1:1
IIC ei-langattomat.

Tekniset tiedot
Kaikki mittaukset on tehty kojeilla, joissa on ProWax-vahasuoja ja T-Cap-mikrofonisuoja.

75

OSPL90	Huippu	121 dB SPL	109 dB SPL
	1600 Hz	112 dB SPL	103 dB SPL
	Keskiarvo	110 dB SPL	103 dB SPL
Suurin vahvistus	Huippu	45 dB	36 dB
	1600 Hz	41 dB	33 dB
	Keskiarvo	40 dB	34 dB
Viitevahvistus		-	-
Taajuusalue		100-7300 Hz	100-7200 Hz
Induktiokelan antotaso (1600 Hz)	1mA/m kenttä	-	-
	10 mA/m kenttä	-	-
	SPLITS L/R	-	-
Harmoninen kokonaissärö (Ottotaso 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	2,0 %
	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Vastaa ottokohinasoa (A)	Omni	21 dB SPL	18 dB SPL
	Suunta	-	-
Pariston kulutus	Lepovirta	0,7 mA	0,7 mA
	Tyypillinen	0,7 mA	0,7 mA

Pariston kesto, laskettu, tuntia*

135

Koko: 10 (IEC PR70)

IRIL (IEC 60118-13-2011) 800/1400/2000 MHz: 16/16/<9 dB SPL

* Perustuu standardoituun paristonkulutuksen mittaukseen (IIC 60118-0). Todellinen paristonkesto riippuu pariston laadusta, käyttötavasta, kojeen toimintaominaisuuksista, kuulonalenemasta ja ääniympäristöstä.
Huomaa: Yksilölliset kojeet saatetaan toteuttaa alennetulla maksimivahvistuksella kojeen koon ja suorituskyvyn parantamiseksi.

Oticon | Ria2

CUSTOM 75
OTICON RIA2 PRO
OTICON RIA2



Mittakaava 1:1

Tekniset tiedot
Kaikki mittaukset suoritettu kojeilla, joissa on ProWax ja T-Cap- tai O-Cap-suoja. Omni-suuntatoimintoa käytetty, ellei muuta ole mainittu.

75

OSPL90	Huippu	119 dB SPL	109 dB SPL
	1600 Hz	112 dB SPL	104 dB SPL
	Keskiarvo	110 dB SPL	105 dB SPL
Suurin vahvistus	Huippu	49 dB	38 dB
	1600 Hz	43 dB	35 dB
	Keskiarvo	41 dB	35 dB
Viitevahvistus		36 dB	27 dB
Taajuusalue		100-7200 Hz	100-7100 Hz
Induktiokelan antotaso (1600 Hz)	1mA/m kenttä	73 dB SPL	-
	10 mA/m kenttä	93 dB SPL	-
	SPLITS L/R	-	82/82 dB SPL
Harmoninen kokonaissärö (Ottotaso 70 dB SPL)	500 Hz	2,0 %	< 2 %
	800 Hz	2,0 %	< 2 %
	1600 Hz	3,0 %	2,0 %
Vastaa ottokohinasoa (A)	Omni	22 dB SPL	20 dB SPL
	Suunta	31 dB SPL	29 dB SPL
Pariston kulutus	Lepovirta	1,0 mA	1,0 mA
	Tyypillinen	1,0 mA	1,0 mA

Pariston kesto, laskettu, tuntia*

135/140/260

Koko: 10 (IEC PR70) / 312 (IEC PR41) / 13 (IEC PR48)

IRIL (IEC 60118-13-2011) 800/1400/2000 MHz: 28/44/37 dB SPL

IRIL (IEC 60118-13-2011) IIC ja CIC 800/1400/2000 MHz: 17/33/26 dB SPL

* Perustuu standardoituun paristonkulutuksen mittaukseen (IIC 60118-0). Todellinen paristonkesto riippuu pariston laadusta, käyttötavasta, kojeen toimintaominaisuuksista, kuulonalenemasta ja ääniympäristöstä.
Huomaa: Yksilölliset kojeet saatetaan toteuttaa alennetulla maksimivahvistuksella kojeen koon ja suorituskyvyn parantamiseksi.

CUSTOM 85
OTICON RIA2 PRO
OTICON RIA2






Mittakaava 1:1

Tekniset tiedot
Kaikki mittaukset suoritettu kojeilla, joissa on ProWax ja T-Cap- tai O-Cap-suoja. Omni-suuntatoimintoa käytetty, ellei muuta ole mainittu.

85

KEINOKORVA




Mitattu
IEC 60118-0:n (1983) ja 60711:n (1981)
ja DIN 45605:n mukaisesti.

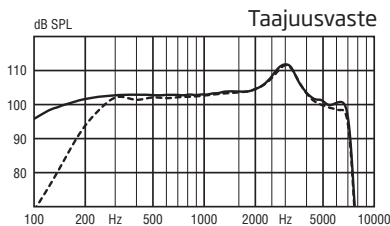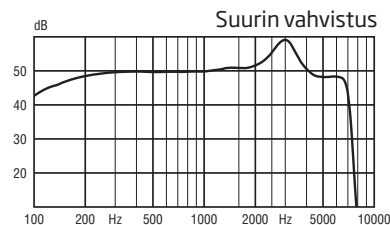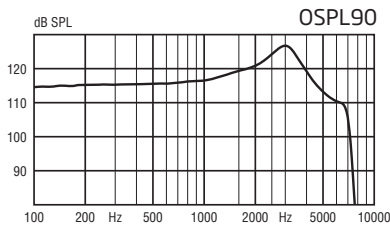

— Akustinen ottotaso: 60 dB SPL
- - - Magneettinen ottotaso: 31,6 mA/m

2CC KYTKINONTELO

Mitattu
ANSI S3.22:n (2003) ja S3.7:n (1995),
IEC 60118-7:n (2005) ja IEC 60318-5:n (2006) mukaisesti.

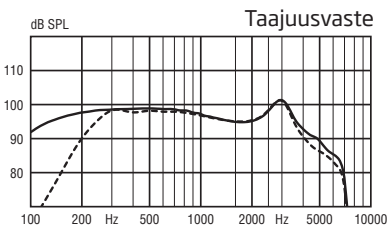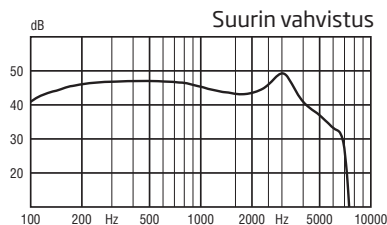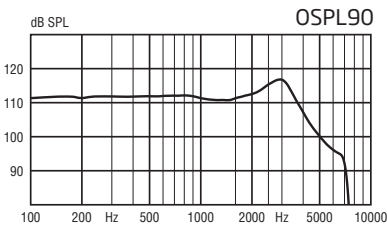

— Akustinen ottotaso: 60 dB SPL
- - - Magneettinen ottotaso: 31,6 mA/m

OSPL90	Huippu	126 dB SPL	117 dB SPL
	1600 Hz	119 dB SPL	111 dB SPL
	Keskiarvo	117 dB SPL	113 dB SPL
Suurin vahvistus	Huippu	59 dB	50 dB
	1600 Hz	51 dB	43 dB
	Keskiarvo	50 dB	45 dB
Viitevahvistus		44 dB	37 dB
Taajuusalue		100-7260 Hz	100-7050 Hz
Induktiokelan antotaso	1mA/m kenttä	81 dB SPL	-
	10 mA/m kenttä	101 dB SPL	-
	SPLITS L/R	-	90/90 dB SPL
Harmoninen kokonaissärö	500 Hz	2,0 %	< 2 %
	(Ottotaso 70 dB SPL)	800 Hz	< 2 %
	1600 Hz	3,0 %	2,0 %
Vastaa ottokohinasoa (A)	Omni	22 dB SPL	19 dB SPL
	Suunta	32 dB SPL	29 dB SPL
Pariston kulutus	Lepovirta	1,0 mA	1,0 mA
	Tyypillinen	1,0 mA	1,0 mA

Pariston kesto, laskettu, tuntia* 125/140/260

Koko: 10 (IEC PR70) / 312 (IEC PR41) / 13 (IEC PR48)

IRIL (IEC 60118-13-2011) 800/1400/2000 MHz: 21/39/ < 14 dB SPL

IRIL (IEC 60118-13-2011) IIC ja CIC 800/1400/2000 MHz: < 20/26/29 dB SPL

* Perustuu standardoituun paristonkulutuksen mittaukseen (IIC 60118-0). Todellinen paristonkesto riippuu pariston laadusta, käytöstavasta, kojeen toimintominaisuuksista, kuulonalenemasta ja ääniympäristöstä.
Huomaa: Yksilölliset kojeet saatetaan toteuttaa alennetulla maksimivahvistuksella kojeen koon ja suorituskyvyn parantamiseksi.

Oticon | Ria2

CUSTOM 90
OTICON RIA2 PRO
OTICON RIA2






Mittakaava 1:1

Tekniset tiedot
Kaikki mittaukset on tehty kojeilla, joissa on ProWax ja O-Cap-suoja. Omni-suuntatoimintoa käytetty, ellei muuta ole mainittu.

90

KEINOKORVA

Mitattu
IEC 60118-0:n (1983) ja 60711:n (1981)
ja DIN 45605:n mukaisesti.

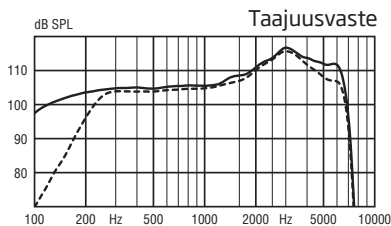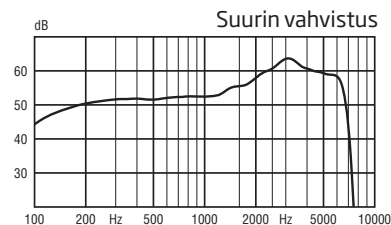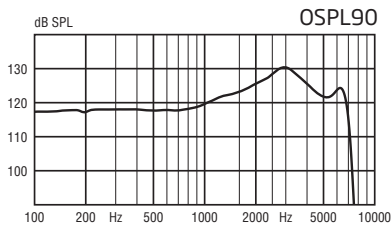

— Akustinen ottotaso: 60 dB SPL
- - - Magneettinen ottotaso: 31,6 mA/m

OSPL90	Huippu	130 dB SPL	121 dB SPL
	1600 Hz	123 dB SPL	115 dB SPL
	Keskiarvo	121 dB SPL	116 dB SPL
Suurin vahvistus	Huippu	64 dB	54 dB
	1600 Hz	56 dB	47 dB
	Keskiarvo	54 dB	49 dB
Viitevahvistus		48 dB	40 dB
Taajuusalue		100-7180 Hz	100-6980 Hz
Induktiokelan antotaso	1mA/m kenttä	85 dB SPL	-
	10 mA/m kenttä	105 dB SPL	-
	SPLITS L/R	-	93/93 dB SPL
Harmoninen kokonaissärö	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	(Ottotaso 70 dB SPL)	800 Hz	< 2 %
	1600 Hz	3,0 %	2,0 %
Vastaa ottokohinasoa (A)	Omni	23 dB SPL	19 dB SPL
	Suunta	34 dB SPL	29 dB SPL
Pariston kulutus	Lepovirta	1,0 mA	1,0 mA
	Tyypillinen	1,0 mA	1,0 mA

Pariston kesto, laskettu, tuntia* 140/260

Koko: 312 (IEC PR41) / 13 (IEC PR48)




IRIL (IEC 60118-13-2011) 800/1400/2000 MHz: 26/55/41 dB SPL

* Perustuu standardoituun paristonkulutuksen mittaukseen (IIC 60118-0). Todellinen paristonkesto riippuu pariston laadusta, käytöstavasta, kojeen toimintominaisuuksista, kuulonalenemasta ja ääniympäristöstä.
Huomaa: Yksilölliset kojeet saatetaan toteuttaa alennetulla maksimivahvistuksella kojeen koon ja suorituskyvyn parantamiseksi.

Oticon | Ria2

2CC KYTKINONTELO

Mitattu
ANSI S3.22:n (2003) ja S3.7:n (1995),
IEC 60118-7:n (2005) ja IEC 60318-5:n (2006) mukaisesti.

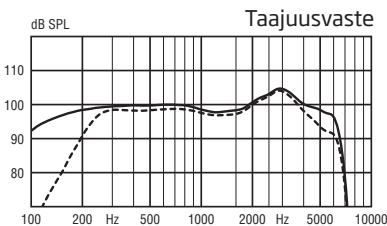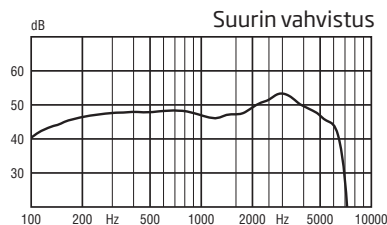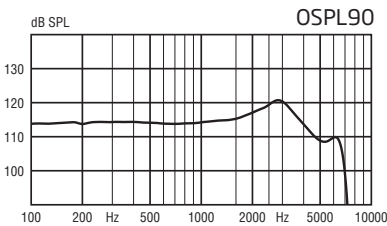

— Akustinen ottotaso: 60 dB SPL
- - - Magneettinen ottotaso: 31,6 mA/m

CUSTOM 100
OTICON RIA2 PRO
OTICON RIA2



Mittakaava 1:1

Tekniset tiedot

Kaikki mittaukset on tehty kojeilla, joissa on ProWax ja O-Cap-suoja. Omni-suuntatoimintoa käytetty, ellei muuta ole mainittu.

Varoitus kojeen sovittajalle

Kuulokojeen suurin antotaso saattaa ylittää 132 dB SPL (IEC 711). Kuulokojeen valinta ja sovitus tulee suorittaa erityisen huolella, koska on olemassa vaara vahingoittaa käyttäjän jäljellä oleva kuuloa.

100

OSPL90	Huippu	135 dB SPL	127 dB SPL
	1600 Hz	135 dB SPL	127 dB SPL
	Keskiarvo	130 dB SPL	123 dB SPL
Suurin vahvistus	Huippu	71 dB	62 dB
	1600 Hz	67 dB	59 dB
	Keskiarvo	65 dB	58 dB
Viitevahvistus		60 dB	48 dB
Taajuusalue		100-7029 Hz	100-6896 Hz
Induktiokelan antotaso (1600 Hz)	1mA/m kenttä	95 dB SPL	-
	10 mA/m kenttä	115 dB SPL	-
	SPLITS L/R	-	105/105 dB SPL
Harmoninen kokonaissärö (Ottotaso 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1600 Hz	2,0 %	< 2 %
Vastaa ottokohinasoa (A)	Omni	17 dB SPL	15 dB SPL
	Suunta	27 dB SPL	26 dB SPL
Pariston kulutus	Lepovirta	0,9 mA	0,9 mA
	Tyypillinen	0,9 mA	0,9 mA

Pariston kesto, laskettu, tuntia*

155/290

Koko: 312 (IEC PR41) / 13 (IEC PR48)

IRIL (IEC 60118-13-2011)

800/1400/2000 MHz: 15/45/28 dB SPL




* Perustuu standardoituun paristonkulutuksen mittaukseen (IIC 60118-0). Todellinen paristonkesto riippuu pariston laadusta, käytöstavasta, kojeen toimintaominaisuuksista, kuulonalenemasta ja ääniympäristöstä.

Huomaa: Yksilölliset kojeet saatetaan toteuttaa alennetulla maksimivahvistuksella kojeen koon ja suorituskyvyn parantamiseksi.

Oticon | Ria2

2CC KYTKINONTELO

Mitattu
ANSI S3.22:n (2003) ja S3.7:n (1995),
IEC 60118-7:n (2005) ja IEC 60318-5:n (2006) mukaisesti.

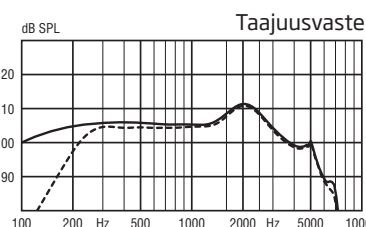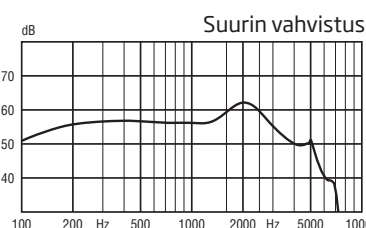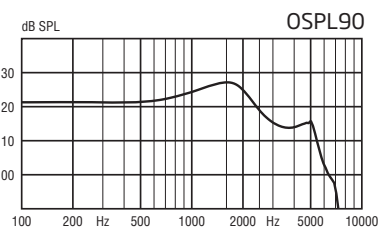

— Akustinen ottotaso: 60 dB SPL
--- Magneettinen ottotaso: 31,6 mA/m

designRITE 80
OTICON RIA2 PRO



Mittakaava 1:1

Tekniset tiedot

Omni-suuntatoimintoa käytetty, ellei muuta ole mainittu.

80

OSPL90	Huippu	127 dB SPL	117 dB SPL
	1600 Hz	120 dB SPL	112 dB SPL
	Keskiarvo	117 dB SPL	111 dB SPL
Suurin vahvistus	Huippu	62 dB	53 dB
	1600 Hz	53 dB	44 dB
	Keskiarvo	50 dB	47 dB
Viitevahvistus		45 dB	34 dB
Taajuusalue		100-7300 Hz	100-7000 Hz
Induktiokelan antotaso (1600 Hz)	1mA/m kenttä	-	-
	10 mA/m kenttä	-	-
	SPLITS L/R	-	-
Harmoninen kokonaissärö (Ottotaso 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Vastaa ottokohinasoa (A)	Omni	21 dB SPL	17 dB SPL
	Suunta	33 dB SPL	30 dB SPL
Pariston kulutus	Lepovirta	1,0 mA	1,0 mA
	Tyypillinen	1,3 mA	1,3 mA

Pariston kesto, laskettu, tuntia*

90

Koko: 10 (IEC PR70)

IRIL (IEC 60118-13-2011)




800/1400/2000 MHz: <17 dB SPL

* Perustuu standardoituun paristonkulutuksen mittaukseen (IIC 60118-0). Todellinen paristonkesto riippuu pariston laadusta, käytöstavasta, kojeen toimintaominaisuuksista, kuulonalenemasta ja ääniympäristöstä.

Oticon | Ria2

2CC KYTKINONTELO

Mitattu
ANSI S3.22:n (2003) ja S3.7:n (1995),
IEC 60118-7:n (2005) ja IEC 60318-5:n (2006) mukaisesti.

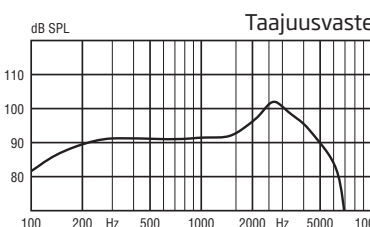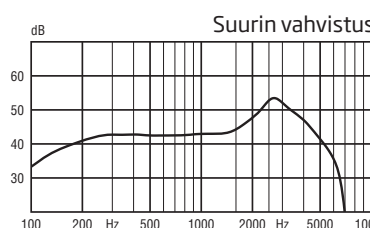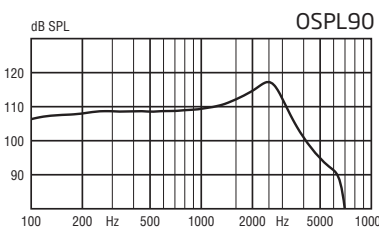

— Akustinen ottotaso: 60 dB SPL
--- Magneettinen ottotaso: 31,6 mA/m

miniRITE 60
OTICON RIA2 PRO
OTICON RIA2






Mittakaava 1:1

Tekniset tiedot
Omni-suuntatoimintoa käytetty,
ellei muuta ole mainittu.

KEINOKORVA

Mitattu
IEC 60118-0:n (1983) ja 60711:n (1981)
ja DIN 45605:n mukaisesti.

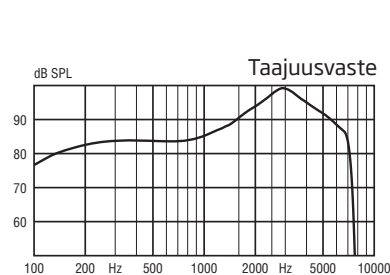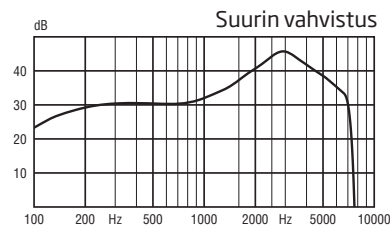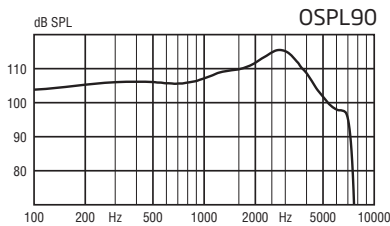

60

OSPL90	Huippu	115 dB SPL	105 dB SPL
	1600 Hz	110 dB SPL	101 dB SPL
	Keskiarvo	108 dB SPL	103 dB SPL
Suurin vahvistus	Huippu	46 dB	35 dB
	1600 Hz	37 dB	29 dB
	Keskiarvo	34 dB	30 dB
Viitevahvistus		30 dB	26 dB
Taajuusalue		100-7200 Hz	100-7000 Hz
Induktiokelan antotaso (1600 Hz)	1mA/m kenttä	-	-
	10 mA/m kenttä	-	-
	SPLITS L/R	-	-
Harmoninen kokonaissärö (Ottotaso 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Vastaa ottokohinasoa (A)	Omni	21 dB SPL	16 dB SPL
	Suunta	29 dB SPL	24 dB SPL
Pariston kulutus	Lepovirta	1,0 mA	1,0 mA
	Tyypillinen	1,1 mA	1,3 mA

Pariston kesto, laskettu, tuntia*

130

Koko 312 (IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13-2011) 800/1400/2000 MHz: 43/26/ <18 dB SPL

* Perustuu standardoituun paristonkulutuksen mittaukseen (IIC 60118-0). Todellinen paristonkesto riippuu pariston laadusta, käytöstavasta, kojeen toimintaominaisuuksista, kuulonalenemasta ja ääniympäristöstä.

Oticon | Ria2

miniRITE 85
OTICON RIA2 PRO
OTICON RIA2






Mittakaava 1:1

Tekniset tiedot
Omni-suuntatoimintoa käytetty,
ellei muuta ole mainittu.

KEINOKORVA

Mitattu
IEC 60118-0:n (1983) ja 60711:n (1981)
ja DIN 45605:n mukaisesti.

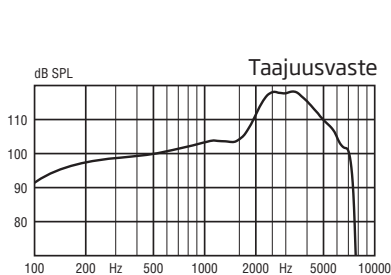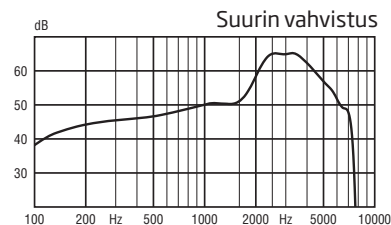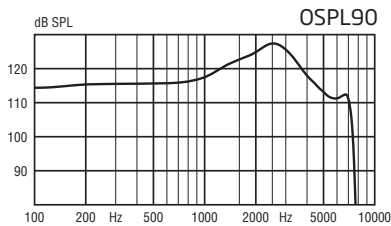

85

OSPL90	Huippu	127 dB SPL	118 dB SPL
	1600 Hz	123 dB SPL	114 dB SPL
	Keskiarvo	119 dB SPL	114 dB SPL
Suurin vahvistus	Huippu	65 dB	55 dB
	1600 Hz	51 dB	43 dB
	Keskiarvo	52 dB	47 dB
Viitevahvistus		44 dB	38 dB
Taajuusalue		100-7500 Hz	100-7200 Hz
Induktiokelan antotaso (1600 Hz)	1mA/m kenttä	-	-
	10 mA/m kenttä	-	-
	SPLITS L/R	-	-
Harmoninen kokonaissärö (Ottotaso 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	2,4 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Vastaa ottokohinasoa (A)	Omni	25 dB SPL	18 dB SPL
	Suunta	33 dB SPL	25 dB SPL
Pariston kulutus	Lepovirta	1,0 mA	1,0 mA
	Tyypillinen	1,1 mA	1,2 mA

Pariston kesto, laskettu, tuntia*

130

Koko 312 (IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13-2011) 800/1400/2000 MHz: 45/30/25 dB SPL

* Perustuu standardoituun paristonkulutuksen mittaukseen (IIC 60118-0). Todellinen paristonkesto riippuu pariston laadusta, käytöstavasta, kojeen toimintaominaisuuksista, kuulonalenemasta ja ääniympäristöstä.

miniRITE 100
OTICON RIA2 PRO
OTICON RIA2



Mittakaava 1:1

Tekniset tiedot
Omni-suuntatoimintoa käytetty,
ellei muuta ole mainittu.

Varoitus kojeen sovittajalle
Kuulokojeen suurin antotaso saattaa
ylittää 132 dB SPL (IEC 711). Kuulokojeen
valinta ja sovitus tulee suorittaa erityisen
huolella, koska on olemassa vaara vahin-
goittaa käyttäjän jäljellä oleva kuuloa.

100

OSPL90	Huippu	132 dB SPL	124 dB SPL
	1600 Hz	131 dB SPL	124 dB SPL
	Keskiarvo	126 dB SPL	121 dB SPL
Suurin vahvistus	Huippu	66 dB	57 dB
	1600 Hz	56 dB	49 dB
	Keskiarvo	58 dB	52 dB
Viitevahvistus		50 dB	44 dB
Taajuusalue		100-7500 Hz	100-7200 Hz
Induktiokelan antotaso (1600 Hz)	1mA/m kenttä	-	-
	10 mA/m kenttä	-	-
	SPLITS L/R	-	-
Harmoninen kokonaissärö (Ottotaso 70 dB SPL)	500 Hz	2,5 %	<2 %
	800 Hz	<2 %	<2 %
	1600 Hz	<2 %	<2 %
Vastaa ottokohinasoa (A)	Omni	22 dB SPL	16 dB SPL
	Suunta	30 dB SPL	25 dB SPL
Pariston kulutus	Lepovirta	1,0 mA	1,0 mA
	Tyypillinen	1,1 mA	1,3 mA

Pariston kesto, laskettu, tuntia*

130

Koko 312 (IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13-2011) 800/1400/2000 MHz: 46/28/23 dB SPL

* Perustuu standardoituun paristonkulutuksen mittaukseen (IIC 60118-0). Todellinen paristonkesto riippuu pariston laadusta, käytöstavasta, kojeen toimintaominaisuuksista, kuulonalenemasta ja ääninympäristöstä.

Oticon | Ria2

miniRITE 105
OTICON RIA2 PRO
OTICON RIA2



Mittakaava 1:1

Tekniset tiedot
Omni-suuntatoimintoa käytetty,
ellei muuta ole mainittu.

Varoitus kojeen sovittajalle
Kuulokojeen suurin antotaso saattaa
ylittää 132 dB SPL (IEC 711). Kuulokojeen
valinta ja sovitus tulee suorittaa erityisen
huolella, koska on olemassa vaara vahin-
goittaa käyttäjän jäljellä oleva kuuloa.

105

OSPL90	Huippu	135 dB SPL	125 dB SPL
	1600 Hz	133 dB SPL	123 dB SPL
	Keskiarvo	130 dB SPL	121 dB SPL
Suurin vahvistus	Huippu	72 dB	61 dB
	1600 Hz	65 dB	55 dB
	Keskiarvo	64 dB	55 dB
Viitevahvistus		57 dB	44 dB
Taajuusalue		100-7100 Hz	100-6900 Hz
Induktiokelan antotaso (1600 Hz)	1mA/m kenttä	-	-
	10 mA/m kenttä	-	-
	SPLITS L/R	-	-
Harmoninen kokonaissärö (Ottotaso 70 dB SPL)	500 Hz	2,5 %	<2 %
	800 Hz	2,0 %	<2 %
	1600 Hz	2,0 %	<2 %
Vastaa ottokohinasoa (A)	Omni	18 dB SPL	16 dB SPL
	Suunta	29 dB SPL	28 dB SPL
Pariston kulutus	Lepovirta	1,0 mA	1,0 mA
	Tyypillinen	1,1 mA	1,3 mA

Pariston kesto, laskettu, tuntia*

130

Koko 312 (IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13-2011) 800/1400/2000 MHz: 39/28/24 dB SPL

* Perustuu standardoituun paristonkulutuksen mittaukseen (IIC 60118-0). Todellinen paristonkesto riippuu pariston laadusta, käytöstavasta, kojeen toimintaominaisuuksista, kuulonalenemasta ja ääninympäristöstä.

RITE 60
OTICON RIA2 PRO
OTICON RIA2



Mittakaava 1:1

Tekniset tiedot
Omni-suuntatoimintoa käytetty,
ellei muuta ole mainittu.

60

OSPL90	Huippu	115 dB SPL	105 dB SPL
	1600 Hz	110 dB SPL	101 dB SPL
	Keskiarvo	108 dB SPL	103 dB SPL
Suurin vahvistus	Huippu	46 dB	35 dB
	1600 Hz	37 dB	29 dB
	Keskiarvo	34 dB	30 dB
Viitevahvistus		30 dB	26 dB
Taajuusalue		100-7200 Hz	100-7000 Hz
Induktiokelan antotaso	1mA/m kenttä	65 dB SPL	-
(1600 Hz)	10 mA/m kenttä	85 dB SPL	-
	SPLITS L/R	-	82/82 dB SPL
Harmoninen kokonaissärö	500 Hz	< 2 %	< 2 %
(Ottotaso 70 dB SPL)	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Vastaa ottokohinasoa (A)	Omni	21 dB SPL	16 dB SPL
	Suunta	29 dB SPL	24 dB SPL
Pariston kulutus	Lepovirta	1,0 mA	1,0 mA
	Tyypillinen	1,1 mA	1,3 mA

Pariston kesto, laskettu, tuntia*

130

Koko 312 (IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13-2011) 800/1400/2000 MHz: 27/46/51 dB SPL

* Perustuu standardoituun paristonkulutuksen mittaukseen (IIC 60118-0). Todellinen paristonkesto riippuu pariston laadusta, käytettävästä, kojeen toimintaominaisuuksista, kuulonalenemasta ja ääniympäristöstä.

Oticon | Ria2

RITE 85
OTICON RIA2 PRO
OTICON RIA2



Mittakaava 1:1

Tekniset tiedot
Omni-suuntatoimintoa käytetty,
ellei muuta ole mainittu.

85

OSPL90	Huippu	127 dB SPL	118 dB SPL
	1600 Hz	123 dB SPL	114 dB SPL
	Keskiarvo	119 dB SPL	114 dB SPL
Suurin vahvistus	Huippu	65 dB	55 dB
	1600 Hz	51 dB	43 dB
	Keskiarvo	52 dB	47 dB
Viitevahvistus		44 dB	38 dB
Taajuusalue		100-7500 Hz	100-7200 Hz
Induktiokelan antotaso	1mA/m kenttä	79 dB SPL	-
(1600 Hz)	10 mA/m kenttä	99 dB SPL	-
	SPLITS L/R	-	95/95 dB SPL
Harmoninen kokonaissärö	500 Hz	< 2 %	< 2 %
(Ottotaso 70 dB SPL)	800 Hz	2,4 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Vastaa ottokohinasoa (A)	Omni	25 dB SPL	18 dB SPL
	Suunta	33 dB SPL	25 dB SPL
Pariston kulutus	Lepovirta	1,0 mA	1,0 mA
	Tyypillinen	1,1 mA	1,2 mA

Pariston kesto, laskettu, tuntia*

130

Koko 312 (IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13-2011) 800/1400/2000 MHz: 19/41/36 dB SPL

* Perustuu standardoituun paristonkulutuksen mittaukseen (IIC 60118-0). Todellinen paristonkesto riippuu pariston laadusta, käytettävästä, kojeen toimintaominaisuuksista, kuulonalenemasta ja ääniympäristöstä.

Oticon | Ria2

RITE 100
OTICON RIA2 PRO
OTICON RIA2



Mittakaava 1:1

Tekniset tiedot
Omni-suuntatoimintoa käytetty,
ellei muuta ole mainittu.

Varoitus kojeen sovittajalle
Kuulokojeen suurin antotaso saattaa
ylittää 132 dB SPL (IEC 711). Kuulokojeen
valinta ja sovitus tulee suorittaa erityisen
huolella, koska on olemassa vaara vahin-
goittaa käyttäjän jäljellä oleva kuuloa.

100

OSPL90	Huippu	132 dB SPL	124 dB SPL
	1600 Hz	131 dB SPL	124 dB SPL
	Keskiarvo	126 dB SPL	121 dB SPL
Suurin vahvistus	Huippu	66 dB	57 dB
	1600 Hz	56 dB	49 dB
	Keskiarvo	58 dB	52 dB
Viitevahvistus		50 dB	44 dB
Taajuusalue	100-7500 Hz		100-7200 Hz
Induktiokelan antotaso	1mA/m kenttä	85 dB SPL	-
	10 mA/m kenttä	105 dB SPL	-
	SPLITS L/R	-	101/101 dB SPL
Harmoninen kokonaissärö	500 Hz	2,5 %	< 2 %
	(Ottotaso 70 dB SPL)		
	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Vastaa ottokohinasoa (A)	Omni	22 dB SPL	16 dB SPL
	Suunta	30 dB SPL	25 dB SPL
Pariston kulutus	Lepovirta	1,0 mA	1,0 mA
	Tyypillinen	1,1 mA	1,3 mA

Pariston kesto, laskettu, tuntia*

130

Koko 312 (IEC PR41)




IRIL (IEC 60118-13-2011) 800/1400/2000 MHz: <17/49/39 dB SPL

* Perustuu standardoituun paristonkulutuksen mittaukseen (IEC 60118-0). Todellinen paristonkesto riippuu pariston laadusta, käytöstavasta, kojeen toimintamomenteista, kuulonalenemasta ja ääniympäristöstä.

Oticon | Ria2

2CC KYTKINONTELO

Mitattu
ANSI S3.22:n (2003) ja S3.7:n (1995),
IEC 60118-7:n (2005) ja IEC 60318-5:n (2006) mukaisesti.

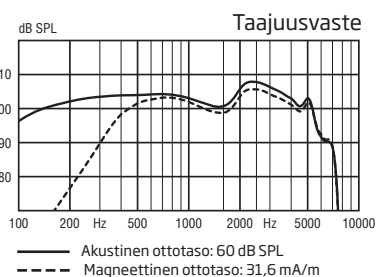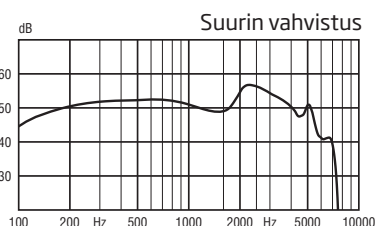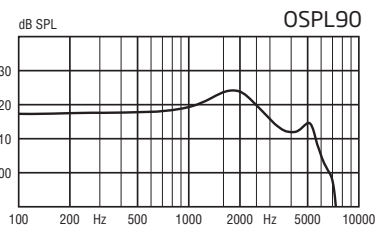

RITE 105
OTICON RIA2 PRO
OTICON RIA2



Mittakaava 1:1

Tekniset tiedot
Omni-suuntatoimintoa käytetty,
ellei muuta ole mainittu.

Varoitus kojeen sovittajalle
Kuulokojeen suurin antotaso saattaa
ylittää 132 dB SPL (IEC 711). Kuulokojeen
valinta ja sovitus tulee suorittaa erityisen
huolella, koska on olemassa vaara vahin-
goittaa käyttäjän jäljellä oleva kuuloa.

105

OSPL90	Huippu	135 dB SPL	125 dB SPL
	1600 Hz	133 dB SPL	124 dB SPL
	Keskiarvo	130 dB SPL	121 dB SPL
Suurin vahvistus	Huippu	72 dB	61 dB
	1600 Hz	65 dB	56 dB
	Keskiarvo	64 dB	56 dB
Viitevahvistus		58 dB	44 dB
Taajuusalue	100-7100 Hz		100-6900 Hz
Induktiokelan antotaso	1mA/m kenttä	94 dB SPL	-
	10 mA/m kenttä	114 dB SPL	-
	SPLITS L/R	-	109/109 dB SPL
Harmoninen kokonaissärö	500 Hz	2,5 %	< 2 %
	(Ottotaso 70 dB SPL)		
	800 Hz	2,0 %	< 2 %
	1600 Hz	2,0 %	< 2 %
Vastaa ottokohinasoa (A)	Omni	18 dB SPL	16 dB SPL
	Suunta	29 dB SPL	28 dB SPL
Pariston kulutus	Lepovirta	1,0 mA	1,0 mA
	Tyypillinen	1,1 mA	1,3 mA

Pariston kesto, laskettu, tuntia*

130

Koko 312 (IEC PR41)




IRIL (IEC 60118-13-2011) 800/1400/2000 MHz: 33/51/51 dB SPL

* Perustuu standardoituun paristonkulutuksen mittaukseen (IEC 60118-0). Todellinen paristonkesto riippuu pariston laadusta, käytöstavasta, kojeen toimintamomenteista, kuulonalenemasta ja ääniympäristöstä.

Oticon | Ria2

2CC KYTKINONTELO

Mitattu
ANSI S3.22:n (2003) ja S3.7:n (1995),
IEC 60118-7:n (2005) ja IEC 60318-5:n (2006) mukaisesti.

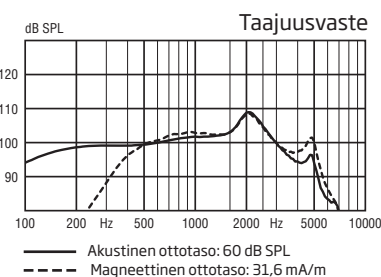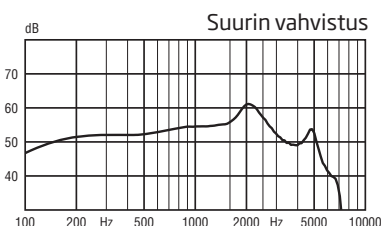
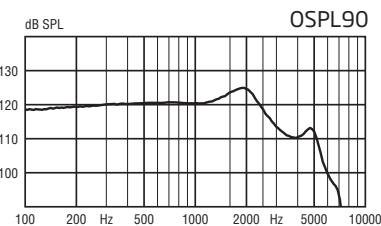


miniBTE 85
OTICON RIA2 PRO
OTICON RIA2



Mittakaava 1:1

Tekniset tiedot
Omni-suuntatoimintoa käytetty,
ellei muuta ole mainittu.

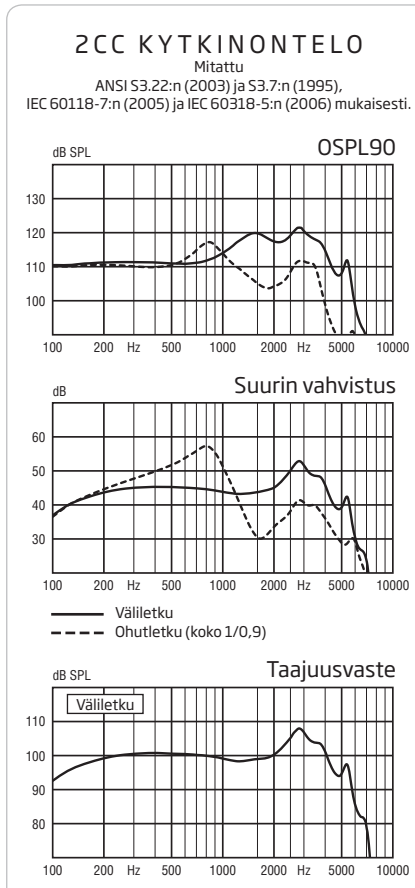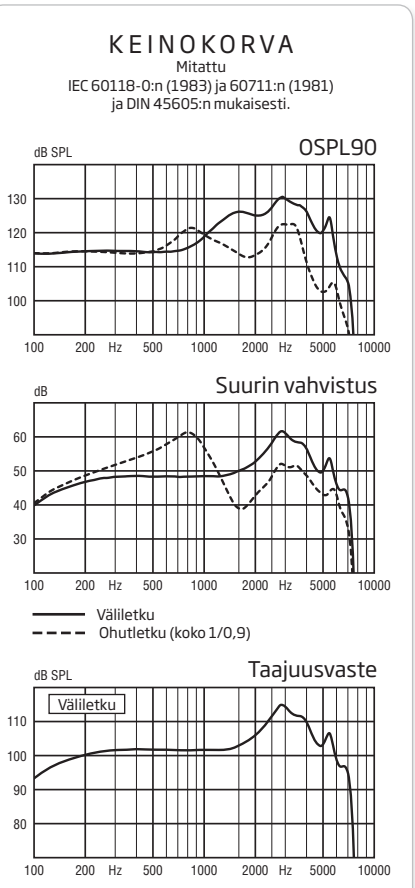



Oticon | Ria2

BTE13 85
OTICON RIA2 PRO
OTICON RIA2



Mittakaava 1:1

Tekniset tiedot
Omni-suuntatoimintoa käytetty,
ellei muuta ole mainittu.

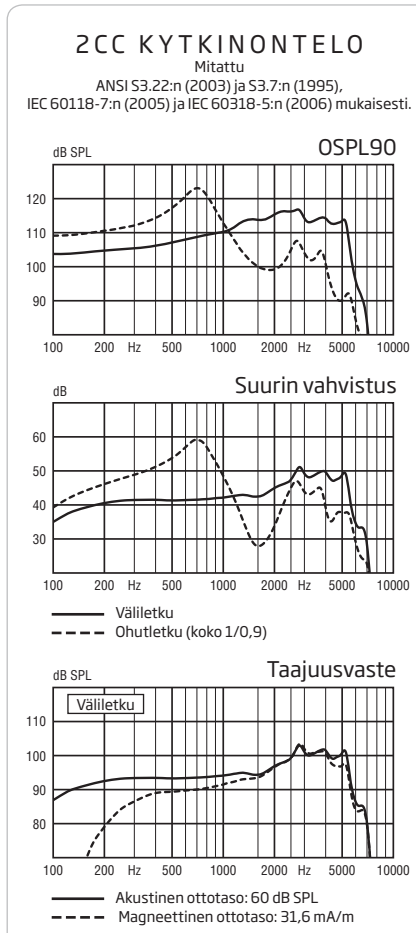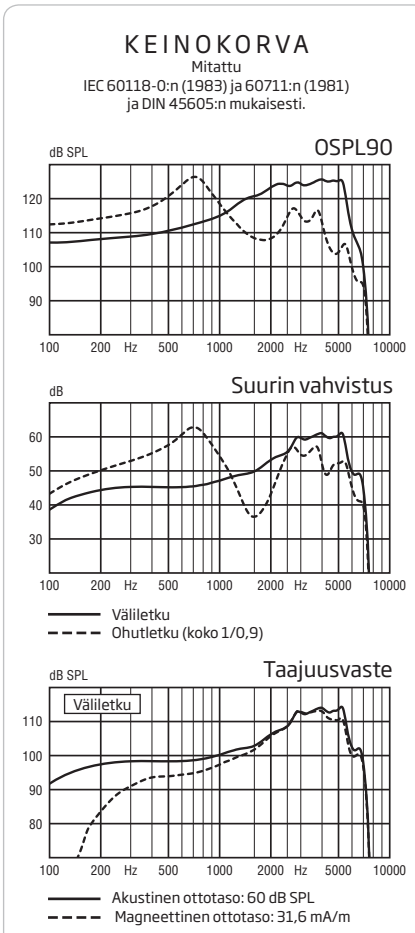

Oticon | Ria2

85

OSPL90	Huippu	131 (122*) dB SPL	121 (117*) dB SPL
	1600 Hz	126 (114*) dB SPL	120 (105*) dB SPL
	Keskiarvo	119 (116*) dB SPL	118 (109*) dB SPL
Suurin vahvistus	Huippu	62 (61*) dB	53 (57*) dB
	1600 Hz	50 (39*) dB	44 (30*) dB
	Keskiarvo	50 (52*) dB	46 (40*) dB
Viitevahvistus		43 dB	41 dB
Taajuusalue		100-7200 Hz	100-6200 Hz
Induktiokelan antotaso	1mA/m kenttä	-	-
(1600 Hz)	10 mA/m kenttä	-	-
	SPLITS L/R	-	-
Harmoninen kokonaissärö	500 Hz	< 2 %	< 2 %
(Ottotaso 70 dB SPL)	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Vastaa ottokohinasoa (A)	Omni	22 dB SPL	17 dB SPL
	Suunta	29 dB SPL	25 dB SPL
Pariston kulutus	Lepovirta	1,0 mA	1,0 mA
	Tyypillinen	1,1 mA	1,2 mA

Pariston kesto, laskettu, tuntia**

130

Koko 312 (IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13-2011)

800/1400/2000 MHz: <18/24/36 dB SPL

* Kojelle, jotka sovitettu Corda miniFit:lla

** Perustuu standardoituun paristonkulutuksen mittaukseen (IEC 60118-0.) Todellinen paristonkesto riippuu pariston laadusta, käytettävästä, kokeen toimintaominaisuuksista, kuulonalenemasta ja ääniympäristöstä

85

OSPL90	Huippu	126 (126*) dB SPL	117 (123*) dB SPL
	1600 Hz	121 (108*) dB SPL	114 (100*) dB SPL
	Keskiarvo	116 (116*) dB SPL	113 (106*) dB SPL
Suurin vahvistus	Huippu	61 (63*) dB	51 (59*) dB
	1600 Hz	50 (36*) dB	43 (28*) dB
	Keskiarvo	49 (52*) dB	44 (41*) dB
Viitevahvistus		43 dB	36 dB
Taajuusalue		100-7200 Hz	100-7000 Hz
Induktiokelan antotaso	1mA/m kenttä	79 dB SPL	-
(1600 Hz)	10 mA/m kenttä	99 dB SPL	-
	SPLITS L/R	-	94/94 dB SPL
Harmoninen kokonaissärö	500 Hz	< 2 %	< 2 %
(Ottotaso 70 dB SPL)	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Vastaa ottokohinasoa (A)	Omni	23 dB SPL	18 dB SPL
	Suunta	32 dB SPL	27 dB SPL
Pariston kulutus	Lepovirta	1,1 mA	1,1 mA
	Tyypillinen	1,1 mA	1,1 mA

Pariston kesto, laskettu, tuntia**

240

Koko 13 (IEC PR48)

IRIL (IEC 60118-13-2011)

800/1400/2000 MHz: 24/48/45 dB SPL

* Kojelle, jotka sovitettu Corda miniFit

** Perustuu standardoituun paristonkulutuksen mittaukseen (IEC 60118-0.) Todellinen paristonkesto riippuu pariston laadusta, käytettävästä, kokeen toimintaominaisuuksista, kuulonalenemasta ja ääniympäristöstä.

BTE13 100
OTICON RIA2 PRO
OTICON RIA2



Mittakaava 1:1

Tekniset tiedot
Omni-suuntatoimintoa käytetty,
ellei muuta ole mainittu.

Varoitus kojeen sovittajalle
Kuulokojeen suurin antotaso saattaa
ylittää 132 dB SPL (IEC 711). Kuulokojeen
valinta ja sovitus tulee suorittaa erityisen
huolella, koska on olemassa vaara vahin-
goittaa käyttäjän jäljellä oleva kuuloa.

100

OSPL90	Huippu	135 (132*) dB SPL	126 (128*) dB SPL
	1600 Hz	128 (116*) dB SPL	120 (108*) dB SPL
	Keskiarvo	122 (121*) dB SPL	120 (115*) dB SPL
Suurin vahvistus	Huippu	68 (66*) dB	60 (62*) dB
	1600 Hz	60 (44*) dB	52 (36*) dB
	Keskiarvo	57 (56*) dB	53 (49*) dB
Viitevahvistus		53 dB	43 dB
Taajuusalue		100-7200 Hz	100-6000 Hz
Induktiokelan antotaso	1mA/m kenttä	89 dB SPL	-
(1600 Hz)	10 mA/m kenttä	109 dB SPL	-
	SPLITS L/R	-	100/100 dB SPL
Harmoninen kokonaissärö	500 Hz	< 2 %	< 2 %
(Ottotaso 70 dB SPL)	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Vastaa ottokohinasoa (A)	Omni	19 dB SPL	16 dB SPL
	Suunta	29 dB SPL	26 dB SPL
Pariston kulutus	Lepovirta	1,1 mA	1,1 mA
	Tyypillinen	1,1 mA	1,1 mA

Pariston kesto, laskettu, tuntia**

Koko 13 (IEC PR48)

IRIL (IEC 60118-13-2011)

800/1400/2000 MHz: 24/48/45 dB SPL

* Kojelle, joissa on Corda miniFit Power

** Perustuu standardoituun paristonkulutuksen mittaukseen (IIC 60118-0.) Todellinen paristonkesto riippuu pariston laadusta, käytettävästä, kojeen toimintaominaisuuksista, kuulonalenemasta ja ääniympäristöstä.

Oticon | Ria2

BTE13 105
OTICON RIA2 PRO
OTICON RIA2



Mittakaava 1:1

Tekniset tiedot
Omni-suuntatoimintoa käytetty,
ellei muuta ole mainittu.

Varoitus kojeen sovittajalle
Kuulokojeen suurin antotaso saattaa
ylittää 132 dB SPL (IEC 711). Kuulokojeen
valinta ja sovitus tulee suorittaa erityisen
huolella, koska on olemassa vaara vahin-
goittaa käyttäjän jäljellä oleva kuuloa.

105

OSPL90	Huippu	138 (133*) dB SPL	133 (131*) dB SPL
	1600 Hz	131 (122*) dB SPL	124 (114*) dB SPL
	Keskiarvo	128 (126*) dB SPL	128 (120*) dB SPL
Suurin vahvistus	Huippu	73 (69*) dB	67 (67*) dB
	1600 Hz	66 (57*) dB	59 (49*) dB
	Keskiarvo	63 (62*) dB	63 (55*) dB
Viitevahvistus		57 dB	52 dB
Taajuusalue		100-7200 Hz	100-5700 Hz
Induktiokelan antotaso	1mA/m kenttä	96 dB SPL	-
(1600 Hz)	10 mA/m kenttä	117 dB SPL	-
	SPLITS L/R	-	105/105 dB SPL
Harmoninen kokonaissärö	500 Hz	5 %	2 %
(Ottotaso 70 dB SPL)	800 Hz	3 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Vastaa ottokohinasoa (A)	Omni	17 dB SPL	14 dB SPL
	Suunta	30 dB SPL	28 dB SPL
Pariston kulutus	Lepovirta	1,0 mA	1,0 mA
	Tyypillinen	1,1 mA	1,3 mA

Pariston kesto, laskettu, tuntia**

Koko 13 (IEC PR48)

IRIL (IEC 60118-13-2011)

800/1400/2000 MHz: 36/<16/<16 dB SPL

* Kojelle, joissa on Corda miniFit Power

** Perustuu standardoituun paristonkulutuksen mittaukseen (IIC 60118-0.) Todellinen paristonkesto riippuu pariston laadusta, käytettävästä, kojeen toimintaominaisuuksista, kuulonalenemasta ja ääniympäristöstä.

Oticon | Ria2

MUISTIINPANOT

Oticon | **Ria2**

MUISTIINPANOT

Oticon | **Ria2**

People First

Tarjoamme ihmisille mahdollisuuden vapaaseen kommunikointiin, luonnolliseen vuorovaikutukseen ja aktiiviseen osallistumiseen.