

# Pikaopas Oticon Companion-sovellus Apple Watchissa

Oticon Companionin asennus, pariliitos ja ohjaus Apple Watchilla.

Apple Watchilla voidaan säätää äänenvoimakkuutta, vaihtaa ohjelmaa, vaimentaa tai poistaa kuulokojeiden vaimennus, ottaa käyttöön tai sulkea Speech Booster, ottaa etämikrofoni pois käytöstä sekä tarkistaa pariston/akun taso. Jos sovellusta halutaan käyttää nopeasti kellotaulusta, voidaan lisätä myös erikoistoimintoja, niin sanottuja komplikaatioita.

## Käytön aloitus

Ennen Oticon Companionin käyttöä Apple Watchissa sovellus tulee asentaa iPhoneeseen ja varmistaa, että kuulokojeet on yhdistetty iPhoneen laitepariksi.

## Järjestelmävaatimukset

Sovelluksen käyttämiseen Apple Watchissa tarvitaan seuraavaa:

- Apple Watch, sarja 4 tai uudempi
- watchOS 8 tai uudempi



Skannaa QR-koodi  
ja lataa  
Oticon Companion  
App Storesta.



Lataa  
App Storesta

Made for  
iPhone | Apple Watch


Apple, Apple-logo, iPhone, iPad ja Apple Watch ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

# Oticon Companionin asentaminen Apple Watchiin


Oticon Companionin käytön aloitus Apple Watchissa.



Lataa ensin **Oticon Companion-sovellus** iPhoneen App Storesta sekä yhdistä kuulokojeesi iPhoneen laitepariksi.

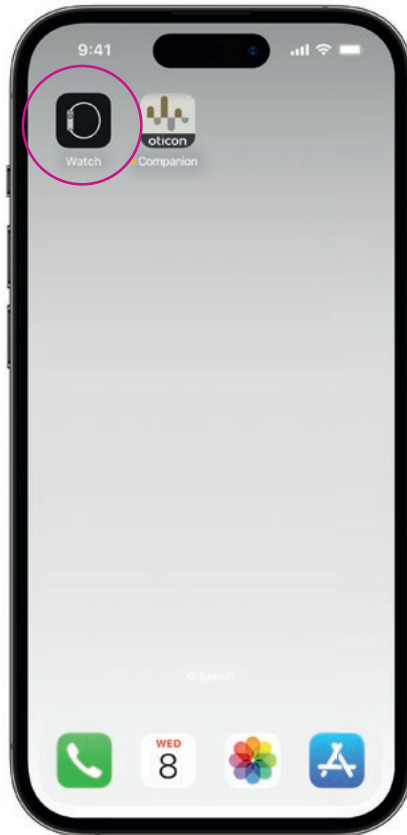

Avaa **Watch-sovellus** iPhoneessa.

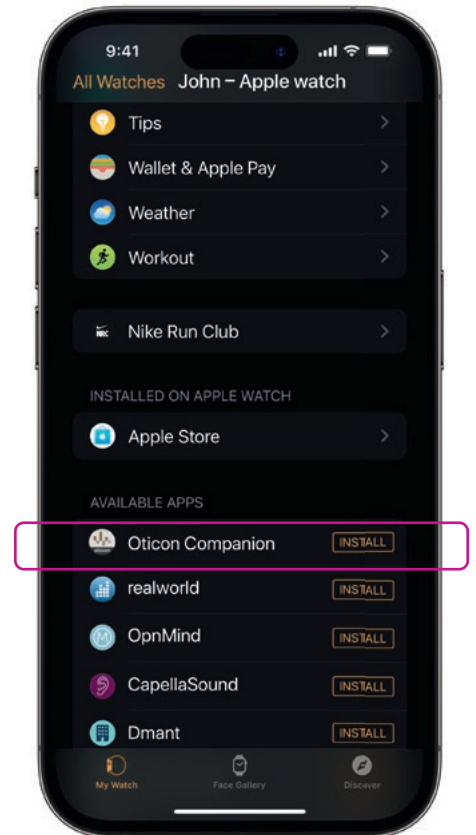

Vieritä kohtaan **KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT APIT** ja napauta **ASENNA** Oticon Companion-kuvakkeen oikealla puolella. Sovellus asennetaan nyt Apple Watchiin.

# Oticon Companionin perustoimintojen käyttäminen Apple Watchissa

Avaa **Oticon Companion-sovellus** napauttamalla sen kuvaketta Apple Watchissa.



## Pariston/akun tason tarkistaminen

Voit nähdä kuulokojeiden pariston/akun tason **pyyhkäisemällä oikealle** Oticon Companionin Yleinen-näytössä.



## Yleinen

Oticon Companionin Yleinen-näyttöä käytetään ohjelman vaihtamiseen, äänenvoimakkuuden säätämiseen ja kuulokojeiden vaimentamiseen.



## Speech Booster

Voit ottaa Speech Boosterin käyttöön tai pois käytöstä sekä etämikrofonin pois käytöstä **pyyhkäisemällä vasemmalle** Oticon Companion Yleinen-näytössä.

Siirry Ohjelma-näyttöön napauttamalla **(P1)**-ohjelmakuvaketta.


Selaa ohjelmia ja **napauta ohjelmaa**, jonka haluat valita.

Ohjelmia voidaan selata myös **kääntämällä Digital Crownia**.




# Apple Watch -komplikaatioiden lisääminen

Kun sovellusta halutaan käyttää nopeasti kellotaulusta, voidaan lisätä Apple Watch -komplikaatio\*. Se on hyödyllinen Apple Watch -ominaisuus, joka toimii pikakomentona kellotaulussa.

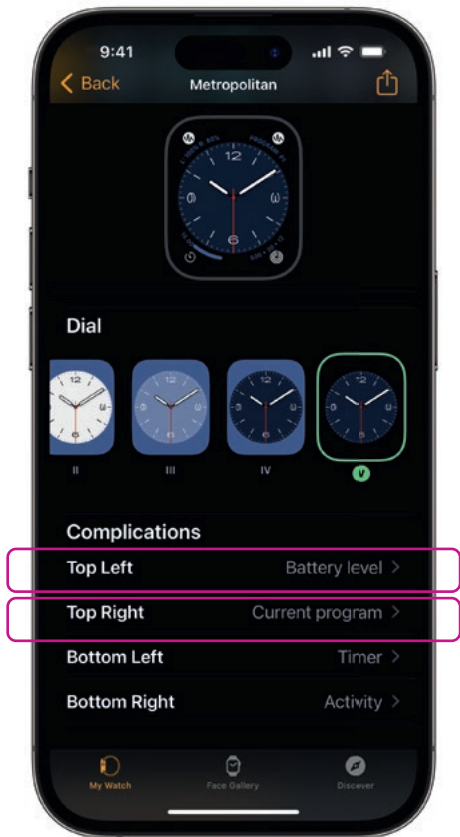

Valitse kellotaulu Omat kellotaulut -osiosta ja selaa komplikaatioihin. Huomaa, että kaikkiin kellotauluihin ei voi lisätä komplikaatioita.

Napauta **Ylös vasemmalle** ja valitse pikakomento.

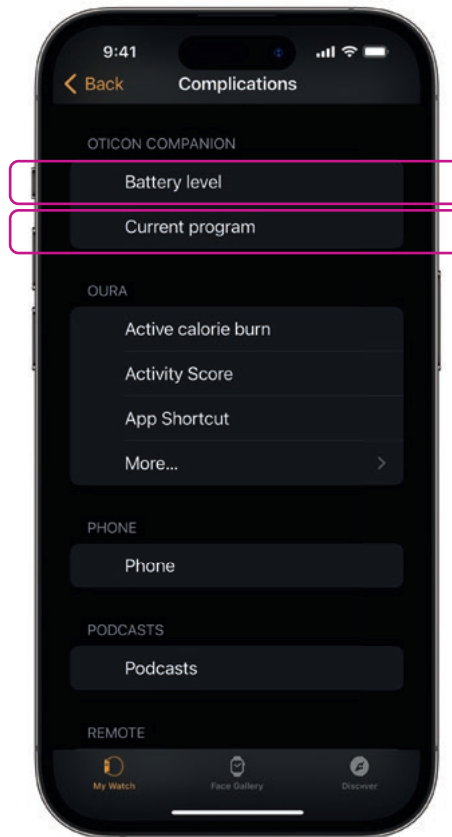

Selaa komplikaatioita ja valitse **Pariston/akun tila** Oticon Companionin alta.

Tee sama **Ylös oikealle** ja valitse **Nykyinen ohjelma**.



Komplikaatiot näkyvät nyt kellotaulussa näytön **yläkulmassa**.

\* Jos valitussa kellotaulussa voidaan käyttää komplikaatioita.