

Käyttöohje

ConnectClip



oticon
PEOPLE FIRST

Johdanto

Tämä käyttöohje opastaa uuden ConnectClipin käytössä ja huollossa. Lukekaa käyttöohje huolella, mukaan lukien Varoitukset. Näin saatte parhaan hyödyn uudesta ConnectClipistäsi. Ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen, jos teillä on lisäkysymyksiä ConnectClipin käytöstä.

Käytettävyyden parantamiseksi käyttöohje sisältää navigointipalkin, jonka avulla voitte liikkua osioiden välillä vaivattomasti.

Käyttötarkoitus

ConnectClip on tarkoitettu käytettäväksi langattomana äänen vastaanottimena ja lähettimenä kuulokojeiden ja ympäristön, kuten puhujan tai langattoman elektronisen äänilähteen, välillä. ConnectClip myös auttaa langattomien kuulokojeiden käyttäjiä kuulokojeen toimintojen hallinnassa.

ConnectClip on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä kuulokojeen kanssa, ja se soveltuu sekä aikuisille että yli 3-vuotiaille lapsille.

TÄRKEÄÄ


Tutustu tähän käyttöohjeeseen huolellisesti ennen ConnectClipin käyttöä. Käyttöohje sisältää tärkeää tietoa ConnectClipin käytöstä ja hoidosta.

Johdanto

ConnectClipiä voidaan käyttää sekä matkapuhelimien langattomina kuulokkeina että etämikrofonina/apumikrofonina.


1. Matkapuhelimen kuulokkeet

Ääni suoratoistetaan puhelimesta kuulokojeisiin ConnectClipin kautta (A). ConnectClip poimii oman äänesi ja lähettää sen matkapuhelimeen (B).

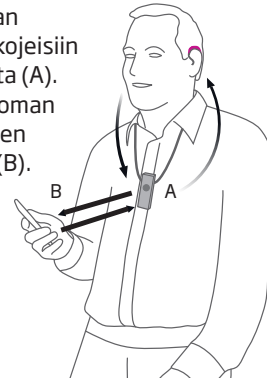

2. Etä- tai apumikrofoni

Puhujan ääni siirretään langattomasti ConnectClipistä kuulokojeisiin.

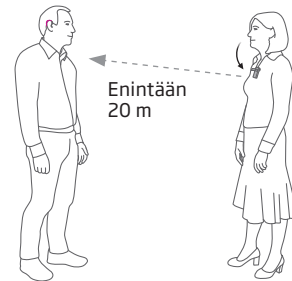

Sisällys

Pakkauksen sisältö	9
Yleiskuvaus - päätoiminnot	10
Yleiskuvaus - tuotteen merkkivalot	12
Käytön aloitus	14
Alkutoimet	
A. Kuulokojeiden ja ConnectClipin liittäminen pariaksi	16
A. Matkapuhelimen ja ConnectClipin liittäminen pariaksi	18
Päivittäinen käyttö	
Päivittäinen käyttö: Virran kytkeminen/katkaisu	20
Päivittäinen käyttö: Lataaminen	21
ConnectClipin käyttäminen matkapuhelimen kanssa	
ConnectClipin käyttäminen matkapuhelimen kanssa	22
ConnectClipin asettaminen puhelintilaan	23
Puheluiden vastaanottaminen	24
Puheluiden soittaminen	26
Muut kuuloketoiminnot	27

Musiikin kuunteleminen	
Musiikin kuunteleminen	28
ConnectClipin käyttäminen etämikrofonina	
ConnectClipin käyttäminen etämikrofonina	30
Mikrofonitilan valitseminen	31
Äänen toiston aloittaminen/lopettaminen etämikrofonista	32
Etämikrofonin äänitason säätäminen	33
Äänen toiston aloittaminen/lopettaminen etämikrofonista	
kuulokojeita käyttäen	34
ConnectClipin puhdistaminen	35
ConnectClipin käyttäminen kuulokojeiden kaukosäätimenä	
ConnectClipin käyttäminen kuulokojeiden kaukosäätimenä	36
Muut ominaisuudet ja toiminnot	37
Varoitukset	38
Tekniset tiedot	44
Kansainvälinen takuu	47

Pakkauksen sisältö

ConnectClip-pakkaus sisältää seuraavat:



ConnectClip




Nauha - pitkä



Nauha - normaali



Pussi

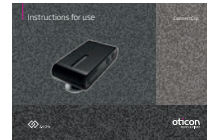

Tämä opas
(Käyttöohje)






Seinälaturi
(vaihtelee maittain)



USB-latauskaapeli

Yleiskuvaus - päätoiminnot

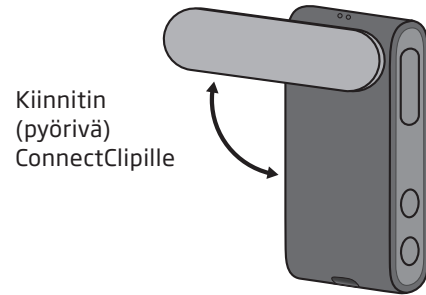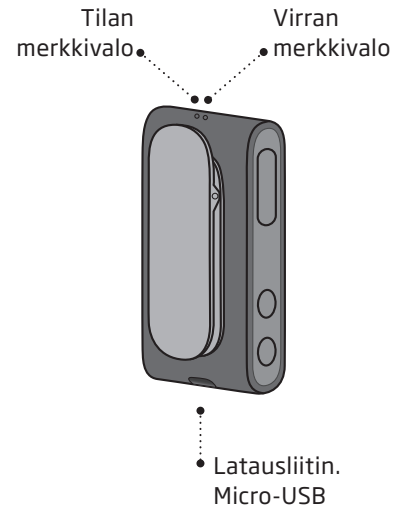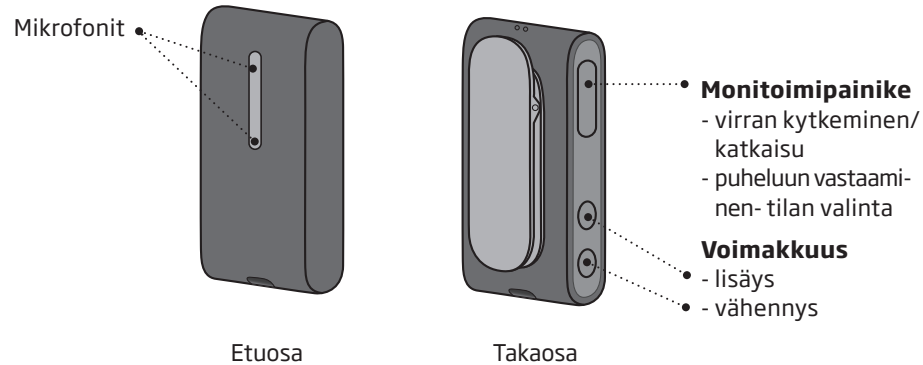

Yleiskuvaus - tuotteen merkkivalot


Tila	Kuvaus	
	Vilkkuva keltainen	Etsii kuulokojeita
	Yhtenäinen keltainen	Vapaa. Kuulokojeet yhdistetty. Ei yhteyttä puhelimeen.
	Vilkkuva sininen	Etsii matkapuhelinta (laiteparin muodostus)
	Yhtenäinen sininen	Yhdistetty matkapuhelimeen.
	Yhtenäinen vihreä	Puhelu käynnissä. Kuulokkeet (HFP), matkapuhelin
	Vilkkuva vihreä	Saapuva puhelu
	Yhtenäinen oranssi	Musiikki, matkapuhelin (A2DP)
	Yhtenäinen magenta	Etämikrofonitila
	Vilkkuva magenta	Yhdistää uudelleen etämikrofoniin

Virta	Kuvaus	
	Yhtenäinen punainen	Akun virta vähissä
	Yhtenäinen vihreä	Virta kytketty - ei lataa
	Vilkkuva vihreä	Virta kytketty - lataa
	Himmenevä vihreä	Virta kytketty - lataus valmis
	Vilkkuva oranssi	Virta katkaistu - lataa
	Yhtenäinen oranssi	Virta katkaistu - lataus valmis


Käytön aloitus

Ennen kuin ConnectClipiä voidaan käyttää kuulokojeiden kanssa, molemmat kuulokojeet ja ConnectClip on yhdistettävä laitepareiksi. ConnectClipin käyttäminen matkapuhelimen kanssa edellyttää, että ConnectClip yhdistetään myös matkapuhelimen laitepariksi.

1. Kuulokojeen ja ConnectClipin pariliitântä

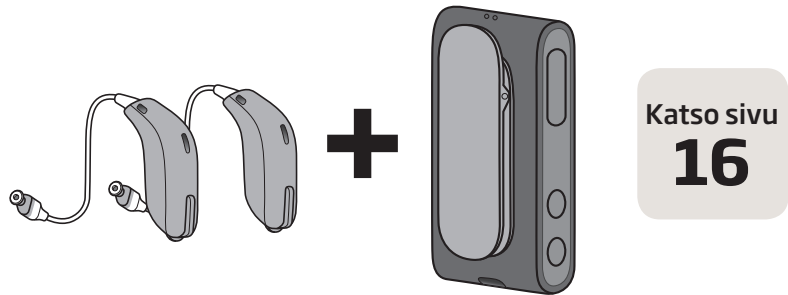

2. ConnectClipin ja matkapuhelimen pariliitântä

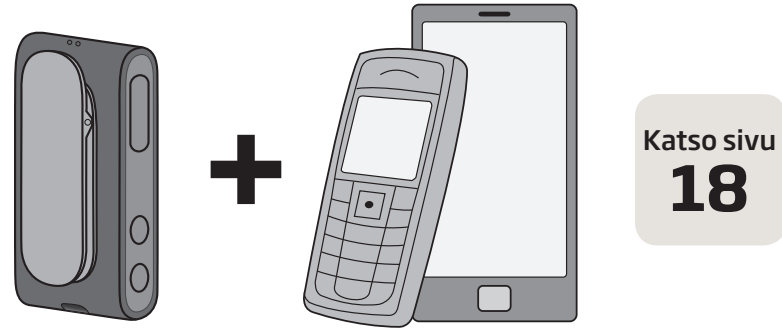

A. Kuulokojeiden ja ConnectClipin pariliitäntä

1. Varmistakaa, että ConnectClipin virta on katkaistu (katso sivu 20) Painakaa monitoimipainiketta noin 6 sekunnin ajan, kunnes virran merkkivalo sammuu ●




2. Katkaiskaa virta molemmista kuulokojeista (avaa paristokotelo)

3. Kytkekää virta molempiin kuulokojeisiin (sulje paristokotelo)

4. Kuulokojeet ovat nyt valmiit muodostamaan ensi kertaa yhteyden ConnectClipiin. Teillä on 3 minuuttia aikaa muodostaa pariliitäntä.

5. Kytkekää virta ConnectClipiin


Painakaa monitoimipainiketta noin 3 sekunnin ajan, kunnes virran merkkivalo palaa YHTENÄISESTI VIHREÄNÄ ●

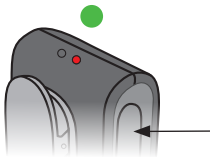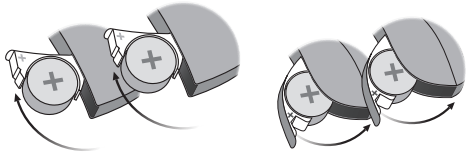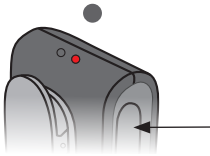


6. ConnectClip etsii nyt kuulokojeita. Tilan merkkivalo VILKKUU KELTAISENA ●

7. Asettakaa ConnectClip ja molemmat kuulokojeet lähelle (enimmäisetäisyys 20 cm)

8. Kun yhteys kuulokojeisiin on muodostettu, tilan merkkivalo palaa YHTENÄISESTI KELTAISENA ●

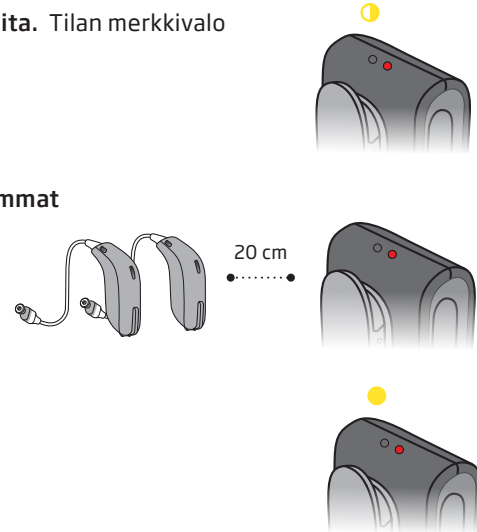


B. Matkapuhelimen ja ConnectClipin pariliitântä

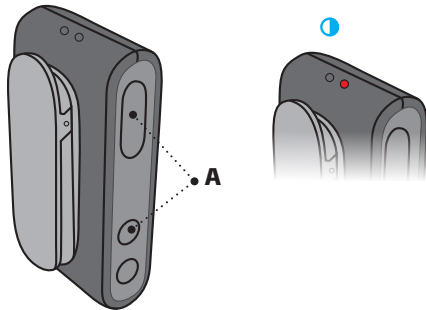

Laittakaa ConnectClip pariliitântätilaan
Painakaa monitoimipainiketta JA voimak-
kuuden säätöpainiketta noin 6 sekuntia
(A), kunnes tila VILKKUU SINISENÄ

**ConnectClip on pariliitântätilassa noin
3 minuutin ajan.**

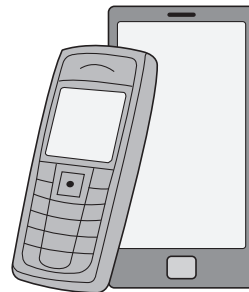


Mahdollista pariliitântä matkapuhelimessa
Ottakaa Bluetooth käyttöön. Etsikää ConnectClip
ja muodostakaa pariliitântä.

Tämä tehdään yleensä puhelimen asetuksissa
Bluetooth-kohdassa.

Laittakaa pin-koodi
Jos puhelin pyytää pin-koodia, laittakaa 0000
(neljä nollaa).

Pariliitântä valmis
Kun pariliitântä matkapuhelimeen on valmis,
tilan merkkivalo palaa YHTENÄISESTI SINISENÄ

Päivittäinen käyttö: virran kytkeminen/katkaisu

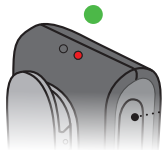

• PÄÄLLE ●

Painakaa monitoimipainiketta noin 3 sekunnin ajan, kunnes virran merkkivalo palaa YHTENÄISESTI VIHREÄNÄ.



• POIS PÄÄLTÄ ●

Painakaa monitoimipainiketta noin 6 sekunnin ajan, kunnes virran merkkivalo SAMMUU.

Päivittäinen käyttö: lataaminen




• Akun virta vähissä ●

Kun suoratoisto-aikaa on jäljellä noin 30 minuuttia, virran merkkivalo muuttuu PUNAISEKSI.



• Lataaminen ●


Kytkekää mukana tullut laturi ConnectClipin pohjassa olevaan mikro-USB-liittimeen. Virran merkkivalo VILKKUU VIHREÄNÄ tai ORANSSINA.

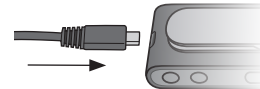

Lataamisen merkkivalot

Lataa (ConnectClip päällä)	Vilkkuu	●
Lataus valmis (ConnectClip päällä)	Himmenevä	●
Lataa (ConnectClip pois päältä)	Vilkkuu	●
Lataus valmis (ConnectClip pois päältä)	Yhtenäinen	●


ConnectClipin käyttäminen matkapuhelimen kanssa

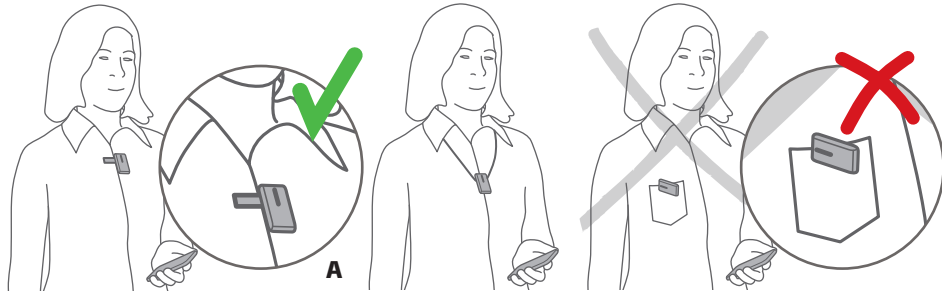

TÄRKEÄÄ

ConnectClip toimii parhaiten, kun siitä pidetään kuvan osoittamalla tavalla. On tärkeää, että ConnectClipin mikrofoni osoittaa kohti omaa suuta (A) ja etteivät vaatteet tms. peitä ConnectClipiä. Suurin sallittu etäisyys ConnectClipin ja matkapuhelimen välillä on 10 metriä.

ConnectClipin asettaminen puhelintilaan

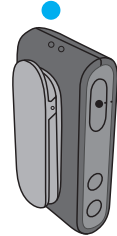

Valitkaa puhelintila

Vaihtakaa tilaa painamalla monitoimipainiketta noin 3 sekunnin ajan. Tilan vaihto vahvistetaan kuulokojeista kuuluvalla äänimerkillä. TILA SININEN ●



Tila	Tila
●	Vapaa. Yhdistetty kuulokojeisiin. Ei yhteyttä matkapuhelimeen
●	Yhdistetty matkapuhelimeen
●	Etä-/apumikrofonitila


Puheluiden vastaanottaminen



Puhelin yhdistetty

Kun ConnectClipiin kytketään virta ja se on matkapuhelimen alueella, se yhdistetään automaattisesti matkapuhelimeen.

Tilan merkkivalo palaa YHTENÄISESTI SINISENÄ ●

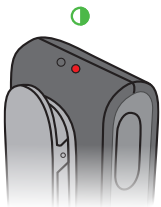

Puhelin soi

Kun puhelin soi, kuulette soiton merkkiään ja, jos käytettävissä, puhelimenne soittoään kuuloalojeissa.

Tilan merkkivalo VILKKUU VIHREÄNÄ ●



Puheluun vastaaminen

Napsauttaa monitoimipainiketta lyhyesti (A) tai vastatkaa puheluun matkapuhelimesta.

Kun puhelu yhdistetään, tila muuttuu YHTENÄISEKSI VIHREÄKSI ●




Puhelun lopettaminen

Napsauttaa monitoimipainiketta lyhyesti (A) tai katkaistaa puhelu matkapuhelimesta.

Tila YHTENÄINEN SININEN ●

Puheluiden soittaminen

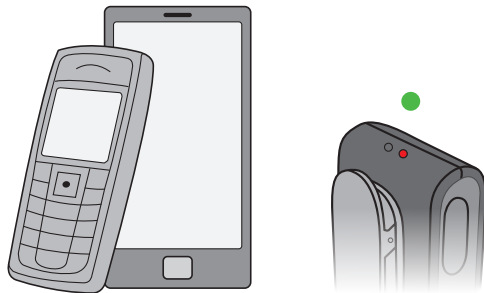

Puhelun soittamiseen tarvitaan vain puhelinta.
Puhelu yhdistetään automaattisesti ConnectClipiin.

Kun puhelu yhdistetään, tila muuttuu YHTENÄISEKSI
VIHREÄKSI ●

Muut kuuloketoiminnot

Numeron äänivalinta / äänikomennot

Kun yhteys matkapuhelimeen on muodostettu, monitoimipainikkeen kaksoisnapsautus aktivoi numeroiden äänivalinnan, jos puhelin tukee toimintoa.

Puhelun hylkääminen


Puhelu voidaan hylätä painamalla voimakkuuden laskupainiketta pitkään puhelimen soidessa.

Kuulokojeen mikrofonien vaimennus

Kuulokojeiden mikrofonit voidaan vaimentaa painamalla voimakkuuden laskupainiketta noin 3 sekunnin ajan.

Voimakkuuden noston tai laskun lyhyt painallus poistaa vaimennuksen

Musiikin kuunteleminen

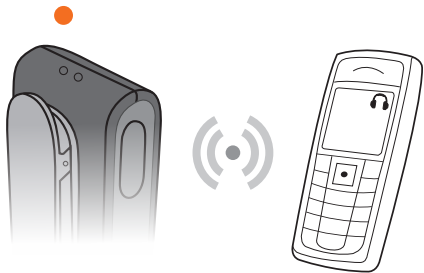

Langaton ääni (A2DP)

Jos on muodostettu Bluetooth-yhteys matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen, puhelimesta/laitteesta toistettava musiikki kuuluu automaattisesti kuulokojeista.

Tila ORANSSI ●

ConnectClipissä ei tarvitse tehdä mitään.


Tila	Kuvaus
●	CConnectClipiin on kytketty virta -- ja se suoratoistaa musiikkia puhelimesta

Äänenvoimakkuuden säätäminen


Musiikkia kuunneltaessa suoratoiston äänenvoimakkuutta voi lisätä tai vähentää säätöpainikkeilla.

Puhelimen äänentoiston lopettaminen

Monitoimipainikkeen lyhyt painallus lopettaa äänentoiston. Äänentoisto aloitetaan puhelimesta käsin.

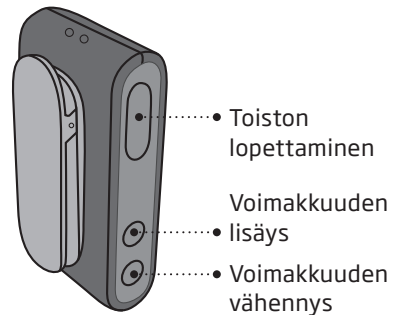


ConnectClipin käyttäminen etämikrofonina

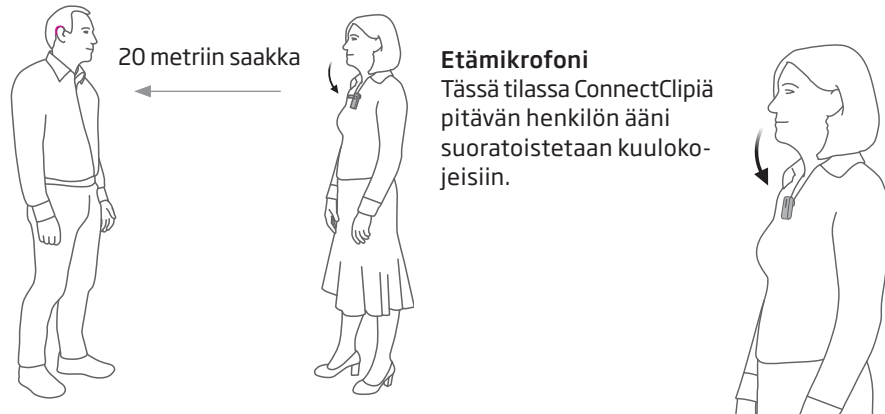

TÄRKEÄÄ

Varmistakaa, että mikrofoni on kohti puhujan suuta, eikä se peity vaatteilla tms.

Mikrofonitilan valitseminen

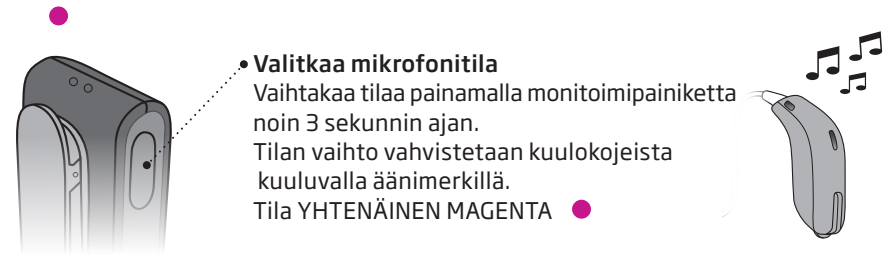

Tila	Kuvaus
●	ConnectClipiin on kytketty virta. Vapaa-tilassa eli ei yhteyttä puhelimeen
●	Yhdistetty matkapuhelimeen
●	ConnectClipiin on kytketty virta - ja se on etämikrofonitilassa

Äänentoiston aloittaminen/lopettaminen



Äänentoiston lopettaminen mikrofonista
Voitte lopettaa signaalin lähetyksen mikrofonista kuulokojeisiin ja vaihtaa kuulokojeet takaisin normaaliin ohjelmaan painamalla monitoimipainiketta (A) noin 3 sekunnin ajan.

Tilan merkkivalo muuttuu
KELTAISEKSI ● tai SINISEKSI ●

Etämikrofonin äänitason säätäminen


Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen

Suoratoistettavaa signaalia voidaan säätää voimakkuuden säätöpainikkeilla.

Vaimentakaa kuulokojeiden mikrofonit (ääni vain etämikrofonista).

Kuulokojeiden mikrofonit voidaan vaimentaa painamalla voimakkuuden säätöpainiketta noin 3 sekunnin ajan.

Voimakkuuden noston tai laskun lyhyt painallus poistaa vaimennuksen.

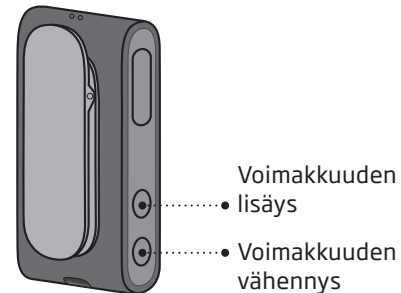

Äänen toiston aloittaminen/lopettaminen etämikrofonista kuulokojeita käyttäen



P1 --> P2 --> TV --> Mikrofoni

Kuulokojeen painikkeen pitkä painallus vaihtaa seuraavaan ohjelmaan kuulokojeissa.

Kun pääsette etämikrofoniohjelmaan, kuulette etämikrofoniohjelman äänimerkin.

Voitte lopettaa äänentoiston etämikrofonista vaihtamalla takaisin kuulokojeohjelmaan.

TÄRKEÄÄ

Katsokaa oman kuulokojeenne käyttöohjeesta tarkemmat tiedot kuulokojeen toiminnoista.

ConnectClipin puhdistaminen

TÄRKEÄÄ

Käyttäkää kuulokojeen puhdistamiseen pehmeää, kuivaa liinaa. Itse kuulokojetta ei tule koskaan pestä tai upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.

ConnectClipin käyttäminen kuulokojeiden

Kun ConnectClip ei suoratoista ääntä, sitä voidaan käyttää kuulokojeiden kaukosäätimenä.



Voimakkuuden nosto

- - lyhyt painallus

Voimakkuuden lasku

- - lyhyt painallus



Seuraava ohjelma

- - 3 sekunnin painallus vaihtaa seuraavaan

Kuulokojeiden mikrofonien vaimennus - pitkä painallus

- voimakkuuden noston tai laskun lyhyt painallus poistaa vaimennuksen

TÄRKEÄÄ

ConnectClipin ja kuulokojeiden välinen enimmäisetäisyys on 2 metriä.

Muut ominaisuudet ja toiminnot

Yksi yhteys kerrallaan

Kun ConnectClip on liitetty pariksi usean (enintään kahdeksan) laitteen kanssa, se muodostaa yhteyden vain ensimmäiseen kantaman sisällä olevaan laitteeseen.

Ei puheluita mikrofonina käytettäessä

Kun ConnectClipiä käytetään apu- tai etämikrofonina, sillä ei ole yhteyttä matkapuhelimeen.

Aikakatkaisu (kantaman ulkopuolella) mikrofonitilassa

Jos ConnectClip on kuulokojeiden kantaman ulkopuolella, kuulokojeet palaavat alkuperäiseen ohjelmaansa 90 sekunnin kuluttua.

Bluetooth-pariliitännöjen poistaminen

Voitte poistaa kaikki Bluetooth-pariliitännät painamalla monitoimipainiketta sekä voimakkuuden nosto- ja laskupainiketta 10 sekunnin ajan. Tämä ilmaistaan tilalla VILKKUVA PUNAINEN.

Varoitukset

Tutustukaa huolellisesti seuraaviin yleisiin varoituksiin ja koko käyttöohjeeseen ennen ConnectClipin käyttämistä. Näin varmistatte oikean käytön sekä henkilökohtaisen turvallisuuden. Ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen, jos kohtaatte yllättävää toimintaa tai tilanteita ConnectClipin kanssa.

Tukehtumisvaara ja pienten osien nielemisvaara

ConnectClip ja sen osat on säilytettävä lasten ja kaikkien sellaisten ulottumattomissa, jotka saattavat niellä ne tai muutoin vahingoittaa itseään niillä. Osan nieläisseen täytyy mennä lääkäriin välittömästi.

Tulenarkuus

ConnectClipin virtalähde on riittämätön energianlähde aiheuttamaan tulipaloa normaaleissa käyttöolosuhteissa. ConnectClipiä ei ole testattu räjähtäviä kaasuja koskevien kansainvälisten standardien osalta. ConnectClipiä ei suositella käytettäväksi tiloissa, joissa on räjähdysvaara.

Varoitukset

Röntgen/CT/MR/PET-kuvaus, sähköhoito ja kirurgia

Irrottakaa ConnectClip ennen röntgen/CT/MR/PET-kuvausta, sähköhoitoa tai leikkausta, koska ConnectClip voi vaurioitua altistuessaan voimakkaille kentille.

Kuumuus ja kemikaalit

ConnectClipiä ei saa koskaan altistaa korkeille lämpötiloille, esim. jättää aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn autoon. ConnectClipiä ei myöskään saa kuivata mikroaalto- tai muussa uunissa. Kosmetiikan, hiuskiinteen, hajuveden, partaveden, aurinkovoiteen, hyönteiskarkotteen ym. kemikaalit voivat vahingoittaa ConnectClipiä. Poistakaa ConnectClip aina ennen näiden aineiden käyttöä ja antakaa aineiden kuivua ennen ConnectClipin käyttöä.

Häiriöt

ConnectClipin häiriönsietokyky on tarkoin tutkittu tiukimpien kansainvälisten standardien mukaan. Tästä huolimatta jotkin laitteet, kuten radio, matkapuhelin, kauppohenkilöstön hälytyslaitteet ja muut langattomat laitteet, saattavat aiheuttaa häiriötä ConnectClipissä. Mikäli näin tapahtuu, loitontakaa häiriötä aiheuttava laite ConnectClipistä.

Varoitukset

Käyttö liikenteessä

ConnectClipin käyttö voi häiritä keskittymistä. Olkaa tietoinen ympäristöstänne, kun käytätte ConnectClipiä. Noudattakaa kansallisia liikennelainsäädännön määräyksiä viestintälaitteiden käytöstä liikenteessä.

Käyttö lentokoneessa

ConnectClipissä on Bluetooth. ConnectClipiä ei saa käyttää lentokoneessa, ellei siihen ole saatu erityistä lupaa lentohenkilöstöltä.

Aktiiviset implantit

Aktiivisten implanttien kanssa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Jos teillä on aktiivinen aivoimplantti, ottakaa yhteys valmistajaan ja kysykää tietoja implantin mahdollisista häiriötekijöistä.

Varoitukset

Ladattava akku

Älkää yrittäkö avata ConnectClipiä, sillä akku saattaa vahingoittua.

Älkää koskaan yrittäkö vaihtaa akkua. Jos akun vaihto on tarpeen, ottakaa yhteyttä laitteen hankintapaikkaan. Huoltotakuu mitätöityy, mikäli havaitaan merkkejä väärinkäytöstä.

USB-liittimen turvallisuus akkuja ladattaessa määräytyy ulkoisen laitteiston perusteella. Kun USB-liitin on liitetty verkkovirtaan kytkettyyn laitteeseen, tämän laitteen on oltava UL-hyväksytty tai täytettävä IEC-60065:n, IEC-60950:n tai muiden vastaavien standardien vaatimukset.

KytKentä ulkoisiin laitteisiin

ConnectClipin käytön turvallisuus ulkoiseen laitteeseen kytkettynä (ulkoisen tulokaapelin kautta, USB-kaapelin kautta tai suoraan) määräytyy ulkoisen laitteen mukaan. Kun ConnectClip liitetään verkkovirtaan kytkettyyn laitteeseen, tämän laitteen tulee täyttää IEC-60065:n, IEC-60950:n tai vastaavien turvallisuusstandardien vaatimukset.

Varoitukset

Säilytys

ConnectClipiä tulee säilyttää lasten ja muiden laitetta varomattomasti käsittelevien ulottumattomissa virheellisen käytön ja henkilökohtaisen turvallisuutesi varmistamiseksi.

Nauhan käyttö

Jos nauha käytettäessä tarttuu vahingossa johonkin, se on suunniteltu katkeamaan automaattisesti. Älkää siis koskaan yrittäkö lyhentää tai muokata nauhaa tavalla, jota ei ole hyväksytty. Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää nauhaa.

Mahdollisia haittavaikutuksia

ConnectClipissä käytetyt tavallisesti allergiaa aiheuttamattomat materiaalit voivat joissain tapauksissa aiheuttaa ihoärsytystä tai muita sivuvaikutuksia erittäin herkille henkilöille. Hakeutukaa lääkärin hoitoon, mikäli tällaisia oireita ilmenee.

Varoitukset

Yhteensopivuus matkapuhelimen kanssa

Sivulla www.oticon.global on luettelo kaikista Oticonin perusteellisesti testaamista matkapuhelimista, jotka täyttivät ConnectClip-yhteensopivuuden vähimmäisvaatimukset testausajankohtana. Oticon ei kuitenkaan ota vastuuta kyseisestä yhteensopivuudesta yleisesti. Erityisesti Oticon ei ole vastuussa yhteensopivuudesta myöhempien matkapuhelimeen tehtyjen päivitysten jälkeen eikä yhteensopimattomuudesta, jota kyseiset testit eivät kata tai jota ei testeissä havaittu. Oticon ei ota taloudellista vastuuta siltä osin, että hyvittäisi matkapuhelimia, jotka eivät toimi odotetusti.

Suosittelemme tarkistamaan yllä mainitun luettelon ennen uuden matkapuhelimen hankkimista.

Tekniset tiedot

Käyttöolosuhteet:

Käyttökosteus: 15–93 % suhteellinen kosteus, ei tiivistyvä.

Käyttölämpötila: 5...40 °C

Säilytys- ja kuljetus: -20...70 °C

ConnectClip sisältää radiolähtetimen, joka käyttää Bluetooth EDR-, Bluetooth Low Energy (BLE)- ja omaa lyhyen kantaman radioteknologiaa, jotka kaikki toimivat 2,4 GHz:n taajuudella. 2,4 GHz:n radiolähtetin on heikko ja sen säteilemä kokonaisteho aina alle 17 dBm e.i.r.p.

ConnectClip on radiolähtetimiä, sähkömagneettista yhteensopivuutta ja ihmisten altistusta koskevien kansainvälisten standardien mukainen.

ConnectClipin koon asettamista rajoituksista johtuen kaikki asiaan liittyvät hyväksyntämerkinnät ovat tässä oppaassa.

Yhdysvallat ja Kanada

Tämä laite sisältää radiomoduulin, jolla on seuraavat sertifiointitunnukset:

FCC ID: 2ACAHAC01

IC: 11936A-AC01

Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osion 15 ja Kanadan RSS-210 säännösten normeja.

Toimintaperiaate edellyttää seuraavien kahden ehdon täyttymistä:

(1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja

(2) tämän laitteen täytyy sietää kaikki vastaanottamansa häiriöt, myös sellaiset, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai lisäykset, jotka eivät ole todistettavasti valmistajan hyväksymiä, voivat purkaa käyttäjän oikeuden laitteen käyttämiseen.

Tämä B-luokan digitaalilaitte on Kanadan ICES-003-säännösten mukainen.

Huomaa: Tämä laite on testattu ja noudattaa luokan B digitaalisten laitteiden rajoja FCC-säännösten osion 15 mukaisesti. Näiden rajojen tarkoitus on antaa riittävä suoja haitallista häiriötä vastaan asuinympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa ja, mikäli sitä ei ole asennettu ja käytetty ohjeiden mukaan, voi aiheuttaa haitallista häiriötä radioviestintään. Ei voida kuitenkaan taata, etteikö häiriötä jossain tietyssä ympäristössä tapahtuisi. Jos tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- ja televisiovastaanottoon, joka voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjää kehoitetaan kokeilemaan häiriön poistamista yhdellä tai useilla seuraavista toimista:

- Kääntäkää vastaanottimen antennia tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Kasvattakaa laitteen ja vastaanottimen välimatkaa.
- Kytkekää laite eri pistorasiaan kuin vastaanotin.
- Kysykää lisätietoa ja apua valmistajalta tai radio-/televisioteknikolta.

Kansainvälinen takuu

ConnectClipillä on valmistajan myöntämä rajoitettu 12 kuukauden takuu, joka alkaa kojeen ostopäivästä. Tämä rajoitettu takuu kattaa valmistus- ja materiaaliviat itse laitteessa, muttei siihen liittyvissä lisälaitteissa, kuten akuissa, johdoissa, virtalähteissä jne. Ongelmat, jotka johtuvat laitteen huolimattomasta käsittelystä tai hoidosta, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai muun kuin maahantuojan suorittamasta korjauksesta, altistumisesta korroosiota aiheuttaville olosuhteille, korvan fyysisistä muutoksista, vieraiden esineiden joutumisesta kojeeseen tai vääristä säädöistä, EIVÄT kuulu takuun piiriin ja saattavat poistaa takuuvastuun kokonaan. Tämä takuu ei vaikuta kansallisen lainsäädännön antamiin laillisiin oikeuksiin koskien kulutustavaroiden kauppaa. ConnectClipin myyjällä saattaa olla edellä olevaa takuuta laajempi takuu. Kysy lisätietoja myyjältä.

Jos ConnectClip tarvitsee huoltoa

Ottakaa yhteyttä ensin ConnectClipin hankintapaikkaan, jossa voidaan hoitaa pienemmät ongelmat ja tehdä tarvittavia säätöjä.

Valmistaja vakuuttaa, että tämä ConnectClip (AC1A) on yhteensopiva direktiivin 2014/53/EU keskeisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien lausekkeiden kanssa. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavissa valmistajalta.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Tanska
www.oticon.global



Elektroniikkajäte
on käsiteltävä paikallisen
lainsäädännön
edellyttämällä tavalla.



178671FI / 2017.10.25

178671FI / 2017.10.25



0000178671000001

oticon
PEOPLE FIRST

178671F/ 2017.10.25