

Käyttöohje

ConnectClip



2.4 GHz

oticon
life-changing technology

Johdanto

Tämä käyttöohje opastaa teitä uuden ConnectClipin käytössä ja huollossa. Lukekaa käyttöohje huolellisesti, mukaan lukien kohta **Varoitukset**.

Näin saatte parhaan hyödyn uudesta ConnectClipistäne. Ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen, jos teillä on lisäkysymyksiä ConnectClipin käytöstä.

Käyttöohje sisältää alla olevan navigointipalkin, jonka avulla voitte liikkua helposti eri osien välillä.

| **Tietoa** | [Aloitus](#) | [Toiminnot](#) | [Varoitukset](#) | [Lisätiedot](#) |

Käyttötarkoitus

Käyttötarkoitus	ConnectClip on tarkoitettu langattomaksi vastaanottimeksi ja lähettimiksi Oticonin langattomien kuulokojeiden ja muiden äänilähteiden, kuten puheen ja langattomien elektronisten laitteiden välillä. Lisäksi ConnectClip auttaa kuulokojeiden käyttäjiä ohjaamaan kuulokojeen toimintoja.
Käyttöaiheet	Ei käyttöaiheita.
Suunniteltu käyttäjä	Aikuiset ja yli 3-vuotiaat lapset.
Käyttöympäristö	Sisällä / ulkona
Käytön esteet	Aktiivisten implanttien käyttäjien on noudatettava erityistä varovaisuutta laitetta käyttäessään. Lisätietoa löytyy varoitusosioista.
Kliiniset hyödyt	Katsokaa kuulokojeen kliiniset hyödyt.

Sisällys

Tietoa

Pakkauksen sisältö	6
Käytön aloitus	8
ConnectClipin esittely - päätoiminnot	10
Merkkivalojen esittely	12

Aloituis

Kuulokojeiden ja ConnectClipin liittäminen pariaksi	14
Matkapuhelimen ja ConnectClipin liittäminen pariaksi	16
ConnectClipin kytkeminen päälle ja pois päältä	18
ConnectClipin lataaminen	20

Toiminnot

ConnectClipin käyttö matkapuhelimen kanssa	22
Musiikin kuuntelu	28
ConnectClipin käyttö etämikrofonina	30
ConnectClipin käyttö kuulokojeiden kaukosäätimenä	35
Muut ominaisuudet ja toiminnot	36

Varoitukset

Varoitukset	38
-------------	----

Lisätiedot

Käyttöolosuhteet	42
Kansainvälinen takuu	43
Tekniset tiedot	44

Pakkauksen sisältö


Pakkaus sisältää seuraavat tuotteet:



ConnectClip



Tämä opas
(käyttöohje)

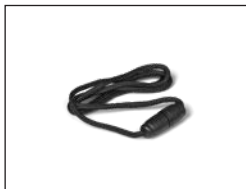

Pitkä kaulanauha



Lyhyt kaulanauha



Kotelo



Seinälaturi
(vaihtelee maittain)



USB-latauskaapeli




Suojus

Käytön aloitus


Ennen kuin voitte käyttää ConnectClipiä kuulokojeiden kanssa, molemmat kuulokojeet ja ConnectClip on yhdistettävä laitepareiksi. Jos ConnectClipiä käytetään matkapuhelimen kanssa, ConnectClip täytyy yhdistää myös matkapuhelimen laitepariksi.

Kuulokojeiden ja ConnectClipin liittäminen pariksi

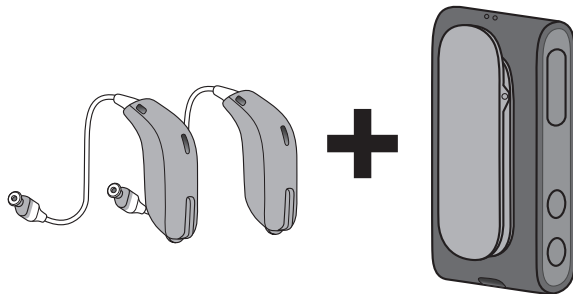


Siirry
sivulle
14

ConnectClipin ja matkapuhelimen liittäminen pariaksi

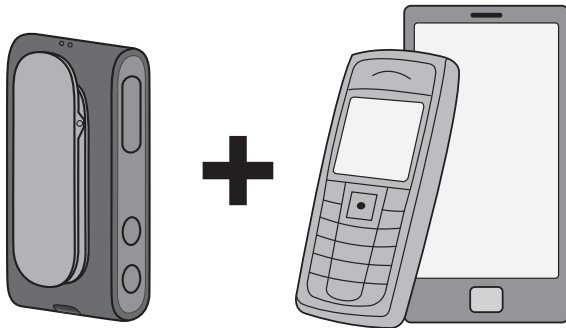

Siirry
sivulle
16

ConnectClipin esittely - päätoiminnot

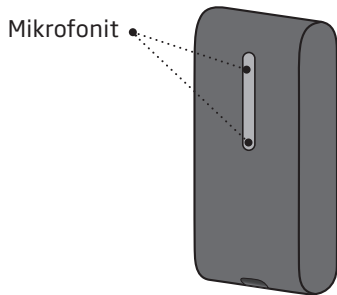

Mikrofonit

Etuosa



• **Monitoimipainike**

- Päälle / pois päältä
- Puheluun vastaaminen
- Tilan valitsin


• **Äänenvoimakkuuden painikkeet**

- - Ylös
- - Alas

Takaosa


Tilan
merkkivalo

Virran
merkkivalo

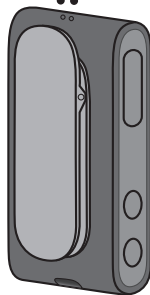

Latausliitäntä
(Mikro USB)

Pidike
ConnectClipin
kiinnittämiseen

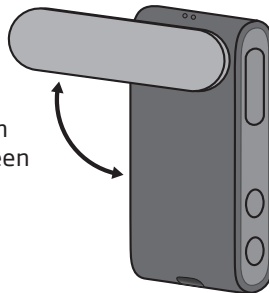

Merkkivalojen esittely


Tilan merkkivalo		Kuvaus
	Vilkkuva keltainen	Etsitään kuulokojeita
	Tasainen keltainen	Passiivinen. Kuulokojeet yhdistetty. Ei yhteyttä matkapuhelimeen.
	Vilkkuva sininen	Etsitään matkapuhelinta (pariliitos)
	Tasainen sininen	Yhdistetty matkapuhelimen laitepariksi
	Tasainen vihreä	Puhelu kesken. Kuulokkeet tai matkapuhelin.
	Vilkkuva vihreä	Saapuva puhelu
	Tasainen oranssi	Musiikki, matkapuhelin
	Tasainen magenta	Etämikrofonitila

Virran merkkivalo		Kuvaus
	Tasainen punainen	Akku vähissä
	Tasainen vihreä	Kytetty päälle - ei ladata
	Vilkuva vihreä	Kytetty päälle - ladataan
	Himmenevä vihreä	Kytetty päälle - lataus valmis
	Vilkuva oranssi	Kytetty pois päältä - ladataan
	Tasainen oranssi	Kytetty pois päältä - lataus valmis

Kuulokojeiden ja ConnectClipin pariliitos

1. Varmistakaa, että ConnectClipin virta on katkaistu

Pitäkää monitoimipainiketta painettuna noin 6 sekuntia, kunnes **virran merkkivalo sammuu** ●

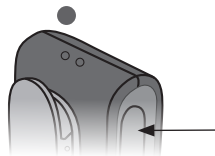

2. Asettakaa kuulokojeet pariliitostilaan

Aktivoikaa pariliitostila käynnistämällä kuulokojeet uudelleen.

Katsokaa kuulokojeiden käyttöohjeesta, miten ne kytketään päälle ja pois päältä.


3. Kuulokojeet ovat valmiit

yhdistettäväksi ConnectClipiin.

Teillä on 3 minuuttia aikaa pariliittää laitteet.

4. Kytkekää ConnectClip päälle

Pitäkää monitoimipainiketta painettuna noin 3 sekuntia, kunnes virran merkkivalo palaa TASAISEN VIHREÄNÄ ●

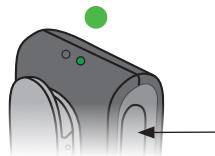

5. ConnectClip etsii kuulokojeita

Tilan merkkivalo


VILKKUU KELTAISENA ①



6. Asettakaa ConnectClip ja molemmat kuulokojeet lähelle toisiaan (enintään 20 cm)




20 cm

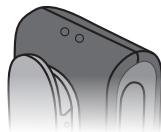

7. Yhteys kuulokojeisiin muodostettu. Tilan merkkivalo palaa TASAISEN KELTAISENA ●




Matkapuhelimen ja ConnectClipin liittäminen pariaksi

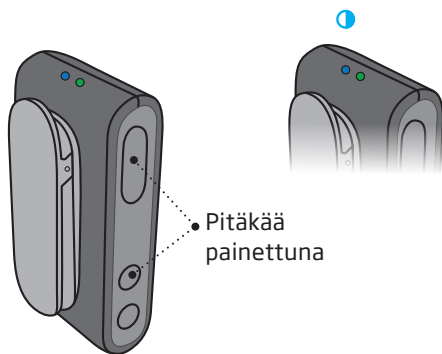

Asettakaa ConnectClip pariliitostilaan

Pitäkää monitoimipainiketta JA äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta yhtä aikaa painettuina noin 6 sekuntia, kunnes tilan merkkivalo VILKKUU SINISENÄ 

ConnectClip pysyy pariliitostilassa noin 3 minuuttia.

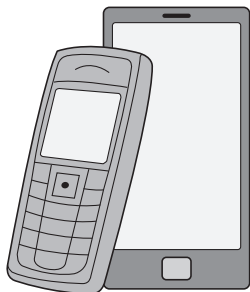

Laiteparin muodostus matkapuhelimessa
Kytkekää Bluetooth päälle. Etsikää ConnectClip ja muodostakaa pari.

Tämä suoritetaan normaalisti puhelimen asetuksissa tai Bluetooth-asetuksissa.

Antakaa pin-koodi

Jos puhelin pyytää pin-koodia, se on 0000 (neljä nollaa).



Laiteparin muodostus valmis


Pariliitos matkapuhelimen kanssa on valmis.
Tilan merkkivalo palaa TASAISEN SINISENÄ ●

ConnectClipin kytkeminen päälle ja pois päältä



PÄÄLLÄ ●

Pitäkää monitoimipainiketta painettuna noin 3 sekuntia, kunnes virran merkkivalo palaa TASAISEN VIHREÄNÄ.

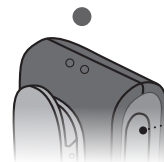

POIS PÄÄLTÄ ●

Pitäkää monitoimipainiketta painettuna noin 6 sekuntia, kunnes virran merkkivalo sammuu.

Käyttö	Kapasiteetti
Tyypillinen päivittäinen käyttö	16 tuntia: enintään 2 tuntia musiikin suoratoistoa + 2 tuntia puheluja + 12 tuntia valmiustilassa
Valmiustila (kytketty päälle, ei suoratoistoa)	Enintään 36 tuntia
Musiikki tai etämikrofoni	Enintään 5 tuntia
Puhelut	Enintään 6 tuntia

TÄRKEÄÄ

Käyttäkää ConnectClipin puhdistamiseen pehmeää kosteaa liinaa. Laitetta ei saa koskaan pestä vedessä tai upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.

Älkää käyttäkö ConnectClipiä suihkussa tai muissa vesiaktiviteeteissa tai upottako ConnectClipiä veteen tai muihin nesteisiin.

ConnectClipin lataaminen




Akku vähissä ●

Suoratoistoaikaa jäljellä noin 30 minuuttia. Virran merkkivalo palaa TASAISEN PUNAISENA.



Ladataan ●

Kytkekää mukana tullut latausjohto ConnectClipin pohjassa olevaan micro-USB-liitäntään. Virran merkkivalo VILKKUU VIHREÄNÄ tai ORANSSINA.

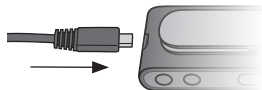

TÄRKEÄÄ

Kun lataatte ConnectClipiä, käyttäkää mukana toimitettua alkuperäistä, turvamerkittyä 5,0 V / 1 A:n virtalähdettä.



Lataamisen merkkivalot		
Ladataan (ConnectClip päällä)	Vilkkuu	
Lataus valmis (ConnectClip päällä)	Himmenevä	
Ladataan (ConnectClip pois päältä)	Vilkkuu	
Lataus valmis (ConnectClip pois päältä)	Tasainen	


Latausaika:

2 tuntia täyteen varaukseen mukana tullutta virtalähdettä käyttäen

TÄRKEÄÄ


Latauksen aikana lataamisen merkkivalojen pitäisi palaa tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Jos lataamisen merkkivalot eivät pala kuvatulla tavalla, irrottakaa laite latauksesta ja ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.

ConnectClipin käyttö matkapuhelimen kanssa

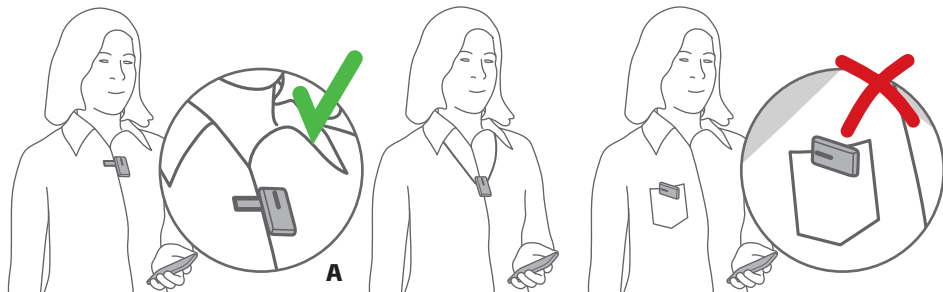

ConnectClipiä tulisi pitää kuvan osoittamalla tavalla, jotta se toimii parhaalla mahdollisella tavalla. On tärkeää, että mikrofoni osoittaa kohti suutanne (A). Varmistakaa, ettei ConnectClip jää vaatteiden tms. peittoon. Enimmäisetäisyys ConnectClipin ja matkapuhelimen välillä on 10 metriä.

Varmistakaa ConnectClipin yhteys puhelimeen

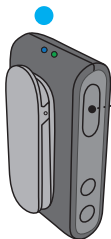

Puhelintilan valinta

Vaihtakaa tilaa pitämällä monitoimipainiketta painettuna noin 3 sekuntia. Tilan vaihto vahvistetaan äänimerkillä kuulokojeissa. Tilan merkkivalo palaa TASAISEN SINISENÄ ●



Tila	Tila
●	Passiivinen. Kuulokojeet yhdistetty. Ei yhteyttä matkapuhelimeen.
●	Yhdistetty matkapuhelimeen
●	Etämikrofonitila

Puhelujen vastaanottaminen



Puhelin yhdistetty

Kun ConnectClip on kytketty päälle ja matkapuhelin on sen kantoalueella, ConnectClip muodostaa automaattisesti yhteyden matkapuhelimeen.

Tilan merkkivalo palaa TASAISEN SINISENÄ ●



Puhelin soi

Kun puhelin soi, kuulette äänimerkin ja, jos käytössä, puhelimen soittoäänien kuulokojeista.

Tilan merkkivalo VILKKUU VIHREÄNÄ ●






• **Puheluun vastaaminen**

Painakaa monitoimipainiketta lyhyesti tai vastatkaa puheluun matkapuhelimesta.

Kun puhelu yhdistyy, tilan merkkivalo palaa TASAISEN VIHREÄNÄ ●

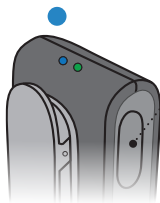


• **Puhelun lopettaminen**

Painakaa monitoimipainiketta lyhyesti tai katkaiskaa puhelu matkapuhelimesta.

Tilan merkkivalo palaa TASAISEN SINISENÄ ●

Puhelujen soittaminen

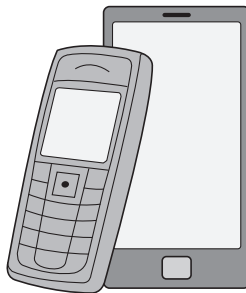

Puhelun soittamiseen tarvitaan vain matkapuhelin. Puhelu yhdistyy automaattisesti ConnectClipiin.

Kun puhelu on yhdistetty, tilan merkkivalo palaa **TASAISEN VIHREÄNÄ** ●

Muut kuuloketoiminnot

Numeron äänivalinta / äänikomento

Kun ConnectClip on yhdistetty matkapuhelimeen, monitoimipainikkeen painaminen kahdesti aktivoi numeron valinnan äänikomennolla, jos puhelin tukee tätä toimintoa.

Puhelun hylkääminen


Kun puhelin soi, äänenvoimakkuuden vähennyspainikkeen pitkä painallus hylkää puhelun.

Kuulokojeiden vaimennus

Voitte vaimentaa kuulokojeet painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta noin 3 sekuntia.

Äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainikkeen lyhyt painallus poistaa vaimennuksen.

Musiikin kuuntelu

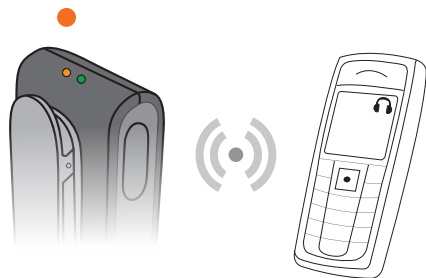

Langaton äänentoisto

Jos teillä on Bluetooth-yhteys matkapuhelimeen tai johonkin muuhun laitteeseen, puhelimesta/laitteessa soitetusta musiikista kuuluu automaattisesti kuulokojeista.

Tilan merkkivalo palaa TASAISEN ORANSSINA ●

ConnectClipistä ei tarvitse valita mitään.


Tila	Kuvaus
●	ConnectClip on kytketty päälle - ja suoratoistaa musiikkia puhelimesta

Äänenvoimakkuuden säätäminen


Kuunneltaessa musiikkia, suoratoistosignaalin tasoa voidaan säätää äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainikkeilla.

Puhelimen äänen keskeyttäminen


Monitoimipainikkeen lyhyt painallus katkaisee äänen. Voitte käynnistää äänen uudelleen käyttämällä puhelimen toimintoja.

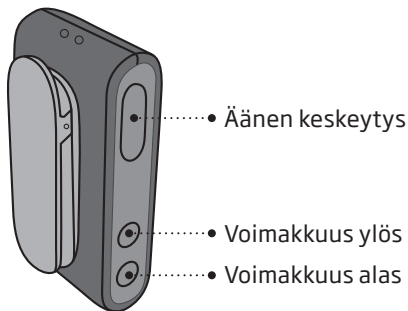

ConnectClipin käyttö etämikrofonina

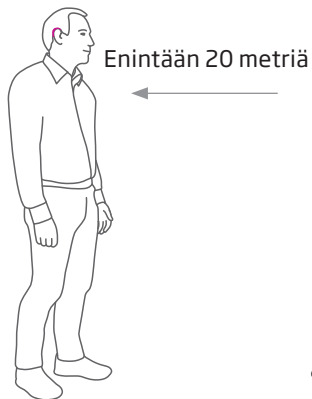

Etämikrofoni
Tässä tilassa
ConnectClipiä pitävän
henkilön puhe
suoratoistetaan
kuulokojeisiin.

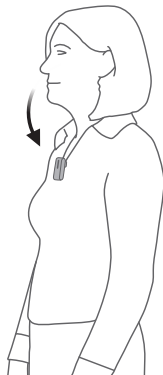

Huomattavaa: Varmistakaa, että mikrofoni on kohti puhujan suuta ja etteivät vaatteet tms. peitä sitä.

Mikrofonitilan valinta




- **Mikrofonitilan valinta**
Vaihtakaa tilaa pitämällä monitoimipainiketta painettuna noin 3 sekuntia. Tilan vaihto vahvistetaan äänimerkillä kuulokojeissa. Tilan merkkivalo vilkkuu TASAISEN MAGENTANA ●



Tila	Kuvaus
●	ConnectClip on kytketty päälle. Passiivinen. Ei yhteyttä matkapuhelimeen.
●	Yhdistetty matkapuhelimeen
●	ConnectClip on kytketty päälle - ja etämikrofonitilassa

Etämikrofonin äänen käynnistys/keskeytys

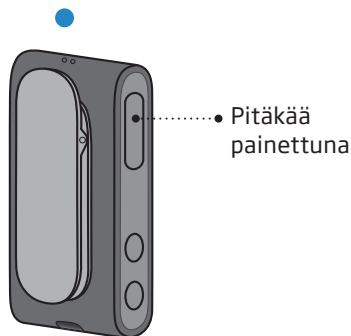

Pitäkää
painettuna

Mikrofonin äänen keskeytys

Pitäkää monitoimipainiketta painettuna noin 3 sekuntia, niin signaali mikrofonista kuulokojeisiin keskeytyy. Kuulokojeet siirtyvät samalla takaisin tavalliseen ohjelmaansa.

Tilan merkkivalo palaa KELTAISENA ● tai SINISENÄ ●

Etämikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen

Voimakkuuden lisääminen tai vähentäminen

Suoratoistosignaalia voidaan säätää äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainikkeilla.

Kuulokojeen mikrofoniin vaimennus (vain etämikrofonista tuleva ääni)

Pitäkää äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta painettuna noin 3 sekuntia.

Äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainikkeen lyhyt painallus poistaa vaimennuksen.



• Voimakkuus ylös

• Voimakkuus alas

Etämikrofonin äänen käynnistys/keskeytys kuulokojeita käyttäen



P1 --> P2 --> TV --> Mikrofoni

Kuulokojeen painikkeen painallus vaihtaa kuulokojeiden ohjelmaa.

Kun etämikrofoniohjelma saavutetaan, kuulette etämikrofoniohjelman merkkiään.


Voitte keskeyttää etämikrofonin äänen vaihtamalla kuulokojeen ohjelmaa.

TÄRKEÄÄ


Katsokaa kuulokojeiden käyttöohjeesta tarkempaa tietoa kuulokojeidenne toiminnoista.

ConnectClipin käyttö kuulokojeiden kaukosäätimenä

Kun ConnectClip ei suoratoista ääntä, se toimii kuulokojeidenne kaukosäätimenä.

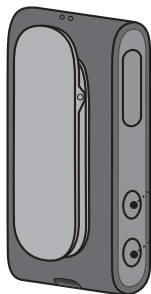

- **Voimakkuutta ylös**
- lyhyt painallus
- **Voimakkuutta alas**
- lyhyt painallus

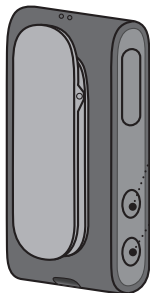

- **Seuraava ohjelma**
3 sekunnin painallus
vaihtaa seuraavaan ohjelmaan
- **Kuulokojeen mikrofonien vaimennus - pitkä painallus**
Vaimennuksen poisto -
voimakkuussäätimen lyhyt
painallus

Huomautkaa: Enimmäisetäisyys ConnectClipin ja kuulokojeiden välillä on 2 metriä.

Muut ominaisuudet ja toiminnot

Yksi yhteys kerrallaan

Kun ConnectClip on yhdistetty usean laitteen (enintään 8) laitepariksi, se yhdistyy vain ensimmäiseen käytettävissä olevaan puhelimeen.

Ei puheluja mikrofonina käytettäessä

Kun ConnectClipiä käytetään etämikrofonina, se ei ole yhteydessä matkapuhelimeen.

Ei alueella - kun mikrofonitilassa

Jos ConnectClip ei ole kuulokojeiden kantoalueella, kuulokojeet palaavat normaaliin ohjelmaansa 90 sekunnin jälkeen.

Bluetooth-laiteparien poistaminen

Voitte poistaa kaikki Bluetooth-laiteparit pitämällä monitoimipainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta painettuna 10 sekuntia. Tilan merkkivalo VILKKUU PUNAISENA.

Varoitukset

Tutustukaa huolellisesti seuraaviin yleisiin varoituksiin ennen ConnectClipin käyttöä henkilökohtaisen turvallisuutenne ja oikean käytön varmistamiseksi. Ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen, jos kohtaatte yllättävää toimintaa tai vakavia vaaratilanteita ConnectClipin käytön aikana tai sen käytön takia. Kuuloalan ammattilainen neuvoo teitä asian käsittelyssä ja tarvittaessa ilmoituksen tekemisessä valmistajalle ja/tai maan viranomaisille.

Tukehtumisvaara ja pienten osien nielemisvaara

ConnectClip ja sen osat on säilytettävä lasten ja kaikkien sellaisten ulottumattomissa, jotka saattavat niellä ne tai muutoin vahingoittaa itseään niillä. Osan nielaiseen täytyy mennä lääkäriin välittömästi.

Tulenarkuus

ConnectClip on turvallinen normaaleissa käyttöolosuhteissa. ConnectClipiä ei ole testattu räjähtäviä kaasuja koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti. Älkää käyttäkö ConnectClipiä ympäristöissä, joissa on räjähdysvaara, esim. kaivoksissa, happirikkaissa ympäristöissä tai alueilla, jossa käsitellään helposti syttyviä anesteetteja.

Röntgen/CT/MR/PET-kuvaus, sähköhoito ja kirurgia

Älkää käyttäkö ConnectClipiä röntgen-, CT-, MR- tai PET-kuvauksen, sähköhoidon tai leikkauksen aikana, sillä voimakkaat sähkömagneettiset kentät voivat vaurioittaa ConnectClipiä.

Kuumuus ja kemikaalit

ConnectClipiä ei saa koskaan altistaa korkeille lämpötiloille, esim. jättää aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn autoon. ConnectClipiä ei saa kuivata mikroaalto- tai muussa uunissa.

Kosmetiikan, hiuskiinteen, hajuveden, partaveden, aurinkovoiteen, hyönteiskarkotteen ym. kemikaalit voivat vahingoittaa ConnectClipiä. Poistakaa ConnectClip aina ennen tällaisten aineiden käyttöä ja antakaa aineiden kuivua ennen ConnectClipin käyttöä.

Häiriöt

ConnectClipin häiriönsietokyky on tarkoin tutkittu tiukimpien kansainvälisten standardien mukaan. Tästä huolimatta jotkin laitteet, kuten radio, matkapuhelin, kauppojen hälytyslaitteet ja muut langattomat laitteet, saattavat aiheuttaa häiriötä ConnectClipissä. Mikäli näin tapahtuu, kasvattakaa etäisyyttä häiriötä aiheuttavan laitteen ja ConnectClipin välillä.

Käyttö liikenteessä

ConnectClipin käyttö voi häiritä ympäristön huomioimista. Kiinnittäkää huomiota ympäristön, kun käytätte ConnectClipiä. Noudattakaa kansallisia liikennelainsäädännön määräyksiä liittyen viestintälaitteiden käyttöön liikenteessä.

Käyttö lentokoneessa

ConnectClip sisältää Bluetooth-tekniikkaa. ConnectClipiä ei saa käyttää lentokoneessa, ellei siihen ole saatu erityistä lupaa lentohenkilöstöltä.

Aktiiviset implantit

ConnectClipin vaikutus ihmisten terveyteen on testattu ja kuvailtu tarkkaan SAR-arvoja (sähkömagneettisen energian ja jännitteen ihmiskehoon imeytymistä kuvaavia altistumisarvoja) koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti.

Altistumisarvot ovat reilusti alle kansainvälisesti hyväksytyjen SAR-turvallisuusrajojen, jotka on määritelty ihmisten terveyttä ja aktiivisten lääkinnällisten laitteiden, kuten tahdistimien ja sydämen defibrillaattorien, käyttöä koskevissa standardeissa.

Varoitukset

Ladattava akku

Älkää yrittäkö avata ConnectClipiä, sillä akku saattaa vahingoittua.

Älkää koskaan yrittäkö vaihtaa akkua. Jos akun vaihto on tarpeen, ottakaa yhteyttä laitteen hankintapaikkaan. Huoltotakuu mitätöityy, mikäli havaitaan merkkejä väärinkäytöksistä.

USB-kaapelilla ladattavien akkujen turvallisuus määräytyy ulkoisen laitteiston perusteella. Jos ulkoinen laite kytketään sähköpistorasiaan, ulkoisen laitteen on oltava IEC 62368-1:n tai vastaavan turvallisuusstandardin mukainen.

Yhdistäminen ulkoisiin laitteisiin

Kun ConnectClip yhdistetään ulkoiseen laitteeseen (aux-kaapelilla, USB-kaapelilla tai suoraan), ulkoinen laite vaikuttaa käytön turvallisuuteen.

Jos ulkoinen laite kytketään sähköpistorasiaan, ulkoisen laitteen on oltava IEC 62368-1:n tai vastaavan turvallisuusstandardin mukainen.

Säilytys

ConnectClip tulee säilyttää lasten tai muiden laitetta varomattomasti käsittelevien ulottumattomissa henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi ja virheellisen käytön välttämiseksi.

Kolmannen osapuolen lisävarusteiden käyttö

Käyttäkää ainoastaan valmistajan toimittamia lisävarusteita, antureita tai kaapeleita. Yhteensopimattomat lisävarusteet voivat heikentää laitteen sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC).

Kaulanauhan käyttö

Jos kaulanauha tarttuu vahingossa kiinni johonkin sen ollessa kaulassa, nauha on suunniteltu katkeamaan automaattisesti. Tämän vuoksi älkää koskaan yrittäkö lyhentää tai muokata nauhaa tavalla, jota ei ole hyväksytty. Nauhaa ei tule antaa alle 3-vuotiaiden lasten käyttöön.

Mahdollisia haittavaikutuksia

Tavallisesti allergiaa aiheuttamattomat materiaalit voivat joissain tapauksissa aiheuttaa ihoärsytystä tai muita sivuvaikutuksia erittäin herkille henkilöille. Ottakaa yhteyttä lääkäriin, mikäli teillä esiintyy mainittuja tai muita haittavaikutuksia.

Lataaminen

Ladatkaa ConnectClip 6 kuukauden välein ehkäistäkseenne akun mahdollista vahingoittumista säilytytettäessä.

Yhteensopivuus matkapuhelimen kanssa

Katsokaa osoitteesta www.oticon.global luettelo matkapuhelimista, jotka Oticon on testannut perusteellisesti ja joiden on todettu täyttävän yhteensopivuuden vähimmäisvaatimukset testaushetkellä. Oticon ei kuitenkaan ole yleisesti vastuussa yhteensopivuudesta. Erityisesti Oticon ei ole vastuussa yhteensopimattomuudesta, joka johtuu matkapuhelimien tulevista päivityksistä tai sellaisesta yhteensopimattomuudesta, jota näissä testeissä ei ole testattu ja/tai löydetty. Oticonilla ei ole korvausvastuuta sellaisista matkapuhelimista, jotka eivät toimi odotetulla tavalla.

Ennen kuin ostatte uuden puhelimen, tutustukaa yllä mainittuun luetteloon.

Käyttöolosuhteet

Käyttöympäristön olosuhteet	Lämpötila: +5 °C - 40 °C Kosteus: 15-93 % suhteellinen kosteus, ei tiivistyvä Ilmanpaine: 700-1060 hPa
Kuljetus- ja säilytysolosuhteet	Lämpötila ja kosteus eivät saa ylittää alla annettuja arvoja pitkiksi ajoiksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana: Lämpötila: -20°C - +60°C Kosteus: 15-93 % suhteellinen kosteus, ei tiivistyvä Ilmanpaine: 700-1060 hPa

Kansainvälinen takuu

Laitteellanne on valmistajan myöntämä rajoitettu kansainvälinen 12 kuukauden takuu, joka alkaa ostopäivästä. Tämä rajoitettu takuu kattaa valmistus- ja materiaali- eli itse laitteessa, muttei siihen liittyvissä lisävarusteissa, kuten paristoissa, johdoissa, virtalähteissä jne. Ongelmat, jotka johtuvat laitteen virheellisestä tai huolimattomasta käsittelystä tai hoidosta, kohtuuttomasta käytöstä, onnettomuuksista, muun kuin valtuutetun osapuolen suorittamasta korjauksesta, altistumisesta korroosiota aiheuttaville olosuhteille, vieraiden esineiden laitteeseen joutumisen tai väärin säätöjen aiheuttamista vaurioista, EIVÄT kuulu rajoitetun takuun piiriin ja saattavat mitätöidä takuun. Tämän takuun puitteissa valmistaja päättää oman harkintansa mukaan, korjataanko laite vai vaihdetaanko se vastaavaan malliseen laitteeseen. Tämä takuu ei vaikuta kansallisen lainsäädännön antamiin

laillisiin oikeuksiin koskien kulutustavaroiden kauppaa. Laitteen myyjällä saattaa olla tätä rajoitettua takuuta laajempi takuu. Kysykää lisätietoja myyjältä.

Jos laite tarvitsee huoltoa

Ottakaa yhteyttä ensin laitteen hankintapaikkaan, jossa voidaan hoitaa pienemmät ongelmat ja tehdä tarvittavia säätöjä. Kuuloalan ammattilainen voi auttaa järjestämään takuhuollon valmistajan kanssa. Kuuloalan ammattilainen saattaa periä maksun palveluistaan.

Tekniset tiedot

Malli	AC1A
GTIN	05714464006755

ConnectClip sisältää radiovastaanottimen, joka käyttää Bluetooth Low Energy (BLE) -tekniikkaa ja valmistajan omaa lyhyen kantaman radiotekniikkaa, jotka molemmat toimivat ISM-kaistalla 2,4 GHz. GHz-radiolähettimet on heikkoja ja aina alle 50 mW, mikä vastaa 17 dBm:n kokonaissäteilytehoa. ConnectClip noudattaa kansainvälisiä radiolähetin-, säteilyn ihmisaltistus- ja sähkömagneettisuusstandardeja.

ConnectClipin koon asettamista rajoituksista johtuen kaikki asiaan liittyvät hyväksymismerkinnät ovat tässä oppaassa.

Kehoon kiinnitettynä laite täyttää FCC:n ja IC RF -altistumisen raja-arvot, ja se on testattu kosketuksessa ihmiskehoon. Laitetta ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää yhdessä toisen antennin tai lähettimen kanssa.

Lisätietoa löytyy teknisten tietojen erittelyistä osoitteesta www.oticon.global.

Yhdysvallat ja Kanada

Tämä laite sisältää radiomoduulin, jonka sertifiointinumerot ovat seuraavat:

FCC ID: 2ACAHAC01

IC: 11936A-AC01

Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osion 15 ja Kanadan RSS-säännösten normeja.

Toiminta edellyttää seuraavien kahden ehdon täyttymistä:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
2. Tämän laitteen täytyy sietää kaikki vastaanottamansa häiriöt, myös sellaiset, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Huomautus

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai lisäykset, jotka eivät ole todistettavasti valmistajan hyväksymiä, voivat purkaa käyttäjän oikeuden laitteen käyttämiseen.

Valmistaja vakuuttaa, että tämä ConnectClip on yhteensopiva EU direktiivin 2014/53/ EU keskeisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien lausekkeiden kanssa.

Tämä lääkinällinen laite on lääkinällisistä laitteista annetun asetuksen (EU) 2017/745 mukainen.

Yhteensopivuusvakuutus on saatavissa valmistajalta.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark/Tanska



Elektroniikkalaitteet
on käsiteltävä paikallisen
lainsäädännön
edellyttämällä tavalla.



Complies with
IMDA Standards
DA103820



Tässä oppaassa käytettyjen symbolien ja lyhenteiden selitykset



Varoitukset

Varoituksen symbolin yhteydessä oleva teksti tulee lukea ennen laitteen käyttöä.



Valmistaja

Laitteen on valmistanut valmistaja, jonka nimi ja osoite ilmoitetaan symbolin vieressä. Osoittaa lääkinnällisten laitteiden valmistajan EU:n asetusten 2017/745 ja 2017/746 mukaisesti.



CE-merkintä

Laite on kaikkien vaadittavien EU:n asetusten ja direktiivien mukainen.



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE)

Kuulokojeet, lisävarusteet, akut ja paristot on kierrätettävä paikallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Kuulokojeen käyttäjät voivat myös palauttaa elektroniikkaromun kuuloalan ammattilaiselle hävitettäväksi. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU (WEEE) piiriin kuuluva elektroniikkalaitte.



Säädöstenmukaisuusmerkintä (RCM)

Laite noudattaa Australian tai Uuden-Seelannin markkinoille saapuvien laitteiden sähköturvallisuus-, sähkömagneettinen yhteensopivuus- (EMC) ja radiotaajuussäädöksiä.



Bluetooth-logo

Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröimä tavaramerkki, jonka käyttö vaatii lisenssin.



Kaksoiseristys

Virtalähde on kaksoiseristetty. Tämä tarkoittaa, että vikaantumisriski yhden vian ilmetessä on hyvin pieni.



Sisäkäyttö

Vain sisäkäyttöön.

Tässä oppaassa käytettyjen symbolien ja lyhenteiden selitykset

GTIN

Maailmanlaajuinen kaupanumero

14-numeroinen tunnus, joka yksilöi lääkinällisen laitteen tai lääkinällisen ohjelmiston maailmanlaajuisesti. Tässä oppaassa oleva GTIN-tunnus liittyy lääkinällisen laitteen laiteohjelmistoon. Lakisääteisissä pakkausmerkinnöissä oleva GTIN-tunnus liittyy lääkinälliseen laitteeseen.

Complies with
IMDA Standards
DA103820

Singaporen IMDA-merkintä

Laite on Info-Communications Media Development Authority -viranomaisen (IMDA) julkaisemien standardien ja määritysten mukainen sekä yhteensopiva Singaporen yleisten televiestintäverkkojen kanssa eikä se aiheuta radiotaajuuksien häiriöitä muille valtuutetuille radioviestintäverkoille.

220073FI / 2020.03.20 / v1

Merkinnöissä käytettyjen muiden symbolien selitykset



Lääkinnällinen laite

Laite on lääkitsevä laite.



Pitä kuivana

Osoittaa, että lääkitsevä laite on suojattava kosteudelta.



Varoitusmerkki

Tutustu käyttöohjeeseen varoituksiin.



Viitenumero

Osoittaa valmistajan viitenumeron lääkitsevän laitteen tunnistamiseksi.



Sarjanumero

Osoittaa valmistajan sarjanumeron lääkitsevän laitteen valmistuserän tunnistamiseksi.



Li-ion

Paristojen ja akkujen kierrätysmerkki

Litiumioniparistojen ja -akkujen kierrätysmerkki.

5.0V 200mA

Virtalähteen ulostulo

Ilmoittaa virtalähteen sähkölaitteeseen syöttämän sähkövirran voimakkuuden.



Etelä-Afrikan ICASA-merkki

Laitteella on myyntilupa Etelä-Afrikassa.



Japanin TELEC-symboli

Sertifioitujen radiolaitteiden merkki.



Brasilian ANATEL-merkki

Laite on sertifioitu ja homologoitu Brasiliassa.



oticon
life-changing **technology**