

Tekniset tiedot

Charger 1.0 miniBTE R

Latauslaite on suunniteltu helppoon päivittäiseen lataamiseen vain muutamalla yksinkertaisella toiminnolla.

Lataaminen

- Kuulokojeet irrotetaan ja ne asetetaan laturiin - ei erillistä kantta.
- Kuulokojeet alkavat latautua automaattisesti, kun ne asetetaan laturiin, ja käynnistyvät automaattisesti, kun ne poistetaan laturista.
- Kuulokojeet ladataan joka yö, jotta ne ovat täyteen ladatut seuraavan päivän käyttöä varten.

Helppo havaita

Kuulokojeen LED-valon avulla käyttäjän on helppo tulkita latauksen tilaa:

- Oranssi = ladataan
- Vihreä = ladattu täyteen

Lyhyet latausajat

Kun kuulokojeiden akut ovat täysin tyhjt, normaali latausaika on:

- 3,5 h = ladattu täyteen
- 1 h = ladattu 40 %
- 0,5 h = ladattu 20 %

Tuotetiedot

- Induktiivinen lataus
- Virta PÄÄLLÄ/POIS-merkkivalo, LED
- Magneettiliitännät - kuulokojeet pysyvät paikoillaan latausporteissa
- Kiinteä virtakaapeli
- Kumiset liukuesteet vakauden parantamiseksi
- Pehmeä, kaareva muotoilu - helppo puhdistaa
- Pehmeä säilytyspussi kuljetukseen



Latauslaite on suunniteltu miniBTE R:n lataamiseen. Se perustuu induktioteknologiaan ja lataa kuulokojeet langattomasti kolmessa tunnissa.


Suunniteltu miniBTE R:lle
Oticon More™
Oticon Zircon
Oticon Play PX



* Virtapistoke vaihtelee maittain



| Tekniset tiedot: Latauslaite | |
|--------------------------------------|--|
| Nimi | Charger 1.0, Oticon miniBTE R |
| Suunniteltu/Yhteensopiva | Oticon More™, Oticon Zircon, Oticon Play PX: miniBTE R |
| Mitat | Ø95 mm / kokonaiskorkeus 39 mm |
| Paino | 135 g |
| Väri | Musta |
| Virtalähteen liitäntä | USB A |
| Tilan merkkivalo | Latauslaitteen LED-merkkivalo: kertoo, onko laite päällä vai pois päältä Kuulokojeiden LED-merkkivalo ladatessa: kertoo latauksen tilan |
| Kuulokojeiden latausaika | Enintään 3,5 tuntia riippuen akkujen varaustasosta Lämpötila: +10-35 °C (+50-95 °F) Enintään 5 tuntia riippuen akkujen varaustasosta Lämpötila: +5-10 °C ja +35-40 °C (+41-50 °F ja +95-104 °F) |
| Virtalähde | Mukana toimitettava virtapistoke |
| Tulojännite | 5 V DC |
| Tulovirta | < 0.2 A (kahta kuulokojetta ladattaessa) < 10 mA valmiustilassa (ei kuulokojeita) |
| Johto | Kiinteä johto, pituus 150 cm |
| KytKentä ulkoisiin laitteisiin | Jos ulkoinen laite kytketään sähköpistorasiaan, ulkoisen laitteen on oltava IEC 62368-1:n tai vastaavan turvallisuusstandardin mukainen. |
| Käyttöolosuhteet | |
| Käyttöolosuhteet | Lämpötila: +5 °C - +40 °C (+41°F - +104°F) Suhteellinen kosteus: 5-93 %, tiivistymätön |
| Säilytys- ja kuljetusolosuhteet | Lämpötila: -25°C - +70°C (-13°F - +158°F) Suhteellinen kosteus: 5-93 %, tiivistymätön |
| Ilmanpaine | 700-1060 hPa |
| Tekniset tiedot: Virtapistoke | |
| Tulojännite | 100-240 V AC |
| Tulotaajuus | 50-60 Hz |
| Lähtöjännite | 5 V DC |
| Lähtövirta | 1 A |

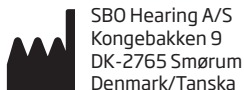

Pääkonttori
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark/Tanska