

# Kuinka pidät kuulokojeesi puhtaina COVID-19

Ohjeet kuulokojeiden päivittäiseen puhtaanapitoon kotona



- Käytä kertakäyttöisiä suojakäsineitä puhdistaessasi kuulokojeitasi.
- Mikäli käytät korvantauskojeita, puhdista kuulokojeen pinta kostealla puhdistusliinalla tai paperilla, joka ei sisällä alkoholia. Kuulokojeiden pinta on vettähylykivä, mutta ei kestä kemikaaleja, kuten alkoholia.
- Korvakäytäväkojeiden pinnan voi puhdistaa millä tahansa kostealla liinalla tai paperilla, joka sisältää desinfioivaa tai alkoholipitoista puhdistusainetta. Näitä puhdistusohjeita voidaan soveltaa myös EduMic- ja Connect Clip- yhteislaitteiden kanssa.
- Kertakäyttöisten puhdistusliinojen sijaan, voit käyttää puhdistuksessa myös miedossa saippua-vesiliuoksessa kostutettua, nukkaamatonta puuvillaista kangasliinaa. Vältä runsaan veden käyttöä, ettei vettä pääse kuulokojeen sisään vahingoittamaan koneistoa.
- Heitä kertakäyttöiset suojakäsineet roskeen ja pese kätesi huolellisesti saippualla ja vedellä sekä käytä desinfioivaa käsihuhdetta kuulokojeittesi puhdistamisen päätteeksi.
- Anna puhdistettujen kuulokojeittesi kuivua huoneenlämmössä noin tunnin (1 h) ennen käyttöönottoa.

## Kuumeen mittaaminen korvastasi

Jos korvastasi mitataan kuumetta, suosittelemme kuulokojeen poistamista ennen toimenpidettä. Mikäli kuulokojetta pidetään korvassa mittauksen aikana, tulos voi olla virheellinen.