

Accessoires sans fil Oticon Opn

Tout ce dont vous  
avez besoin pour  
**rester connecté**



**oticon**  
PEOPLE FIRST

## Facilitez-vous le quotidien

Les accessoires sans fil conçus spécifiquement pour Oticon Opn™, sont prévus pour améliorer votre expérience d'écoute et de communication, tout en vous assurant une utilisation facile.

Les accessoires sans fil vous aident à tirer le meilleur parti de vos aides auditives Oticon Opn. Vous pouvez, par exemple, diffuser en streaming le son de votre téléviseur, téléphone portable, lecteur de musique, PC ou autre appareil directement dans vos aides auditives, comme si vous portiez des écouteurs sans fil.


### Discret et pratique

Pour un maximum de discrétion et de commodité, vous pouvez, entre autres, contrôler vos aides auditives avec l'application Oticon ON et vous connecter à une télécommande et même, au monde des objets connectés et de la domotique.



## Contrôlez vos aides auditives avec l'application Oticon ON

L'application Oticon ON vous permet de choisir ce que vous souhaitez entendre et de régler le son. Elle offre également une notification de batterie faible, et bien d'autres fonctionnalités.

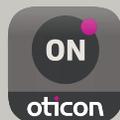

Téléchargez l'application gratuite sur l'App Store® ou Google Play™.



## Passez des appels clairs, sûrs et **sans soucis**

Vos aides auditives Oticon Opn peuvent se connecter à n'importe quel téléphone portable moderne par Bluetooth™.



## Des appels mains libres avec n'importe quel smartphone

Grâce au ConnectClip, il est facile de passer des appels mains libres avec un iPhone®, un Android™ ou tout autre smartphone. Le ConnectClip transmet la voix de l'interlocuteur directement dans vos aides auditives tandis que le microphone intégré transmet clairement ce que vous dites à l'interlocuteur. Le ConnectClip transforme vos aides auditives Opn en kit mains libres de haute qualité vous permettant de :

- Passer et recevoir des appels sans toucher à votre téléphone dans la voiture ou en déplacement, en les diffusant en streaming dans les deux oreilles
- Diffuser en streaming de la musique, des vidéos ou tout autre contenu sonore sans fil de votre smartphone à vos aides auditives
- Contrôler le volume et changer de programme à distance



## Oticon Opn est une aide auditive Made for iPhone

- Connectez-vous directement à votre iPhone, iPad® ou iPod touch®
- Transformez vos aides auditives en écouteurs stéréo
- Diffusez en streaming des appels, de la musique, des vidéos ou tout autre contenu sonore sans fil dans vos aides auditives
- Utilisez votre iPhone pour contrôler le volume ou changer de programme

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0.



## Obtenez le son **directement** dans vos aides auditives

L'adaptateur TV vous permet de profiter de votre programme TV favori ou d'écouter la musique de votre chaîne hi-fi directement dans vos aides auditives, comme si vous portiez des écouteurs stéréo sans fil.

### Grâce à l'adaptateur TV, vous pouvez :

- Entendre clairement la télévision ou écouter de la musique en diffusant le son en streaming directement dans vos aides auditives
- Choisir le niveau auquel vous souhaitez entendre tout en laissant le téléviseur à un volume agréable pour les autres
- Utiliser l'application Oticon ON pour contrôler le volume du son diffusé en streaming à distance
- Compatible avec le format Dolby Digital®
- Portée : jusqu'à 15 mètres



## Contrôlez vos aides auditives **à distance**

Si vous souhaitez contrôler le volume, changer de programme ou simplement éteindre vos aides auditives en toute discrétion, vous pouvez utiliser l'une des trois options de commande à distance : l'application Oticon ON, le ConnectClip ou la télécommande.





## Entendez **plus facilement** votre interlocuteur

Même avec les meilleures aides auditives, il peut parfois être difficile d'entendre clairement ce que quelqu'un dit, surtout dans un environnement bruyant ou lorsqu'on participe à une conférence.

Le ConnectClip sans fil peut vous aider dans les situations d'écoute difficiles en diffusant le son en streaming directement dans vos aides auditives.

### Entendre la parole à une certaine distance ou dans le bruit

- Donnez le ConnectClip à la personne que vous souhaitez mieux entendre
- Le ConnectClip diffuse en direct la voix de votre interlocuteur directement dans vos aides auditives sans compromettre votre capacité à entendre les autres sons qui vous entourent
- Utilisez l'application Oticon ON pour contrôler le volume du microphone à distance
- Portée : jusqu'à 20 mètres

Le ConnectClip est également idéal pour parler via l'ordinateur en transformant vos aides auditives en micro-casque sans fil.

### Parler via l'ordinateur

- Utilisez le ConnectClip pour diffuser le son en streaming directement dans vos aides auditives lorsque vous parlez par Skype, Lync, etc.
- Appairez le ConnectClip directement avec votre ordinateur ou utilisez la clé USB d'Oticon
- Portée : jusqu'à 10 mètres



Jusqu'à 10 mètres  
←-----→





## Connectez vos aides auditives Opn à Internet

Le réseau « If This Then That (IFTTT) » vous donne des possibilités infinies de connexions sans fil vos aides auditives Oticon Opn à d'autres appareils connectés à Internet.

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
Vous pouvez par exemple :

- Recevoir une notification directement dans vos aides auditives lorsque quelqu'un sonne à la porte
- Obtenir les prévisions météo, les SMS et les actualités, etc. à haute voix dans vos aides auditives
- Mettre en marche votre cafetière lorsque vous allumez vos aides auditives le matin
- Éteindre automatiquement les lumières lorsque vous éteignez vos aides auditives
- Et inventer chaque jour de nouvelles interactions : le monde des objets connectés ouvre à vous...

Découvrez tout ce qu'Oticon Opn™ peut faire pour vous. Demandez conseil à votre audioprothésiste dès aujourd'hui.

Rendez-vous sur [oticon.fr/connectivity](http://oticon.fr/connectivity) pour obtenir plus d'informations sur les produits et la compatibilité entre les appareils.

Contactez votre audioprothésiste :



Durée de disponibilité garantie des pièces détachées : 5 ans après la date d'achat. Décret 2014-1482 / Article L111-3 du code de la consommation

Prodition S.A.S., Parc des Barbanniers, 3 allée des Barbanniers, 92635 GENEVILLIERS CEDEX - SIREN 301 689 790 R.C.S. NANTERRE



oticon.fr

**oticon**  
PEOPLE FIRST