

OTICON | **Opn**

Opn™ mini RITE

La solution rechargeable



Un guide
rapide pour
votre nouvelle
aide auditive
rechargeable

oticon
PEOPLE FIRST

Vous venez d'acquérir une nouvelle aide auditive rechargeable

Ce livret est un guide d'utilisation de la solution rechargeable Oticon Opn™ mini RITE.

Nous vous invitons à lire le mode d'emploi fourni avec l'aide auditive Oticon Opn™ mini RITE, ainsi que celui fourni avec le boîtier rechargeable.

Pour un accès facile à nos instructions en vidéo, vous pouvez scanner les QR codes présents sur chaque page avec votre smartphone ou visiter notre page assistance sur www.oticon.fr/rechargeable.

Nous espérons que vous profiterez de sa capacité de recharge pratique. En outre, vous pouvez être sûr(e) de ne jamais être à court de piles, car vous pouvez toujours utiliser des piles classiques comme solution de secours.




Sommaire


<u>Votre aide auditive rechargeable Oticon Opn mini RITE</u>	6
<u>Comment insérer les piles rechargeables</u>	8
<u>Performance attendue des accus</u>	10
<u>Comment utiliser les accus</u>	12
<u>Soin et entretien</u>	13
<u>Comment recharger vos aides auditives</u>	14
<u>Voyants lumineux</u>	15
<u>Guide de dépannage</u>	16
<u>5 conseils pour profiter au mieux de vos aides auditives rechargeables</u>	18

Votre aide auditive rechargeable Oticon Opn mini RITE

DESCRIPTIF

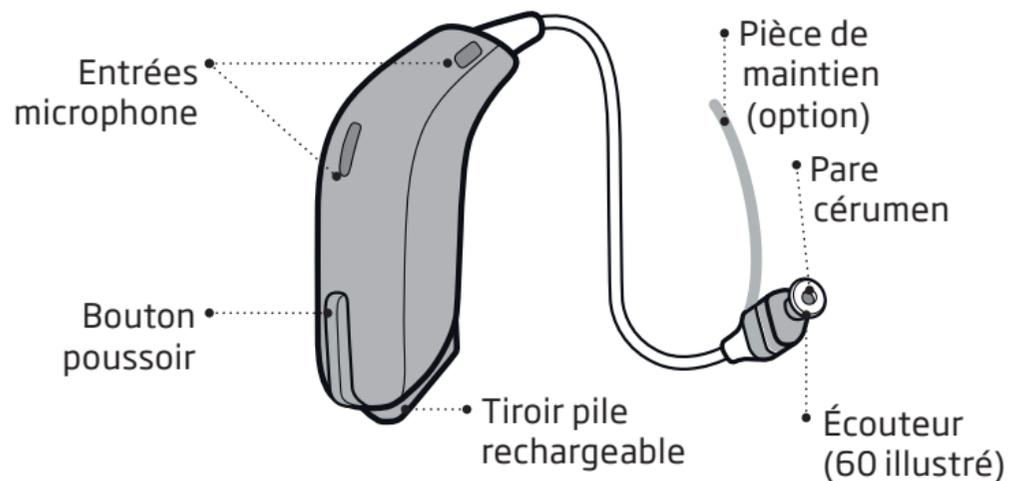


UTILISATION

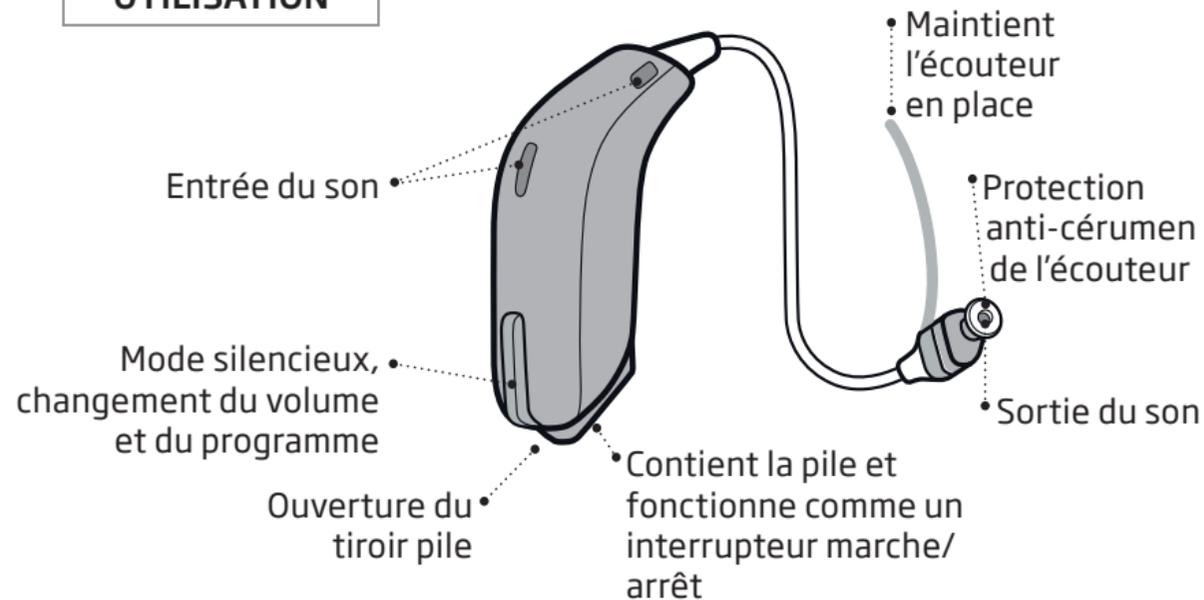


REMARQUE

Ouvrez le tiroir pile si vous souhaitez éteindre votre aide auditive.


Comment insérer les piles rechargeables

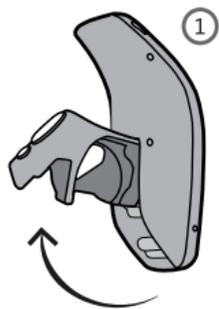

1. Ouvrez le tiroir pile

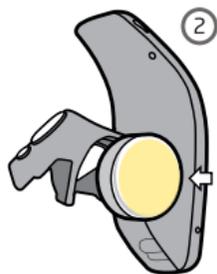

2. Placez la pile rechargeable à l'intérieur du tiroir pile (côté doré vers le haut)

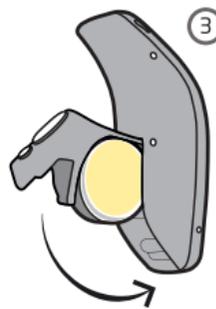

3. Refermez le tiroir pile



Accu argent-zinc rechargeable



Pile zinc-air jetable



Comment utiliser les piles rechargeables



Comment utiliser les piles jetables classiques

REMARQUE

Vous pouvez utiliser les piles jetables zinc-air 312 dans vos Oticon Opn mini RITE rechargeables. Ne pas poser les aides auditives dans le chargeur si vous avez inséré des piles jetables classiques.

Performance attendue des accus

Si les accus sont chargés complètement pendant 7 heures ininterrompues, la solution ZPower est prévue pour fonctionner pendant une journée entière.

La durée de vie quotidienne des accus dépend du degré d'utilisation de l'appareil :

- Jusqu'à 19 heures d'autonomie pour une utilisation sans streaming.
- 16-17 heures d'utilisation basées sur 90 minutes de streaming iPhone associé à un usage traditionnel.
- 15-16 heures d'utilisation pour une utilisation traditionnelle associée à 4 heures de télévision et une heure de streaming iPhone.

S'ils sont utilisés quotidiennement, les accus silver-zinc ZPower ont une durée de vie d'environ un an avant de nécessiter un remplacement.

Exemples d'autonomie avec des accus chargés complètement



Le nombre d'heures d'utilisation quotidienne dépend du niveau de perte auditive et du style de vie.

Basé sur une charge minimale de 7 heures ininterrompues

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch, et Apple Watch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Comment utiliser les accus


Une utilisation appropriée contribuera à l'allongement de la durée de vie de vos piles rechargeables (accus).

- Chargez les aides auditives avant de les porter. Le temps de chargement recommandé est 7 heures ininterrompues.
- Chargez les accus à des températures comprises entre 50 °F (10 °C) et 104 °F (40 °C).
- Ne placez pas les accus dans le chargeur si le chargeur est débranché, car ceci les déchargera.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser vos aides auditives pendant plusieurs jours, retirez les accus.
- Evitez de forcer le fonctionnement des accus lorsque l'aide auditive s'est éteinte en ouvrant et fermant le tiroir pile.
- Vos accus devraient durer environ un an. Nous vous invitons à contacter votre audioprothésiste si vous avez besoin de nouveaux accus.


Soin et entretien

- Nettoyez quand nécessaire.
- Retirez les débris et accumulations des aides auditives et du socle de chargement avec un chiffon doux ou la brosse de l'outil multi-usages Oticon.
- N'appliquez pas de désinfectant alcoolisé ou d'autres substances chimiques.
- Les tests effectués confirment que l'humidité et la poussière ne devraient pas poser de problème.
- Ne stockez pas les accus silver zinc avec des pièces de monnaie ou objets en métal lorsque vous les enlevez des appareils auditifs.
- Essuyez l'humidité éventuelle sur les appareils auditifs ou le socle de chargement avec un chiffon doux ou la brosse de l'outil multi-usages d'Oticon, avant d'effectuer le chargement.

Comment recharger vos aides auditives

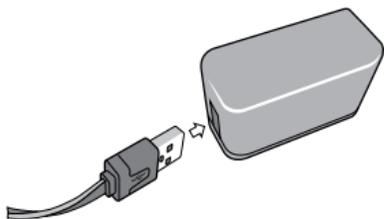

Branchez la prise USB dans le chargeur, puis branchez l'adaptateur sur une prise murale.

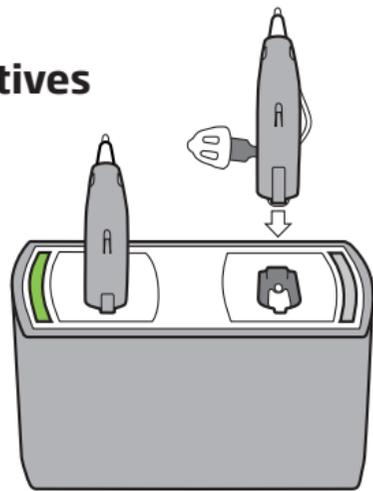


Placez vos aides auditives sur le socle de charge. Un voyant vert clignotera lorsque les aides auditives commenceront à se recharger.

REMARQUE

Dès que vous enlevez les aides auditives de votre chargeur, elles s'allumeront automatiquement.

Voyants lumineux

- **Le voyant vert clignote** pendant le chargement
- **Le voyant vert permanent** indique que la charge est complète
- Si **le voyant est rouge**, nous vous invitons à vous reporter au guide de dépannage à la page suivante.

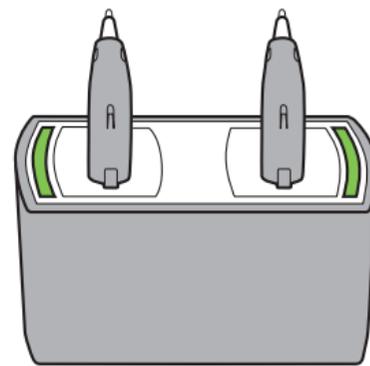

Comment charger les aides auditives



Voyant vert permanent

Guide de dépannage

Voyants lumineux du chargeur	Cause possible	Solution
Aucun voyant	L'aide auditive n'est pas insérée correctement dans le chargeur, ou le chargeur n'est pas alimenté.	Retirez la/les aide(s) auditive(s) et placez-les dans la position correcte. Vérifiez que le câble USB est bien branché sur l'adaptateur mural USB. Vérifiez que l'adaptateur mural USB fonctionne correctement en branchant un autre appareil USB.



Voyant rouge permanent



Voyant rouge clignotant

Voyants lumineux du chargeur	Cause possible	Solution
Un ou 2 voyants lumineux rouges permanents	L'accu ne se charge pas.	Vérifiez que la pile de l'aide auditive est une pile rechargeable (accu) de type ZPower.
Les deux voyants clignotent en rouge	La température est en dehors de la plage autorisée. Le chargement est interrompu jusqu'à ce que la température revienne dans la plage autorisée.	Déplacez le chargeur vers un environnement dont la température est comprise entre 50 °F (10 °C) et 104 °F (40 °C).

REMARQUE

Si aucune de ces solutions ne résout le problème, visitez notre rubrique assistance www.oticon.fr/rechargeable ou consultez votre audioprothésiste.

5 conseils pour profiter au mieux de vos aides auditives rechargeables

1. **Le chargement** : Chargez toujours les batteries au maximum, jusqu'à ce que la lumière du socle du chargeur soit verte. Evitez les micro-charges, cela abîme les batteries. Une charge complète prend environ 7 heures.
2. **Plus de batterie** : Si les batteries sont épuisées et que les aides auditives se sont éteintes, **n'essayez pas d'obtenir plus d'autonomie en ouvrant et en fermant le logement de piles.**
 - a. Placez plutôt les aides auditives dans le socle de chargement et assurez-vous qu'il est alimenté.
 - b. Insérez des piles jetables et placez les batteries rechargeables en sécurité, pour les charger plus tard.
3. **Pas d'utilisation** : Si vous n'utilisez pas vos aides auditives pendant une longue période, enlevez les batteries en ayant pris soin de les charger au maximum.

Remarque : Évitez de laisser les batteries rechargeables dans les aides auditives avec le logement de piles ouvert. Cela compromettra leur durée de vie.

4. **Manipulation** : Ne conservez pas les batteries rechargeables avec des objets métalliques, comme des clés ou des pièces de monnaie.
5. **Entretien** : Essuyez toute humidité, avec un chiffon doux, sur les aides auditives ou le socle de chargement avant de procéder au chargement. N'utilisez pas d'alcool isopropylique ou d'autres produits chimiques.



oticon.fr



Prodition S.A.S., Parc des Barbanniers,
3 allée des Barbanniers, 92635 GENNEVILLIERS CEDEX
SIREN 301 689 790 R.C.S. NANTERRE

oticon
PEOPLE FIRST