

Mode d'emploi

ConnectClip



oticon
PEOPLE FIRST

Introduction de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi vous guide dans l'utilisation et l'entretien de votre nouveau ConnectClip. Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi, y compris la section Avertissements. Il décrit comment utiliser au mieux votre nouveau ConnectClip. Si vous avez des questions supplémentaires relatives à l'utilisation de votre ConnectClip, veuillez contacter votre audioprothésiste.

Pour plus de facilité, ce mode d'emploi contient une barre de navigation qui vous aidera à vous repérer facilement dans les différentes sections.

Usage prévu

Le ConnectClip est un récepteur et un émetteur sans fil fonctionnant entre les aides auditives et l'environnement ambiant. Il permet également de relier sans fil les appareils de synthèse vocale et les appareils audio électroniques. Le ConnectClip aide également les utilisateurs d'aides auditives sans fil à contrôler certaines fonctions des aides auditives.

Le ConnectClip est destiné à être utilisé par les adultes et les enfants (> 36 mois) avec leur solution auditive.

IMPORTANT


Veillez vous familiariser avec l'ensemble de ce mode d'emploi avant d'utiliser votre ConnectClip. Il contient des instructions et des informations importantes sur l'utilisation et la manipulation de votre ConnectClip.

Introduction

Le ConnectClip peut être utilisé comme un kit mains libres pour les téléphones portables et comme un microphone distant.


1. Kit mains libres

Les sons de votre téléphone seront diffusés dans vos aides auditives via le ConnectClip (A). Votre voix est captée par le ConnectClip et envoyée au téléphone portable (B).

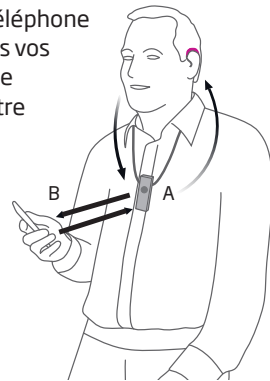

2. Microphone distant

La voix d'un interlocuteur choisi est transmise sans fil DEPUIS le ConnectClip VERS vos aides auditives.

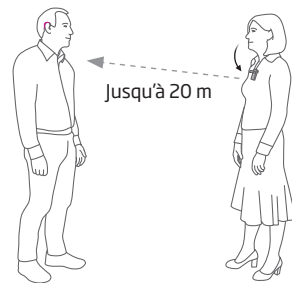

Sommaire

Contenu de la boîte	9
Présentation - fonctions principales	10
Présentation - indications lumineuses	12
Pour bien commencer	14
■ Configuration initiale	
A. Appairer les aides auditives avec le ConnectClip	16
B. Appairer le téléphone portable avec le ConnectClip	18
■ Utilisation quotidienne	
Utilisation quotidienne : Marche/Arrêt	20
Utilisation quotidienne : En charge	21
■ Utiliser le ConnectClip avec un téléphone portable	
Utiliser le ConnectClip avec un téléphone portable	22
S'assurer que le ConnectClip est connecté au téléphone	23
Recevoir des appels	24
Passer des appels	26
Fonctions de casque avancées	27

■ Écouter de la musique	
Écouter de la musique	28
■ Utiliser le ConnectClip comme microphone distant	
Utiliser le ConnectClip comme microphone distant	30
Sélectionner le mode microphone	31
Activer/couper le son du microphone distant	32
Ajuster le niveau à partir du microphone distant	33
Activer/couper le son du microphone distant à l'aide de vos aides auditives	34
Nettoyer le ConnectClip	35
■ Utiliser le ConnectClip comme télécommande pour les aides auditives	
Utiliser le ConnectClip comme télécommande pour les aides auditives	36
Autres caractéristiques et fonctions	37
Avertissements	38
Informations techniques	44
Garantie internationale	47

Contenu de la boîte

La boîte du ConnectClip contient les accessoires suivants :



ConnectClip




Tour de cou - long



Tour de cou -
standard



Étui

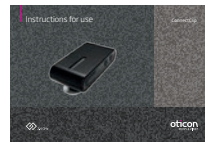

Ce Mode d'emploi




Chargeur mural





Câble de chargeur USB

Présentation - fonctions principales

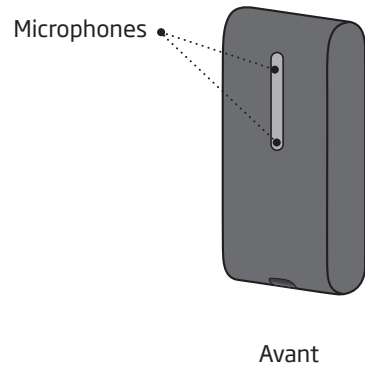



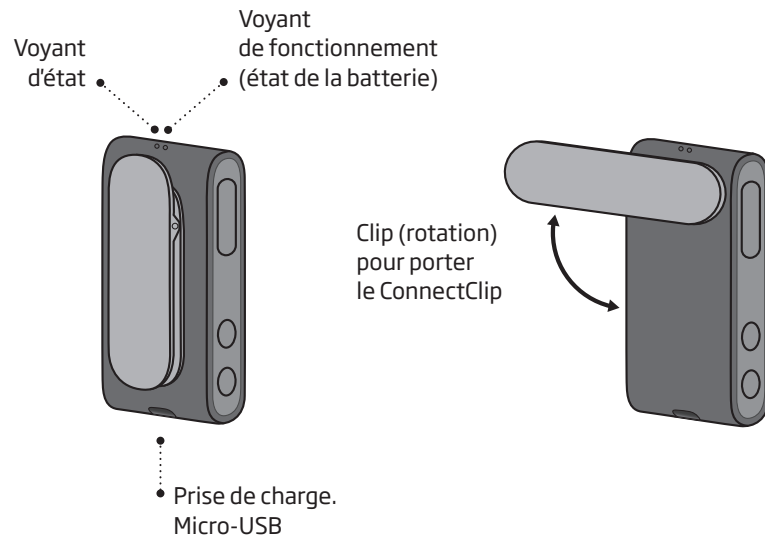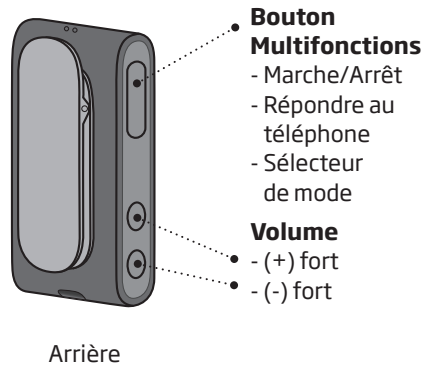












10



11

Présentation - indications lumineuses


État	Description	
	Jaune clignotant	Recherche d'aides auditives
	Jaune fixe	Inactif. Aides auditives connectées, Non connecté à un téléphone
	Bleu clignotant	Recherche d'un téléphone portable (appairage)
	Bleu fixe	Connecté à un téléphone portable
	Vert fixe	Appel en cours. Casque mains libres (HFP) ; Portable
	Vert clignotant	Appel entrant
	Orange fixe	Musique ; Téléphone portable (A2DP)
	Magenta fixe	Mode microphone distant
	Magenta clignotant	Reconnexion du microphone distant

Etat	Description	
	Rouge fixe	Faible niveau de pile
	Vert fixe	Allumé
	Vert clignotant	Allumé - en charge
	Vert estompé	Allumé - charge terminée
	Orange clignotant	Éteint - en charge
	Orange fixe	Éteint - charge terminée

Pour bien commencer


Avant de pouvoir utiliser le ConnectClip avec vos aides auditives, les aides auditives et le ConnectClip doivent être appairés/connectés. L'utilisation du ConnectClip avec un téléphone portable nécessite également que le ConnectClip soit appairé/connecté avec celui-ci.

1. Appairer les aides auditives avec le ConnectClip

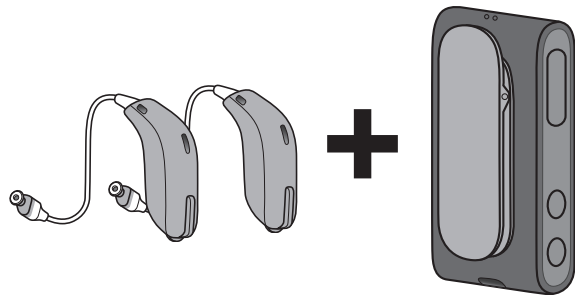

Voir page
16

2. Appairer le ConnectClip avec le téléphone portable

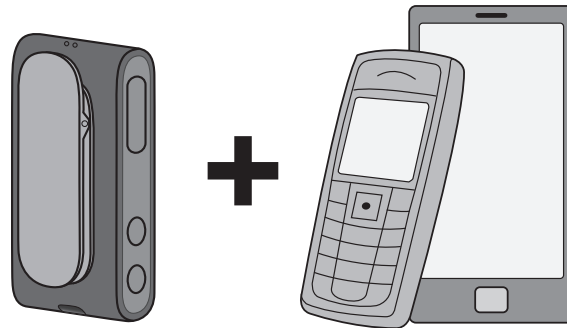

Voir page
18

A. Appairer les aides auditives avec le ConnectClip

1. Assurez-vous que le ConnectClip est éteint (voir page 20)

Appuyez sur le bouton Multifonctions pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que le voyant de fonctionnement s'éteigne ●

2. Éteignez les deux aides auditives (ouvrez le logement de pile)

3. Allumez les deux aides auditives (fermez le logement de pile)


4. Les aides auditives sont maintenant prêtes

pour une première connexion avec le ConnectClip.

Vous avez maintenant 3 minutes pour terminer l'appairage.

5. Allumez le ConnectClip


Appuyez sur le bouton Multifonctions pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de fonctionnement soit VERT FIXE ●

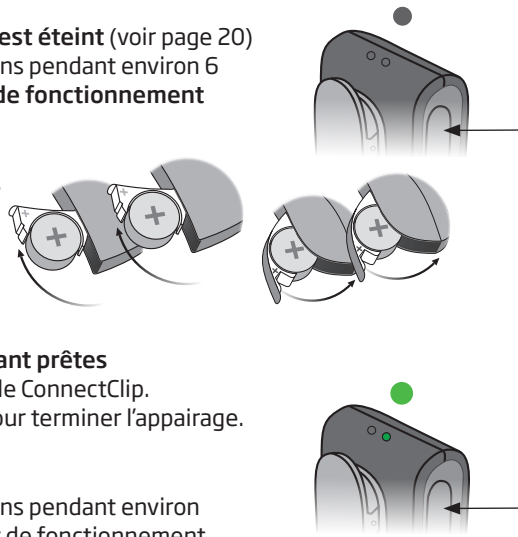


6. Le ConnectClip va maintenant rechercher vos aides auditives.

Voyant d'état JAUNE CLIGNOTANT ●

7. Placez le ConnectClip et les deux aides auditives à proximité l'une de l'autre (distance max. 20 cm).

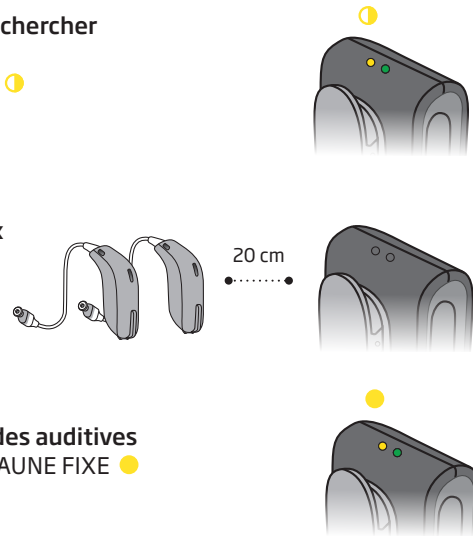


B. Appairer le téléphone portable avec le ConnectClip

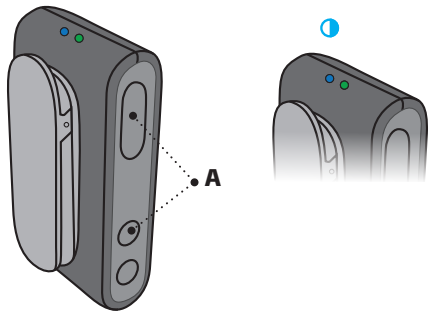

Mettez le ConnectClip en mode appairage.
Appuyez sur le bouton Multifonctions ET le bouton Augmentation du volume pendant environ 6 secondes (A) jusqu'à ce que le voyant d'état CLIGNOTE EN BLEU ●

Le ConnectClip reste en mode appairage pendant environ 3 minutes.

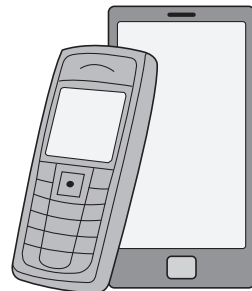

Activez l'appairage sur le téléphone portable
Activez le Bluetooth. Recherchez et connectez/appairez le ConnectClip.

Ceci s'effectue normalement dans les réglages Bluetooth de votre téléphone.

Saisissez le code PIN
Si votre téléphone demande un code PIN, saisissez 0000 (quatre zéros).




Appairage actif
L'appairage terminé avec le téléphone portable est indiqué par le voyant d'état BLEU FIXE ●

Utilisation quotidienne : Marche/Arrêt



• MARCHE ●

Appuyez sur le bouton Multifonctions pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de fonctionnement soit VERT FIXE.

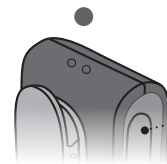

• ARRÊT ●


Appuyez sur le bouton Multifonctions pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que le voyant de fonctionnement s'éteigne.

Utilisation quotidienne : En charge




• Niveau de batterie faible ●

Lorsqu'il reste environ 30 minutes de temps de diffusion audio, le voyant de fonctionnement devient ROUGE.

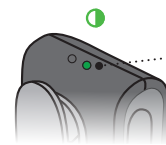

• En charge ●


Branchez le chargeur fourni au connecteur micro-USB situé au bas du ConnectClip. Le voyant de fonctionnement CLIGNOTE EN VERT ou EN ORANGE.

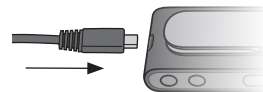

Voyants de charge

En charge (ConnectClip allumé)	Clignotant	●
Charge terminée (ConnectClip allumé)	Estompé	●
En charge (ConnectClip éteint)	Clignotant	●
Charge terminée (ConnectClip éteint)	Fixe	●


Utiliser le ConnectClip avec un téléphone portable

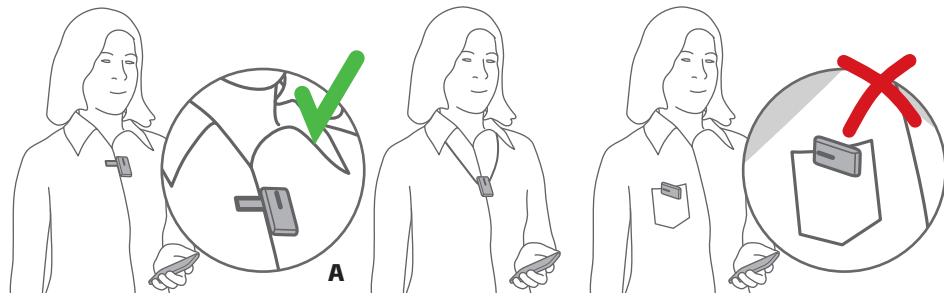

IMPORTANT

Le ConnectClip doit être porté comme indiqué pour obtenir les meilleures performances possibles. Il est important que le microphone du ConnectClip soit dirigé vers votre bouche (A), et que le ConnectClip ne soit pas couvert par des vêtements, etc. Distance maximale entre le ConnectClip et le téléphone portable : 10 mètres.

S'assurer que le ConnectClip est connecté au téléphone

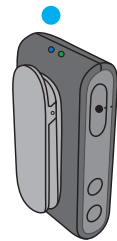

- **Sélectionnez le mode Téléphone.**
Appuyez sur le bouton Multifonctions pendant environ 3 secondes pour changer de mode. Le changement de mode est confirmé par une indication sonore dans vos aides auditives. **ÉTAT BLEU** ●



État	Mode
●	Inactif Connecté à des aides auditives Non connecté à un téléphone portable
●	Connecté à un téléphone portable
●	Mode microphone distant

Recevoir des appels



Téléphone connecté

Lorsque le ConnectClip est allumé et se situe dans la portée de votre téléphone portable, il se connecte automatiquement au téléphone portable.

Le voyant d'état est BLEU FIXE ●



Téléphone qui sonne

Lorsque le téléphone sonne, vous entendez un indicateur sonore et, si disponible, la sonnerie (de votre téléphone) dans vos aides auditives.

Le voyant d'état CLIGNOTE EN VERT 🟢



• Répondre à un appel

Cliquez sur le bouton Multifonctions brièvement (A) ou répondez à l'appel depuis votre téléphone portable.

Une fois l'appel démarré, l'état passe à VERT FIXE ●




• Terminer l'appel

Cliquez sur le bouton Multifonctions brièvement (A) ou terminez l'appel depuis votre téléphone portable.

État BLEU FIXE ●

Passer des appels

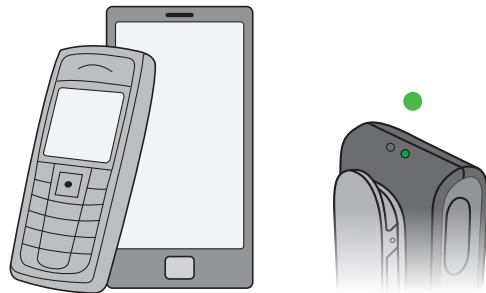

Pour appeler, il vous suffit d'utiliser le téléphone portable. L'appel est automatiquement transféré vers le ConnectClip.

Une fois l'appel connecté, l'état passe à VERT FIXE ●

Fonctions de casque avancées

Numérotation vocale

Une fois connecté à un téléphone portable, appuyez deux fois sur le bouton Multifonctions pour activer la numérotation vocale si elle est prise en charge par le téléphone.


Rejeter l'appel

Une pression longue sur le bouton de diminution du volume, pendant que le téléphone sonne, permet de rejeter l'appel.

Couper les microphones des aides auditives

Appuyez sur le bouton de diminution du volume pendant environ 3 secondes pour couper les microphones des aides auditives.

Écouter de la musique

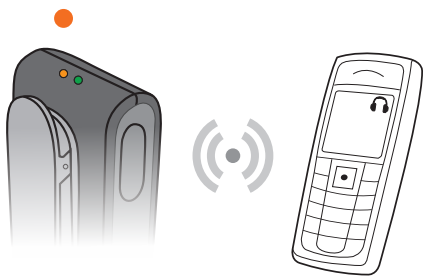

Audio sans fil (A2DP)

Si le ConnectClip est connecté à un téléphone portable ou un autre appareil, via le Bluetooth, la musique lue sur le téléphone/appareil sera automatiquement diffusée dans vos aides auditives.

État ORANGE ●

Vous n'avez pas à manipuler le ConnectClip.


État	Description
●	Le ConnectClip est allumé - et la musique est diffusée vers les aides auditives

Réglage du volume


Tout en écoutant de la musique, le niveau du signal audio diffusé peut être réglé à l'aide des boutons d'augmentation/de diminution du volume.

Coupure du son du téléphone

Une pression brève sur le bouton Multifonctions permet de couper le son. Utilisez les commandes du téléphone pour activer le son.

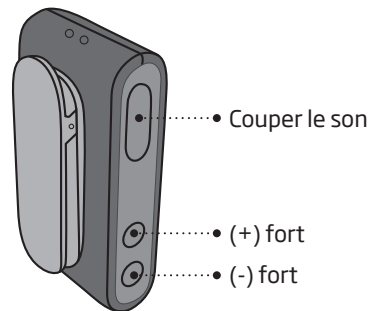

Utiliser le ConnectClip comme microphone distant

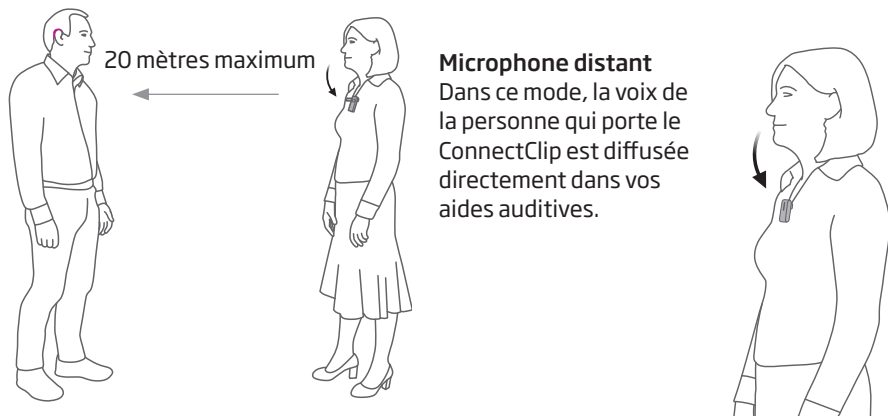


Microphone distant
Dans ce mode, la voix de la personne qui porte le ConnectClip est diffusée directement dans vos aides auditives.

IMPORTANT

Assurez-vous que le microphone est dirigé vers la bouche de l'orateur et qu'il n'est pas couvert par des vêtements, etc.

Sélectionner le mode microphone

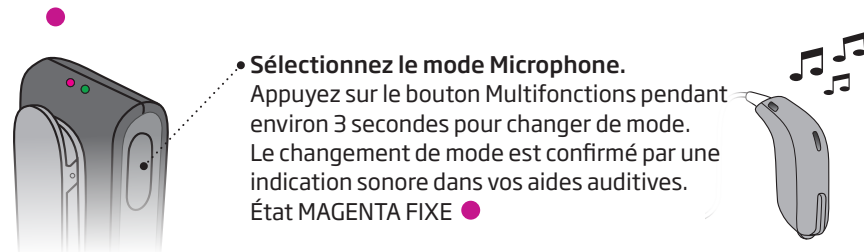

● **Sélectionnez le mode Microphone.**
Appuyez sur le bouton Multifonctions pendant environ 3 secondes pour changer de mode. Le changement de mode est confirmé par une indication sonore dans vos aides auditives.
État MAGENTA FIXE ●

État	Description
●	Le ConnectClip est allumé. En mode inactif, c'est-à-dire non connecté à un téléphone
●	Connecté à un téléphone portable
●	Le ConnectClip est allumé - et en mode microphone distant

Activer/couper le son du microphone distant



Couper le son du microphone

Appuyez sur le bouton Multifonctions (A) pendant environ 3 secondes pour couper le signal du microphone distant vers les aides auditives. Vous remettez les aides auditives sur leur programme normal.

Le voyant d'état passe au JAUNE ● ou BLEU ●

Ajuster le niveau à partir du microphone distant


Augmentation du volume ou diminution du volume

Le signal diffusé peut être réglé à l'aide des boutons d'augmentation/de diminution du volume.

Coupez les microphones des aides auditives (le son du microphone distant uniquement).

Appuyez sur le bouton de diminution du volume pendant environ 3 secondes pour couper les microphones des aides auditives.

Une pression brève sur le bouton d'augmentation ou de diminution du volume désactive le mode silencieux des aides auditives.

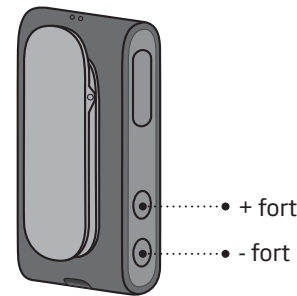

Activer/couper le son du microphone distant à l'aide de vos aides auditives



P1 --> P2 --> TV --> Microphone

Une pression longue sur le bouton de l'aide auditive permet de passer au programme suivant dans les aides auditives.

Lorsque vous atteignez le programme du microphone distant, vous entendez l'indicateur sonore (bip) du programme de microphone distant.

Pour couper le son du microphone distant, revenez simplement au programme principal des aides auditives.

IMPORTANT

Veuillez vous référer au mode d'emploi de vos aides auditives pour en savoir plus sur leurs fonctionnalités.

Nettoyer le ConnectClip

IMPORTANT


Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le ConnectClip. Il ne doit jamais être lavé ni immergé dans l'eau ni aucun autre liquide.

Utiliser le ConnectClip comme télécommande pour les aides auditives

Lorsque le ConnectClip ne diffuse pas de son, il fait office de télécommande pour vos aides auditives.



- **(+) fort**
- pression brève
- **(-) fort**
- pression brève

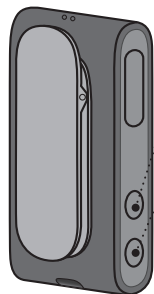

- **Programme suivant**
- Appuyez pendant 3 secondes
- **Couper les microphones des aides auditives - pression longue**
une pression brève sur le bouton d'augmentation ou de diminution du volume désactive le mode silencieux

IMPORTANT

Distance maximale entre le ConnectClip et les aides auditives : 2 mètres.

Autres caractéristiques et fonctions

Une connexion à la fois

En cas d'appairage avec plusieurs appareils (maximum de huit), le ConnectClip ne se connecte qu'au premier téléphone disponible/dans la portée.

Aucun appel lorsqu'il est utilisé comme microphone distant

Lorsque le ConnectClip est utilisé comme microphone distant, il n'y a aucune connexion avec le téléphone portable.

Temporisation (hors de portée) en mode microphone

Si le ConnectClip est hors de la portée des aides auditives, celles-ci reviendront à leur programme initial au bout de 90 secondes.

Supprimer les appairages Bluetooth

Appuyez sur les boutons Multifonctions, augmentation du volume et diminution du volume pendant 10 secondes pour supprimer tous les appairages Bluetooth. Le voyant d'état sera alors ROUGE CLIGNOTANT.

Avertissements

Vous devez vous familiariser avec les avertissements à caractère général donnés ci-après et lire l'intégralité du contenu de ce mode d'emploi avant d'utiliser votre ConnectClip, afin de garantir votre sécurité personnelle et l'utilisation correcte de l'appareil. Consultez votre audioprothésiste si vous êtes confronté à des opérations ou des événements inattendus avec votre ConnectClip.

Risques d'étouffement et risque d'ingestion de petites pièces

Votre ConnectClip et ses composants doivent être tenus hors de portée des enfants et de toute autre personne susceptible de les avaler ou de se blesser à leur contact. Si une petite pièce est avalée, veuillez consulter immédiatement un médecin.

Explosifs

La source d'alimentation de votre ConnectClip n'a pas assez d'énergie pour provoquer un incendie dans des conditions normales d'utilisation. Le ConnectClip n'a pas été testé pour la conformité avec les normes internationales concernant les atmosphères explosives. Il est recommandé de ne pas utiliser votre ConnectClip dans les zones où il existe un danger d'explosion.

Avertissements

Radiographie/tomodensitométrie/IRM/scanner TEP, électrothérapie et intervention chirurgicale

Retirez votre ConnectClip avant les séances de radiographie, tomodensitométrie, IRM, scanner TEP et électrothérapie ainsi que pour les interventions chirurgicales pour éviter les dommages causés à votre ConnectClip par des champs électromagnétiques importants.

Chaleur et produits chimiques

Le ConnectClip ne doit jamais être exposé à une température extrême, par exemple en le laissant dans une voiture garée en plein soleil. Le ConnectClip ne doit pas être séché dans un four à micro-ondes ou dans d'autres types de fours. Les produits chimiques contenus dans les produits de beauté, les laques, les parfums, les après-rasages, les crèmes solaires ou les produits insecticides peuvent abîmer le ConnectClip. Enlevez toujours votre ConnectClip avant d'utiliser ce genre de produits et attendez que ce produit sèche avant utilisation.

Interférences

Le ConnectClip a fait l'objet de tests approfondis pour les interférences selon les normes internationales les plus rigoureuses. Cependant, des interférences entre le ConnectClip et d'autres appareils (par ex. certains téléphones portables, appareils à bande publique, systèmes d'alarme de magasins et autres appareils sans fil) peuvent se produire. Si cela se produit, augmentez la distance entre le ConnectClip et l'appareil concerné.

Avertissements

Utilisation lors de la conduite

Le fait d'utiliser le ConnectClip peut vous distraire. Soyez conscient de ce qui vous entoure lorsque vous utilisez le ConnectClip. Veuillez vous référer au code de la route national concernant l'utilisation des appareils de communication en conduisant.

Utilisation en avion

Votre ConnectClip est doté du Bluetooth. Le ConnectClip ne doit pas être utilisé à bord d'un avion, sauf si le personnel naviguant l'a expressément autorisé.

Implants actifs

Faites preuve de prudence avec les implants actifs. Si vous avez un implant intracrânien, veuillez contacter le fabricant de votre appareil implanté pour des informations sur les risques de perturbation.

Avertissements

Batterie rechargeable

Ne tentez pas d'ouvrir le ConnectClip car cela pourrait endommager la batterie.

N'essayez jamais de remplacer la batterie. S'il est nécessaire de remplacer la batterie, veuillez renvoyer votre appareil au fournisseur. La garantie deviendra nulle en cas de présence de signes d'altération.

La sécurité de la recharge des accus par connecteur USB est déterminé par l'équipement externe. Lorsque le connecteur USB est raccordé à un équipement branché à une prise murale, cet équipement doit être approuvé UL ou conforme aux normes de sécurité IEC-60065, IEC-60950, ou à des normes équivalentes.

Connexion à un équipement externe

La sécurité d'utilisation du ConnectClip lorsqu'il est connecté à un équipement externe (via un câble d'entrée auxiliaire, un câble USB ou directement) est déterminée par l'équipement externe. Lorsqu'il est raccordé à un équipement externe branché à une prise murale, cet équipement doit être conforme aux normes de sécurité IEC-60065, IEC-60950, ou à des normes équivalentes.

Avertissements

Contrôle croisé

Votre ConnectClip doit être maintenu hors de portée des enfants ou de toute personne susceptible de prendre le contrôle de sa fonctionnalité, afin de garantir votre sécurité personnelle et d'éviter toute utilisation incorrecte.

Utilisation du tour de cou

Si le tour de cou s'accroche ou se prend accidentellement quelque part pendant que l'utilisateur le porte, il est conçu pour se rompre automatiquement. En conséquence, n'essayez jamais de le raccourcir ou de le modifier d'une façon qui n'est pas autorisée. Le tour de cou ne doit pas être utilisé par les enfants de moins de 36 mois.

Effets secondaires possibles

Bien que les matières utilisées pour fabriquer votre ConnectClip soient hypoallergéniques, dans des cas très rares, elles peuvent provoquer une irritation de la peau ou d'autres effets secondaires. Veuillez consulter un médecin si ces effets se produisent.

Avertissements

Compatibilité des téléphones portables

Vous trouverez sur le site www.oticon.fr une liste de téléphones portables qui ont été exhaustivement testés par Oticon et qui ont satisfait aux exigences minimum de compatibilité. Toutefois, Oticon décline toute responsabilité liée à une incompatibilité due à une éventuelle mise à jour ultérieure des téléphones mobiles, ou de toute circonstance d'incompatibilité qui n'aurait pas été soumise ou découverte lors de ces tests. Spécifiquement, Oticon ne sera pas responsable d'une incompatibilité résultant de futures mises à jour des téléphones portables, ni d'événements d'incompatibilité n'étant pas couverts par et/ou trouvés dans ces tests. Oticon ne prend aucune responsabilité financière, notamment celle du remboursement d'un téléphone mobile qui ne fonctionnerait pas comme escompté.

Veuillez consulter la liste mentionnée ci-dessus avant d'acheter un nouveau téléphone mobile.

Informations techniques

Conditions d'utilisation :

Humidité d'utilisation : 15 % à 93 % d'humidité relative, sans condensation.

Température d'utilisation : 5-40 °C

Stockage et transport : -20-70 °C

Le ConnectClip est équipé d'un émetteur-récepteur radio utilisant le Bluetooth EDR, BLE (Bluetooth Low Energy) et une technologie radio à ondes courtes propriétaire fonctionnant tous à 2,4 GHz. L'émission radio de 2,4 GHz est faible et toujours inférieur à 17 dBm e.i.r.p. en puissance rayonnée totale.

Le ConnectClip est conforme aux normes internationales relatives aux émetteurs radio, à la compatibilité électromagnétique et à l'exposition humaine.

En raison de l'espace disponible limité sur le ConnectClip, tous les marquages de certification sont présents dans ce mode d'emploi.

États-Unis et Canada

Cet appareil contient un module radio portant les numéros d'ID de certification suivants :

FCC ID : ZACAHAC01

IC : 11936A-AC01

Cet appareil est conforme à la Partie 15 du Règlement FCC et aux RSS exempts de licence d'Industrie Canada.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne risque pas de causer d'interférences dommageables, et

(2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Les changements ou les modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

Ce dispositif numérique de Catégorie B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Remarque : *Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites relatives à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut provoquer des interférences nocives avec les radiocommunications. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nocives avec la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger les interférences en prenant l'une des mesures suivantes :*

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise électrique placée sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le fabricant ou un technicien radio/TV expérimenté pour une assistance.

Garantie internationale

Votre ConnectClip bénéficie d'une garantie internationale limitée, assurée par le fabricant. Cette garantie est de 12 mois à partir de la date de livraison. Cette garantie est limitée aux défauts de fabrication et matériels de l'appareil à proprement parler. Elle ne porte pas sur les accessoires tels que la batterie, câbles, alimentations électriques, etc. Les problèmes provoqués par une manipulation ou un entretien inapproprié(e)/incorrect(e), une utilisation excessive, des accidents, des réparations effectuées par un tiers non agréé, une exposition à des conditions corrosives, des dommages dus à la pénétration de corps étrangers dans l'appareil ou des ajustements incorrects ne sont PAS couverts par la garantie limitée et peuvent l'annuler. La garantie expliquée ci-dessus n'affecte pas les droits juridiques dont vous bénéficiez peut-être, de par les législations nationales régissant la vente des biens de consommation. Votre audioprothésiste peut offrir une garantie plus large que celle qui est prévue par les dispositions de cette garantie limitée. Pour obtenir davantage d'informations, veuillez le consulter.

Si vous avez besoin de services d'entretien

Prenez régulièrement rendez-vous avec votre audioprothésiste qui pourra entretenir, régler, et réparer votre ConnectClip tout au long de sa durée de vie.

Le fabricant certifie que ce ConnectClip (AC1A) est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité est disponible auprès du fabricant.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemark
www.oticon.global



Durée de disponibilité garantie des pièces détachées :
5 ans après la date d'achat. Décret 2014-1482 / Article L111-3 du code de la consommation.

Prodition S.A.S., Parc des Barbanniers, 3 allée des Barbanniers,
92635 GENNEVILLIERS CEDEX - SIREN 301 689 790 R.C.S. NANTERRE



Les déchets élec-
troniques doivent
être traités selon la
législation locale.



178674FR / 2017.10.12

178674FR / 2017.10.12



oticon
PEOPLE FIRST