

Kurzanleitung Oticon Companion App auf der Apple Watch

Wie Sie die Oticon Companion App installieren, koppeln und steuern mit der Apple Watch.

Mit der Apple Watch lassen sich Hörsysteme-Features einfach und bequem am Handgelenk einstellen.

Steuern Sie Lautstärke, Programme, oder schalten Sie Ihre Hörsysteme bei Bedarf stumm. Für noch mehr Unterstützung lässt sich der Speech Booster per Knopfdruck aktivieren bzw. deaktivieren. Weiterhin haben Sie jederzeit Zugriff auf den Batteriestand und das Remote Mikrofon lässt sich deaktivieren.

„Komplikationen“ ermöglichen über das Zifferblatt der Apple Watch einen Schnellzugriff auf die Companion App und ausgewählte Features.

So geht's

Um Oticon Companion auf Ihrer Apple Watch nutzen zu können, installieren Sie die App zunächst auf Ihrem iPhone und stellen Sie sicher, dass Ihre Hörsysteme mit Ihrem iPhone gekoppelt sind.

Systemanforderungen

- Apple Watch Series 4 oder neuer
- watchOS 8 oder neuer



Scannen Sie den QR-Code um die Oticon Companion App aus dem App Store herunterzuladen.



Download on the
App Store

Made for
iPhone | Apple Watch

Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und iPod touch sind Marken von Apple Inc. und in den USA sowie anderen Ländern eingetragen.


Installation der Oticon Companion App auf Ihrer Apple Watch



Laden Sie die **Oticon Companion App** aus dem App Store auf Ihr iPhone herunter und koppeln Sie Ihre Hörsysteme mit Ihrem iPhone.



Öffnen Sie die **Watch App** auf Ihrem iPhone.

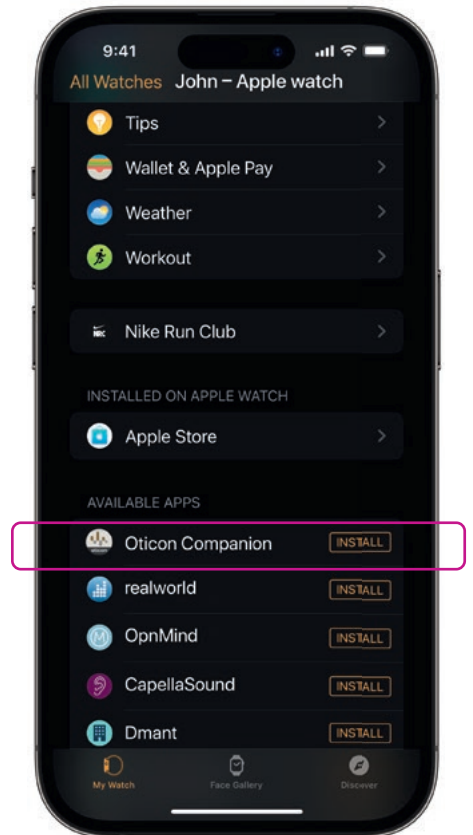

Scrollen Sie nach unten zu **VERFÜGBARE APPS** und tippen sie rechts neben dem Oticon Companion-Symbol auf **INSTALLIEREN**. Die App wird nun auf Ihrer Apple Watch installiert.

Wie Sie die wichtigsten Features der Oticon Companion App auf Ihrer Apple Watch verwenden

Tippen Sie auf das **Oticon Companion-Symbol**, um die App zu öffnen.



Batteriestand prüfen

Wischen Sie **nach rechts** über das Hauptmenü der App, um den Batteriestand Ihrer Hörsysteme anzuzeigen.



Hauptmenü Companion App

Über das Hauptmenü lassen sich Lautstärke und Programme steuern und Ihre Hörsysteme stummschalten.



Speech Booster

Wischen Sie **nach links** über das Hauptmenü der App, um den Speech Booster, oder das Fernmikrofon ein- bzw. auszuschalten.



Tippen Sie auf das Programm-Symbol (**P1**) um den Programmbildschirm aufzurufen.


Scrollen Sie durch die einzelnen Programme und **wählen Sie Ihr gewünschtes Programm** aus.

Sie können hierfür ebenfalls die **Digital Crown** verwenden.




Apple Watch "Komplikationen" einrichten

Um per Schnellzugriff über das Zifferblatt die Companion App ausführen zu können, nutzen Sie Apple Watch-Komplikation*. Das hilfreiche Feature richtet eine Verknüpfung auf dem Zifferblatt der Apple Watch ein.

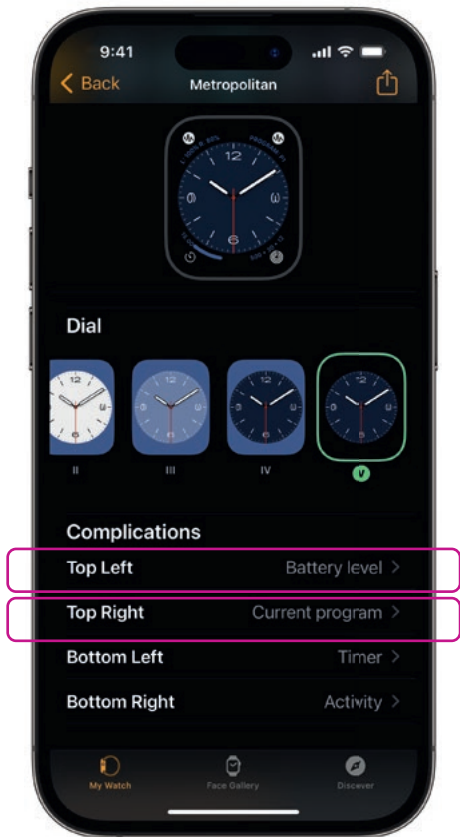

Wählen Sie Ihr Zifferblatt unter **Meine Watch** aus und scrollen Sie nach unten zu **Komplikationen**. Bitte beachten Sie, dass nicht bei allen Zifferblättern Komplikationen hinzufügen können.

Tippen Sie **Oben links** und legen Sie Ihre Verknüpfung an.

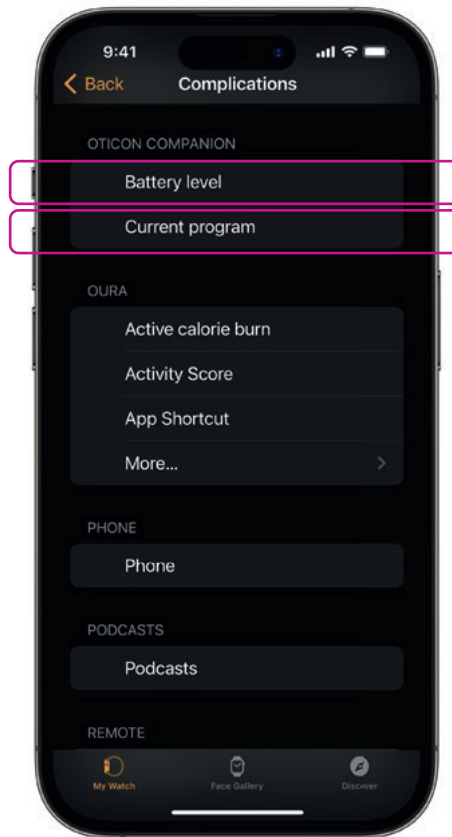

Scrollen Sie durch die Komplikationen und wählen Sie den **Batteriestand** unter Oticon Companion aus.

Wiederholen Sie den Vorgang für die Verknüpfung **Oben rechts** und wählen Sie **Aktuelles Programm** aus.



Die Komplikationen werden nun auf der Apple Watch in den **oberen Ecken** des Zifferblatts angezeigt.

* Falls Komplikationen für das ausgewählte Zifferblatt verfügbar sind.