

**Nutzerhinweise für
die ConnectLine App
für iPhone**



App Version 1.0.2

oticon
PEOPLE FIRST

Einleitung

Diese Anleitung informiert detailliert über die ConnectLine App für das iPhone®.

- Kopplung des Streamer Pro mit dem iPhone
- ConnectLine App vom App Store herunterladen
- Funktionen des iPhones mit der App
- Überblick der durch die App möglichen ConnectLine-Konfiguration
- Fehlerbehebung

Einsatz

Die Oticon ConnectLine App ist eine Fernbedienung, mit der der Hörsystemenutzer über den Streamer Pro 1.2 die Lautstärke und Programme seiner Hörsysteme steuern kann. Sie ermöglicht es dem Nutzer auch, ein externes (zusätzliches) mit dem Streamer Pro gekoppeltes Gerät für das Streaming auszuwählen und dessen Lautstärke einzustellen.

Die ConnectLine App unterstützt iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s und iPhone 4 (Voraussetzung ist iOS 7).


Apple, das Apple Logo und iPhone sind eingetragene Markenzeichen der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Marke der Apple Inc.



Inhalt

- 4 | Kopplung
- 6 | Streamer Pro als Headset
- 8 | App installieren
- 9 | App Überblick
- 10 | Programme
- 12 | Anruf annehmen
- 14 | Anruf ausführen
- 16 | Musik
- 18 | TV/Mikrofon/Audio
- 20 | FM/Telefon-Spule
- 22 | Zweites Handy
- 23 | Festnetztelefon
- 24 | Einstellungen
- 32 | Fehlerbehebung

Kopplung iPhone und Streamer Pro 1.2

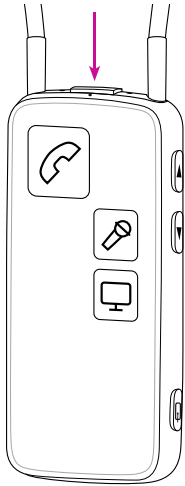


Streamer

Halten Sie den An-/Aus-Taster gedrückt (ca. 5 Sekunden), bis die linke blaue LED blinkt.




Einstellungen

Wählen Sie das Icon für "Einstellungen" beim iPhone.

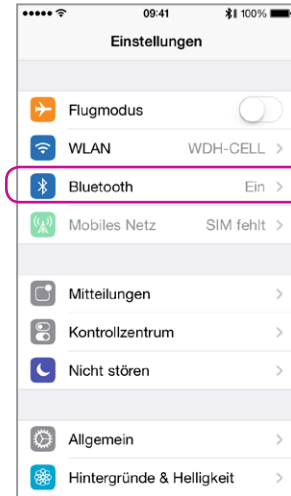


Bluetooth wählen

Aktivieren Sie Bluetooth unter "Einstellungen".

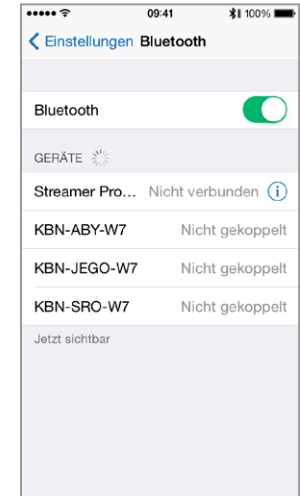

Suche Streamer Pro 1.2

Wählen Sie den Streamer Pro 1.2 aus.

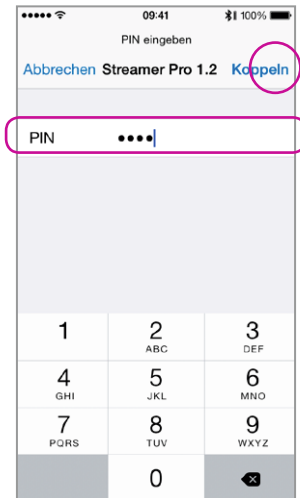

Pin #0000

Geben Sie im Kopplungs-
menü die Pin für den
Streamer Pro ein: 0000
(vier Nullen).

Drücken Sie "Koppeln".



Verbindung prüfen

Prüfen Sie die Verbindung zum
Streamer Pro:
Der Status sollte "Verbunden"
anzeigen und in der Statusleiste
sollte ein kleines Bluetooth-
Zeichen zu sehen sein.


Streamer Pro als Standard-Headset

Das iPhone nutzt standardmäßig den eingebauten Lautsprecher für die Audioübertragung bei der Annahme eines Anrufs - auch dann, wenn ein Bluetooth Headset (wie z.B. der Streamer Pro) verbunden ist.


Für die tägliche Nutzung des iPhone mit Hörsystemen kann diese Voreinstellung geändert werden, so dass das Signal immer (über den Streamer Pro) in die Hörsysteme übertragen wird.



“Einstellungen” wählen

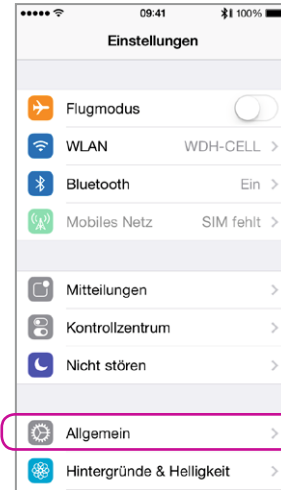


“Allgemein” wählen

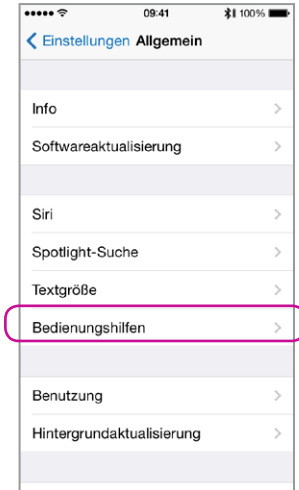


“Bedienungshilfen” wählen



“Eingehende Anrufe” wählen

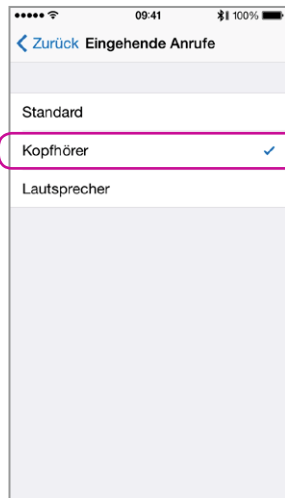

“Kopfhörer” auswählen

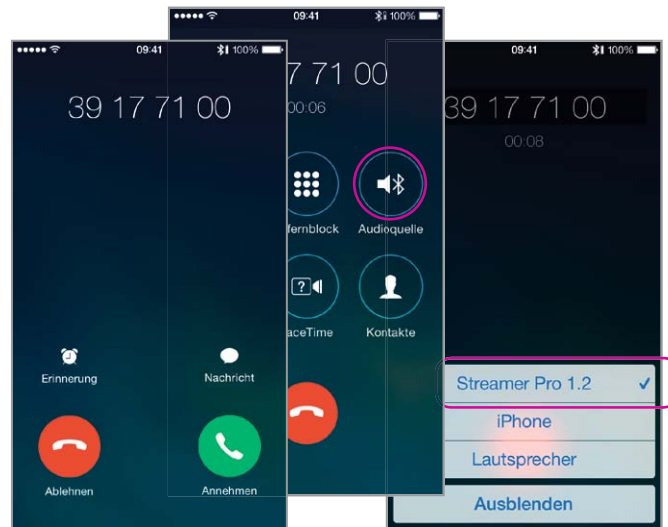

Überprüfen

Wenn jetzt ein Anruf auf dem iPhone eingeht, sollte der Streamer Pro 1.2 als Audioquelle angezeigt werden (und der Klingelton sollte in den Hörsystemen zu hören sein).
Weitere Infos auf Seite 12.

App installieren



“App Store” aufrufen

Klicken Sie auf das “App Store” Logo auf Ihrem iPhone.

Schritt 1:

Wählen Sie “Suchen” im App Store.

Schritt 2:

Schreiben Sie “Oticon” oder “ConnectLine” in das Suchfeld.

Schritt 3:

Drücken Sie auf das “Gratis” Icon, um das Herunterladen zu starten.

Schritt 4:

Bestätigen Sie mit Ihrem Kennwort Ihren iTunes Zugang.

Suchen, Herunterladen und Zugang bestätigen.




App verfügbar

Die ConnectLine App sollte nun auf Ihrem iPhone zu sehen sein.

App Überblick




Programme

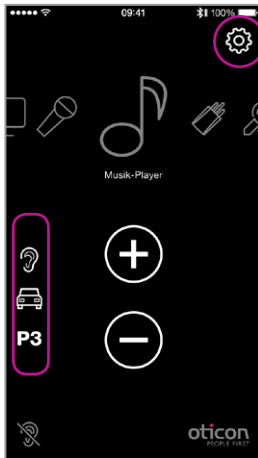

Programmauswahl

Hier können die in den Hörsystemen eingestellten Programme direkt angewählt werden.

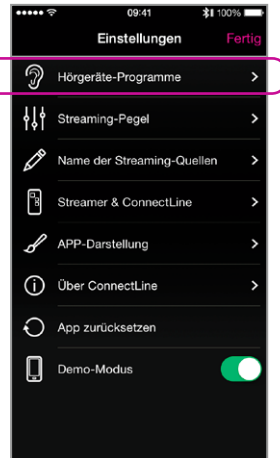

Ergänzen und Umbenennen

Die vom Hörakustiker programmierten Hörsysteme-Programme können unter "Hörgeräte-Programme" individualisiert werden. Starten Sie die App zum ersten Mal, werden noch keine Programme angezeigt.



Programme personalisieren


Einstellungen --> Hörgeräte-Programme --> Mit Drücken auf das + bzw. - Zeichen kann ein Symbol für ein in den Hörsystemen existierendes Programm hinzugefügt oder gelöscht werden. Klicken Sie auf das Symbol bzw. den Namen, um Symbol bzw. Name für ein Programm zu ändern. Symbole und Namen sind nur in der Anzahl sinnvoll, in der auch Programme im Hörsystem existieren.

Hinweis:

Ein hier hinzugefügter oder gelöschter Programmname führt nicht dazu, dass ein Programm in den Hörsystemen hinzugefügt oder gelöscht wird!



Stummschalten der Hörsysteme-Mikrofone

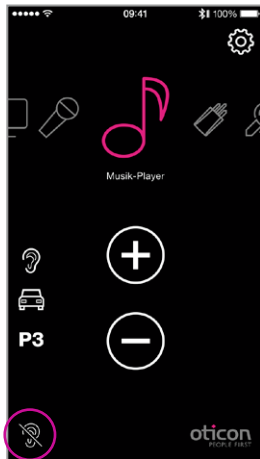

Beim Streaming


Während des Streamings können hier die Hörsysteme-Mikrofone stummgeschaltet werden, um Umgebungslärm zu reduzieren.



Kein Streaming

Wenn kein Streaming stattfindet, können hier die Hörsysteme-Mikrofone für Hörsysteme mit Inium-Chipplattform stummgeschaltet werden, z.B. für Alta, Nera, Ria oder Sensei.

Anruf annehmen - App ist aktiv

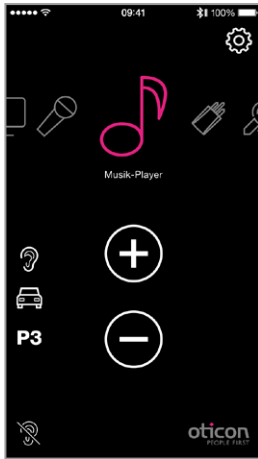

App ist aktiv

Die ConnectLine App läuft. In diesem Beispiel hört der Nutzer Musik vom iPhone.




Eingehender Anruf

Wenn ein Anruf eingeht, rückt die ConnectLine App automatisch in den Hintergrund. Das normale Telefondisplay vom iPhone wird geöffnet. Der Anruf kann wahlweise über den Streamer Pro oder über "Annehmen" auf dem iPhone angenommen werden (1).



Während des Anrufs

Während des Anrufs bleibt das Telefondisplay vom iPhone aktiv.

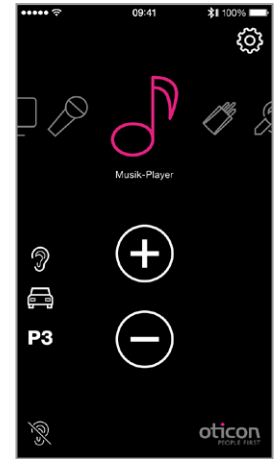

AutoResume

Wenn der Anruf beendet wird, kehrt die App (und das Connectline System) automatisch zum letzten Status zurück. Bei diesem Beispiel zum Display und zum Abspielen von Musik.

App ist nicht aktiv



App ist nicht aktiv
Die ConnectLine App läuft nicht. In diesem Fall ist der Home-Bildschirm vom iPhone zu sehen.



Eingehender Anruf
Wenn ein Anruf eingeht, wird das normale Telefondisplay vom iPhone geöffnet. Der Anruf kann wahlweise über den Streamer Pro oder über "Annehmen" auf dem iPhone angenommen werden (2).



Während des Anrufs
Während des Anrufs bleibt das Telefondisplay vom iPhone aktiv.



Anruf beendet
Das iPhone kehrt in seinen vorherigen Status mit dem Home-Bildschirm zurück.

Anruf ausführen, iPhone



Falls die App aktiv ist

Schließen Sie die App über den Home-Button.




„Telefon“ wählen



Nummer


Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie auf die grüne Anruftaste.

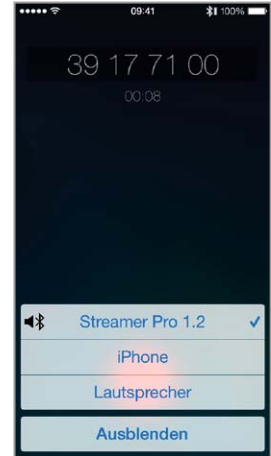

Anruf beenden

Sie können den Anruf wahlweise über das iPhone oder direkt am Streamer Pro beenden (Telefontaste).

Musik abspielen

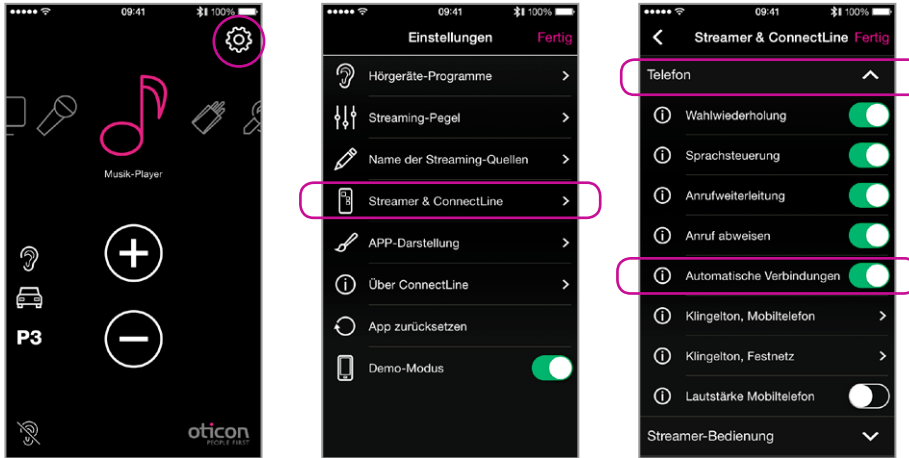

Automatische Verbindungen für Musik-Player


Damit der Streamer Pro automatisch die Übertragung startet, wenn der Musik-Player läuft, muss die Einstellung "Automatische Verbindungen" aktiviert werden.

Einstellungen --> Streamer & ConnectLine --> Telefon --> "Automatische Verbindungen" aktivieren




Musik starten

Schließen Sie ggfs. die ConnectLine App über den Home-Button. Klicken Sie auf das Musik-Icon.

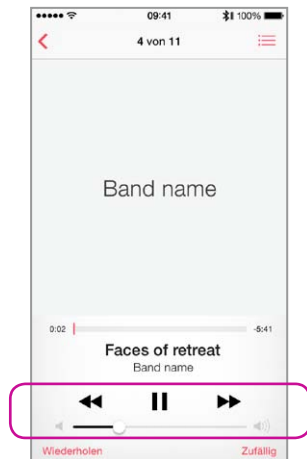


Musik-Player

Über das Musik-Programm vom iPhone können Sie Musik abspielen, die Übertragung anhalten und die Lautstärke regeln. Die Verbindung zum Streamer Pro und den Hörsystemen wird automatisch hergestellt.

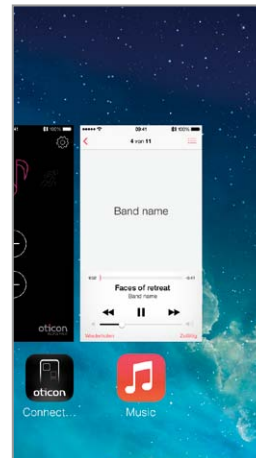

Zur App wechseln

Wenn Sie wieder zur ConnectLine App wechseln möchten, drücken Sie entweder den Home-Button zweimal, um zur Übersicht aller aktiven Apps zu gelangen. Wählen Sie dann die ConnectLine App aus. Oder Sie drücken einmal den Home-Button und gehen dann wie gewohnt zur ConnectLine App.

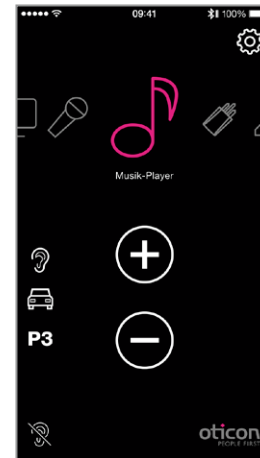


Schnelltaste

Wenn Sie die ConnectLine App nutzen, ist das Notensymbol im Karussell eine Schnelltaste zum Musik-Player vom iPhone, der darüber gestartet oder gestoppt werden kann. Wenn Sie ein anderes externes Gerät auswählen, stoppt die Übertragung solange bis der Musik-Player wieder ausgewählt wird.

TV

Sichtbar, wenn eine Kopplung zwischen TV Adapter und Streamer Pro vorliegt

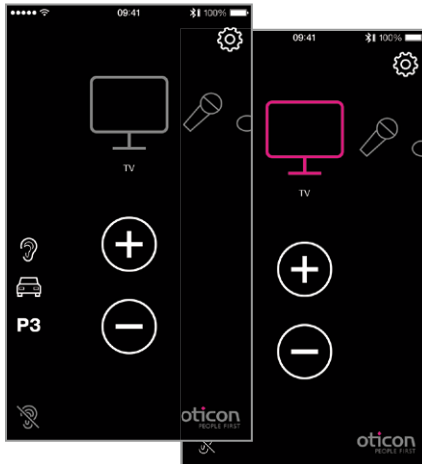


TV

Drücken Sie das TV-Symbol, um die Übertragung vom TV Adapter zu starten oder zu stoppen.

Externes Mikrofon

Sichtbar, wenn eine Kopplung zwischen ConnectLine Mikrofon und Streamer Pro vorliegt

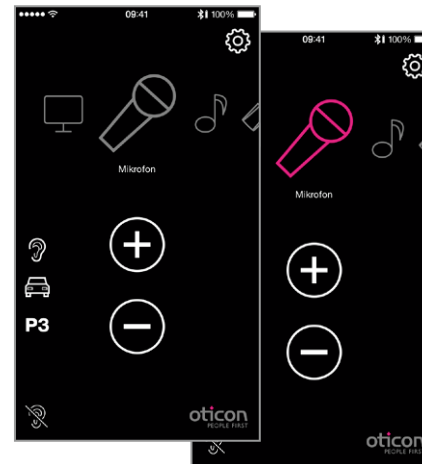

Externes Mikrofon

Drücken des Mikrofon-Symbols startet die Übertragung vom ConnectLine Mikrofon. Die Übertragung kann wahlweise auch vom Streamer Pro oder vom Connect-Line Mikrofon gestartet werden.





Audio via Kabel

Sichtbar bei Kabelverbindung



Audio Eingang/Ausgang

Die Übertragung startet automatisch falls ein Klinkenkabel eingesteckt wird.

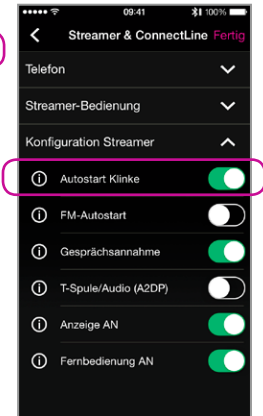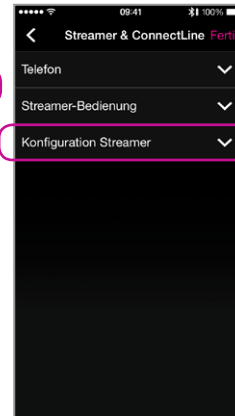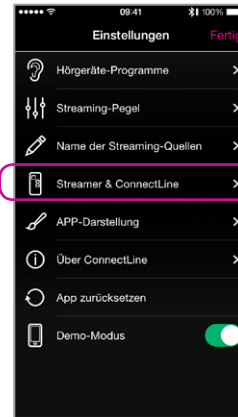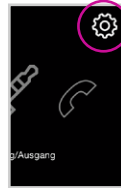


Audio Eingang/Ausgang - Autostart

Der automatische Start kann unter Einstellungen aktiviert/deaktiviert werden.

Einstellungen --> Streamer & ConnectLine --> Konfiguration Streamer --> Autostart Klinke

FM

Sichtbar bei aufgestecktem FM-Empfänger

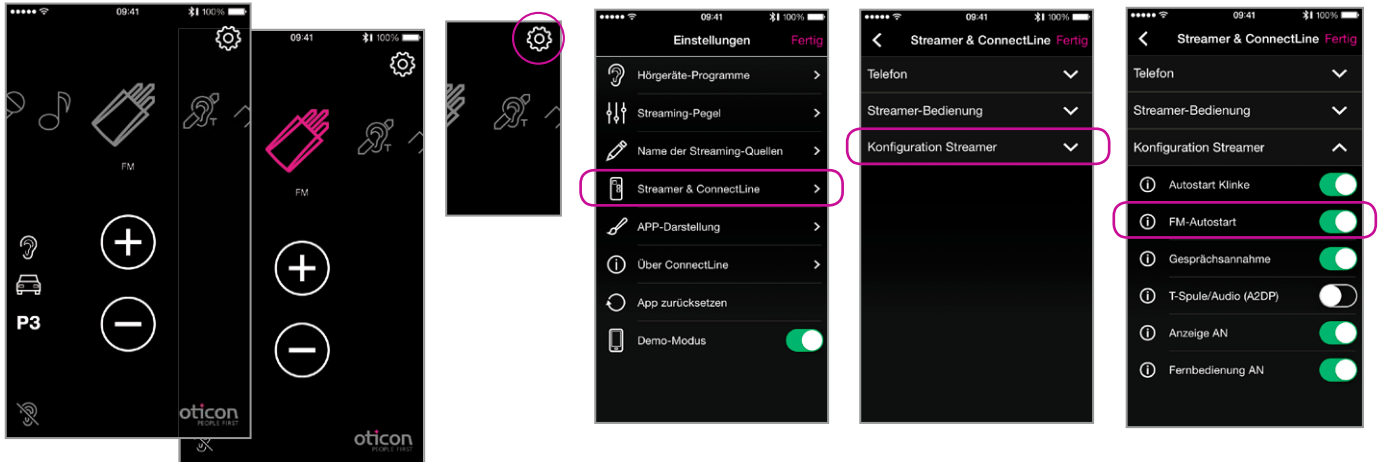

FM

Drücken des FM-Symbols startet oder stoppt die FM-Übertragung.

“FM Autostart”

Der automatische FM-Start kann unter Einstellungen aktiviert/deaktiviert werden.

Einstellungen --> Streamer & ConnectLine --> Konfiguration Streamer --> FM-Autostart

Telefon-Spule

Immer sichtbar




Telefon-Spule

Drücken des T-Spulen-Symbols startet oder stoppt die Übertragung von der Telefon-Spule.


Zweites Handy

Erscheint NICHT im Karussell

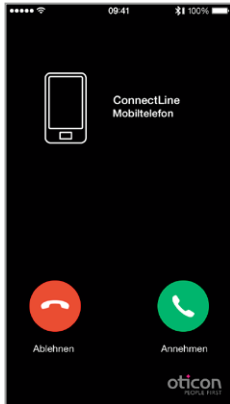


Anruf abweisen oder annehmen

Wird jetzt das 2. Handy angerufen, wird auf dem 1. Handy der Anruf über die App angezeigt. Sie können nun diesen Anruf über die App oder den Streamer Pro annehmen.

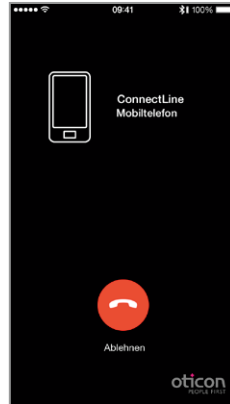

Anruf beenden

Der Anruf kann auf dem 1. Handy wahlweise über die ConnectLine App oder den Streamer Pro beendet werden.

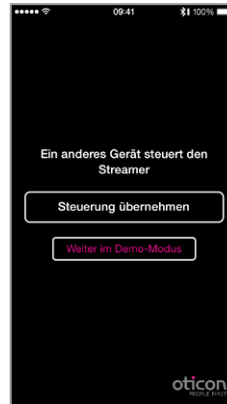

Zwei Apps

Sie können die ConnectLine App auf zwei iPhones installieren. Wenn beide iPhones mit Streamer Pro gekoppelt sind, können Sie entscheiden, welches iPhone für den Streamer Pro die Steuerung übernimmt (1. Handy). Beim 2. Handy ist die App im Demo-Modus aktiv.

WARNUNG!

Wir empfehlen, die ConnectLine App nur auf Ihren persönlichen Geräten zu installieren, um eine Steuerung durch fremde Personen zu vermeiden.


Festnetztelefon

Sichtbar falls über den Phone Adapter gekoppelt und in Reichweite




App ist aktiv

Wenn der Phone Adapter mit dem Streamer Pro gekoppelt und in Reichweite ist, erscheint das Telefon-Symbol in der App. (Wenn die App nicht läuft, kann der Anruf ausschließlich direkt über den Streamer Pro angenommen werden.)

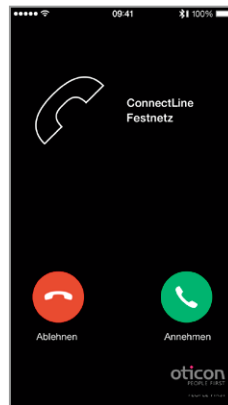


Anruf annehmen

Ein eingehender Anruf wird in den Hörsystemen und in der App angezeigt. Der Anruf kann über die App oder über den Streamer Pro angenommen werden.

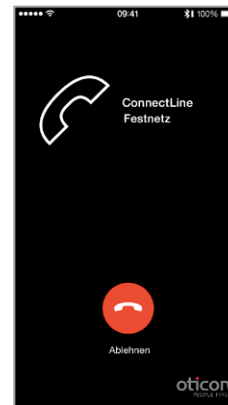

Anruf beenden




Der Anruf kann wahlweise über die App oder den Streamer Pro beendet werden.

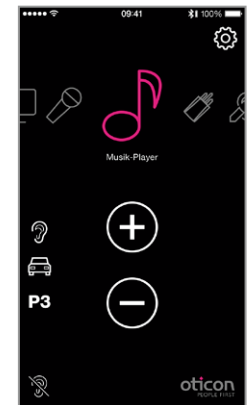

AutoResume

Wenn vor dem Anruf eine andere Audioquelle aktiv war (in diesem Beispiel hier Musik), ist diese nach Beendigung des Anrufs automatisch wieder aktiv.

Einstellungen - Streaming-Pegel

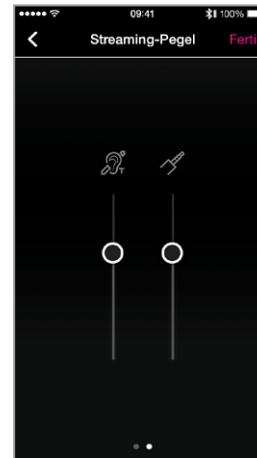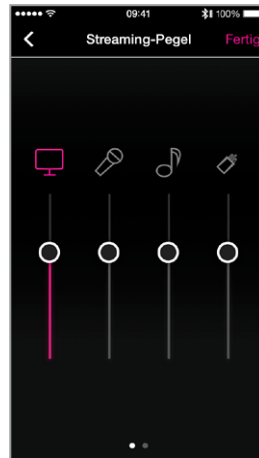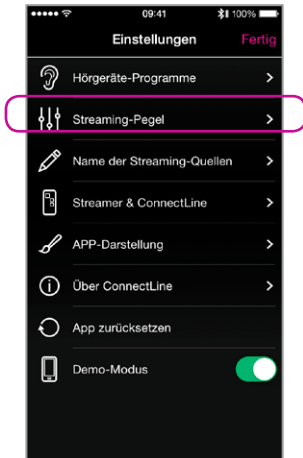


“Streaming-Pegel”

Die Streaming-Pegel können für jede Quelle unabhängig eingestellt werden. Wenn dieses Display während des Streamings geöffnet ist, wird die aktive Schallquelle in Magenta dargestellt.

Einstellungen --> Streaming-Pegel

Einstellungen - Name der Streaming-Quellen



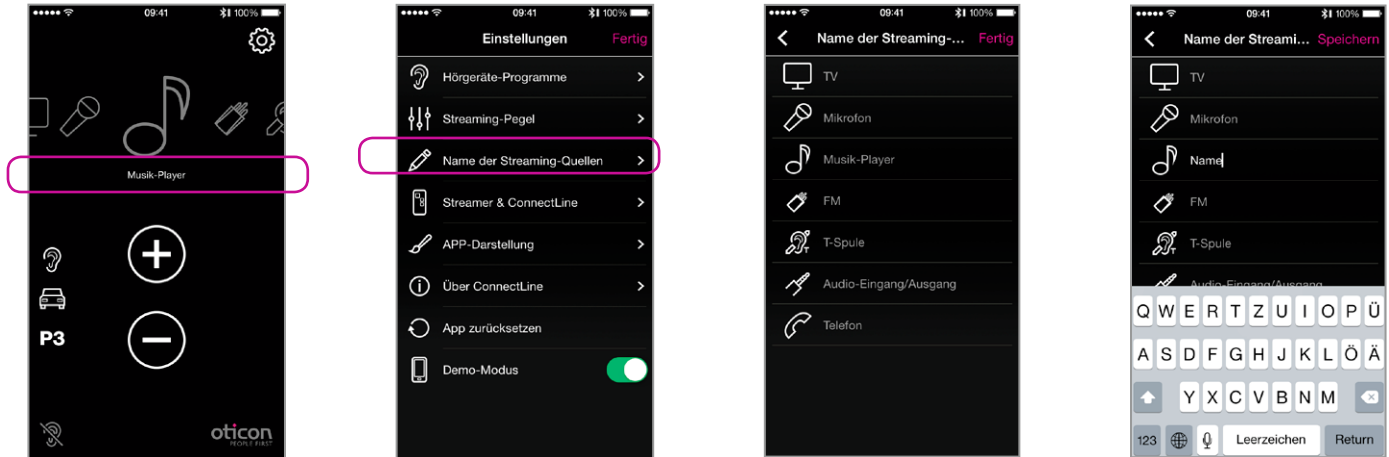


“Streaming-Quellen umbenennen”

Der Name der Streaming-Quellen, also der externen Geräte, kann individualisiert werden.

Einstellungen --> Name der Streaming-Quellen

Einstellungen - Telefon

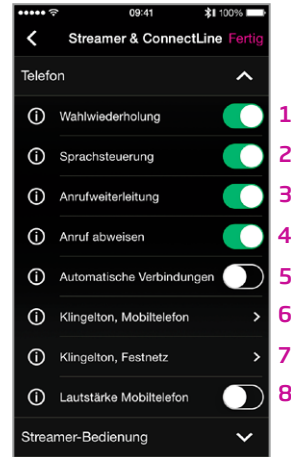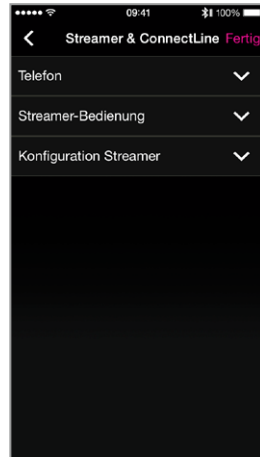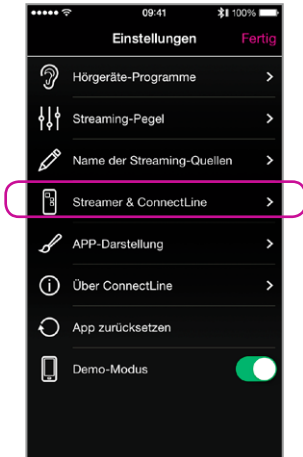

Telefon-Einstellungen

Einstellungen des Streamer Pro zum Telefonieren können für den täglichen Bedarf angepasst werden.

Einstellungen --> Streamer & ConnectLine --> Telefon

1: Wahlwiederholung

Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann die Wahlwiederholung durch langes Drücken der Telefontaste auf dem Streamer Pro gestartet werden (falls Ihr Mobiltelefon diese Funktion unterstützt).

2: Sprachsteuerung

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie die Sprachsteuerung über den Streamer Pro aktivieren, indem Sie die Telefontaste kurz drücken (falls Ihr Mobiltelefon diese Funktion unterstützt und Sie sich außerhalb der Reichweite des ConnectLine Telefon-Adapters befinden).

3: Anrufweiterleitung

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird durch langes Drücken der Telefontaste auf dem Streamer Pro das Gespräch an das Mobiltelefon zurückgeleitet.

4: Anruf abweisen

Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann ein eingehender mobiler Anruf durch Drücken der Leiser-Taste am Streamer Pro abgelehnt werden.

5: Automatische Verbindungen

Automatische Verbindungen zulassen, z.B. SMS-Nachrichten und Musik-Player.

6: Klingelton, Mobiltelefon

Klingelton bei Anrufen über Ihr(e) Mobiltelefon(e).



7: Klingelton, Festnetztelefon

Klingelton bei Anrufen über den ConnectLine Phone Adapter.

8: Lautstärke Mobiltelefon

Damit können Sie die Anruflautstärke über die Lautstärketasten des Telefons einstellen.

Einstellungen - Streamer-Bedienung

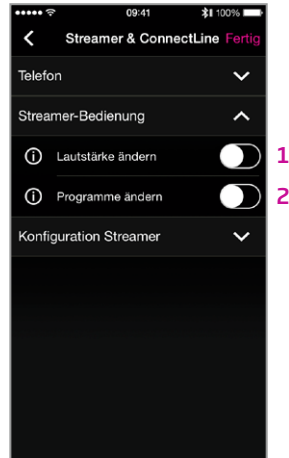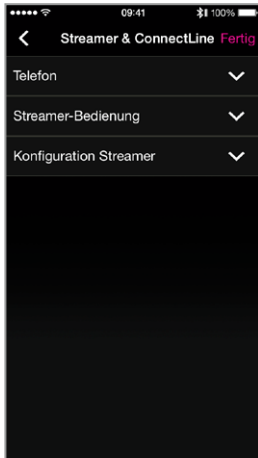

1: Lautstärke ändern

Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann die Lautstärke der Hörgeräte über den Streamer Pro geregelt werden.

2: Programme ändern



Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann das am Hörgerät gewählte Programm über den Streamer Pro gewechselt werden.

Streamer-Bedienung

Einige Einstellungen des Streamer Pro für die Fernbedienung können für den täglichen Bedarf angepasst werden.

Einstellungen --> Streamer & ConnectLine --> Streamer-Bedienung

Einstellungen - Konfiguration Streamer

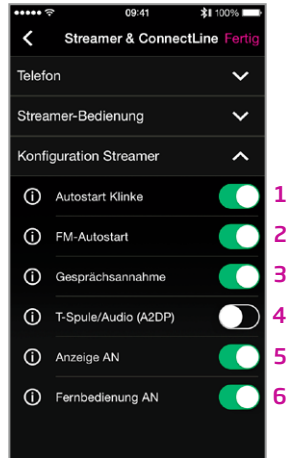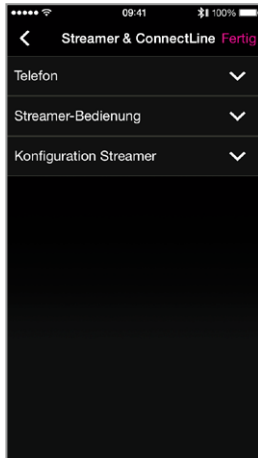

Konfiguration Streamer

Hier können weitere Funktionen des Streamer Pro für den täglichen Bedarf angepasst werden.

Einstellungen --> Streamer & ConnectLine --> Konfiguration Streamer

1: Autostart Klinke

Wenn diese Funktion aktiviert ist, beginnt der Streamer Pro automatisch mit dem Streamen, sobald die Buchse belegt wird.

2: FM-Autostart

Wenn diese Funktion aktiviert ist, beginnt der Streamer Pro automatisch mit dem Streamen, sobald der FM-Empfänger an der Buchse angeschlossen wird.

3: Gesprächsannahme

Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann der Anruf mit allen Tasten auf der Vorderseite des Streamer Pro angenommen werden.

4: T-Spule/Audio (A2DP)

Wenn diese Funktion deaktiviert/aktiviert ist, wird durch kurzes Drücken der Audiotaste am Streamer Pro die Audio (A2DP)-Übertragung/T-Spule gestartet.


5: Anzeige AN

Ist diese Funktion aktiviert, erfolgt auf der Frontseite des Streamer Pro eine optische Anzeige.

6: Fernbedienung AN

Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann der Streamer Pro zur Fernbedienung der Hörgeräte genutzt werden, auch wenn der Streamer Pro ausgeschaltet ist.

Einstellungen - APP-Darstellung

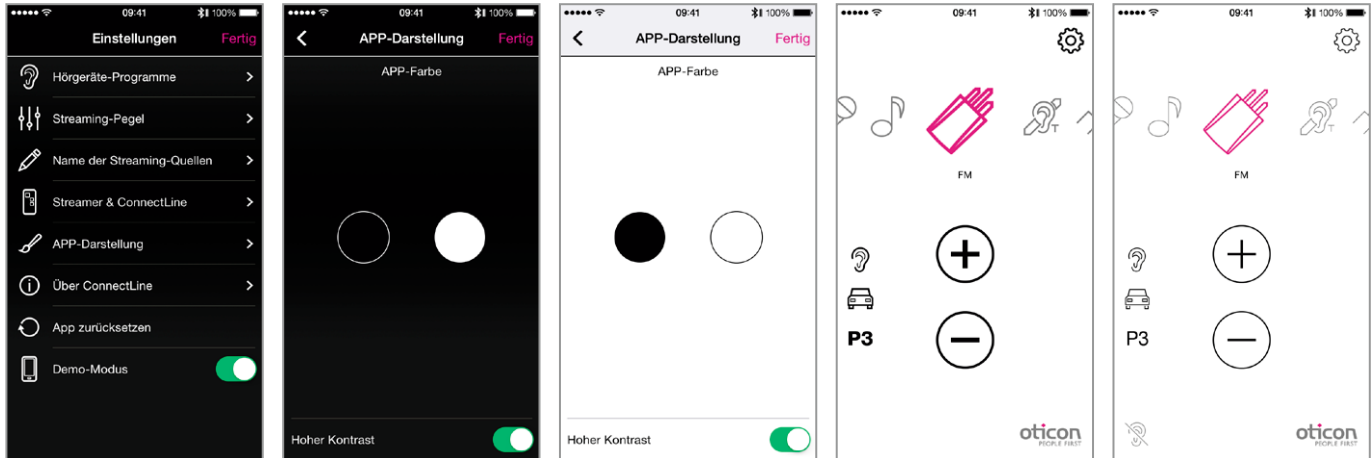

“App-Darstellung”

Die Darstellung der App kann wahlweise in schwarz oder weiß gehalten werden. (A)

Für jede Farbvariante kann ein hoher oder niedriger Kontrast der Icon-Linien ausgewählt werden. (B)

Einstellungen --> APP-Darstellung

Fehlerbehebung




App zurücksetzen

Zweimaliges Drücken auf den Home-Button zeigt Ihnen alle aktiven Apps.




App schließen

Schieben Sie das Bild der ConnectLine App nach oben, so dass es vom Bildschirm verschwindet. Die App ist nun komplett gestoppt.

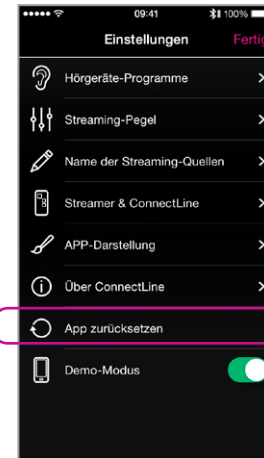



App zurücksetzen

“App zurücksetzen” unter “Einstellungen” startet die App erneut mit allen Original-Einstellungen.

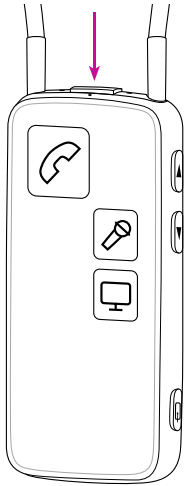

Streamer Pro zurücksetzen

Der Streamer Pro wird durch Aus- und wieder Einschalten automatisch zurückgesetzt.

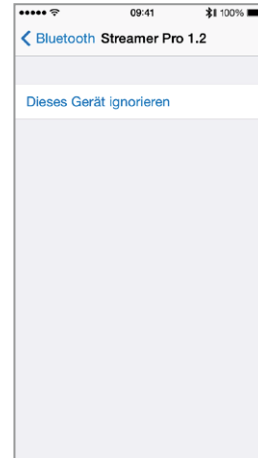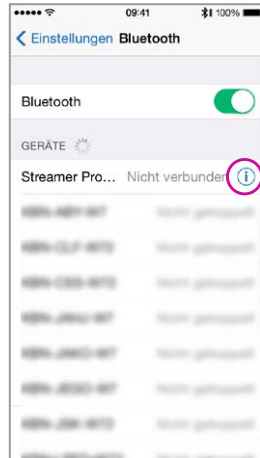

Streamer Pro und iPhone erneut koppeln

In einigen Fällen, besonders, wenn iPhone und Streamer Pro mehrfach mit anderen Geräten gekoppelt worden sind, hilft es, die Kopplungen im iPhone und Streamer Pro zu löschen.

- Streamer Pro ausschalten
- Am iPhone: (Einstellungen > Bluetooth > Streamer Pro 1.2) das kleine (i) wählen und dann "Dieses Gerät ignorieren" drücken
- iPhone ausschalten
- Streamer Pro anschalten
- Am Streamer: An/Aus-Taster UND "Lautstärke lauter" für 10 Sekunden gedrückt halten
- iPhone anschalten und erneut mit dem Streamer Pro koppeln (s. Seite 4)

People First

Unser Versprechen
für Kommunikation
und Lebensqualität.