

Phone Adapter 2.0



Bedienungsanleitung

**oticon**  
PEOPLE FIRST

## Inhaltsverzeichnis


Gebrauch des ConnectLine Phone Adapters 2.0	4
Eingehende Anrufe Streamer Pro	6
Ausgehende Anrufe Streamer Pro	10
Eingehende Anrufe ConnectClip	14
Ausgehende Anrufe ConnectClip	18
Reinigung des Phone Adapters	21
Internationale Garantie	23
Weitere Informationen	24

## Gebrauch des ConnectLine Phone Adapters 2.0

Mithilfe dieser Lösung für das Festnetz können Sie eingehende und abgehende Telefonate führen. Während eines Telefonats dienen Ihre Hörsysteme als Headset, das Mikrofon am Streamer oder ConnectClip ermöglicht dabei das Freisprechen.

Diese Bedienungsanleitung erläutert, wie der Streamer oder der ConnectClip für Telefonate genutzt werden. Die korrekte Installation des Phone Adapters ist in der "Installationsanleitung" beschrieben.

Um den Phone Adapter zu nutzen, muss der Streamer bzw. der ConnectClip einmalig mit dem Phone Adapter gekoppelt werden. Die Verbindung erfolgt danach automatisch, wenn sich Streamer bzw. der ConnectClip und Phone Adapter in Reichweite befinden (Seite 13).

Der Phone Adapter ist mit dem Streamer oder dem ConnectClip verbunden, wenn die Power-Anzeige  am Phone Adapter konstant blau leuchtet.



## Eingehende Anrufe Streamer Pro



### Einen Anruf annehmen und beenden

Stellen Sie sicher, dass Sie in das Mikrofon auf der Oberseite des Streamers sprechen können.







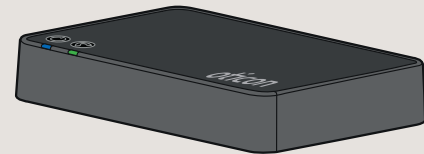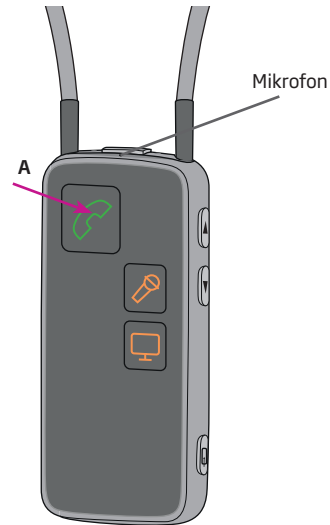

Wenn Sie einen Anruf auf dem Festnetztelefon erhalten, hören Sie einen Klingelton in Ihren Hörsystemen. Die Status-Anzeige auf dem Phone Adapter blinkt grün. Gleichzeitig blinken die Telefontaste und die Status-Anzeige auf dem Streamer ebenfalls grün.

**Drücken Sie kurz die Telefontaste auf dem Streamer (A),** um den Anruf anzunehmen. Sie hören einen kurzen Bestätigungston in Ihren Hörsystemen. Die Telefontaste und die Status-Anzeige des Streamers sowie die Status-Anzeige auf dem Phone Adapter leuchten jetzt konstant grün. Sprechen Sie ganz normal, so als ob Ihr Gesprächspartner vor Ihnen sitzen würde.

Um den Anruf zu beenden, drücken Sie einfach kurz die Telefontaste auf dem Streamer. Die grün leuchtende Telefontaste auf dem Streamer geht aus.



## Einen Anruf annehmen

Streamer Pro Status-Anzeige	Streamer Pro Telefontaste	Anzeigen am Phone Adapter 2.0	Bedeutung
			Streamer und Phone Adapter sind verbunden.
			Ein Anruf geht ein: Die Status-Anzeige auf dem Phone Adapter und die Status-Anzeige auf dem Streamer Pro blinken grün. Sie hören einen Klingelton in Ihren Hörsystemen.
			Wurde der Anruf angenommen, hören Sie einen kurzen Bestätigungston in Ihren Hörsystemen. Sie können jetzt mit dem Gesprächspartner telefonieren.

 Konstant  Blinkend

## Ausgehende Anrufe Streamer Pro

### Einen Anruf ausführen


Stellen Sie sicher, dass Sie in das Mikrofon des Streamers sprechen können.






1. Um einen Anruf zu tätigen, **drücken Sie kurz die Telefontaste am Streamer (A)**. Sie hören nun einen Wählton in den Hörsystemen. Die Telefontaste auf dem Streamer und die Status-Anzeige auf dem Phone Adapter leuchten konstant grün.
2. **Wählen Sie wie gewohnt die Nummer am Telefon (B)**: Bei einem schnurlosen Telefon drücken Sie die Anruftaste und wählen die Nummer (oder umgekehrt, je nach Telefon). Bei einem kabelgebundenen Telefon nehmen Sie den Hörer ab und wählen.
3. Kurz darauf hören Sie das Anrufsignal in Ihren Hörsystemen, das anzeigt, dass der Anruf durchgestellt wird.

Sie können bereits jetzt **den Hörer des Telefons auflegen** (bzw. beim schnurlosen Telefon die Auflegentaste drücken).\*

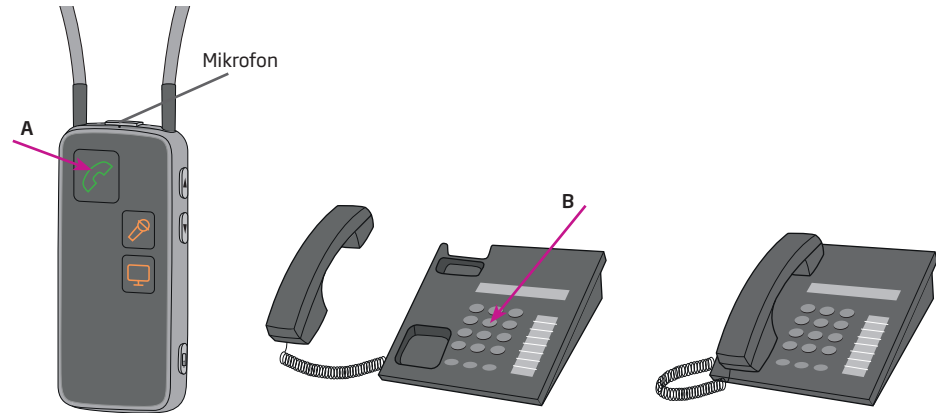Um den Anruf zu beenden, drücken Sie kurz die Telefon-Taste am Streamer.

\* Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der Hörer spätestens am Ende des Anrufs wieder korrekt aufgelegt wird, damit die Telefonleitung für eingehende Anrufe frei ist.



Anruf ausführen			
Streamer Pro Status-Anzeige	Streamer Pro Telefontaste	Anzeigen am Phone Adapter 2.0	Bedeutung
			Streamer und Phone Adapter sind verbunden.
			Drücken Sie kurz die Telefontaste am Streamer. Sie hören nun einen Wählton in den Hörsystemen.

 Konstant  Blinken

## Eingehende Anrufe ConnectClip

### Einen Anruf annehmen

Stellen Sie sicher, dass Sie in das Mikrofon des ConnectClip sprechen können (A).


Wenn Ihr Festnetztelefon klingelt, hören Sie einen Klingelton in Ihren Hörsystemen. Die Status-Anzeige auf dem Phone Adapter und die **Status-Anzeige auf dem ConnectClip blinken gleichzeitig grün (B)**.

**Drücken Sie kurz die Multifunktions-taste auf dem ConnectClip (C)**, um den Anruf entgegenzunehmen. Sie hören einen kurzen Signalton in Ihren Hörsystemen. Die Status-Anzeige auf dem ConnectClip und die Status-Anzeige auf dem Phone Adapter leuchten jetzt konstant grün.

Um den Anruf zu beenden, drücken Sie einfach kurz die Multifunktions-taste auf dem ConnectClip. Die Status-Anzeige wird blau.





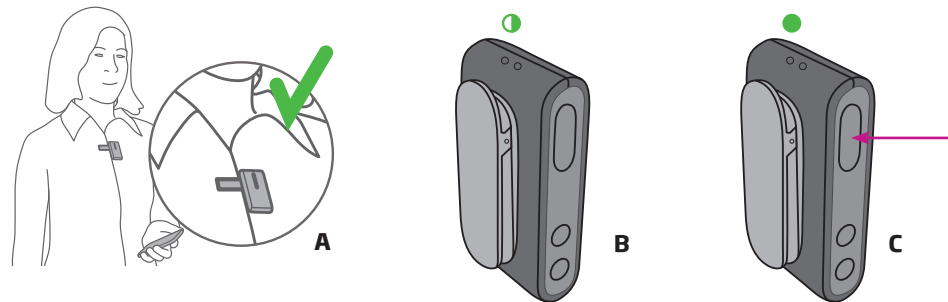







### WICHTIGER HINWEIS

Der ConnectClip kann immer nur mit einem Telefon zurzeit arbeiten.  
Auf Seite 20 in der Installationsanleitung ist der Kopplungsvorgang beschrieben.





### Einen Anruf annehmen mit dem ConnectClip

ConnectClip Status-Anzeige	ConnectClip Power-Anzeige	Phone Adapter	Beschreibung
		 	ConnectClip und Phone Adapter sind verbunden.
		 	Das Telefon klingelt: Die Status-Anzeigen auf dem Phone Adapter und ConnectClip blinken grün. Sie hören einen Klingelton in Ihren Hörsystemen für den eingehenden Anruf.
		 	Wurde der Anruf angenommen, hören Sie einen kurzen Signalton in den Hörsystemen. Sie können jetzt mit Ihrem Gesprächspartner telefonieren.

 Konstant  Blinkend

## Ausgehende Anrufe ConnectClip

### Einen Anruf ausführen



Stellen Sie sicher, dass Sie in das Mikrofon des ConnectClip sprechen können (A).







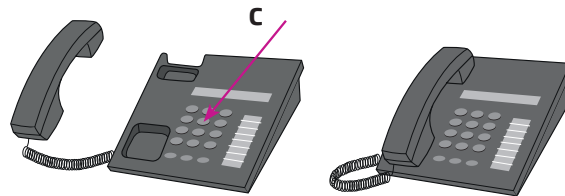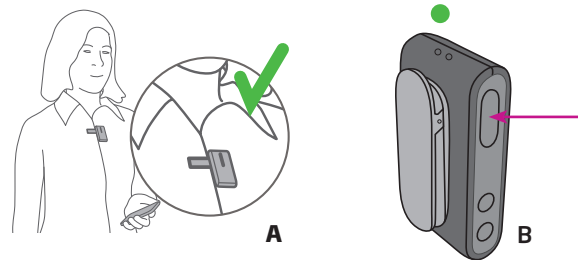

1. Um einen Anruf zu tätigen, **drücken Sie kurz die Multifunktionstaste am ConnectClip (B)**. Dieses entspricht dem Abnehmen des Hörers und Sie hören einen Wählton in den Hörsystemen. Die Status-Anzeigen auf dem ConnectClip und dem Phone Adapter leuchten konstant grün.
2. **Nehmen Sie den Hörer** von Ihrem Festnetztelefon ab (bzw. drücken Sie die Anruftaste an Ihrem schnurlosen Telefon) **und wählen Sie wie gewohnt die Nummer (C)**.
3. Kurz darauf hören Sie das Anrufsignal in Ihren Hörsystemen, das anzeigt, dass der Anruf über Ihren ConnectClip und Ihre Hörsysteme durchgestellt wird.

Sie können jetzt **den Hörer auflegen** (bzw. „Anruf beenden“ an Ihrem schnurlosen Telefon drücken).

Um den Anruf zu beenden, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste am ConnectClip.

\* Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie den Hörer wieder richtig auf das Telefon legen, andernfalls ist Ihre Telefonleitung für eingehende Anrufe gesperrt.



Anruf ausführen			
ConnectClip Status-Anzeige	ConnectClip Power-Anzeige	Phone Adapter	Beschreibung
		 	ConnectClip und Phone Adapter sind verbunden.
		 	Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste am ConnectClip und Sie hören einen Wählton in den Hörsystemen.

 Konstant  Blinkend

## Reinigung des Phone Adapters

Reinigen Sie den Phone Adapter 2.0 mit einem weichen, trockenen Tuch.

### WICHTIGER HINWEIS

Der Phone Adapter 2.0 darf keinesfalls gewaschen oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.

Detaillierte Informationen zum Streamer entnehmen Sie bitte der Streamer Bedienungsanleitung.

Detaillierte Informationen zum ConnectClip entnehmen Sie bitte der ConnectClip Bedienungsanleitung.

Weitere Hinweise und Informationen finden Sie unter [www.oticon.de/connectline](http://www.oticon.de/connectline).

### **WICHTIGER HINWEIS**

Ausführliche Hinweise zum Funktionsumfang Ihrer Hörsysteme entnehmen Sie bitte der zugehörigen Bedienungsanleitung.

## **Internationale Garantie**

Ihr Phone Adapter 2.0 verfügt über eine auf zwölf Monate befristete internationale Garantie auf Material und Ausführung vom Zeitpunkt der Lieferung an. Diese eingeschränkte Garantie bezieht sich nur auf Herstellungs- und Materialdefekte des Adapters an sich, nicht jedoch auf Batterien, Kabel, Netzteile usw. Probleme, die durch falsche/unsachgemäße Handhabung oder Pflege, übermäßigen Gebrauch, Unfälle, Reparaturen durch Unbefugte, Verwendung unter hoher Korrosionsbelastung, Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät oder fehlerhafte Einstellungen entstehen, sind durch die eingeschränkte Garantie NICHT abgedeckt oder können zu deren Verlust führen.

### **Service**

Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Hörakustiker. Er kann sofort kleinere Schwierigkeiten beheben und Einstellungen verändern.

## Weitere Informationen

### Phone Adapter ausschalten

Wenn Sie keine Telefonanrufe über den Streamer oder ConnectClip empfangen möchten, schalten Sie den Phone Adapter aus, indem Sie den Netzstecker ziehen. Bei normalem Gebrauch benötigt der Phone Adapter sehr wenig Strom, so dass Sie ihn nicht ausschalten müssen.

### Reichweite des Phone Adapters

Der Phone Adapter 2.0 hat eine Reichweite von ca. 30 Metern zum Streamer Pro bzw. ca. 20 Metern zum ConnectClip. Die exakte Reichweite hängt von vorhandenen Möbeln und Wänden ab. Innerhalb dieser Reichweite können Sie bei guter Klangqualität telefonieren.

Normalerweise hören Sie den Klingelton in Ihren Hörsystemen bis zu einer Distanz von 30-40 Metern (z. B. wenn Sie draußen im Garten arbeiten). Um die Stimme Ihres Gesprächspartners dann klar und deutlich zu verstehen, gehen Sie bitte näher an den Phone Adapter heran.

### Lautstärke

Nutzen Sie die Lautstärketasten am Streamer bzw. ConnectClip, um die Lautstärke des Telefonsignals in den Hörsystemen zu steuern. Sie regeln die Lautstärke, indem Sie beim Streamer einmal kurz oben (lauter) oder unten (leiser) auf die Taste drücken. Beim ConnectClip nutzen Sie die Tasten „+“ und „-“ zur Lautstärkeregelung. Wiederholen Sie das kurze Drücken für weitere Lautstärkeänderungen.

Der Streamer merkt sich die Lautstärke, die Sie zum Telefonieren eingestellt haben. Wenn Sie nach einer Unterbrechung wieder telefonieren, wird automatisch die letzte am Streamer eingestellte Lautstärke für das Telefonat gewählt. Im ConnectClip ist diese Funktion nicht verfügbar.

### Nur das Telefonsignal übertragen

Die Hörsysteme-Mikrofone sind automatisch eingeschaltet.

Sie können jedoch bei Bedarf auch stummgeschaltet werden, damit Sie dem Telefonat besser folgen können. Halten Sie dafür die Leiser-Taste für 3 Sekunden gedrückt (Streamer Pro bzw. ConnectClip).

Um die Hörsysteme-Mikrofone während des Telefonats wieder zu aktivieren, halten Sie einfach die Leiser-Taste erneut für ca. 3 Sekunden gedrückt (Streamer Pro bzw. ConnectClip).