


EINLEITUNG


Dieser Phone Adapter stellt eine drahtlose Verbindung zwischen dem Streamer und Ihrem Festnetztelefon zu Hause her (ausgenommen sind ISDN-Telefone, Internet-Protokoll-Telefonie (IP) und Anlagentelefone für Großtelefonanlagen).

Der Phone Adapter unterstützt eingehende und ausgehende Telefonate. Während eines Anrufs arbeiten Ihre Hörsysteme wie ein Headset. Durch den um den Hals getragenen Streamer haben Sie während des Telefonates die Hände frei.

Bevor Sie diese Bedienungsanleitung lesen, stellen Sie sicher, dass der Phone Adapter korrekt mit dem Telefon verbunden und mit Strom versorgt ist und dass der Streamer mit dem Phone Adapter gekoppelt wurde. Informationen zum Anschluss finden Sie in der Installationsanleitung für den Phone Adapter. Diese Bedienungsanleitung erklärt Ihnen wie Sie den Streamer zum Telefonieren einsetzen. Das Telefonsignal wird innerhalb einer Reichweite von ca. 10 Metern vom Phone Adapter via Streamer direkt in die Hörsysteme gesendet.

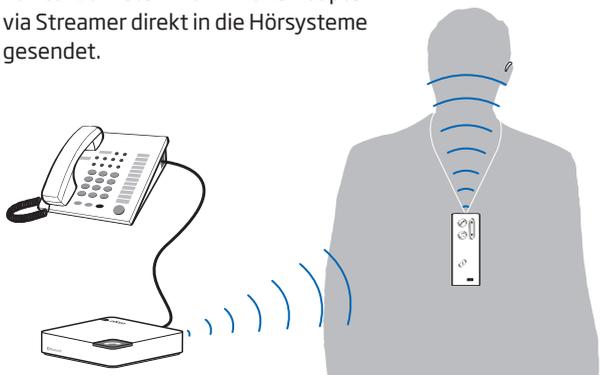

STREAMER ÜBERBLICK

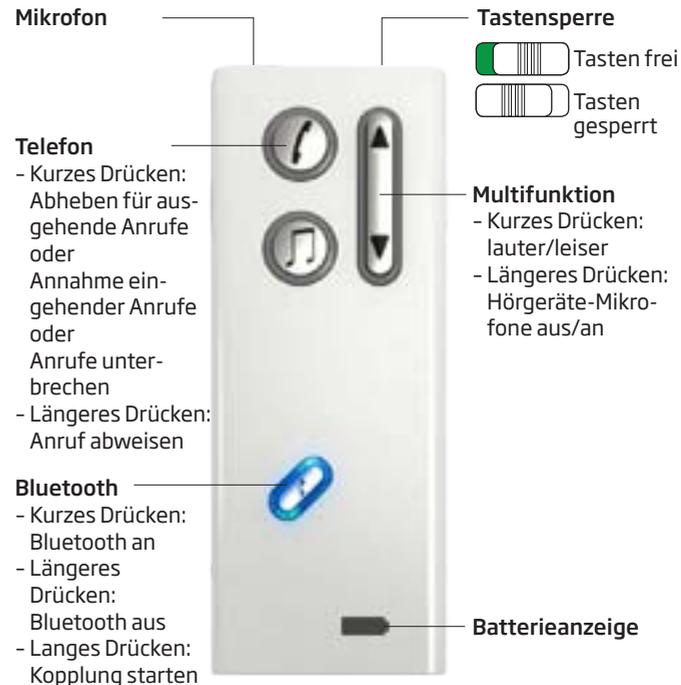

Auch wenn die Tasten gesperrt sind, können Sie Telefonate empfangen.

People First

Unser Versprechen für Kommunikation und Lebensqualität

BEDIENUNGSANLEITUNG TELEFONIEREN



112559DE / 12.10 / FSC recycled paper. Cert.no.: FSC-XXXXXX. www.fsc.org

EINGEHENDE ANRUF

VORBEREITUNG

Den Streamer mit dem Halsgurt um den Hals tragen, da der Gurt eine Antenne für die optimale Übertragung enthält. Schalten Sie Bluetooth am Streamer ein. Sie müssen sich in einer Reichweite von 10 Metern des Phone Adapters aufhalten und die rote Statusanzeige des Phone Adapters muss konstant leuchten.

EINGEHENDE ANRUF

Wenn Sie einen Anruf erhalten, hören Sie einen Klingelton in Ihren Hörsystemen und die Umrandung der Telefon Taste auf dem Streamer blinkt grün.



ANRUF ANNEHMEN

Drücken Sie kurz die Telefon Taste auf dem Streamer. Der Streamer nimmt den Anruf entgegen und das grüne Licht leuchtet konstant. Sie hören den Anruf nun direkt in Ihren Hörsystemen. Sprechen Sie ganz normal, so als ob Ihr Gesprächspartner vor Ihnen sitzen würde. Während des Telefonats blinkt die rote Statusanzeige am Phone Adapter regelmäßig.



ANRUF BEENDEN

Drücken Sie kurz die Telefon Taste auf dem Streamer. Der Streamer beendet das Telefonat. Das grüne Licht geht aus. Die rote Statusanzeige am Phone Adapter leuchtet nun wieder konstant.



STATUS

AUSGEHENDE ANRUF

ANRUF AUSFÜHREN

1. Drücken Sie kurz die Telefon Taste am Streamer (oder die rote Telefon Taste des Phone Adapters). Sie hören nun Signale in den Hörsystemen. Die Telefon Taste auf dem Streamer leuchtet konstant grün.
2. Wählen Sie wie gewohnt die Nummer am Telefon: Schnurloses Telefon: Anruf-Taste drücken und Nummer wählen (oder umgekehrt, dies kann je nach Telefon variieren). Kabelgebundenes Telefon: Hörer abnehmen und Nummer wählen.
3. Warten Sie das Anrufsignal ab. Legen Sie dann den Hörer des Telefons auf (bzw. drücken Sie beim schnurlosen Telefon die Auflegen-Taste). Sie führen das Gespräch nun mit dem Streamer weiter.



Wichtiger Hinweis bei schnurlosen Telefonen: Wenn Sie ständig nur das Besetztzeichen hören, starten Sie mit Punkt 2 (Nummer wählen) und führen anschließend Punkt 1 aus (Telefon Taste am Streamer drücken).

4. Führen Sie das Telefonat. Die rote Statusanzeige am Phone Adapter blinkt während des Telefonates.



WANRUF BEENDEN

Drücken Sie kurz die Telefon Taste am Streamer. Das grüne Licht geht aus. Die Statusanzeige am Phone Adapter leuchtet konstant rot. Vergewissern Sie sich, dass beim Telefon spätestens jetzt der Hörer aufgelegt (bzw. die Auflegen-Taste gedrückt) wird, wenn dies nicht bereits unter Punkt 3 geschehen ist.



STATUS

LAUTSTÄRKE REGELN

Nutzen Sie die Multifunktions-taste am Streamer, um die Lautstärke des Telefonsignals in den Hörsystemen zu steuern.



Sie regeln die Lautstärke indem Sie einmal kurz oben (lauter) oder unten (leiser) auf die Taste drücken. Wiederholen Sie das **kurze Drücken** für weitere Lautstärke-änderungen.



Der Streamer merkt sich die Lautstärke, die Sie zum Telefonieren eingestellt haben.

Wenn Sie nach einer Unterbrechung (z.B. nachdem Sie ferngesehen haben) wieder telefonieren, wird automatisch die letzte am Streamer eingestellte Lautstärke für das Telefonat gewählt. Die gespeicherten Lautstärkeeinstellungen werden in dem Moment gelöscht, wenn Sie die Bluetooth Funktion ausschalten.

Hinweis: Der Streamer regelt automatisch die Lautstärke mit der Ihre Stimme übertragen wird. Sie sollten aber immer klar und deutlich sprechen und wenn nötig direkt in das Mikrofon des Streamers.

TIPPS UND HINWEISE

NUR TELEFONSIGNAL

Wenn Sie das erste Mal mit dem Streamer telefonieren, sind die Hörgeräte-Mikrofone angeschaltet.

Sie können die Hörgeräte-Mikrofone ausschalten, um Nebengeräusche zu reduzieren.

Dafür drücken Sie die Multifunktions-taste entweder oben oder unten für **2 Sekunden**.



2 sec

Wenn Sie diese Taste erneut für 2 Sekunden drücken aktivieren Sie die Hörgeräte-Mikrofone wieder.

Detaillierte Informationen zum Streamer entnehmen Sie bitte der Streamer Bedienungsanleitung.

Weitere Hinweise und Informationen finden Sie unter www.oticon.de

Bitte beachten Sie, dass Sie sich nach § 201 Absatz 2 Nr. 1 Strafgesetzbuch strafbar machen, wenn Sie aufgrund der bei einigen Telefonen optionalen Konferenzfunktion beim Phone Adapter ohne Zustimmung der Gesprächspartner ein Gespräch mithören.