


Dieser TV Adapter stellt zu Hause eine drahtlose Verbindung zwischen dem Streamer und Ihrem Fernseher her.

Das Audiosignal vom Fernseher wird innerhalb einer Reichweite von 10 Metern in brillianter Klangqualität direkt in Ihre Hörsysteme übertragen.

Bevor Sie diese Bedienungsanleitung lesen, stellen Sie sicher, dass der TV Adapter korrekt mit dem Fernseher verbunden und mit Strom versorgt ist und dass der Streamer mit dem TV Adapter gekoppelt wurde. Informationen zum Anschluß finden Sie in der Installationsanleitung für den TV Adapter.

Diese Bedienungsanleitung erklärt Ihnen wie Sie den Streamer zum Fernsehen einsetzen.

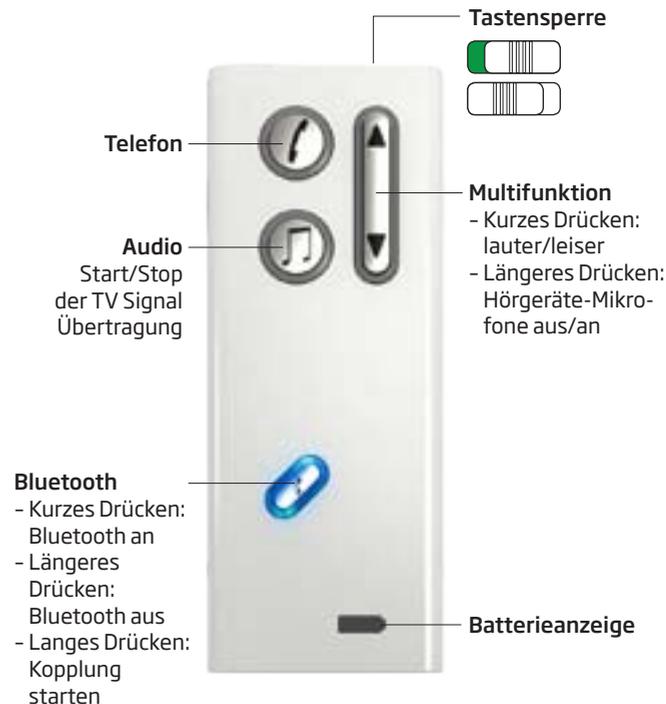


Wenn der Streamer-Akku vollständig geladen ist, sind ca. 5 Stunden fernsehen möglich.

Unser Versprechen für Kommunikation und Lebensqualität



112504DE/12.10/FSC recycled paper, Cert.no.: FSC-XXXXXX, www.fsc.org

FERNSEHEN MIT STREAMER

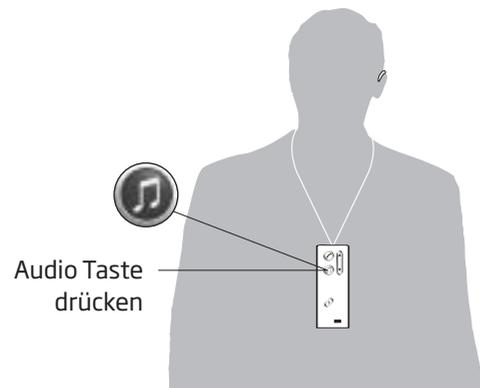

START/STOP TV SIGNAL ÜBERTRAGUNG

VORBEREITUNG

Tragen Sie den Streamer mit dem Halsgurt um den Hals. Sie dürfen sich höchstens **10 Meter** vom Fernseher entfernt aufhalten.

Die Audio Taste des Streamers kontrolliert die TV Signal Übertragung.



START ÜBERTRAGUNG

Drücken Sie kurz die Audio Taste. Der Streamer verbindet sich mit dem TV Adapter. Nach einigen Sekunden leuchtet die Umrandung der Audio Taste am Streamer und die Statusanzeige am TV Adapter konstant orange auf. Die Hörsysteme empfangen nun das Audiosignal des Fernsehers.



STATUS

STOP ÜBERTRAGUNG

Drücken Sie kurz die Audio Taste. Die orangenen Lichter am Streamer und TV Adapter gehen aus. Die Hörsysteme gehen zurück in das erste Hörgeräte-Programm (P1).

Hinweis: Die Bluetooth Taste am Streamer muss für die Übertragung des Fernsehtons aktiviert sein. Sollte sie deaktiviert sein, springt sie automatisch an, wenn die Audio Taste zur TV Signal Übertragung gedrückt wird. Die Bluetooth Taste muss immer manuell deaktiviert werden.

LAUTSTÄRKE REGELN

Nutzen Sie die Multifunktionstaste am Streamer um die Lautstärke des TV Signals in den Hörsystemen zu steuern.



Sie regeln die Lautstärke indem Sie einmal kurz oben (lauter) oder unten (leiser) auf die Taste drücken. Wiederholen Sie das **kurze Drücken** für weitere Lautstärkeänderungen.



Der Streamer merkt sich die Lautstärke, die Sie zum Fernsehen eingestellt haben. Wenn Sie z.B. nach einem Telefonat wieder fernsehen, wird automatisch die letzte am Streamer eingestellte Lautstärke gewählt. Die gespeicherten Lautstärkeeinstellungen werden in dem Moment gelöscht, wenn Sie die Bluetooth Funktion ausschalten.

Hinweis: Die Lautstärke der Hörsysteme wird normalerweise nicht durch Lautstärkeänderungen, die Sie mit der Fernbedienung des Fernsehers vornehmen, beeinflusst.

TIPP

NUR TV SIGNAL

Wenn Sie das erste Mal mit dem Streamer fernsehen, sind die Hörgeräte-Mikrofone angeschaltet.

Sie können die Hörgeräte-Mikrofone ausschalten, um nur das TV Signal zu hören.

Dafür drücken Sie die Multifunktionstaste entweder oben oder unten für **2 Sekunden**.



2 sec

Wenn Sie die Taste erneut für 2 Sekunden drücken, aktivieren Sie die Hörgeräte-Mikrofone wieder.

Hinweis: Das System merkt sich welche Mikrofoneinstellung Sie gewählt haben. Wenn Sie das nächste Mal fernsehen, wird automatisch die zuletzt gewählte Mikrofoneinstellung aktiviert. Die gespeicherte Mikrofoneinstellung wird in dem Moment gelöscht, wenn Sie die Bluetooth Funktion ausschalten.

Detaillierte Informationen zum Streamer entnehmen Sie bitte der Streamer Bedienungsanleitung.

Weitere Hinweise und Informationen finden Sie unter www.oticon.de