

People First

Unser Versprechen für Kommunikation und Lebensqualität.

ClearSounds QH2
Bluetooth Telefonadapter

159491DE / 05.15



0000159491000001

oticon
PEOPLE FIRST



oticon
PEOPLE FIRST

ClearSounds QH2
Bluetooth Telefonadapter

Einleitung

Die Nutzung von Hörsystemen in Verbindung mit Telefonanlagen im Büro kann schwierig sein, da unterschiedliche Telefonanlagen verschiedene digital verschlüsselte Signale verwenden.

Mit ClearSounds QH2 bieten wir eine Lösung für alle kabelgebundenen Büro-Telefone (PBX, VoIP usw.) über Bluetooth. Dabei verwenden Sie die Hörsysteme in Verbindung mit dem Streamer Pro als eigenes kabelloses Headset.

Aktuelle Informationen, Videos und Bedienungsanleitungen für den QH2 Telefonadapter finden Sie auf www.clearsounds.com.



QH2 mit Streamer Pro nutzen

Streamer Pro* kann über Bluetooth mit dem QH2 Telefonadapter verbunden werden. Auf diese Weise setzen Sie ihn als kabelloses Headset ein.

* Auch kompatibel mit Streamer 1.4

Alle Telefonate können nun über den QH2 Telefonadapter (oder das Büro-Telefon) erfolgen. Bitte entnehmen Sie die benötigten Hinweise Abschnitt 3 der QH2 Anleitung für eine schnelle Inbetriebnahme.

Sobald die mechanische Rufannahme am Telefon angebracht und der Streamer Pro* mit QH2 gekoppelt worden ist, können Sie Telefongespräche direkt über die Telefontaste am Streamer annehmen und beenden.

* Auch kompatibel mit Streamer 1.4

Anleitung

1. Lesen Sie die ClearSounds QH2 Anleitung für eine schnelle Inbetriebnahme aufmerksam durch.
2. Verbinden Sie QH2 mit Ihrem Büro-Telefon wie in Abschnitt 1 beschrieben.
3. Anschließend koppeln Sie den Streamer Pro* mit QH2 wie in Abschnitt 2 beschrieben.

* Auch kompatibel mit Streamer 1.4

Bitte entnehmen Sie der aktuellen Bedienungsanleitung des Streamer Pro ab Seite 30, wie Sie ihn als Headset koppeln und nutzen können.

Aktuelle Informationen, Videos und Bedienungsanleitungen für den QH2 Telefonadapter finden Sie auf www.clearsounds.com.

Aktuelle Informationen zum Streamer Pro und zu ConnectLine finden Sie auf www.oticon.de unter Zubehör/ConnectLine.



Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Oticon A/S unter Lizenz verwendet. Andere ausgewiesene Marken- und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.