

# ConnectClip - Übersicht der Tastenfunktionen



An- / Ausschalten



Mobil telefonieren



Streaming Musik / Audio



Externes Mikrofon



Fernbedienung



Starten

3 Sekunden  
lang drücken

Anruf annehmen / beenden

kurz drücken  
(oder am Smartphone)

Am Smartphone

3 Sekunden  
lang drücken

Stoppen

6 Sekunden  
lang drücken

Anruf ablehnen

⊖ lang drücken  
(oder am Smartphone)

kurz drücken

3 Sekunden  
lang drücken

Weitere

Sprachwahl aktivieren

2x kurz drücken

Programme wechseln:

⊕ 3 Sekunden  
lang drücken

Lautstärke

Lauter: ⊕ kurz drücken | Leiser: ⊖ kurz drücken

Hörgeräte-  
Mikrofone

Aus: ⊖ 3 Sekunden lang drücken | An: ⊖ oder ⊕ kurz drücken

Alle Kopplungen zu  
externen Bluetooth-  
Geräten löschen

⊖ ⊕ 10 Sekunden lang drücken

# Hörsysteme mit dem **ConnectClip** koppeln

## 1. ConnectClip ausschalten




Der ConnectClip muss ausgeschaltet sein.



Ca. 6 Sekunden lang drücken

## 2. Beide Hörsysteme Aus- und Einschalten

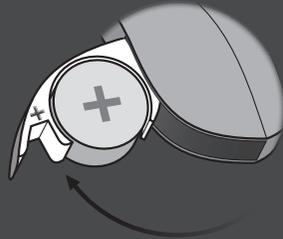

Batteriefach öffnen und wieder schließen. Ca. 10-15 Sekunden die Startmelodie abwarten. Die Hörsysteme sind nun 3 Minuten lang im Kopplungsmodus.

## 3. ConnectClip einschalten



Ca. 3 Sekunden lang drücken

## 4. Suche nach Hörsystemen



Der ConnectClip sucht nun nach den Hörsystemen und blinkt dabei gelb.

## 5. Maximaler Abstand von 20 cm



ConnectClip und beide Hörsysteme maximal im Abstand von 20 cm platzieren.

## 6. Erfolgreiche Kopplung



Die Status-LED leuchtet konstant gelb.

# Mobiltelefon mit dem **ConnectClip** koppeln

## 1. ConnectClip in Kopplungsmodus bringen



Ca. 6 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Status-LED blau blinkt. Der ConnectClip ist nun für 3 Minuten im Kopplungsmodus.

## 2. Bluetooth am Mobiltelefon einschalten



Im Bereich Einstellungen/Bluetooth des Mobiltelefons Bluetooth aktivieren, nach dem ConnectClip suchen und die Geräte miteinander koppeln.

Falls Pin Code erforderlich: 0000 (vier Nullen)

## 3. Erfolgreiche Kopplung



Die Status-LED leuchtet konstant blau.