


Bedienungsanleitung

Oticon ON

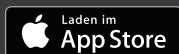

oticon
life-changing technology

Einleitung

Die folgende Bedienungsanleitung ist für die Oticon ON App ab Version 2.3.0 oder neuer gültig.

Lesen Sie diese Broschüre bitte sehr sorgfältig durch, einschließlich des **Abschnitts** Warnhinweise. Damit stellen Sie sicher, dass Sie die App optimal nutzen können.

Die App läuft auf Ihrem Apple iOS- oder Android™ -Gerät und ermöglicht Ihnen die direkte Steuerung Ihrer Oticon-Hörsysteme.

Wenn in dieser Anleitung Gerät(e) erwähnt werden, bezieht sich dies auf Ihr Apple iOS-Gerät, z. B. ein iPhone® oder iPad®, oder auf Ihr Android-Gerät, z. B. ein Telefon oder Tablet.

Stellen Sie sicher, dass Sie immer die neueste Version der App nutzen. Stellen Sie außerdem sicher, dass sich die Betriebssoftware auf Ihrem iOS oder Android OS Gerät auf dem aktuellsten Stand befindet.

Falls Sie weitere Fragen zur Verwendung der App haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Hörakustiker.

Beachten Sie bitte, dass einige Einstellungen in der App von der durch den Hörakustiker durchgeführten Anpassung abhängen.

Diese Anleitung unterstützt Sie bei:

- Erste Schritte mit der App
- So verwenden Sie die App auf Ihrem Gerät

| Hörsystem | Inbetriebnahme | Pflege und Handhabung | Tinnitus | Optionen | Warnhinweise | Weitere Informationen |

Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und iPod sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

Zu dieser Anleitung

Beachten Sie, dass Sie die App auf Ihr Gerät herunterladen, installieren und die Hörsysteme mit Ihrem Gerät koppeln müssen, *bevor* Sie die Anweisungen in dieser Broschüre befolgen.

Wenn Sie Hilfe beim Koppeln Ihres Geräts mit Ihren Hörsystemen benötigen, besuchen Sie:
www.oticon.de/pairing

Vorgesehene Verwendung

Vorgesehene Verwendung	Oticon ON soll Nutzer von Bluetooth-fähigen Hörsystemen bei der Steuerung der Funktionen ihrer Hörsystemlösung unterstützen. Die Verwendung erfolgt in Kombination mit der jeweils genutzten Hörsystemlösung.
Angaben zur Verwendung	Keine Angaben zur Verwendung.
Vorgesehene Nutzer	Nutzer von Bluetooth-fähigen Hörsystemen. Kinder unter 10 Jahren müssen von einem verantwortlichen Erziehungsberechtigten oder Betreuer unterstützt werden.
Anwendungsumgebung	Im Freien sowie in Innenräumen.
Kontraindikationen	Keine Kontraindikationen
Klinische Vorteile	Siehe klinische Vorteile des Hörsystems.

Inhaltsverzeichnis

Hörsystem

Systemvoraussetzungen	7
-----------------------	---

Inbetriebnahme

Startbildschirm	8
Ein Konto erstellen oder Anmelden	9

Pflege und Handhabung

Ändern der Lautstärke und Stummschalten	10
Wechseln des Programms	11
TV-Adapter, EduMic und ConnectClip	12
Streaming Equalizer	14
Fernmikrofon	15
Tinnitus SoundSupport	16

Tinnitus

Erweiterte Tinnitus-Einstellungen	18
-----------------------------------	----

Optionen

Sound Booster	21
Hörsysteme finden	22
HearingFitness	23
Internet der Dinge	24
Apple Watch	25

Warnhinweise

Warnhinweise	28
--------------	----

Weitere Informationen

Hilfe und Fehlersuche	29
Technische Daten	30

Haftungsausschluss für Oticon ON

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung dieser App außerhalb der vorgesehenen Verwendung oder der Warnhinweise.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, den IFTTT-Funktionen-Service ohne vorherige Ankündigung einzustellen.

WICHTIGER HINWEIS

Ausführliche Hinweise zum Funktionsumfang Ihres Hörsystems finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Hörsystems.

Systemvoraussetzungen

Um die App nutzen zu können, benötigen Sie Folgendes:

- Oticon More™, Oticon Opn S™, Oticon Opn Play™, Oticon Opn™, Oticon Xceed, Oticon Xceed Play, Oticon Ruby oder Oticon Siya-Hörsysteme - gekoppelt mit Ihrem Gerät.
- Ein kompatibles Apple iOS- oder Android-Gerät.
 - Um die Kompatibilität zu überprüfen, gehen Sie zu: www.oticon.de/compatibility
- Für Apple iOS-Geräte
 - iOS-Betriebssystemsoftware mit Version 13.0 oder neuer. Um herauszufinden, welche iOS-Version Sie auf Ihrem iPhone oder iPad haben, gehen Sie zu:
Einstellungen > Allgemein > Info > Softwareversion
- Für Android-Geräte
 - Android-Betriebssystemsoftware mit Version 8.0 oder neuer. Um herauszufinden, welche Android-Version Sie auf Ihrem Android-Gerät haben, gehen Sie zu: **Einstellungen > Über das Telefon > Software-Informationen**

Startbildschirm

Verwenden Sie den Startbildschirm, um Zugriff auf alle Funktionen der App zu haben. Der Startbildschirm kann von überall in der App aufgerufen werden, indem Sie in der Menüleiste auf **Startseite** tippen.

- A. Mit **Fernbedienung** können Sie Hörsystemprogramme und Lautstärke ändern.
- B. Mit **Hörsysteme** können Sie den Batteriestand der Hörsysteme prüfen und die Hörsysteme bei Verlust suchen.
- C. Mit **HearingFitness™** können Sie persönliche Hörziele festlegen.
- D. Mit **Internet der Dinge** haben Sie Zugriff auf die IFTTT-Funktionen (If This Then That).
- E. Mit **Handbuch zum Hören** können Sie auf verschiedene Anleitungen zugreifen, um zu erfahren, wie Sie Ihre Hörsysteme optimal nutzen können.
- F. Mit **Einstellungen** können Sie die App gemäß Ihren Vorlieben konfigurieren und auf die Bedienungsanleitungen der Anwendung zugreifen.
- G. In der Menüleiste können Sie zwischen **Startseite**, **Fernbedienung** und **Hörsysteme** wählen.



Ein Konto erstellen oder Anmelden

Wenn Sie zum ersten Mal auf HearingFitness oder den Internet der Dinge/ IFTTT-Dienst zugreifen, werden Sie aufgefordert, ein Konto zu erstellen, indem Sie entweder Ihre Apple ID-, Facebook- oder Google-Anmeldeinformationen oder Ihre E-Mail-Adresse verwenden.

Wenn Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse anlegen, müssen Sie das Konto aktivieren und ein Kennwort erstellen.

Wenn Sie sich bereits bei anderen registrierten Diensten von Oticon angemeldet haben, können Sie Ihre Anmeldeinformationen wiederverwenden, um sich bei Ihrem Konto anzumelden.

Sie benötigen nur ein Konto für die Dienste HearingFitness und IFTTT.



Ändern der Lautstärke und Stummschalten


Sie können die Lautstärke in beiden Hörsystemen zusammen oder getrennt voneinander in jedem Hörsystem ändern.

Das Ändern der Lautstärke gilt nur für das ausgewählte Programm.

Zugriff auf Lautstärkeregelung und Stummschaltungen

- Tippen Sie in der Menüleiste auf **Fernbedienung**.

- A. Anzeige des Lautstärkepegels. Der Wert **0** entspricht der Startlautstärke, die Ihr Hörakustiker programmiert hat.
- B. Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, schieben Sie den Schieberegler nach oben oder unten.
- C. Um zwischen der Lautstärkeregelung in einem oder beiden Hörsystemen zu wechseln, tippen Sie auf das Schieberegler-Symbol .
- D. Um die Mikrone des Hörsystems stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben, tippen Sie auf das Stummschalten-Symbol .

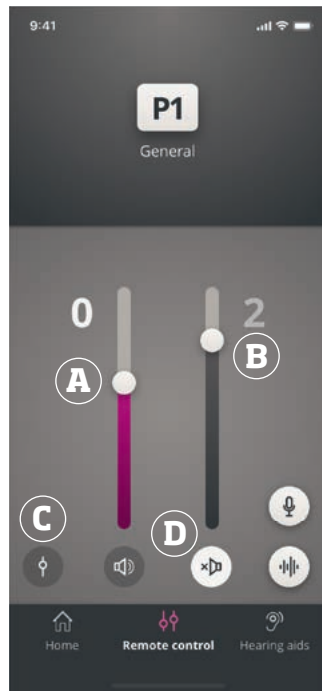

Wechseln des Programms

Ein Programm ist eine individuelle Klang- bzw. Lautstärkeanpassung, das für bestimmte / unterschiedliche Hörsituationen optimiert ist.

Die Lautstärke kann für jedes Programm unabhängig eingestellt werden.

Programme ändern

1. Tippen Sie in der Menüleiste auf **Fernbedienung**.
2. Wischen Sie in der Programmleiste nach links oder rechts, um die verfügbaren Programme zu sehen.
3. Tippen Sie auf das gewünschte Programm, um es auszuwählen.

Wenn Sie ein Programm auswählen, ändert sich die Hintergrundfarbe des Programm-Symbol zu weiß.

Ihr Hörakustiker kann während Ihrer Anpassungs-Sitzung bis zu vier verschiedene Hörprogramme definieren.

Zusätzliche Programme für den TV-Adapter / EduMic, ConnectClip und / oder Tinnitus Sound Support™ von Oticon könnten ebenfalls verfügbar sein.

TV-Adapter, EduMic und ConnectClip

Wenn Ihre Hörsysteme mit dem TV-Adapter von Oticon oder EduMic und / oder ConnectClip gekoppelt wurden, stehen auf dem Programmregler ein Programm oder mehrere Programme dafür zur Verfügung.

TV-Adapter / EduMic

Wenn Ihre Hörsysteme mit einem TV-Adapter gekoppelt sind, können Sie mit der App den von Ihrem Fernseher auf Ihre Hörsysteme gestreamten Klang in der Lautstärke steuern.

Wenn Ihre Hörsysteme mit EduMic gekoppelt sind, können Sie mit der App den vom Gerät auf Ihre Hörsysteme gestreamten Klang in der Lautstärke verändern.

Lautstärke des vom TV-Adapter oder EduMic gestreamten Klang einstellen

1. Tippen Sie in der Menüleiste auf **Fernbedienung**.
2. Tippen Sie in der Programmleiste auf **TV Adapter / EduMic**.
3. Tippen Sie auf die **Registerkarte Streaming**.
4. Bewegen Sie den Schieberegler nach oben oder unten.

Wenn Sie mehr als einen Fernseher und TV-Adapter oder EduMic mit Ihren Hörsystemen gekoppelt haben, können Sie mit der App zwischen den Streaming-Quellen wechseln.

Zwischen Streaming-Quellen wechseln

1. Tippen Sie in der Menüleiste auf **Fernbedienung**.
2. Tippen Sie in der Programmleiste auf **TV Adapter / EduMic**.
3. Tippen Sie auf die Registerkarte **Streaming**. Das markierte Gerät führt aktuell das Streaming aus.
4. Tippen Sie in der Registerkarte **Streaming** auf den Gerätenamen.
5. Tippen Sie in der Liste auf die gewünschte Streaming-Quelle.

Einstellen der Umgebungslautstärke, die über die Mikrofone Ihrer Hörsysteme aufgenommen wird

1. Tippen Sie auf die Registerkarte **Umgebung**.
2. Bewegen Sie den Schieberegler nach oben oder unten.

Ein gekoppeltes Gerät ignorieren oder löschen

1. Tippen Sie in der Menüleiste auf **Fernbedienung**.
2. Tippen Sie in der Programmleiste auf **TV Adapter / EduMic**.
3. Tippen Sie auf die Registerkarte **Streaming**.
4. Tippen Sie im Menü **Streaming** auf das Pfeil-Symbol.
5. Wählen Sie aus der Liste der angeschlossenen Geräte das Gerät aus, das sie ignorieren möchten.
6. Tippen Sie im Bildschirm **Gerät bearbeiten** auf **Gerät ignorieren/löschen**.

Hinweis

Beide Hörsysteme müssen mit der App verbunden sein, um ein Gerät zu ignorieren. Wenn Sie alle angeschlossenen Geräte in der App ignorieren / löschen, wird das Programm TV-Adapter- / EduMic aus dem Programmregler entfernt.

Ihr TV-Adapter / EduMic muss erneut mit Ihren Hörsystemen gekoppelt sein, bevor sie in der App angezeigt werden.

Externes Mikrofon (ConnectClip)

Mit dem ConnectClip können Sie im Freisprechmodus telefonieren und Klänge von jedem Bluetooth-Gerät auf Ihre Hörsysteme streamen, wie ein kabelloses Headset. ConnectClip kann auch als Fernmikrofon verwendet werden.

Anpassung der Lautstärke des gestreamten Klangs vom ConnectClip

1. Tippen Sie in der Menüleiste auf **Fernbedienung**.
2. Wählen Sie in der Programmleiste **ConnectClip**.
3. Tippen Sie auf die Registerkarte **Externes Mikrofon**.
4. Um die Lautstärke zu ändern bewegen Sie den Schieberegler nach oben oder unten.

Streaming Equalizer

Mit dem Streaming Equalizer können Sie die Lautstärke der Frequenzbänder für den von Ihren Mobilgeräten, TV-Adapter, EduMic und / oder ConnectClip gestreamten Klang anpassen.

Der Streaming-Equalizer ist in keinem Tinnitus-Programm verfügbar.


Hinweis

Der Streaming Equalizer ist auf Apple und kompatiblen Android-Geräten immer sichtbar. Auf allen anderen Android-Geräten ist die Schaltfläche nur sichtbar, wenn Sie Klänge von Ihrem Telefon oder anderen Geräten streamen.

Zusätzliche Informationen finden Sie hier:

www.oticon.de/hearing-aid-users/support/faq/wireless-accessories

Streaming Equalizer einstellen

1. Tippen Sie in der Menüleiste auf **Fernbedienung**.
2. Tippen Sie auf das Streaming Equalizer-Symbol .
3. Bewegen Sie die Schieberegler nach oben oder unten um den Klang/Lautstärke zu verändern.
 - **Tief** gleicht die tiefen Klänge aus.
 - **Mittel** gleicht mittelhohe Klänge aus.
 - **Hoch** gleicht die hohen Klänge aus.

Die Standardeinstellungen sind immer 0 dB und der Bereich liegt zwischen +6 dB und -12 dB.


Die Einstellungen für den Streaming Equalizer bleiben erhalten, solange die App aktiv ist. Die Einstellungen werden beim Beenden der App auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Fernmikrofon

Mit dieser Funktion können Sie Ihr iPhone oder iPad als externes Mikrofon verwenden.

Sie können Ihr iPhone zum Beispiel in der Nähe einer Person platzieren, die auf der anderen Seite des Raums spricht und der Ton wird auf Ihre Hörsysteme übertragen.

Fernmikrofon aktivieren oder deaktivieren

1. Tippen Sie in der Menüleiste auf **Fernbedienung**.
2. Wählen Sie in der Programmliste eines der allgemeinen Programme aus.
3. Tippen Sie unten rechts auf das Mikrofon-Symbol .

Hinweis

Die Funktion Fernmikrofon ist zurzeit nur für Apple-Geräte verfügbar.

Tinnitus SoundSupport - Vorgesehene Verwendung

Mithilfe von Tinnitus SoundSupport werden vom Hörsystem Klänge erzeugt, um durch Individualisierung eines speziellen Tinnitus-Programms den Umgang mit Tinnitus zu erleichtern.

Die Zielgruppe sind Erwachsene (über 18 Jahre).

Tinnitus SoundSupport kann von qualifizierten Hörakustikern (Audiologen, Hörsystem-Spezialisten oder Hals-Nasen-Ohren-Ärzten) eingesetzt werden, die Erfahrung mit der Beurteilung von Tinnitus und Hörminderungen haben und entsprechende Maßnahmen begleiten können. Die Anpassung von Tinnitus SoundSupport sollte im Rahmen eines Tinnitus-Programms von einem Hörakustiker vorgenommen werden.

Tinnitus SoundSupport erzeugt Klänge, die in Ihre Hörsysteme integriert werden können. Speziell für die Hörsysteme entwickelte Programme ermöglichen die Wiedergabe von verschiedenen Klängen, die Ihre Aufmerksamkeit vom Tinnitus ablenken.

Während der Anpassungs-Sitzung kann Ihr Hörakustiker den Tinnitus SoundSupport in einem Programm oder mehreren Programmen aktivieren. Diese Programme können zusammen mit den anderen Programmen oben auf dem Bildschirm aufgerufen werden.

Informationen zur eingeschränkten Nutzung dieser Programme finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Hörsystems oder bei Ihrem Hörakustiker.

Hinweis

Die Tinnitus SoundSupport-Funktion ist nur in der App verfügbar, wenn Tinnitus von Ihrem Hörakustiker in den Hörsystemen aktiviert wurde.

Tinnitus SoundSupport

Auswahl eines Tinnitus-Programms mit entspannenden Klängen

1. Tippen Sie in der Menüleiste auf **Fernbedienung**.
2. Wählen Sie in der Programmleiste das Tinnitus-Programm aus, das Sie verwenden möchten.

Weitere Informationen zu Programmen finden Sie im Abschnitt **Programm** ändern.

Anpassung der Lautstärke des entspannenden Tinnitus-Klang


1. Tippen Sie auf die Registerkarte **Tinnitus-Klang**.
2. Bewegen Sie den Schieberegler nach oben oder unten um die Lautstärke zu ändern.

Sie können dies für jedes Hörsystem unabhängig oder für beide Hörsysteme zusammen tun.

Weitere Informationen zur Lautstärkeregelung finden Sie im Abschnitt **Lautstärke ändern**.

Einstellen der Lautstärke von Umgebungsklängen, die von Ihren Hörsystemen erfasst werden

1. Tippen Sie auf die Registerkarte **Umgebung**.
2. Bewegen Sie den Schieberegler nach oben oder unten.

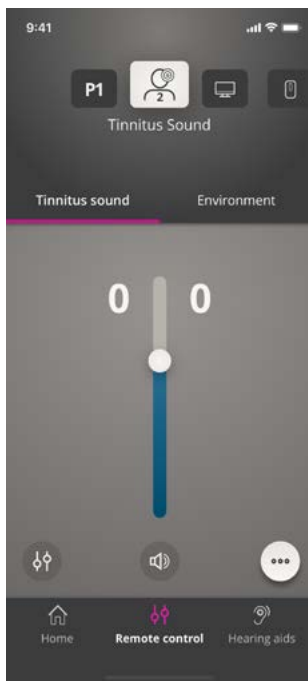

Erweiterte Tinnitus-Einstellungen

Zu den erweiterten Tinnitus-Optionen gehören Tinnitus-Klangvariationen und ein Tinnitus-Klang-Equalizer der den Tinnitus Ihren Bedürfnissen entsprechend maskiert und Ihnen ermöglicht, den Klang anzupassen.

Zugriff auf erweiterte Einstellungen

- Tippen Sie unten rechts im App-Bildschirm auf die Schaltfläche **•••** weitere Optionen.

Die Verfügbarkeit der erweiterten Tinnitus-Optionen hängt von der Anpassung des Programms durch den Hörakustiker ab.

Tinnitus-Klangvariationen

Mit den Optionen für Tinnitus-Klangvariationen können Sie die Klangvariabilität oder die Klangwiedergabe ändern.

Mit den Einstellungen können Sie den Klang so ändern, dass der Tinnitus Ihren Anforderungen entsprechend maskiert wird.



Der Klang ist konstant.



Der Klang ist in sehr geringem Maße variabel, die Wellen sind langsam und subtil.




Der Klang ist in geringem Maße variabel, die Wellen sind stärker spürbar.



Der Klang ist sehr variabel, die Wellen sind ziemlich aktiv.



Der Klang ist weitgehend variabel, die Wellen sind sehr aktiv.

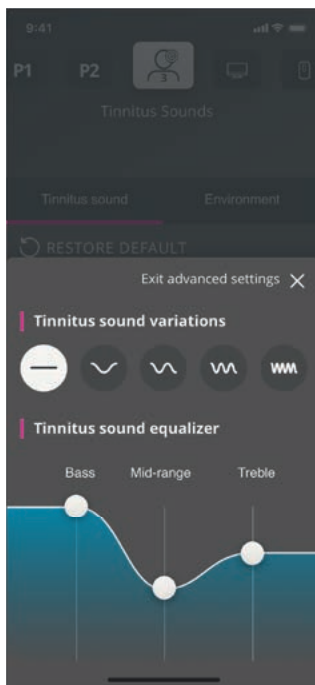

Tinnitus Sound Equalizer

Mit dem Tinnitus Sound Equalizer können Sie verschiedene Eigenschaften (Bereiche) des Tinnitus-Entspannungsklangs einstellen. Sie können damit Folgendes ändern:


- A. **Tief** - Tiefe Klänge des Musikbereichs.
- B. **Mittel** - Mittelhohe Klänge -
- C. **Hoch** - Hohe Klänge -

Der vom Hörakustiker eingestellte Ausgangszustand beträgt 0 Dezibel (dB) für jeden Bereich. Jeder Bereich kann individuell eingestellt werden.

Einstellen der Dezibel- (Lautstärke) Skala für jeden Bereich

- Bewegen Sie die Schieberegler am unteren Rand des App-Bildschirms nach oben oder unten.

Die Lautstärke kann auf bis zu 24 dB verringert werden.

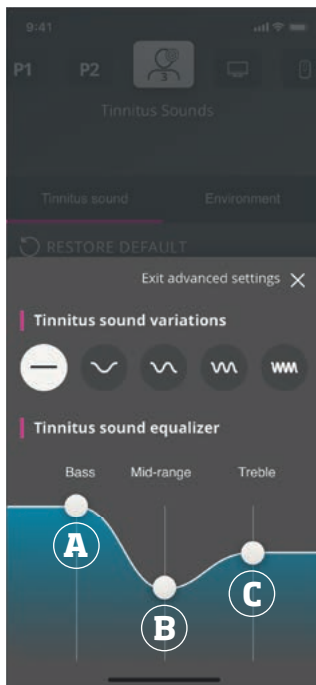

Individuelle Einstellungen speichern


Jedes Mal, wenn Sie die Einstellungen der entspannenden Tinnitus-Klänge anpassen, merkt sich die App diese, speichert sie automatisch und verwendet sie als Ihre bevorzugten Einstellungen.

Sound Booster*

Sound Booster ist hilfreich, wenn es Ihnen schwer fällt, sich auf Sprache zu konzentrieren. Bei Aktivierung werden nicht sprachliche Klangquellen von hinten und von den Seiten unterdrückt werden.

Sound Booster aktivieren und deaktivieren

- Schalten Sie den horizontalen Schalter über dem Lautstärkereglern um.

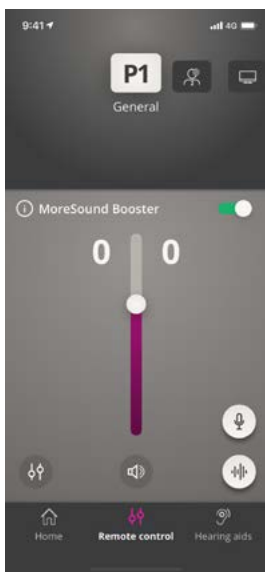

Die Funktion kann deaktiviert werden, wenn Sie das Programm ändern, das Batteriefach öffnen / die Hörsysteme in das Ladegerät legen oder die Hörsysteme wieder anschließen.

Hinweis

*Der genaue Name der Sound Booster-Funktion hängt von den verwendeten Hörsystemen ab. Die Sound Booster-Funktion ist für die Hörsysteme Oticon Opn, Oticon Siya und Oticon Ruby nicht verfügbar.

Hörsysteme finden

Wenn Sie Ihre Hörsysteme nicht finden können, zeigt Ihnen die App eine Karte mit dem letzten bekannten Standort der gekoppelten Hörsysteme, als die App ausgeführt wurde.

So finden Sie Ihre verloren gegangenen Hörsysteme


1. Tippen Sie in der Menüleiste auf **Hörsystem**.
2. Tippen Sie auf **Hörsysteme finden**:

Eine Statusleiste zeigt, wie nahe Sie sich zu jedem verbundenen Hörsystem befinden. Falls sich Ihr Telefon außerhalb der Reichweite der Hörsysteme befindet oder die Verbindung getrennt wurde, können Sie das Datum und die Uhrzeit der letzten Verbindung sehen.

Auf der Karte zeigt eine grüne Markierung an, dass eine Verbindung zwischen dem Hörsystem und Ihrem Telefon besteht.

Eine rote Markierung zeigt eine unterbrochene Verbindung an.

Für beste Ergebnisse wird empfohlen, die App eingeschaltet zu lassen, entweder aktiv zu verwenden oder im Hintergrund auszuführen.

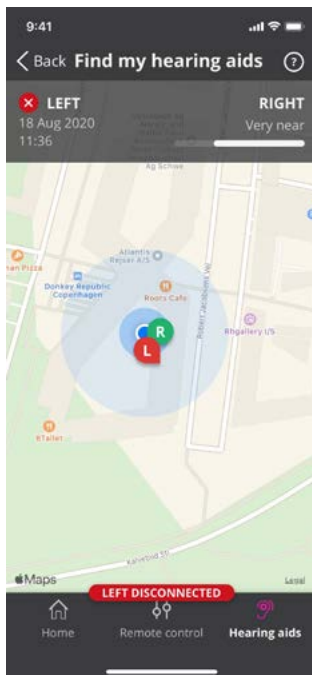

HearingFitness

HearingFitness ist eine Funktion, mit der Sie ein persönliches Hörziel festlegen und den täglichen Gebrauch Ihrer Hörsysteme verfolgen können, um dieses Ziel zu erreichen.

HearingFitness erfordert ein persönliches Konto bei Oticon. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Konto erstellen oder anmelden**.

Wenn Sie sich bereits bei anderen registrierten Diensten von Oticon angemeldet haben, können Sie Ihre Anmeldeinformationen wiederverwenden, um sich mit diesem Konto anzumelden.

Erstmalige Verwendung

1. Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf **HearingFitness**.
2. Tippen Sie auf **Erste Schritte**.
3. Tippen Sie auf **Anmelden**.

Wenn Sie noch kein Oticon-Konto haben

- Tippen Sie auf **Konto erstellen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Falls Sie eine Meldung sehen, dass Ihre Hörsysteme ein Firmware-Update benötigen, kontaktieren Sie Ihren Hörakustiker.

HearingFitness

Ein tägliches Ziel festlegen

Mit HearingFitness können Sie auch ein Ziel für die Anzahl der Stunden festlegen, in denen Sie Ihre Hörsysteme verwenden möchten.

Ihr tägliches Ziel anpassen

1. Tippen Sie auf die Registerkarte **Tag**.
2. Tippen Sie auf **Ziel**.
3. Wählen Sie die Anzahl der Stunden pro Tag aus, während der Sie Ihre Hörsysteme verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **Festlegen**, wenn Sie fertig sind.

Tages-, Wochen- und Monatsansicht

Zur Übersicht über Ihre Verwendung

- Tippen Sie auf die Registerkarte **Tag**, **Woche** oder **Monat**.

Internet der Dinge

Mit Oticon ON können Sie Ihre Hörsysteme über den IFTTT-Dienst mit dem Internet der Dinge verbinden.

Mit IFTTT können Sie alltägliche Aktivitäten automatisieren, z. B. das Einschalten des Lichts Zuhause beim Einschalten der Hörsysteme, oder Sie können eine Textbenachrichtigung einrichten, die bei nachlassendem Batteriestand an ein Mobiltelefon gesendet wird und viele andere Dinge.

Zugriff auf IFTTT

- Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf **Internet der Dinge**.

Für die Nutzung dieses Dienstes ist ein persönliches Konto bei Oticon erforderlich. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Konto erstellen oder anmelden**.

Weitere Informationen zu IFTTT finden Sie unter:
www.oticon.de/hearing-aid-users/support/faq/ifttt

Apple Watch

Einleitung

Mit der Apple Watch können Sie die Lautstärke regeln, Ihre Hörsysteme stummschalten / die Stummschaltung aufheben sowie das Programm ändern.

Beachten Sie, dass in der Lautstärkeanzeige **0** die von Ihrem Hörakustiker vorgeschriebene Anfangslautstärke ist.

Die Lautstärke wird gleichzeitig für beide Hörsysteme geändert, und sie gilt nur für das ausgewählte Programm.

Bevor Sie Oticon ON auf Ihrer Apple Watch verwenden können, müssen Sie zuerst die App auf Ihrem iPhone installieren und sicherstellen, dass Sie Ihre Hörsysteme mit Ihrem iPhone gekoppelt werden.

Systemvoraussetzungen

Zur Nutzung der Apple Watch benötigen Sie Folgendes:


- Apple Watch Serie 1-5
- watchOS 4 oder höher

Anpassen der Lautstärke.

- Drehen Sie im Hauptbildschirm **von Oticon ON** auf der Apple Watch die Digitale Krone.

Stummschalten / Aufheben der Stummschaltung Ihrer Hörsysteme


- Tippen Sie auf die Lautstärkeanzeige.

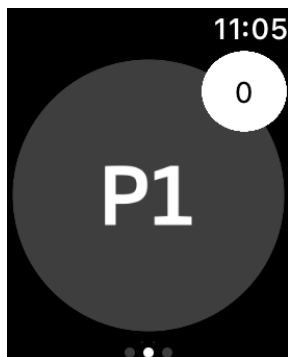

Programm wechseln

1. Wischen Sie im Hauptbildschirm **von Oticon ON** nach links.
2. Tippen Sie im Bildschirm **Programme** auf das Programm, das Sie auswählen möchten. Zum Beispiel **P1**.


Wenn Sie auf das ausgewählte Programm tippen, wird die Hintergrundfarbe des Programmsymbols grau.

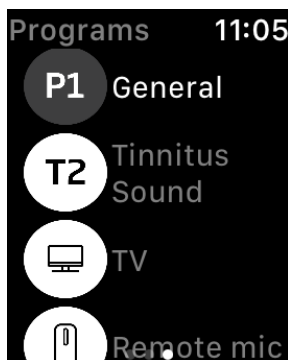

Apple Watch

Batteriestand überprüfen

- Wischen Sie im Hauptbildschirm von Oticon ON nach rechts.

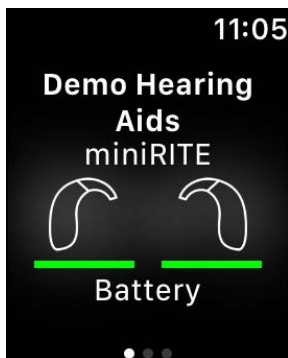

Apple Watch Komplikation

- Für einen schnellen Zugriff auf die App können Sie die Apple Watch Komplikation einrichten (Verknüpfung (1)).



Warnhinweise

Bitte machen Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur ordnungsgemäßen Verwendung mit den Warnhinweisen und dem gesamten Inhalt dieser Broschüre vertraut, bevor Sie die App verwenden. Wenden Sie sich an Ihren Hörakustiker, wenn die App nicht ordnungsgemäß funktioniert oder reagiert.

Die App kann die Programmauswahl und Lautstärke des verbundenen Hörsystems steuern. Deshalb sollte die App nur durch den Nutzer des Hörsystems oder von verantwortlichen Betreuern oder Hörakustikern bedient werden. Andere Dritte sollten an der Bedienung der App gehindert werden.

Die Verwendung der App kann Sie in Situationen ablenken, in denen Ihre volle Aufmerksamkeit erforderlich sind. Achten Sie bei der Verwendung der App auf Ihre Umgebung.

Die Verbindung zwischen Hörsystemen und Mobiltelefon kann aufgrund von Signalstörungen, niedrigem Batteriestand, Abstand zwischen Telefon und Hörsystemen usw. unterbrochen werden. Wenn dies auftritt und die erwartete Funktionalität der Hörsysteme beeinträchtigt, empfiehlt es sich, die Hörsysteme neu zu starten.

Informationen zur Funktionalität Ihres speziellen Hörsystems finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Hörsystems.

Hilfe und Fehlersuche

Zugriff auf den Bildschirm Fehlersuche

1. Tippen Sie in der Menüleiste auf **Hörsysteme**.
2. Tippen Sie auf **Fehlersuche**.

Wenn Sie immer noch Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Hörakustiker.

Technische Daten

Die folgenden Definitionen können in der Bedienungsanleitung für Oticon ON enthalten sein:

Beschreibung der in dieser Broschüre verwendeten Symbole



Warnhinweise

Text, der mit einem Warnsymbol gekennzeichnet ist, muss vor der Verwendung des Geräts gelesen werden.



Hersteller

Das Gerät wird von dem Hersteller hergestellt, dessen Name und Anschrift neben dem Symbol angegeben sind. Gibt den Hersteller von Medizinprodukten an, wie in den EU-Verordnungen 2017/745 definiert.



CE-Zeichen

Das Gerät entspricht allen erforderlichen EU-Richtlinien und -Verordnungen. Die vierstellige Nummer gibt die Identifikation der benannten Stelle an.

Beschreibung der in der App verwendeten Symbole und Abkürzungen



elFU-Anzeige

Elektronische Bedienungsanleitung konsultieren

Gibt an, dass der Nutzer die elektronische Bedienungsanleitung konsultieren sollte.



Medizinisches Gerät

Das Gerät ist ein medizinisches Gerät.

GTIN

Global Trade Item Number

Eine weltweit eindeutige 14-stellige Nummer zur Identifizierung von Produkten für medizinische Geräte, einschließlich Software für medizinische Geräte.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dänemark



Hauptsitz:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dänemark
www.oticon.global

