

Willkommen in der **Wireless Welt**

Für Velox S™ - und Velox™ -basierte Hörsysteme



oticon
PEOPLE FIRST

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Hörsysteme

Sie haben sich für sehr gute Hörsysteme entschieden. In dieser Broschüre erfahren Sie, wie Sie die Möglichkeiten von Ihren Hörsystemen in verschiedenen Alltagssituationen erweitern. Zum Beispiel wie Sie besonders einfach telefonieren, fernsehen, ganz entspannt Musik hören oder Vorträge genießen können.

Nutzen Sie dazu das Oticon Wireless-Zubehör, das einfach und intuitiv zu bedienen ist.

Oticon ON App

Genießen Sie Mobilität: Einfach Ihre Hörsysteme über die Oticon ON App mit dem iPhone® oder Android™-Smartphone verbinden und Lautstärke oder Hörprogramme bequem mit einem Fingerwisch steuern. Die Oticon ON App bietet Ihnen auch eine Hörsystemesuchfunktion sowie die Funktion HearingFitness™, die Sie unterstützt, Ihre Hörsysteme regelmäßig zu tragen.

Einfach die Gratis-App im App Store® oder bei Google Play™ herunterladen und los geht's.

Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und iPod sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.




*HEARING
FITNESS™*



Download on the
App Store




GET IT ON
Google Play

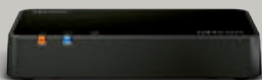

TV Adapter



Fernbedienung

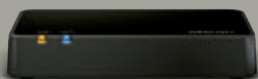

Phone Adapter 2 FW 2.0



ConnectClip



Telefonieren

Einfach Telefonieren



Mit dem iPhone telefonieren

Wenn Sie ein iPhone nutzen, können Sie Ihre Hörsysteme ganz einfach damit verbinden – kabellos ohne weiteres Zubehör. Sie können Ihren Gesprächspartner direkt in beiden Hörsystemen hören. Ihre Hörsysteme werden mit dem iPhone, dessen Mikrofon Sie nutzen, zum kabellosen Stereo-Headset.

Oder Sie genießen Musik bzw. Audiodateien in Stereoklang von Ihrem iPhone, iPad® oder iPod touch®. Wenn Sie freihändig mit dem iPhone telefonieren möchten, können Sie den ConnectClip nutzen.

Made for



iPod



iPhone



iPad

Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und iPod sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Mit dem Android-Smartphone telefonieren

Ihre Hörsysteme können sich über den ConnectClip mit modernen Android-Smartphones* kabellos verbinden. Der ConnectClip leitet das Telefongespräch direkt in beide Hörsysteme. Das in den ConnectClip eingebaute Mikrofon überträgt, was Sie dem Anrufer sagen. Der ConnectClip ermöglicht Ihnen auch das Übertragen von Musik und Audiodateien in Stereo. Sie können ihn u. a. als Fernbedienung für die Hörsysteme nutzen.




Kompatibel mit
**allen modernen
Smartphones**

* Wir empfehlen Android 8.0 Oreo oder höher. Die Kompatibilität hängt vom jeweiligen Smartphone ab.

Mit dem Festnetz telefonieren

Die kabellose Verbindung Ihrer Hörsysteme mit einem Festnetztelefon wird über den Phone Adapter 2 FW 2.0 sowie dem ConnectClip hergestellt. Der Abstand zwischen ConnectClip und Phone Adapter 2 kann bis zu 30 m betragen.

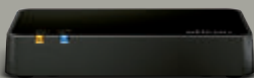




Entspannt fernsehen oder Musik hören

Mit dem TV Adapter 3.0 können Sie den Fernsehton in Stereo direkt in Ihre Hörsysteme übertragen.

- Sie sehen in Ihrer Lieblingslautstärke fern und werden nicht durch Umgebungsgeräusche gestört. Andere Zuschauer können die TV-Lautstärke unabhängig einstellen.
- Sie können den TV Adapter auch mit zahlreichen Audiogeräten verbinden. Entsprechende Kabel gehören zum Lieferumfang.
- Unterstützung von Dolby Digital®
- Egal ob TV oder Musik: Ihre Hörsysteme werden mit dem TV Adapter zu kabellosen Stereo-„Kopfhörern“.

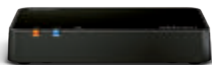

Bis zu 15 m





Die Hörsysteme per Fernbedienung steuern

Mit der Fernbedienung Remote Control 3.0, die kaum größer ist als ein moderner Autoschlüssel, können Sie die Hörsysteme unauffällig und bequem per Knopfdruck steuern, um beispielsweise die Lautstärke zu regeln oder auf ein anderes Hörprogramm umzuschalten.

Alternativ können Sie auch die Fernbedienungs-funktion der Oticon ON App oder den ConnectClip nutzen.



Bis zu 1,8 m





Verstehen auf Entfernung

Bei einem Vortrag oder in einer extrem lauten Umgebung kann der ConnectClip Sprache kabellos direkt in Ihre Hörsysteme übertragen.

So funktioniert es z. B. bei einem Vortrag:

1. Geben Sie den ConnectClip an die vortragende Person weiter, die Sie besser verstehen möchten.
2. Der ConnectClip leitet die Stimme des Sprechers direkt in Ihre Hörsysteme weiter.
3. Sie hören den Vortrag ohne von Umgebungsgläuschen gestört zu werden.



Bis zu 20 m





Chatten über PC oder Tablet

Der ConnectClip ist auch ideal für eine Unterhaltung via PC oder Tablet. In Kombination mit Ihren Hörsystemen können Sie wie mit einem kabellosen Stereo-Headset kommunizieren.

So funktioniert es beim Chatten über PC/Tablet:

- Verwenden Sie den ConnectClip, um Sprache kabellos in Ihre Hörsysteme zu übertragen, zum Beispiel beim Chatten über Skype.
- Ihre Stimme wird über das im ConnectClip integrierte Mikrofon übertragen.



Bis zu 10 m



Wir empfehlen für diese Funktion, dass Sie den ConnectClip über den Sennheiser BTD 800 USB-Netzwerkadapter mit Ihrem PC koppeln. Dieser USB-Adapter ist im Fachhandel erhältlich.





Verbinden Sie sich mit dem Internet

Ihre Hörsysteme lassen sich über die Oticon ON App mit Geräten und Dienstleistungen des Alltagslebens verknüpfen.

Wie wäre es, wenn Ihre Hörsysteme Sie informieren, wenn es an der Tür klingelt, wenn der Feueralarm anspringt, wenn der Kuchen im Backofen fertig ist oder sich das Babyphone meldet? Oder wenn das Licht und die Kaffeemaschine angehen, wenn Sie morgens Ihre Hörsysteme einschalten?

Möglich macht das der Internetdienst **If This Then That** – IFTTT (www.ifttt.com).

Oticon hat sich der IFTTT-Gemeinschaft angeschlossen, der immer mehr Unternehmen beitreten. Profitieren Sie jetzt und in Zukunft von dieser Vernetzung.

HEARING
FITNESS™



HearingFitness™ – gutes Hören hält fit

Mit HearingFitness übernehmen Sie Kontrolle sowie Verantwortung für Ihre Hörgesundheit und werden ermutigt, herausfordernde Hörsituationen aufzusuchen. Diese Funktion hilft Ihnen, Hörziele zu setzen und zu verfolgen.

Die HearingFitness-Funktion ist inspiriert durch aufregende Forschungsergebnisse, die zeigen, dass die Behandlung einer Hörminderung im mittleren Lebensabschnitt das Demenzrisiko stärker senkt als alle anderen Maßnahmen, wie z. B. mit dem Rauchen aufzuhören oder sich mehr zu bewegen.*

* Livingston et al., 2017

Viele Möglichkeiten mit Apps

Sie können natürlich auch andere auf dem Markt verfügbare Apps nutzen und deren Audiodaten direkt (iPhone) oder via ConnectClip (Android) an Ihre Hörsysteme senden lassen. Nutzen Sie z. B. Apps, die Texte in Sprache umwandeln, um sich etwas vorlesen zu lassen, oder Übersetzungs-Apps, um sich im Urlaub zu verständigen.

Ihr Hörakustiker:

Ihr Hörakustiker informiert Sie gerne über
die Vernetzungsmöglichkeiten, die Ihnen
Ihre Oticon Hörsysteme bieten.
Oder besuchen Sie www.oticon.de



www.oticon.de

oticon
PEOPLE FIRST