

Guida rapida per l'app Oticon Companion su Apple Watch

Come installare, associare e controllare Oticon Companion con Apple Watch.

Con Apple Watch puoi controllare il volume, cambiare il programma, silenziare o disattivare gli apparecchi acustici, attivare o disattivare Speech Booster, spegnere il microfono a distanza e controllare il livello della batteria. Puoi anche attivare funzioni speciali denominate "complicazioni", che consentono di accedere rapidamente all'app dal quadrante dell'orologio.

Come iniziare

Prima di utilizzare Oticon Companion su Apple Watch, devi installare l'app su iPhone e abbinare gli apparecchi acustici a esso.

Requisiti di sistema

Per utilizzare l'app con Apple Watch, occorre quanto segue:

- Apple Watch Series 4 o successivo
- watchOS 8 o successivo



Esegui la scansione
del codice QR
per scaricare
Oticon Companion
dall'App Store.



Scarica su
App Store

Made for

iPhone | Apple Watch

Apple, il logo Apple, iPhone, iPad e Apple Watch sono marchi commerciali di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Installazione di Oticon Companion su Apple Watch


Ecco come iniziare a utilizzare Oticon Companion su Apple Watch.



In primo luogo, scarica l'**app Oticon Companion** dall'App Store del tuo iPhone e abbinala agli apparecchi acustici a esso.



Apri l'**app Watch** su iPhone.

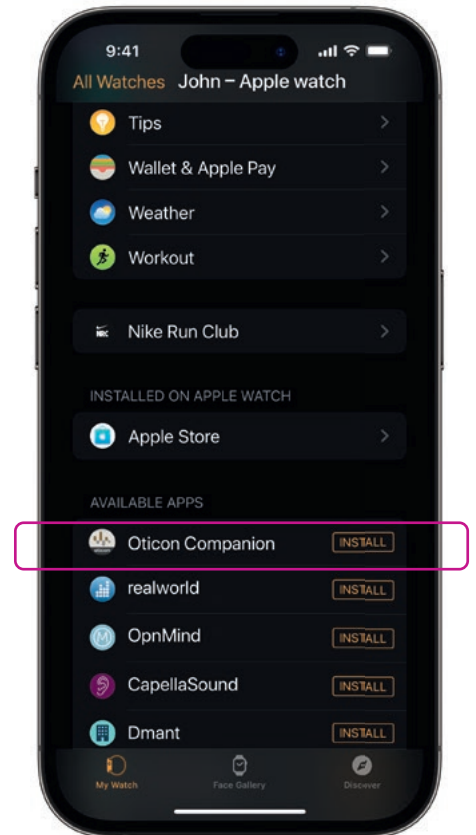

Scorri verso il basso fino alla voce APP DISPONIBILI e fai clic su **INSTALLA**, che si trova a destra dell'icona di Oticon Companion. L'app verrà installata su Apple Watch.

Utilizzo delle funzioni principali di Oticon Companion su Apple Watch

Tocca l'icona dell'**app Oticon Companion** sul tuo Apple Watch per aprire l'app.



Controllare i livelli della batteria

Dalla schermata Generale di Oticon Companion, **scorri verso destra** per visualizzare i livelli della batteria dell'apparecchio acustico.



Generale

La schermata Generale di Oticon Companion consente di cambiare programma, regolare il volume e silenziare gli apparecchi acustici.



Speech Booster

Dalla schermata Generale di Oticon Companion, **scorri verso sinistra** per attivare o disattivare Speech Booster o per disattivare il microfono a distanza.

Tocca l'icona del programma (**P1**) per accedere alla schermata del programma.


Scorri i programmi e **tocca quello da selezionare**.

Puoi anche scorrere i programmi **ruotando la corona digitale**.




Impostare le funzionalità speciali dell'Apple Watch

Per accedere rapidamente all'app dal quadrante dell'orologio, puoi impostare le funzionalità speciali di Apple Watch* che agiscono da scorciatoia sul quadrante dell'orologio.

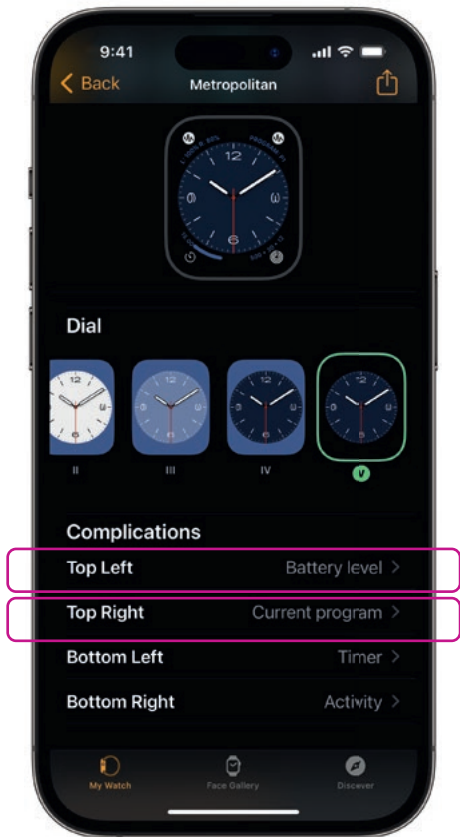

Seleziona il quadrante dell'orologio da "I miei quadranti" e scorri verso il basso fino a Funzionalità speciali. Non tutti i quadranti consentono di aggiungere le funzionalità speciali.

Tocca **in alto a sinistra** e scegli una scorciatoia.

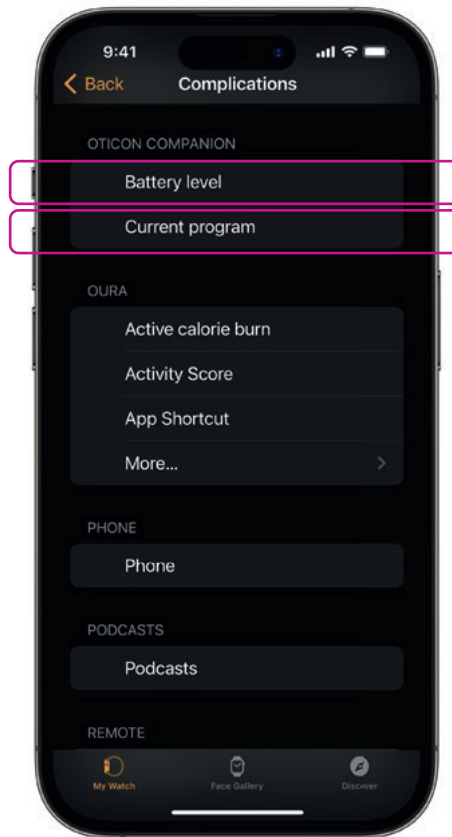

Scorri tra le funzionalità speciali e seleziona **Livello della batteria** sotto Oticon Companion.

Ripeti la procedura per la **parte superiore destra** e seleziona **Programma corrente**.



Le funzionalità speciali vengono visualizzate nell'**angolo superiore** dello schermo del quadrante dell'orologio.

* Se le funzionalità speciali sono disponibili sul quadrante dell'orologio selezionato.