

Documento guida Covid-19

Guida alla pulizia dei **Dispositivi Oticon Amigo, ConnectClip ed EduMic**



Guida alla **Pulizia dei dispositivi Oticon Amigo, ConnectClip ed EduMic**

Questo documento è una linea guida alla pulizia antibatterica dei microfoni a distanza Oticon basata sulle norme igieniche imposte dal Covid-19. È applicabile ai dispositivi Oticon Amigo, ConnectClip, ed EduMic. Si raccomanda la pulizia dei dispositivi quando vengono utilizzato da più utenti.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stabilito che il coronavirus è un virus respiratorio trasmissibile da una persona infetta principalmente attraverso le goccioline generate da tosse o starnuti, o da goccioline di saliva o secrezioni nasali. Inoltre può essere trasmesso anche da chi non manifesta sintomi.

Per questo motivo, i diversi utilizzatori dei dispositivi sopra indicati devono eseguire la loro frequente ed efficace pulizia.

Guida alla Pulizia dei dispositivi Oticon Amigo, ConnectClip ed EduMic

- Per pulire la superficie dei dispositivi Oticon Amigo, Connectclip e EduMic indossi dei guanti protettivi.
- Per pulire i dispositivi può utilizzare delle salviette umidificate con disinfettanti specifici che può trovare in commercio.
- Le ottimali sono quelle con disinfettante a base acquosa; può utilizzare una soluzione di isopropanolo al 70%. Non utilizzi disinfettanti per le mani.
- Pulisca l'intera superficie del trasmettitore con la salvietta disinfettante umidificata.
- Eviti con cura di avvicinare liquidi in eccesso alle aperture microfoniche. Le salviette umidificate sono la soluzione migliore.
- A fine pulizia, getti i guanti e le salviette utilizzate; lavi accuratamente le mani con acqua e sapone o le disinfetti con idoneo disinfettante alcolico.
- Lasci asciugare per circa un'ora i trasmettitori del microfono a distanza.

Per ulteriori informazioni
si rivolga al suo **professionista
di fiducia**

www.oticon.global

