

Istruzioni per l'Uso



SmartCharger
miniRITE R
miniBTE R

Oticon More™
Oticon Zircon™
Oticon Play PX
Oticon CROS PX

Introduzione al presente opuscolo

Questo opuscolo è una guida per l'uso e la manutenzione di Oticon SmartCharger.

Legga attentamente l'opuscolo, inclusa la sezione **Avvertenze**. Ciò le consentirà di utilizzare al meglio il caricabatterie.

Per qualsiasi ulteriore domanda sull'uso del caricabatterie, contatti il suo professionista dell'udito.

Per praticità, l'opuscolo contiene una barra di riferimento che le consente di scorrere con facilità tra una sezione e l'altra.

| [Informazioni](#) | [Come Iniziare](#) | [Uso Quotidiano](#) | [Avvertenze](#) | [Informazioni Aggiuntive](#) |

AVVERTENZA IMPORTANTE

Per maggiori dettagli sulle funzioni dei suoi apparecchi acustici, consulti le relative Istruzioni per l'Uso.

Destinazione d'uso

Destinazione d'uso	Il caricabatterie è destinato alla ricarica degli apparecchi acustici e del trasmettitore CROS, contenenti batterie ricaricabili. Utilizzare il prodotto insieme a una soluzione per l'udito.
Indicazioni per l'uso	Non esistono indicazioni per l'uso (diagnosi) per il caricabatterie.
Utilizzatori	Persone con perdite uditive che utilizzano apparecchi acustici e soggetti che offrono loro assistenza. Il professionista dell'udito responsabile delle regolazioni degli apparecchi acustici.
Tipologia di utilizzatori	Adulti e bambini di età superiore a 36 mesi.
Ambienti d'uso	Interni ed esterni.
Controindicazioni	Nessuna.
Benefici clinici	Vedere i benefici clinici dell'apparecchio acustico.

Indice

Informazioni

Contenuto della confezione	6
Caricabatterie	8
Condizioni di temperatura	9

Come Iniziare

Preparare il caricabatterie	10
Caricare gli apparecchi acustici	12

Uso Quotidiano

Tempo di ricarica	14
Ricarica del caricabatterie	16
Funzione power bank	18
Alimentazione e carica da altre sorgenti	19
Asciugare gli apparecchi acustici	20
Cura del caricabatterie	21

Avvertenze

Avvertenze generali	22
---------------------	----

Informazioni Aggiuntive

Guida alla risoluzione dei problemi	26
Condizioni d'uso	30
Garanzia	33
Dichiarazioni di conformità	36

Contenuto della confezione

La confezione contiene:



Caricabatterie



Spina adattatore per
presa di alimentazione
(diversa da Paese a Paese)



Cavetto



Questo opuscolo

Caricabatterie

Caratteristiche e funzionamento

Cavetto USB
Inserire nella spina adattatore



Porte di ricarica
Per apparecchi acustici durante la ricarica

Spina adattatore
Per prese di alimentazione



Indicatore della batteria
Visualizza lo stato di carica del power bank e della relativa batteria

Condizioni di temperatura

Temperatura	Condizioni di ricarica
Sotto a +5 °C (+41 °F)	Nessuna ricarica a causa della bassa temperatura.
da 10 a 35 °C (da 50 a 95 °F)	Condizioni ottimali di ricarica. La ricarica degli apparecchi acustici può richiedere fino a 3 ore.
Da 5 a 10 °C e da 35 a 38 °C (Da 41 a 50 °F e da 95 a 100 °F)	Ricarica estesa. La ricarica degli apparecchi acustici può richiedere fino a 4 ore.
Sopra +38 °C (100 °F)	Nessuna ricarica a causa dell'elevata temperatura.


AVVISO IMPORTANTE

Non esponga il caricabatterie a temperature inferiori a -20 °C (-4 °F) o superiori a 60 °C (140 °F).

Preparare il caricabatterie


Collegi il caricabatterie alla sorgente di alimentazione

Fase 1

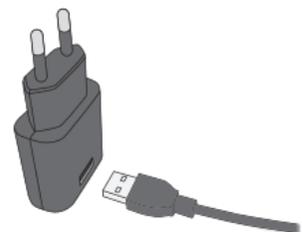


Inserisca lo spinotto USB nella spina adattatore.

Fase 2

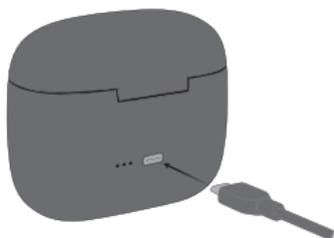

Inserisca l'altra estremità del cavetto USB nella parte posteriore del caricabatterie.


Fase 3

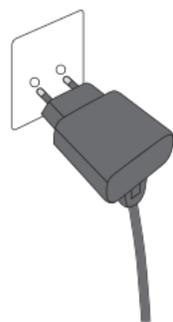

Inserisca la spina adattatore nella presa di alimentazione.

Il caricabatterie si accende automaticamente e inizia a caricare la batteria integrata del power bank.

Il caricabatterie è acceso.

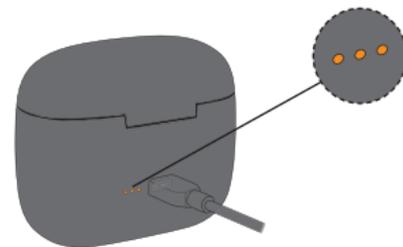

Quando il caricabatterie è collegato all'alimentazione, viene visualizzato lo stato di carica del relativo power bank.

Primo utilizzo. Carichi la batteria del power bank

Quando utilizza il caricabatterie per la prima volta, carichi completamente la batteria integrata.

Caricare gli apparecchi acustici

Posizioni gli apparecchi acustici nel caricabatterie



Posizioni gli apparecchi acustici nelle porte di ricarica come mostrato in figura e chiuda il coperchio. Si assicuri che gli apparecchi acustici corrispondano ai contrassegni colorati destro e sinistro sulle porte di ricarica del caricabatterie.

Il contrassegno ROSSO indica l'apparecchio acustico destro.
Il contrassegno BLU quello sinistro.

In carica



Il LED dell'apparecchio acustico si accende quando l'apparecchio acustico è inserito correttamente nel caricabatterie.

Stato di carica della luce a LED dell'apparecchio acustico:

ARANCIONE = in carica
VERDE = completamente carico

Tempo di ricarica

Si assicuri di caricare completamente gli apparecchi acustici prima del primo utilizzo e ogni notte. In questo modo potrà iniziare la giornata con gli apparecchi acustici completamente carichi.

Se la batteria dell'apparecchio acustico è completamente scarica, il tempo di ricarica normale è il seguente:

miniRITE R	Ricarica completa	Ricarica del 50%	Ricarica del 25 %
	3 ore	1 ora	0.5 ore
miniBTE R	Ricarica completa	Ricarica del 44%	Ricarica del 22 %
	3 ore	1 ora	0.5 ore

Quando la batteria degli apparecchi acustici è completamente carica, il processo di ricarica si interrompe automaticamente.

Il tempo di ricarica può variare a seconda della capacità residua della batteria e tra apparecchio acustico sinistro e destro.

Il coperchio del caricabatterie funge da protezione per gli apparecchi acustici. Durante la ricarica, aprendo il coperchio, i LED degli apparecchi acustici si illuminano per indicarne lo stato di carica.

Nota

Se non utilizza gli apparecchi acustici per lungo tempo e tenta di ricaricarli, potrebbero essere necessari fino a 30 secondi prima che gli apparecchi acustici inizino a caricarsi. Per ulteriori informazioni, consulti le Istruzioni per l'Uso dei suoi apparecchi acustici.

AVVISO IMPORTANTE

Verifichi che il caricabatterie sia alimentato e che la sua batteria integrata sia carica quando gli apparecchi acustici o il trasmettitore vengono inseriti nelle porte di ricarica. In caso contrario, gli apparecchi acustici o il trasmettitore resteranno accesi e continueranno a consumare la batteria.

Ricarica del caricabatterie

SmartCharger contiene una batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio che funge anche da power bank. Con il power bank completamente carico essa consente di caricare completamente un paio di apparecchi acustici per almeno tre volte anche quando si è fuori.

Quando il caricabatterie è collegato a una sorgente di alimentazione

- Gli apparecchi acustici e la batteria integrata nel caricabatterie vengono caricati.

Quando il caricabatterie non è collegato a una sorgente di alimentazione

- Il caricabatterie entra in modalità **power bank**, consentendo la carica degli apparecchi acustici senza alimentazione.

Tempi di ricarica

Batteria del power bank	Power bank + apparecchi acustici
Fino a 4 ore a seconda del livello di carica	Fino a 8 ore a seconda del livello di carica

Nota

Tenere sempre chiuso il coperchio mentre si caricano gli apparecchi acustici.

Quando il caricabatterie è collegato a una sorgente di alimentazione, i LED indicano lo stato di carica del power bank.

I LED si spengono quando la batteria del power bank è completamente carica.

	Ricarica (batteria troppo scarica per ricaricare gli apparecchi acustici)
	Ricarica
	
	
	Ricarica completa

 Lampeggio ARANCIONE  ARANCIONE  VERDE

AVVISO IMPORTANTE

Durante la ricarica, gli indicatori luminosi sul caricabatterie devono essere accesi come indicato in questo opuscolo. Se gli indicatori luminosi non sono accesi, scolleghi il caricabatterie e consulta il professionista dell'udito.

Funzione power bank

Quando il caricabatterie è scollegato dall'alimentazione, i LED su di esso indicano il livello batteria del power bank. È possibile controllare il livello residuo della batteria aprendo il coperchio del caricabatterie.

	Tre cicli di ricarica completa di due apparecchi acustici
	Due cicli di ricarica completa di due apparecchi acustici
	Un ciclo di ricarica completa di due apparecchi acustici
	Batteria troppo scarica per un ciclo completo di carica

 Lampeggio ARANCIONE  VERDE

Conservazione a lungo termine

Prima di riporre il caricabatterie per un periodo prolungato (più di 14 giorni), ne ricarichi completamente la batteria. In questo modo la batteria potrà essere ricaricata di nuovo.

Nota

Per proteggere la batteria ricaricabile, caricare completamente la batteria del power bank del caricabatterie ogni 12 mesi. In caso contrario potrebbe essere necessario sostituire la batteria ricaricabile.

Alimentazione e carica da altre sorgenti

È possibile alimentare e caricare la batteria del caricabatterie usando sorgenti diverse da una presa di alimentazione. Ad esempio, usando il cavetto USB del caricabatterie.

Verifichi che la sorgente di alimentazione sia conforme a USB 2.0, con un'uscita minima di 500 mA.

Esempi di sorgenti di alimentazione:

- Computer
- Auto

AVVISO IMPORTANTE

Quando utilizza una presa di alimentazione, si serva dell'alimentatore originale in dotazione (5,0 V/1 A) per il caricabatterie.

Asciugare gli apparecchi acustici

SmartCharger utilizza il calore della ricarica induttiva per asciugare gli apparecchi acustici alloggiati nelle porte di ricarica del caricabatterie.

L'asciugatura degli apparecchi acustici viene attivata inserendo gli apparecchi acustici nelle porte di ricarica del caricabatterie e iniziando la ricarica.

AVVISO IMPORTANTE

Rimuova il cavetto USB durante il trasporto del caricabatterie.

Cura del caricabatterie

Si assicuri sempre che il caricabatterie sia asciutto e pulito prima dell'uso. Tenga le porte di ricarica pulite e prive di polvere utilizzando un panno asciutto. Non usi acqua o altri liquidi per pulire le porte di ricarica.

Conservi il caricabatterie in un luogo asciutto, ad esempio in camera da letto. Conservi il caricabatterie in un ambiente con una temperatura compresa tra 5 e 38 °C (41 e 100 °F).

AVVISO IMPORTANTE

Per pulire il caricabatterie, usi un panno morbido e asciutto. Non lavi il caricabatterie né lo immerga in acqua o altri liquidi.

Avvertenze generali

Per la propria sicurezza e per garantire un uso corretto, si assicuri di aver familiarizzato appieno con le seguenti avvertenze generali prima di utilizzare il caricabatterie. Consulti il professionista dell'udito se si verificano funzionamenti inaspettati o incidenti gravi con il suo caricabatterie, durante o a causa del suo utilizzo. Il professionista dell'udito potrà fornirle l'assistenza per gestire tali problemi e, se necessario, comunicare tali eventi al produttore e/o alle autorità locali.

Utilizzo del caricabatterie

Il caricabatterie deve essere usato solo come consigliato e regolato dal professionista dell'udito.

Rischio di ustioni

Nelle porte di ricarica del caricabatterie inserisca esclusivamente gli apparecchi acustici.

Rischi di soffocamento

Il caricabatterie, gli apparecchi acustici e le loro parti devono essere tenuti lontano da bambini o da persone che potrebbero ingerirli o usarli impropriamente.

Se un componente viene ingerito, contatti immediatamente un medico o si rechi in ospedale.

Calore

Non lasci mai il caricabatterie vicino a sorgenti di calore come, ad esempio, in un'auto parcheggiata al sole.

Non cerchi mai di asciugare il caricabatterie introducendolo in forni a microonde o di altro tipo.

Esplosivi

Il caricabatterie è sicuro nelle normali condizioni d'uso. Il caricabatterie non è stato testato per la conformità agli standard internazionali in materia di aree esplosive.

Pertanto, non usi il caricabatterie in ambienti a rischio di esplosione, ad esempio miniere, ambienti ricchi di ossigeno o aree dove si manipolano sostanze infiammabili.

Batteria ricaricabile

Non apra il caricabatterie, poiché rischia di danneggiarne la batteria.

Non cerchi mai di sostituire la batteria. Invi il dispositivo al fornitore per sostituire la batteria. Eventuali segni di manomissione annulleranno la garanzia di assistenza prevista.

In caso di perdite dalla batteria, non utilizzi il caricabatterie, poiché potrebbero verificarsi irritazioni cutanee provocate dagli acidi presenti nella batteria. Se la pelle è stata a contatto con gli acidi fuoriusciti dalla batteria, pulisca con un panno umido e rimuova ogni traccia di acido dalla pelle. In caso di irritazione cutanea, consulti un medico. Per ulteriori istruzioni

sull'utilizzo del caricabatterie, consulti il professionista dell'udito.

La sicurezza nel ricaricare la batteria con il cavetto USB dipende dall'apparecchiatura esterna. In caso di collegamento del prodotto a un dispositivo alimentato da rete elettrica, tale dispositivo deve essere conforme agli standard di sicurezza IEC 62368-1 o standard di sicurezza equivalenti.

Collegamento a un dispositivo esterno

La sicurezza del caricabatterie, quando connesso agli apparecchi esterni con il cavetto USB, dipende dalla sorgente del segnale esterno. Quando il caricabatterie è collegato a un dispositivo alimentato da una presa di alimentazione, tale dispositivo deve essere conforme agli standard di sicurezza IEC 62368-1 o standard di sicurezza equivalenti.

Avvertenze

Rischi di incendio

In condizioni normali d'uso, l'alimentazione del caricabatterie non ha energia sufficiente a provocare un incendio.

Prestare attenzione all'ambiente circostante

Non interagisca con il caricabatterie quando occorre concentrarsi su altre azioni. Ciò può distogliere l'attenzione dall'ambiente circostante, come ad esempio nel traffico. Consulti le Norme Nazionali del Codice della Strada per l'utilizzo dei dispositivi di comunicazione durante la guida.

Possibili effetti collaterali

Molto raramente i materiali non-allergenici con cui è realizzato il caricabatterie possono provocare irritazioni cutanee o altri effetti collaterali.

Se si verificano tali effetti collaterali, si rivolga a un medico.

Uso a bordo di velivoli

Consulti la compagnia aerea per informazioni sul trasporto del caricabatterie per apparecchi acustici a bordo di velivoli.

Dispositivi impiantabili attivi

Il caricabatterie è stato accuratamente testato e caratterizzato in relazione alla salute umana in base agli standard internazionali sull'esposizione umana (tasso di assorbimento specifico, SAR), l'energia elettromagnetica e le tensioni indotte nel corpo umano. I valori di esposizione sono ben al di sotto dei limiti di sicurezza accettati per il SAR, l'energia elettromagnetica e le tensioni indotte nel corpo umano sono conformi agli standard per la salute umana.

Si raccomanda di tenere il caricabatterie ad almeno 15 centimetri di distanza dall'impianto. Ad esempio, non lo tenga in tasca poiché contiene magneti. In generale,

segua le linee guida dei produttori di defibrillatori e pacemaker impiantabili sull'uso con dispositivi elettronici portatili e magneti.

Qualora utilizzi un dispositivo impiantabile attivo cerebrale, contatti il produttore del dispositivo per informazioni sul rischio di possibili interferenze.

Ricarica

Per prevenire eventuali danni alla batteria nei periodi di inutilizzo, ricarichi il caricabatterie ogni 12 mesi.

Utilizzo di accessori di terze parti

Utilizzi solo accessori, trasduttori o cavetti forniti dal produttore. Gli accessori non originali potrebbero ridurre la compatibilità elettromagnetica (CEM) del caricabatterie.

Guida alla risoluzione dei problemi

Problema	Possibili cause	Soluzioni
Gli apparecchi acustici non si accendono una volta tolti dal caricabatterie	Il caricabatterie non ha avuto a disposizione tempo sufficiente per accendere gli apparecchi acustici prima che venissero tolti dal caricabatterie	Posizioni gli apparecchi acustici nelle porte di ricarica del caricabatterie e riprovi o utilizzi il pulsante per accendere manualmente gli apparecchi acustici
Due LED del caricabatterie lampeggiano in arancione	La temperatura degli apparecchi acustici o del caricabatterie è troppo alta o bassa	Sposti il caricabatterie e gli apparecchi acustici in un luogo con una temperatura compresa tra +5°C e +38°C (+41°F e +100°F)
I tre LED del caricabatterie lampeggiano in arancione	Errore di sistema	Contatti il professionista dell'udito
I LED del caricabatterie restano spenti quando è collegato all'alimentazione	Il caricabatterie non è in fase di ricarica	Verifichi che la spina di alimentazione sia collegata correttamente Verifichi che la sorgente di alimentazione offra corrente sufficiente per il caricabatterie
I LED degli apparecchi acustici lampeggiano in VERDE quando vengono inseriti nel caricabatterie	Gli apparecchi acustici non sono stati utilizzati per un lungo periodo di tempo	In base al relativo livello di carica della batteria, l'apparecchio acustico riprende automaticamente la normale modalità di ricarica dopo un periodo di tempo massimo di 10 minuti. Durante questo processo, lasci gli apparecchi acustici nel caricabatterie

Continua a pagina seguente

Guida alla risoluzione dei problemi

Problema	Possibili cause	Soluzioni
I LED degli apparecchi acustici rimangono spenti quando sono inseriti nel caricabatterie	Il caricabatterie non è acceso	Verifichi che la spina di alimentazione del caricabatterie sia collegata correttamente o che il power bank sia dotato di carica sufficiente
	La temperatura dell'apparecchio acustico o del caricabatterie è troppo alta o bassa	Sposti il caricabatterie e gli apparecchi acustici in un luogo con una temperatura compresa tra +5°C e +38°C (+41°F e +100°F)
	La ricarica è incompleta. Il caricabatterie ha interrotto la ricarica per proteggere la batteria.	Reinserisca gli apparecchi acustici nel caricabatterie. In questo modo è possibile completare la ricarica entro circa 15 minuti.
	Gli apparecchi acustici non sono inseriti correttamente nel caricabatterie	Verifichi che non vi siano corpi estranei nelle porte di ricarica
I LED degli apparecchi acustici lampeggiano in ARANCIONE quando gli apparecchi acustici vengono inseriti nel caricabatterie	Errore di sistema	Contatti il professionista dell'udito

Condizioni d'uso

Condizioni di operatività	Temperatura: da + 5 °C a +38 °C (da +41 °F a +100 °F) Umidità: dal 5% al 93%, senza condensa Pressione atmosferica: da 700 hPa a 1060 hPa
Condizioni di trasporto e stoccaggio	Durante il trasporto e lo stoccaggio, temperatura e umidità non devono superare i limiti seguenti per periodi prolungati di tempo: Temperatura: da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F) Umidità: dal 5% al 93%, senza condensa

Per informazioni sulle condizioni d'uso dell'apparecchio acustico, consulti le relative Istruzioni per l'Uso.

Garanzia internazionale

Il dispositivo è coperto da una garanzia di 24 mesi a decorrere dalla data di acquisto. La garanzia è valida su territorio nazionale italiano. La garanzia copre i guasti conseguenti ai difetti di progettazione e/o fabbricazione e dei materiali del dispositivo e non include gli accessori quali, ad esempio, le batterie, i cavetti, gli alimentatori, ecc. La garanzia non è operante per i guasti conseguenti all'azione aggressiva e/o corrosiva di eventuali sostanze fuoriuscite dalla batteria di alimentazione del dispositivo. La garanzia offerta dalla OTICON consiste nell'eliminazione del difetto attraverso la riparazione del dispositivo, effettuata presso il Centro Assistenza Tecnica Nazionale OTICON. L'invio dovrà avvenire per tramite dell'Azienda Audioprotesica di fiducia dell'utente che descriverà compiutamente i difetti lamentati. La garanzia copre i costi di manodopera, dei

pezzi di ricambio e l'I.V.A., non copre gli eventuali costi di spedizione e dell'eventuale copertura assicurativa della spedizione del dispositivo al e dal Centro Assistenza Tecnica Nazionale OTICON. La garanzia decade se il difetto di funzionamento è causato da cattiva manutenzione, da uso improprio e/o danneggiamenti, conseguenti a incidenti, cadute e/o traumi meccanici. La garanzia decade, inoltre, qualora il dispositivo venga manomesso da personale non autorizzato e/o riparato con pezzi non originali OTICON. La garanzia OTICON è cumulativa e non alternativa alle altre, eventuali, garanzie previste dalla Legge. Il suo professionista dell'udito potrebbe aver stipulato un contratto di garanzia a copertura delle esclusioni previste dalla presente. Per ulteriori informazioni consulti il suo professionista dell'udito.

Se le serve assistenza

Porti il dispositivo al professionista dell'udito che provvederà a risolvere immediatamente i problemi di entità minore.

Il professionista dell'udito può darle supporto nell'ottenere il servizio di garanzia dal produttore. Il suo professionista dell'udito potrebbe addebitarle dei costi relativi alle proprie prestazioni professionali.

Garanzia

Certificato

Nome del proprietario: _____

Da parte del professionista dell'udito: _____

Indirizzo del professionista dell'udito: _____

Numero di telefono del professionista dell'udito: _____

Data d'acquisto: _____

Durata della garanzia: _____ Mesi: _____

Modello: _____ N° di serie: _____

Descrizione dei simboli e delle abbreviazioni usati in questo opuscolo

	Avvertenze Il testo contrassegnato da un simbolo di avvertenza deve essere letto prima di usare il dispositivo.
	Produttore Il dispositivo è prodotto da un'azienda il cui nome e indirizzo sono indicati accanto al simbolo. Indica il produttore del dispositivo medico, come definito nei Regolamenti UE 2017/745.
	Marchio CE Il dispositivo è conforme a tutti i regolamenti e le direttive UE richiesti.
	Smaltimento rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Riciclare gli apparecchi acustici, gli accessori o le batterie secondo le normative locali. Gli utilizzatori degli apparecchi acustici possono anche consegnare i rifiuti elettronici al proprio professionista dell'udito ai fini del loro smaltimento. Apparecchiature elettroniche contemplate dalla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
	Marchio di conformità normativa (RCM) Il dispositivo è conforme ai requisiti in materia di sicurezza elettrica, CEM e di spettro radio per i dispositivi forniti nei mercati di Australia e Nuova Zelanda.

Descrizione degli altri simboli presenti sulle etichette

	Mantenere asciutto Indica un dispositivo medico che deve essere protetto dall'umidità.
	Simbolo di precauzione Consultare le istruzioni per l'uso riguardo alle avvertenze e alle precauzioni.
	Numero di catalogo Indica il numero di catalogo del produttore in modo che il dispositivo medico può essere identificato.
	Numero di serie Indica il numero di serie del produttore in modo che il dispositivo medico può essere identificato.
	Dispositivo medico Il dispositivo è di tipo medico.
	Natura della tensione di alimentazione Indica che la tensione di alimentazione del dispositivo è CC (corrente continua).
	Simbolo di riciclo delle batterie Simbolo di riciclo delle batterie agli ioni di litio.
	Limiti di temperatura Indica i limiti di temperatura a cui il dispositivo medico può essere esposto in sicurezza.
	Limiti di umidità Indica l'intervallo di umidità a cui il dispositivo medico può essere esposto in sicurezza.
	FW Versione del firmware usata nel dispositivo.

Dichiarazioni di conformità

Informazioni utente

Questo dispositivo è stato collaudato e ritenuto compatibile con i limiti sanciti dalla sezione 18 dei regolamenti FCC.

Questi limiti sono concepiti per offrire una ragionevole protezione da eventuali interferenze dannose in aree residenziali.

Questo dispositivo genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può provocare interferenze nocive per le comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che in particolari installazioni non si verifichino interferenze. Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose per altra apparecchiatura elettronica, determinate dalla sua accensione e spegnimento, le consigliamo di provare a correggere le interferenze con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'apparecchiatura
- Aumentare la distanza tra le apparecchiature

Cambiamenti o modifiche eseguite sul dispositivo non espressamente approvate da Oticon potrebbero annullare l'autorizzazione all'operatività del dispositivo stesso.

239744IT / 2021.10.04 / v1

Questo dispositivo medico è conforme al Regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745.

Nr. Iscriz. R.A.E.E. IT0802000002229

CE 0123



Non smaltire insieme ai rifiuti solidi urbani ma raccogliere separatamente. Le sostanze e i componenti elettrici contenuti nel presente dispositivo, se abbandonati o utilizzati in modo improprio, potrebbero rivelarsi dannosi per l'ambiente. Il simbolo del "bidone rifiuti su ruote" indica che il presente dispositivo è soggetto a raccolta differenziata. Lo smaltimento abusivo del dispositivo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

La dichiarazione di conformità è disponibile presso la sede centrale.

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.global/doc



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarca



239744IT / 2021.10.04 / v1



oticon
life-changing **technology**

239744IT / 2021.10.04 / v1