

Scheda dati tecnici

Oticon SmartCharger miniRITE R

Lo SmartCharger è facile da usare a casa e in viaggio. Il coperchio del caricabatterie agisce come protezione e custodia degli apparecchi acustici e la batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata consente di usare lo SmartCharger come powerbank in assenza di una sorgente di alimentazione.

Ricarica

- Togliere gli apparecchi acustici e inserirli nel caricabatterie.
- Gli apparecchi acustici iniziano a ricaricarsi automaticamente non appena inseriti nel caricabatterie e si accendono quando vengono estratti.
- Ricaricare gli apparecchi acustici ogni notte per poterli usare tutto il giorno senza problemi.

Intuitivo

Il LED presente sull'apparecchio acustico consente di comprendere facilmente lo stato di carica:

- Arancione = in carica
- Verde = completamente carico

Tempi di ricarica brevi

Quando gli apparecchi acustici sono completamente scarichi, i tempi di ricarica normali sono:

- 3 h = ricarica completa
- 1 h = ricarica al 50%
- 0,5 h = ricarica al 25%

Informazioni sul prodotto

- Ricarica a induzione
- Indicatore luminoso a LED per stato di ricarica e livello batteria
- Contatti magnetici: gli apparecchi acustici restano agganciati alle porte di ricarica
- Cavetto di alimentazione staccabile
- Piedini in gomma per maggiore stabilità
- Linea morbida e arrotondata facile da pulire



Lo SmartCharger consente di ricaricare gli apparecchi miniRITE R a casa, collegandoli a una sorgente di alimentazione, e in viaggio, utilizzando la batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata come se fosse un powerbank.

Progettato per
Oticon More™ miniRITE R

Cavetto USB
Inserire nella spina adattatore




Porte di ricarica
Per gli apparecchi acustici durante la ricarica



** La spina di alimentazione varia in base al Paese

Dati tecnici: Caricabatterie	
Nome	Oticon SmartCharger miniRITE R
Progettato per/Compatibile con	Oticon More miniRITE R
Dimensioni	Altezza 76,4 mm / Larghezza 47,2 mm / Lunghezza 95 mm
Peso	180 gr
Colore	Nero
Spinotto di alimentazione	USB A
Indicatore di stato	LED sul caricabatterie, se collegato a un alimentatore: indica lo stato di carica del powerbank. LED sul caricabatterie, se scollegato da un alimentatore: indica il livello della batteria del powerbank. LED sull'apparecchio acustico durante la ricarica: indica la modalità di ricarica
Tempo di ricarica degli apparecchi acustici	Max 3 ore a seconda dello stato iniziale della batteria Temperatura: da 10 a 35°C Max 4 ore a seconda dello stato iniziale della batteria Temperatura: da 5 a 10 °C e da 35 a 38 °C
Tempo di ricarica della batteria del powerbank	Max 4 ore a seconda dello stato iniziale della batteria Temperatura: da 10 a 35 °C
Alimentazione	Spina di alimentazione in dotazione
Tensione in ingresso	5 V DC
Corrente in ingresso	Max 1 A
Cavo	Staccabile, lunghezza 150 cm
Connesso a un dispositivo esterno	Se connesso a un dispositivo alimentato da rete elettrica, tale dispositivo deve essere conforme agli standard di sicurezza IEC 62368-1 o standard di sicurezza equivalenti.
Condizioni d'uso	
Condizioni di operatività	Temperatura: da 5 a 38°C Umidità: dal 5% - al 93% di umidità relativa, senza condensa
Condizioni di trasporto e stoccaggio	Temperatura: da -20 a 60 °C Umidità: dal 5% - al 93% di umidità relativa, senza condensa
Pressione atmosferica	da 700 hPa a 1060 hPa
Dati tecnici: Unità di alimentazione	
Tensione in ingresso	100-240 V AC
Frequenza in ingresso	50-60 Hz
Tensione in ingresso	5 V DC
Corrente in uscita	1 A

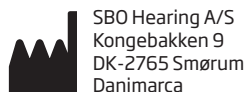

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarca

Sede centrale
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarca