

Scheda dati tecnici

Oticon SmartCharger miniBTE R

Lo SmartCharger è facile da usare a casa e in viaggio. Il coperchio del caricabatterie funge da protezione e custodia degli apparecchi acustici e la batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata consente di usare lo SmartCharger come powerbank in assenza di una fonte di alimentazione.

Ricarica

- Togli gli apparecchi acustici e inseriscili nel caricabatterie.
- Gli apparecchi acustici iniziano a ricaricarsi automaticamente non appena inseriti nel caricabatterie e si accendono estraendoli.
- Ricarica gli apparecchi acustici ogni notte in modo da usarli di giorno senza problemi.

Intuitivo

Il LED presente sull'apparecchio acustico consente di individuare facilmente lo stato di carica:

- Arancione = in carica
- Verde = completamente carico

Tempi di ricarica brevi

Quando gli apparecchi acustici sono completamente scarichi, i tempi di ricarica normali sono:

- 3,5 h = ricarica completa
- 1 h = ricarica al 40%
- 0,5 h = ricarica al 20%

Informazioni sul prodotto

- Ricarica induttiva
- Indicatore luminoso a LED per ricarica e livello della batteria
- Connessione magnetica: gli apparecchi acustici restano agganciati alle porte di ricarica
- Cavo di alimentazione distaccabile
- Piedini in gomma per maggiore stabilità
- Forme morbide e arrotondate facili da pulire



Lo SmartCharger è progettato per ricaricare i miniBTE R a casa, collegandolo a una sorgente di alimentazione, e in viaggio, utilizzando la batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata come power bank.

Progettato per miniBTE R
Oticon More™
Oticon Zircon
Oticon Play PX

Cavetto USB
Inserire nella spina adattatore



Porte di ricarica
Per gli apparecchi acustici durante la ricarica



Spina adattatore di alimentazione*




Indicatore della batteria
Visualizza lo stato di carica del power bank e della relativa batteria

** La spina adattatore di alimentazione varia in base al Paese



Dati tecnici: Caricabatterie	
Nome	Oticon SmartCharger miniBTE R
Progettato per/Compatibile con	Oticon More™, Oticon Zircon, Oticon Play PX: miniBTE R
Dimensioni	Altezza 76,4 mm / Larghezza 47,2 mm / Lunghezza 95 mm
Peso	180 g
Colore	Nero con piastra superiore grigia
Spinotto di alimentazione	USB A
Indicatore di stato	LED sul caricabatterie, se collegato a un alimentatore: indica lo stato di carica del powerbank. LED sul caricabatterie, se scollegato da un alimentatore: indica il livello della batteria del powerbank. LED sull'apparecchio acustico durante la ricarica: indica la modalità di ricarica
Tempo di ricarica degli apparecchi acustici	Max 3,5 ore a seconda dello stato iniziale della batteria Temperatura: da 10 a 35 °C Max 5 ore a seconda dello stato iniziale della batteria Temperatura: da 5 a 10 °C e da 35 a 38 °C
Tempo di ricarica della batteria del powerbank	Max 4 ore a seconda dello stato iniziale della batteria Temperatura: da 10 a 35 °C
Alimentazione	Spina di alimentazione in dotazione
Tensione in ingresso	5 V DC
Corrente in ingresso	Max 1 A
Cavetto	Staccabile, lunghezza 150 cm
Connesso a un dispositivo esterno	Se connesso a un dispositivo alimentato da rete elettrica, tale dispositivo deve essere conforme agli standard di sicurezza IEC 62368-1 o standard di sicurezza equivalenti.
Condizioni d'uso	
Condizioni di operatività	Temperatura: da 5 a 38 °C Umidità: 5% - 93% di umidità relativa, non condensante
Condizioni di trasporto e stoccaggio	Temperatura: da -20 a 60 °C Umidità: 5% - 93% di umidità relativa, non condensante
Pressione atmosferica	da 700 hPa a 1060 hPa
Dati tecnici: Unità di alimentazione	
Tensione in ingresso	100-240 V AC
Frequenza in ingresso	50-60 Hz
Tensione in uscita	5 V DC
Corrente in uscita	1 A

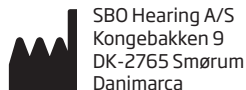

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarca

Sede centrale
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarca