

GEBRUIKSAANWIJZING

miniAHO



-  Oticon | **Alta**
-  Oticon | **Nera**
-  Oticon | **Ria**

oticon
PEOPLE FIRST

Bedankt

dat u ons product hebt gekozen om beter te gaan horen. Wij hebben er alles aan gedaan om te zorgen dat uw nieuwe hooroplossing van de beste kwaliteit is en gemakkelijk te gebruiken en onderhouden is.

Het is aan te bevelen deze handleiding zorgvuldig door te lezen, zodat u optimaal profijt heeft van uw hooroplossing.

Om aan uw luisterbehoeften te voldoen, moeten bepaalde functies worden ingesteld. Uw audicien kan die instellingen aangeven in de relevante gedeelten van deze handleiding. Op de laatste pagina vindt u een overzicht van alle functies die in uw toestel zijn ingesteld.

De versterking van het hoortoestel is specifiek op uw gehoor ingesteld met behulp van de metingen verricht door uw audicien.

Voor eventuele vragen over het gebruik en onderhoud van het toestel kunt u contact opnemen met uw audicien.

Aanwijzingen voor gebruik

De functie van een hooroplossing is het versterken en overbrengen van geluid naar het oor en daarbij te compenseren voor matig tot ernstig gehoorverlies.

BELANGRIJK

Lees dit boekje zorgvuldig door voordat u uw hooroplossing gaat gebruiken. Het bevat belangrijke aanwijzingen en informatie over het gebruik en onderhoud van uw toestel en batterijen.

Inhoud

Afbeelding miniAHO met Corda miniFit (dunne slang)	7a
Afbeelding miniAHO met schaalpje	7b
Waarschuwingen	9
Eerste gebruik van het toestel	15
De batterij vervangen	16
Aan- en uitzetten van uw toestel	18
Links/Rechtsmarkering	19
Inzetten van een toestel met Corda miniFit (dunne slang)	20
Inzetten van een toestel met oorstukje	21
Druktoets	22
Programma's (optie)	24
Volumeregelaar (optie)	26
Dempfunctie (optie)	27
Kindveilige batterijlade (optie)	29
Autophone (optie)	30
Onderhoud van uw toestel	32

Zie volgende pagina

Schoonmaken van het toestel	34
Onderhoud met Corda miniFit (dunne slang)	36
Omgaan met Corda miniFit	42
Onderhoud van toestellen met oorstukje	43
Waterbestendigheid	46
Vermijd hitte en chemicaliën	48
Zeven eenvoudige stappen om beter te gaan horen	49
Veel voorkomende problemen en hun oplossingen	54
Draadloze accessoires	56
Internationale garantie	57
Garantiecertificaat	58
Mobiele telefoon	59
Technische informatie	61
Overzicht toestelinstellingen	64



Afbeelding miniAHO met Corda miniFit (dunne slang)

Uw oorstukje







Tips:


Type

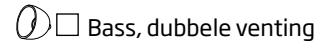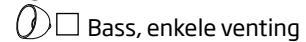


Afmeting

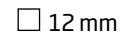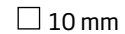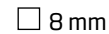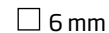

Batterijtype: 312

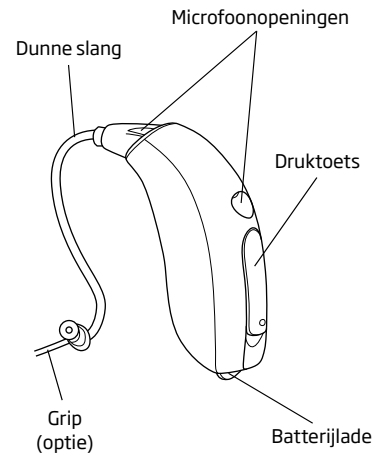

Afbeelding miniAHO met schaltje

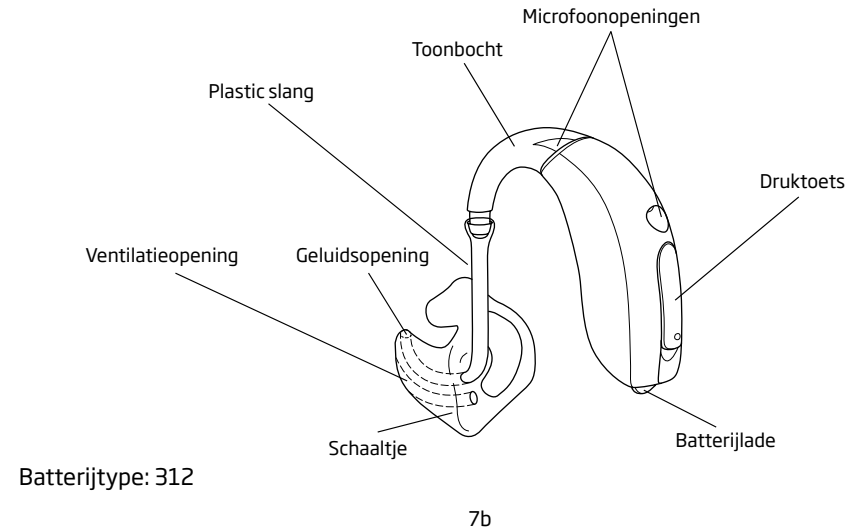

BELANGRIJK

Open de batterijlade volledig als u het toestel niet gebruikt, met name 's nachts, om het binnenin verzamelde vocht te laten verdampen.

Waarschuwingen

Lees de volgende waarschuwingen en inhoud van dit boekje zorgvuldig door voordat u uw toestel gaat gebruiken.

Gebruik van een hooroplossing

- Hooroplossingen mogen alleen gebruikt worden zoals voorgeschreven en geadviseerd door de audicien. Onoordeelkundig gebruik kan plotseling en blijvend gehoorverlies veroorzaken.
- Sta nooit toe dat anderen uw toestel dragen. Verkeerd gebruik kan blijvend gehoorverlies veroorzaken.

Verstikkingsgevaar

- Hoortoestellen, onderdelen daarvan en batterijen dienen buiten bereik van kinderen te blijven en van een ieder die ze zou kunnen inslikken of zich op andere wijze schade zou kunnen toebrengen.
- Vervang de batterijen nooit en pas nooit de bedieningsmogelijkheid van uw toestel aan in het bijzijn van (jonge) kinderen of mensen met een verstandelijke beperking.
- Gooi batterijen weg op een plaats buiten bereik van (jonge) kinderen of mensen met een verstandelijke beperking.

Waarschuwingen

- Het is vaker voorgekomen dat batterijen werden aangezien voor pillen. Controleer daarom uw medicijnen voor u ze inneemt.
- Stop uw toestel of batterijen nooit in uw mond; ze kunnen per ongeluk worden ingeslikt.
- Veel hoortoestellen kunnen op verzoek worden voorzien van een kindveilige batterijlade. Dit is sterk aan te bevelen bij (jonge) kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.

Waarschuw onmiddellijk een arts bij inslikken van een toestel of batterij.

Batterijgebruik

- Gebruik altijd batterijen die zijn aanbevolen door uw audicien. Batterijen van slechte kwaliteit kunnen lekken en lichamelijk letsel veroorzaken.
- Probeer niet-oplaadbare batterijen nooit op te laden. Ze kunnen ontploffen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Probeer batterijen nooit te verbranden. Ze kunnen ontploffen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

Waarschuwingen

Storing van hoortoestellen

- Het geluid van uw hoortoestellen kan, bijvoorbeeld wanneer de batterij leeg is of de slangetjes verstopt zijn door vocht of oorsmeer, plotseling wegvallen. Houd daar rekening mee wanneer u deelneemt aan het verkeer, of zich in een situatie bevindt waar waarschuwingssignalen belangrijk zijn.

Actieve implantaten

Voorzichtigheid is geboden met actieve implantaten. Een algemeen advies is om bij het gebruik van mobiele telefoons de richtlijnen van fabrikanten van defibrillators en pacemakers te volgen.

- Houd het toestel meer dan 15 cm verwijderd van de defibrillator of pacemaker en draag het bijvoorbeeld niet in uw borstzak.
- Neem bij een actief hersenimplantaat contact op met de fabrikant van het implantaat over het risico op storing.
- De meegeleverde MultiTool heeft een ingebouwde magneet. Draag de MultiTool niet in uw borstzak of in de buurt van uw borst als u geïmplanteerde apparatuur zoals een defibrillator of pacemaker gebruikt.

Waarschuwingen

Explosieven

- De batterij van uw toestel heeft onvoldoende energie om onder normale gebruiksomstandigheden brand te veroorzaken. Het toestel is niet getest op naleving van de internationale eisen met betrekking tot explosieve atmosferen. Het is aan te bevelen uw hooroplossing niet te gebruiken op plaatsen waar gevaar op explosie bestaat.

Röntgenstraling, CT-, MRI-, PET-scans en elektrotherapie

- Doe uw toestel uit tijdens het maken van bijvoorbeeld een röntgenfoto, bij CT-, MRI-, en PET-scans, elektrotherapie of een operatie. Het toestel kan beschadigen bij blootstelling aan sterke magnetische velden.

Waarschuwingen

Mogelijke bijwerkingen

- Bij gebruik van een hooroplossing kan de productie van oorsmeer toenemen.
- De anti-allergene materialen kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of andere ongebruikelijke aandoeningen veroorzaken.

Ga naar uw (KNO-)arts bij één van deze bijwerkingen.

Storing

- Uw toestel is op storing getest volgens de strengste internationale eisen. Er kan echter onvoorziene storing optreden met uw hoortoestel bij sommige mobiele telefoons, zendapparatuur of bij alarmsystemen in winkels. Probeer in dat geval de afstand tussen het toestel en de storende apparatuur te vergroten.

Eerste gebruik van het toestel

Een hooroplossing is een elektronisch apparaat dat op speciale batterijen werkt. Plaats voor het eerste gebruik een nieuwe batterij in de batterijlade.

Na het sluiten van de batterijlade start het systeem op. Het duurt een paar seconden voor u iets hoort. U hoort een melodie tijdens het opstarten. U kunt het hoortoestel meteen indoen na het sluiten van de batterijlade.

Als u het hoortoestel in de hand houdt tijdens het inschakelen, kan een fluittoon ontstaan. Deze toon stopt als u het toestel in het oor geplaatst hebt.

De batterij vervangen

Het type batterij voor uw hoortoestel is 312.



Een lege batterij moet altijd onmiddellijk worden vervangen en worden weggegooid volgens de lokale regelgeving.

Wanneer de batterij vervangen moet worden, hoort u twee signalen.

Deze waarschuwing wordt in redelijke intervallen herhaald totdat de batterij leeg is. De batterij kan kort na de waarschuwing leeg zijn of binnen een paar uur, afhankelijk van de capaciteiten van de batterij en individueel gehoorverlies.

Als de batterij leeg is, wordt het toestel uitgeschakeld. U hoort dan vier signalen die aangeven dat het toestel niet langer werkt.

Vervang de batterij.

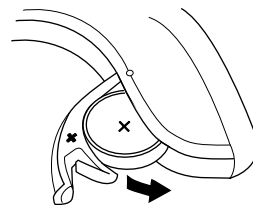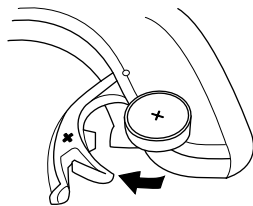


Volg voor het vervangen van de batterij de onderstaande aanwijzingen:

- Open de batterijlade door op de verhoogde rand aan de onderkant van het toestel te drukken. Verwijder de oude batterij. U kunt de magneet aan het uiteinde van de MultiTool gebruiken om de batterij te hanteren.
- Haal het plaklabel van de +-zijde van de nieuwe batterij.
- De nieuwe batterij kan geplaatst worden door het magnetische uiteinde van de MultiTool te gebruiken. Controleer of de markering voor positief (+) tegen het positiefteken (+) op de batterijlade ligt. Sluit de batterijlade.

Eventueel vocht op de batterij dient met een doekje te worden weggeveegd.

Als u de batterij vervangt, duurt het een paar seconden voor de batterij werkt.

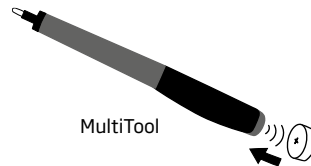

Aan- en uitzetten van uw toestel


Zet uw hoortoestel **AAN** door de batterijlade (met batterij) volledig te sluiten. Na het sluiten van de batterijlade start het toestel met een melodie. Dit geeft aan dat de batterij werkt en het toestel ingeschakeld is.

Zet het toestel **UIT** door de batterijlade enigszins te openen, totdat u een klik voelt.

Om de batterij te sparen zorgt u dat het hoortoestel is uitgeschakeld als u het niet draagt.

BELANGRIJK

Open de batterijlade volledig als u het toestel niet gebruikt, met name 's nachts of wanneer u het toestel een langere periode niet gebruikt, om het binnenin verzamelde vocht te laten verdampen.

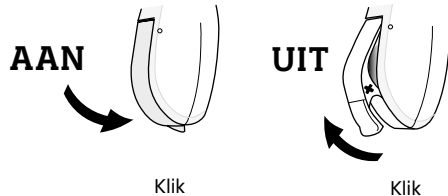


Links/Rechtsmarkering

Hooroplossingen worden op een specifiek gehoorverlies aangepast. Wanneer u twee toestellen gebruikt, is het linkertoestel misschien anders geprogrammeerd dan het rechter. Het is dus van belang om de toestellen van elkaar te kunnen onderscheiden.

Voor eenvoudige herkenning van het linker- en rechertoestel kan op de batterijlade een kleurcodering zijn aangebracht.




Een blauwe stip markeert het **LINKER**-toestel.
Een rode stip markeert het **RECHTER**-toestel.

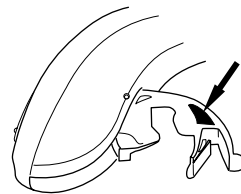

Inzetten van een toestel met Corda miniFit (dunne slang)




Het vergt enige oefening om een toestel met dunne slang correct in het oor te plaatsen:

1. Plaats het hoortoestel achter uw oor.
2. Houd de bocht van de slang tussen uw duim en wijsvinger. De tip moet richting de opening van de gehoorgang wijzen. Druk de tip voorzichtig in de gehoorgang tot het dunne slangetje dicht tegen de zijkant van uw hoofd zit.
3. Plaats de grip met uw wijsvinger in de oorschelp. Kijk in een spiegel. Als het dunne slangetje uit uw oor steekt, dan is de tip niet correct in de gehoorgang geplaatst. Als de grip duidelijk zichtbaar uit uw oor steekt, is hij niet correct geplaatst. Om het toestel uit te nemen, trekt u aan de bocht in het slangetje.

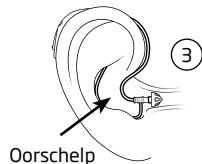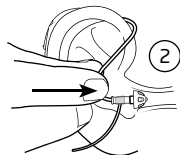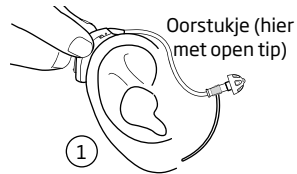

Inzetten van een toestel met oorstukje

1. Plaats de tuit van het schaalpje onder een lichte draaibeweging in de gehoorgang en let hierbij op dat het bovenste puntje van het oorstukje (A) achter en onder de oorplooi (B) zit.
2. Trek de oorlel iets naar achter en druk het oorstukje zachtjes in de gehoorgang.
3. Zodra het schaalpje goed in het oor zit, pakt u de onderkant van het toestel en plaatst u het voorzichtig achter het oor en schuift u het over de bovenkant van uw oor.

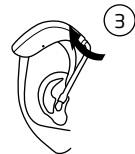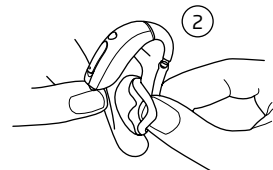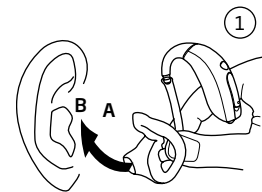


Druktoets

Als u één toestel gebruikt kunt u met de druktoets tussen de verschillende programma's wisselen.

Bij gebruik van twee toestellen kan de druktoets worden geprogrammeerd voor volume- én programmaverandering.

De druktoets kan ook worden gebruikt om het geluid van het toestel tijdelijk uit te zetten (mute).

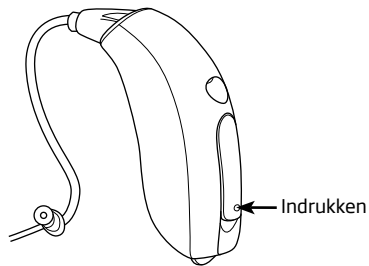

De druktoets van uw hoortoestel kan voor één van de volgende drie functies worden geprogrammeerd.

Links	Rechts	
		Alleen programmaverandering: Kort indrukken voor programmaverandering.
		Alleen volumeverandering: (Alleen als u twee toestellen gebruikt). Kort indrukken voor volumeverandering.
		Zowel volume- als programmaverandering: (Alleen als u twee toestellen gebruikt). Kort indrukken voor volumeverandering. Lang (2 sec.) indrukken voor programmaverandering.

Gebruik van twee toestellen

Als u twee toestellen gebruikt, verandert de druktoets van één toestel de status van beide. Dit betekent dat u bij verandering van het programma of volume van één toestel automatisch ook het programma of volume in het andere verandert. Dit kan eventueel ook worden uitgezet, als u dit niet prettig vindt.





Dit wordt door uw audicien geprogrammeerd.

Programma's (optie)

Uw toestel heeft maximaal vier verschillende programma's.

Het aantal en type programma's in het toestel worden door uw audicien geprogrammeerd.

Het toestel geeft een signaal bij schakelen tussen de programma's. Het aantal signalen geeft het gebruikte programma aan.

	Eén signaal, bij overschakelen naar programma 1
	Twee signalen, bij overschakelen naar programma 2
	Drie signalen, bij overschakelen naar programma 3
	Vier signalen, bij overschakelen naar programma 4


Druk de toets in om vooruit te gaan in de programmacyclus, bijvoorbeeld van P1 naar P2.

Als u twee toestellen gebruikt:

De toets op het **rechertoestel** schakelt vooruit in de programmeercyclus, bijvoorbeeld van P1 naar P2.

De toets op het **linkertoestel** schakelt terug in de programmeercyclus, bijvoorbeeld van P2 naar P1.

Op de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht en beschrijving van de hoorprogramma's die beschikbaar zijn op uw hoortoestel.

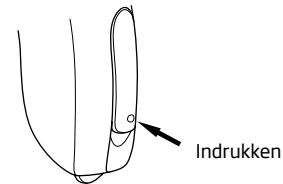

Volumeregelaar (optie)



Alleen bij gebruik van twee toestellen kan een volumeregeling worden geactiveerd. Met de druktoets kunt u het volume in specifieke situaties op het voor u meest aangename niveau instellen.

Als u de toets van één van de toestellen indrukt wordt het volume van beide tegelijkertijd veranderd.

Druk de toets van het toestel **RECHTS** kort in om het **volume te verhogen**.
Druk de toets van het toestel **LINKS** kort in om het **volume te verlagen**.

U hoort een klik als u het volume luider of zachter zet.

Bij het aanzetten staat het toestel op het voor u ingestelde volumeniveau. U hoort een signaal wanneer u het ingestelde niveau weer hebt bereikt.


Dempfunctie (optie)



U kunt de dempfunctie gebruiken om de microfoon uit te zetten terwijl u het hoortoestel in hebt.

Houd de toets minimaal 3 seconden ingedrukt om het geluid van het toestel te dempen.

Door de toets kort in te drukken, schakelt u het toestel weer in.

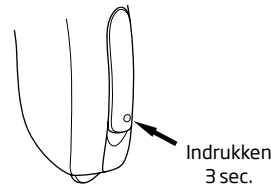

BELANGRIJK


Gebruik de dempfunctie niet om het toestel uit te zetten; het gebruikt dan nog steeds stroom.

Kindveilige batterijlade (optie)



Om de batterij buiten bereik van kleine kinderen en mensen met een verstandelijke beperking te houden, dient er een kindveilige batterijlade op het hoortoestel te worden gebruikt.

De batterijlade kan alleen met een schroevendraaier worden geopend. Plaats een kleine schroevendraaier in de uitsparing. Door de schroevendraaier enigszins te draaien kan de batterijlade worden geopend.

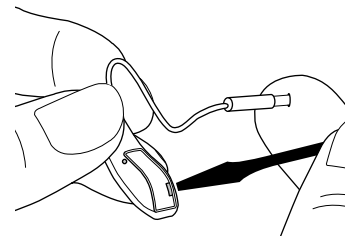


Autophone (optie)

Het toestel kan voorzien zijn van een autophone-functie. Wanneer het toestel in de buurt van een telefoonhoorn is, zal autophone een telefoonprogramma activeren. U hoort een aantal signalen zodra het telefoonprogramma is geactiveerd.

Na het beëindigen van het telefoongesprek keert het toestel automatisch terug naar het voorgaande programma.

Niet alle telefoons kunnen de autophone activeren. Soms is een speciale magneet op de telefoonhoorn noodzakelijk. Volg voor het aanbrengen van de magneet de instructies van uw audicien.

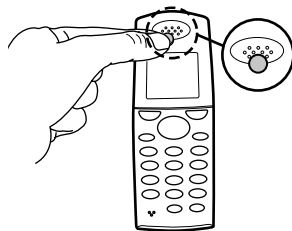

WAARSCHUWING

Bij gebruik van een autophone-magneet:

- Houd de magneten buiten bereik van kinderen en huisdieren. Raadpleeg onmiddellijk een arts bij inslikken van een magneet.
- Draag de magneet niet in een borstzak en houd de magneet altijd 30 cm verwijderd van actieve geïmplanteerde apparatuur zoals pacemakers, defibrillators etc. Gebruik de telefoon met magneet bij voorkeur aan de tegenoverliggende kant van een pacemaker of andere actieve geïmplanteerde apparatuur.
- Houd de magneet 30 cm verwijderd van creditcards en andere magnetisch gevoelige voorwerpen.

Onderhoud van uw toestel

Uw gehoorgang produceert oorsmeer (cerumen) waardoor de geluids- en ventilatieopening van het oorschaaltje verstopt kunnen raken. Volg de instructies op om te voorkomen dat de toestelprestaties negatief worden beïnvloed door opgehoopt oorsmeer.

Houd uw toestel bij het schoonmaken boven een zachte ondergrond, zodat het niet kan beschadigen als u het laat vallen.

Voordat u gaat slapen:


- Zorg ervoor dat er geen oorsmeer zit in de openingen van het oorschaaltje, aangezien dit de prestaties van het toestel kan verminderen.
- Open de batterijlade wanneer u uw toestellen niet gebruikt om binnenin verzameld vocht te laten verdampen.

BELANGRIJK

Het hoortoestel zelf mag nooit gewassen of ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen.

Schoonmaken van het toestel


Gebruik voor het schoonmaken de speciale onderhoudsset. Om ervoor te zorgen dat uw hooroplossing de beste prestaties levert, adviseren wij u gebruik te maken van deze speciale onderhoudsset.

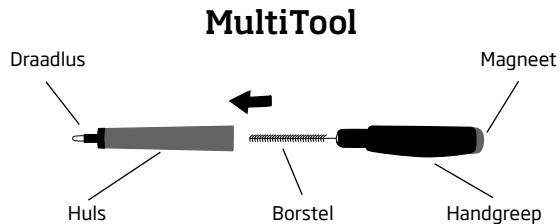

De MultiTool is voorzien van een borstel en een draadlus om oorsmeer uit de openingen van het schaalpje te verwijderen. Gebruik het doekje om de buitenkant van het toestel schoon te vegen.

Microfoonopeningen schoonmaken

Zorg ervoor dat de microfoonopeningen niet verstopt zitten door stof of vuil. Borstel voorzichtig zichtbaar vuil weg uit de openingen. Borstel alleen de buitenkant en zorg ervoor dat de haartjes van de borstel niet in de openingen worden gedrukt. Wees voorzichtig dat u geen vuil in de microfoonopeningen duwt, omdat dit van invloed kan zijn op de prestaties van het toestel.



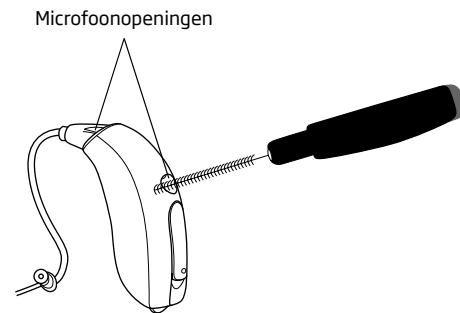


Onderhoud met Corda miniFit (dunne slang)

Corda miniFit is een dunne slang die op de geluidsopening van het toestel wordt geplaatst. Als uw hoortoestel is uitgerust met een Corda miniFit oplossing, raadpleeg dan de volgende pagina's voor de juiste onderhouds- en reinigingsprocedures.

De Corda miniFit vervangen





1. Trek het slangetje uit het hoortoestel.
2. Druk het buisje in het hoortoestel.
3. Correct.

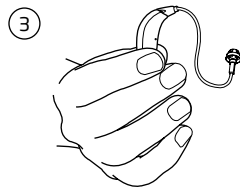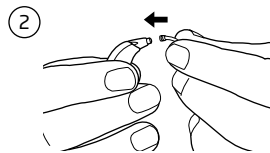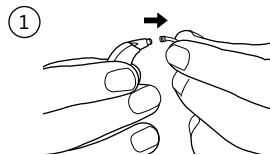

De Corda miniFit (dunne slang) schoonmaken

Oorsmeer verwijderen uit het dunne slangetje:


- Trek de slang van het hoortoestel (1).
- Druk het schoonmaakgereedschap door de hele lengte van de slang (2+3).
- Verwijder het gereedschap en druk de slang terug op het hoortoestel (4).

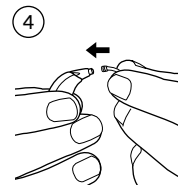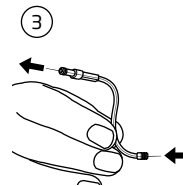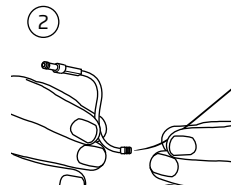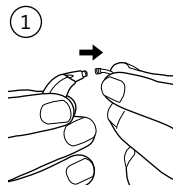

De tip vervangen

De tip mag niet gereinigd worden. Als u een nieuwe, schone tip nodig hebt, verwijder dan de oude en plaats een nieuwe.

De tip is eenvoudig te vervangen. Pak de brede kant van de tip en trek hem van het koppelstuk van de slang (1). Plaats de nieuwe tip op het uiteinde van de slang (2) en controleer of hij goed vast zit (3).

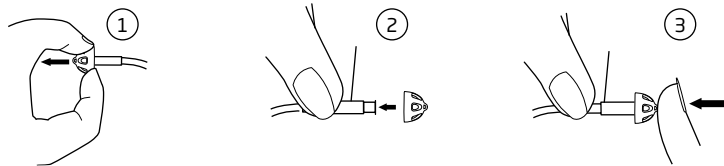

Wij raden aan de tip tenminste een keer per maand, of zoveel vaker als de audicien nodig acht, te vervangen.

BELANGRIJK


De tip is gemaakt van een zacht, medisch goedgekeurd rubber. Als de tip in de gehoorgang loslaat, kan dit geen schade veroorzaken. Als het lukt, trek hem er dan voorzichtig uit.

Laat indien nodig iemand anders u helpen. Druk de tip niet in de gehoorgang. Druk de slang niet opnieuw in het oor voordat u de tip uit uw oor gehaald hebt. Neem zo nodig contact op met uw audicien.

De Corda miniFit micromould schoonmaken

Het schaalpje moet regelmatig gereinigd worden.

Maak de ventilatieopening schoon door de borstel licht draaiend door de opening te duwen.

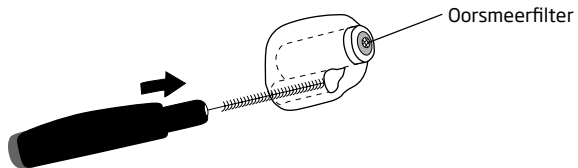

Vervang de borstel wanneer dat nodig is. Trek hem uit de MultiTool en plaats een nieuwe borstel. Druk de nieuwe borstel stevig in de handgreep. Nieuwe borstels zijn verkrijgbaar bij uw audicien.

De oorsmeerfilter vervangen

De oorsmeerfilter dient vervangen te worden:

- Als u kunt zien dat de filter die in het schaalpje geplaatst is, verstopt zit.
- Als het hoortoestel niet klinkt zoals u gewend bent.

**Het formaat en het type oorsmeerfilter zijn afhankelijk van het schaalpje.
Gebruik de oorsmeerfilter volgens de instructies van uw audicien.**

Gedetailleerde instructies over het vervangen van de oorsmeerfilter kunnen aan de binnenkant van de verpakking van de oorsmeerfilter worden gevonden.

Omgaan met Corda miniFit

BELANGRIJK

- Gebruik alleen onderdelen die specifiek bestemd zijn voor uw hoortoestel.
- De dunne slang mag nooit zonder oorstukje worden gebruikt.
- Gebruik uitsluitend miniFit tips
- Voor plaatsing in het oor moet de tip stevig aan de dunne slang bevestigd worden.
- Tips mogen slechts één keer aan een slang worden bevestigd. Gooi tips altijd weg nadat u ze van het slangetje hebt verwijderd.
- Wanneer de tip niet juist is bevestigd en uit uw oor valt: Neem contact op met uw audicien of een arts.
- Het schoonmaakgereedschap mag alleen gebruikt worden als de slang los is gemaakt van het hoortoestel en niet in het oor zit.
- Het juiste onderhoud garandeert de betrouwbaarheid van het toestel en verlengt de levensduur. Maak de dunne slang regelmatig schoon.
- Laat uw hooroplossing of onderdelen daarvan nooit door anderen gebruiken.
- Zorg dat uw handen schoon zijn voordat u uw toestel aanraakt.

Onderhoud van toestellen met oorstukje

Schoonmaken van het oorstukje


Het oorstukje dient regelmatig gereinigd te worden:

- Verwijder restanten van oorsmeer rond de geluidsopening met de borstel. Opgedroogd oorsmeer kan met de draadlus van de MultiTool worden verwijderd.
- Reinig de ventilatieopening door de borstel door de opening te drukken en tegelijkertijd licht te draaien.

Veeg het toestel met het doekje schoon.

Vervang de borstel wanneer dat nodig is. Trek hem uit de handgreep en plaats een nieuwe borstel. Druk de nieuwe borstel stevig in de handgreep.




Nieuwe borstels zijn verkrijgbaar bij uw audicien.

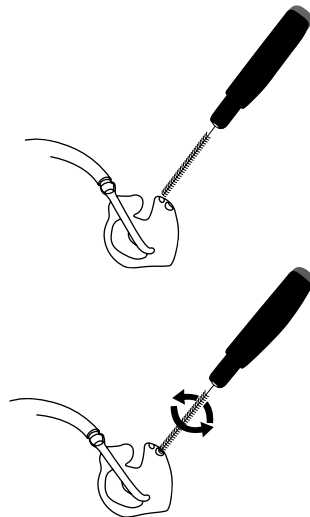


Het oorstukje reinigen

Het oorstukje dient men regelmatig te reinigen:

- Maak het oorstukje en slangetje los van de toonbocht (zie afbeelding). Houd de toonbocht altijd stevig vast als u die van het oorstukje en de slang losmaakt, om schade aan het toestel te voorkomen.
- Reinig het oorstukje in lauw water met een milde zeep. Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen.
- Afspoelen met water.
- Droog het oorstukje.
- Blaas daarna eventuele waterdruppels uit het oorstukje en slangetje. Hiervoor is een speciaal blaasbalgje verkrijgbaar bij uw audicien.

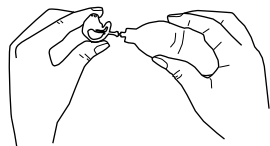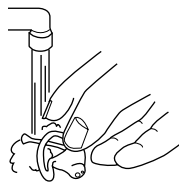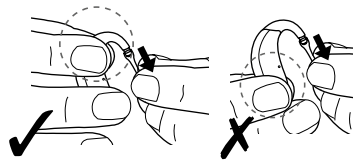

- Zorg dat het oorstukje en slangetje volkomen droog zijn voordat ze weer worden vastgemaakt aan het hoortoestel. Het is belangrijk dat het linker oorstukje en slangetje worden vastgemaakt aan het toestel met de links-markering en het rechter oorstukje en slangetje aan het toestel met de rechts-markering.

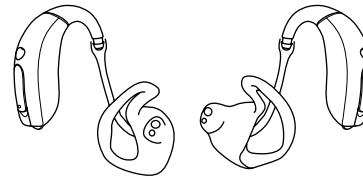

Vervangen van het slangetje

Laat de audicien het slangetje tussen het oorstukje en toestel vervangen als het verkleurt of stug wordt. Neem hiertoe contact op met uw audicien.

Waterbestendigheid

Uw nieuwe Oticon-hoortoestel is waterbestendig.

Hoewel uw hoortoestel over de IP57*-classificatie beschikt, is het waterbestendig, niet waterdicht.

Volg de onderstaande richtlijnen wanneer uw hoortoestel in contact komt met water en niet langer werkt:

- Veeg het water aan de buitenkant van het toestel voorzichtig weg
- Open de batterijlade en verwijder de batterij
- Veeg water in de batterijlade voorzichtig weg
- Laat het hoortoestel terwijl de batterijlade geopend is ongeveer 30 minuten drogen
- Plaats een nieuwe batterij - uw hoortoestel zou nu weer normaal moeten werken

Het gebruik van een droogetui kan helpen om dergelijke problemen te voorkomen en kan zelfs de levensduur van uw hoortoestel verlengen. Raadpleeg hiervoor uw audicien.

BELANGRIJK

- Draag uw hoortoestel niet tijdens het douchen
- Draag uw hoortoestel niet tijdens het zwemmen, snorkelen of duiken. Het is niet ontworpen voor dergelijke activiteiten.
- Dompel uw hoortoestel niet onder in water of andere vloeistoffen.

* IP-codes classificeren en bepalen de beschermingsgraad die wordt geboden tegen de binnendringing van vaste voorwerpen (waaronder lichaamsdelen zoals handen en vingers), stof, toevallig contact en water in mechanische behuizingen en elektrische kastjes.

Vermijd hitte en chemicaliën

Stel uw toestel nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door het te laten liggen in een in de zon geparkeerde auto. Het mag niet worden gedroogd in de magnetron of een oven.

Veeg de batterijen zorgvuldig af met een droge doek als er vocht op zit, om optimale werking te garanderen.

Chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum, aftershave, zonnebrandcrème en insectenspray, kunnen uw toestel beschadigen. Doe daarom altijd uw toestel uit voordat u dergelijke producten gebruikt en neem de tijd om het te laten drogen, voordat u uw toestel weer indoet.

Als u handcrème gebruikt, zorg er dan voor dat uw handen volledig droog zijn voordat u uw toestel indoet.

Zeven eenvoudige stappen om beter te gaan horen

Het kost tijd om aan het nieuwe geluid te wennen. Hoe lang dit duurt, verschilt per persoon. Het is afhankelijk van een aantal factoren, zoals uw ervaring met een hoortoestel en de mate van uw gehoorverlies.

1. In de rust van uw eigen huis

Probeer zelf te wennen aan alle nieuwe geluiden. Luister naar de vele achtergrondgeluiden en probeer ze te herkennen. Onthoud dat sommige geluiden anders lijken dan wat u gewend bent. Het kan zijn dat u ze opnieuw moet leren kennen. Op den duur zult u gewend raken aan de geluiden in uw omgeving - raadpleeg uw audicien wanneer dit niet gebeurt.

Als u vermoeid raakt, kunt u het toestel even uitdoen en een poosje rusten. U zult het geleidelijk langere perioden achter elkaar kunnen gebruiken. En al snel kunt u het de hele dag comfortabel dragen.

2. Gesprek met iemand anders

Ga met iemand in een rustige ruimte zitten. Ga tegenover elkaar zitten zodat u duidelijk de gezichtsuitdrukkingen kunt zien. U kunt nieuwe spraakgeluiden ervaren die in het begin misschien wat vreemd lijken. Als uw hersenen zich hebben aangepast aan de nieuwe spraakgeluiden, kunt u spraak beter horen.

3. Luisteren naar radio of televisie

Als u naar de televisie of de radio luistert, begin dan met het luisteren naar het nieuws, omdat nieuwslezers meestal duidelijk praten. Probeer vervolgens andere televisieprogramma's.


Wanneer u moeite heeft met het volgen van radio en televisie kan uw audicien u informatie geven over Oticon ConnectLine en andere aanvullende luisterapparatuur.

4. In groepsgesprekken

Groepssituaties gaan meestal gepaard met een grotere mate aan achtergrondgeluid en zijn daarom dus moeilijker om mee om te gaan. Probeer uw volledige aandacht te richten op degene naar wie u wilt luisteren. Als u een woord mist, vraag de spreker het dan te herhalen.

5. Gebruik van de telefoon

Houd bij telefoneren de telefoonhoorn schuin tegen uw slaap en positioneer de hoorn lichtjes over uw oor dichtbij de microfoon van uw toestel. Het geluid komt dan direct in de microfoonopening. Zo zal het toestel niet fluiten en bent u er zeker van dat u het gesprek onder de beste omstandigheden kunt volgen. Als u de telefoonhoorn in deze positie houdt, denk er dan aan direct in de hoorn van de telefoon te spreken, om te zorgen dat 'de andere kant van de lijn' u goed kan horen.

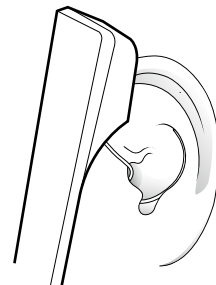

Wanneer u moeite heeft met telefoneren kan uw audicien u informatie geven over Oticon ConnectLine en andere aanvullende luisterapparatuur.

6. Draadloze en mobiele telefoons

Uw toestel voldoet aan de meest strikte eisen van de International Electromagnetic Compatibility. Niet alle mobiele telefoons zijn echter geschikt voor gebruik met hoortoestellen. De mate van storing kan aan de aard van uw specifieke mobiele telefoon liggen.

Wanneer u moeite heeft met telefoneren via de mobiele telefoon kan uw audicien u informatie geven over Oticon ConnectLine en andere aanvullende luisterapparatuur.

7. Gebruik de hooroplossing de hele dag

De beste manier om beter te gaan horen is om te oefenen met luisteren totdat u uw toestel de hele dag comfortabel kunt dragen. Onregelmatig gebruik zal meestal niet het volledige profijt opleveren.

Uw hoortoestel herstelt het normale gehoor niet. Het voorkomt of verbetert gehoorverlies door een fysiologische aandoening ook niet. Wat het u echter wel biedt, is de mogelijkheid beter gebruik te maken van de hoormogelijkheden die u hebt. Gebruik altijd beide toestellen wanneer u twee toestellen heeft.

Veel voorkomende problemen en hun oplossingen		
Klacht	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen geluid	Lege batterij	Vervang de batterij pg. 16
	Verstopte geluidsopening	Maak de Corda miniFit (dunne slang) schoon, vervang de tip of oorsmeerfilter pg. 37, 38 & 41
		Reinig het schaalpje pg. 43
Onderbroken of verminderd geluid	Verstopte geluidsopening	Maak de Corda miniFit (dunne slang) schoon, vervang de tip of oorsmeerfilter pg. 37, 38 & 41
		Reinig het schaalpje pg. 43
	Vocht	Veeg de batterij met een droge doek af pg. 48
	Lege batterij	Vervang de batterij pg. 16
Snerpend geluid	Het toestel zit niet goed in het oor	Plaats het toestel opnieuw in het oor pg. 20 & 21
	Opgehoopt oorsmeer in de gehoorgang	Laat de gehoorgang onderzoeken door uw (KNO-)arts

Raadpleeg uw audicien als de bovenstaande oplossingen uw probleem niet verhelpen.

Draadloze accessoires

ConnectLine

Als aanvulling op uw draadloze hooroplossing kan andere luisterapparatuur worden aangesloten. Via ConnectLine maakt u met uw toestel verbinding met diverse media en geluidsbronnen. Zo kunt u de audiosignalen van de tv, vaste en mobiele telefoon, mp3-speler, pc of externe microfoon rechtstreeks en draadloos in uw toestel ontvangen.

Raadpleeg uw audicien voor meer informatie over ConnectLine of ga naar www.oticon.nl/connectline.

Internationale garantie

Uw Oticon hooroplossing heeft een beperkte fabrieksgarantie voor de eerste twaalf maanden. Deze beperkte garantie dekt fabricagefouten en materiaaldefecten van het toestel, maar niet van accessoires, zoals batterijen, slangetjes, oorsmeerfilters, enz.

De garantie geldt NIET voor schade, defecten of uitval, ontstaan door een ongeluk, onjuist gebruik of misbruik, onzorgvuldigheid, reparatie door ongeautoriseerden, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, fysieke veranderingen aan het oor, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen of zaken in het toestel, of onjuiste instelling door de aanpasser.

De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende verkoop van consumentengoederen. Uw audicien heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw audicien voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig heeft

Bij problemen kunt u het beste naar uw audicien gaan. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen daar vaak ter plekke worden verricht.

Garantiecertificaat

Naam: _____

Audicien: _____

Adres audicien: _____

Telefoon audicien: _____

Aankoopdatum: _____

Garantieperiode: _____ Maand: _____

Links: _____ Serienr.: _____

Rechts: _____ Serienr.: _____

Batterijtype: 312 _____

Mobiele telefoon

Sommige slechthorenden hebben gemeld dat ze bij gebruik van hun mobiele telefoon een brommend geluid in hun toestel hoorden, hetgeen erop kan wijzen dat de mobiele telefoon en het toestel niet compatibel zijn.

Volgens de ANSI C63.19 normering (ANSI C63.19-2007 Amerikaanse nationale standaardmethode van metingen betreffende compatibiliteit tussen draadloze communicatieapparatuur en hooroplossingen) kan de compatibiliteit tussen een hooroplossing en een bepaalde mobiele telefoon worden voorspeld door de kwalificatie van toestel-immuniteit op te tellen bij de kwalificatie van de emissies van de mobiele telefoon. Zo is bijvoorbeeld de gecombineerde kwalificatie van een toestel met een kwalificatie van 2 (M2/T2) en een telefoonkwalificatie van 3 (M3/T3) in totaal 5. Elke gecombineerde kwalificatie van tenminste 5 biedt 'normaal gebruik'; een gecombineerde kwalificatie van 6 of meer levert een 'uitstekende prestatie'.

De immuniteit van dit hoortoestel is minimaal M4. De metingen, categorieën en systeemkwalificaties van de prestaties van de apparatuur zijn gebaseerd op de beste beschikbare informatie, maar geven geen garantie voor tevredenheid van elke slechthorende.

BELANGRIJK

De prestaties van individuele hooroplossingen kunnen per mobiele telefoon variëren. Probeer deze hooroplossing daarom uit met de mobiele telefoon die u momenteel gebruikt en doe hetzelfde bij aanschaf van een nieuwe mobiele telefoon. Vraag voor meer informatie uw gsm-provider naar het boekje 'Compatibiliteit van hoortoestellen met digitale draadloze mobiele telefoons', of in het Engels: 'Hearing Aid Compatibility with Digital Wireless Mobile Phones'.

Technische informatie

Het toestel bevat een radiozender die gebruikmaakt van kortbereik magnetische inductietechnologie op 3.84 MHz. De magnetische veldsterkte van de zender is < -42 dB μ A/m @ 10 m.

Het emissievermogen van het radiosysteem ligt ruim onder de internationale emissiegrenzen waaraan mensen mogen worden blootgesteld. Ter vergelijking: de straling van het toestel is lager dan de onbedoelde elektromagnetische straling van bijvoorbeeld halogeenlampen, computerschermen, afwasmachines, enzovoorts. Het toestel voldoet aan de internationale standaard betreffende Elektromagnetische Compatibiliteit.

In verband met de beperkte ruimte op het toestel zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit document.

De hooroplossing bevat een module met:

FCC ID: U28FU2MBTE

IC: 1350B-FU2MBTE

Het toestel voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en RSS-210 van de Canadese Industrie.

De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

1. dit toestel veroorzaakt geen storing bij andere apparatuur.
2. dit toestel is niet gevoelig voor storing van andere apparatuur, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen het recht doen vervallen om deze apparatuur te gebruiken.

Hierbij verklaart Oticon A/S dat dit toestel voldoet aan de essentiële eisen en bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG.

Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij:

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.oticon.nl

CE 0543 0682



Afval van elektronische
apparatuur dient te worden
weggegooid volgens de
lokale voorschriften.



N1175



Overzicht toestelinstellingen

Hooroplossing				
Links			Rechts	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Volumeregelaar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Programmaschakelaar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Dempfunctie	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Indicaties volumeregelaar				
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Signalen bij min/max volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	'Klikt' bij verandering volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Signalen bij gewenst volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
Indicaties batterij				
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Waarschuwing lage batterijspanning	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit

Beschrijving programma	
Programma nr.	
1	
2	
3	
4	

138621NL/12.13

138621NL/12.13

People First

People First is our promise
to empower people
to communicate freely,
interact naturally and
participate actively



0000138621000001

oticon
PEOPLE FIRST